

# LEUKOPLAST ELASTIC SEBTAPASZ – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termékek:

- Leukoplast elastic sebtapasz, 1 méret/doboz
- Leukoplast elastic sebtapasz, 2 méret/doboz

**Rugalmas sebtapasz, hajlatokban található kisebb sérülések kezelésére.**

**Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!**

A Leukoplast termékek elérhetőek a patikákban vagy a drogériákban. Vásárlásukhoz nem szükséges orvosi rendelvény.

## Használati útmutató:

Válassza ki a seb méretének legmegfelelőbb méretű sebtapaszt.

Vegye ki a steril csomagból a tapaszt.

Húzza le az egyik fehér védőfóliát a tapasz hátoldalán, majd helyezze rá a sebre úgy, hogy a fehér sebzóna rész a sebre essen.

Mindig olyan méretű sebtapaszt válasszon, melynek sebzónája maximálisan fedi és mérsékelten meghaladja a seb terjedelmét.

Simítsa le a ragasztófelületet, majd húzza le a másik fehér tapaszvédő réteget, és simítsa rá ezt a ragasztós felületet is a bőrre.

A termék bőrbarát, vízpára- és légáteresztő, így nem allergizál.

A termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja!



Egyszer használatos termék

## Ellenjavallatok:

- A sebtapaszt sérült, irritált bőrfelületen ne alkalmazza!
- Az alkalmazás ideje a seb gyógyulásától és a betegek egyéni tényezőitől függően változó.
- Sebkezelés során minden esetben biztosítsa a tiszta, fertőzésmentes sebgyógyulás feltételeit, annak megfelelően cserélje a fedőkötést, sebtapaszt!
- Amennyiben a sebtapasz használata során bármilyen bőrirritációt, kellemetlenséget, egyéb mellékhatást tapasztal, haladéktalanul keresse fel háziorvosát!

**Tárolás:** szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

**Gyártó:** BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg

**Forgalmazó:** Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN Medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).