

LEUKOPLAST ELASTOMULL HAFT ÖNTAPADÓ KÖTÉSRÖGZÍTŐ PÓLYA – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Öntapadó kötésrögzítő pólya sebkötöző anyagok rugalmas rögzítésére.

Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A Leukoplast termékek elérhetőek a patikákban vagy a drogériákban. Vásárlásukhoz nem szükséges orvosi rendelvény.

Használati útmutató:

Helyezzen steril mull lapot a sebre, majd az Elastomull haft öntapadós kötésrögzítő pólyával rögzítse azt. A termék anyaga önmagához tapad, így annak stabil felhelyezése, egyéb rögzítő eszköz (ragtapasz, kapocs) alkalmazását nem igényli. Az öntapadós pólyát használhatja enyhe szorítókötésként is.

A termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja!



Egyszer használatos termék

Ellenjavallatok:

- A kötésrögzítő pólyát sérült, irritált bőrfelületen ne alkalmazza!
- Az alkalmazás ideje a seb gyógyulásától és a betegek egyéni tényezőitől függően változó.
- Sebkezelés során minden esetben biztosítsa a tiszta, fertőzésmentes sebgyógyulás feltételeit, annak megfelelően cserélje a fedőkötést, sebtapaszt!
- Amennyiben a kötésrögzítő pólya használata során bármilyen bőrirritációt, kellemetlenséget, egyéb mellékhatást tapasztal, haladéktalanul keresse fel házi orvosát!

Tárolás: különleges tárolást nem igényel.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg

Forgalmazó: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN Medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).