

LEUKOFIX RAGTAPASZ – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Átlátszó ragtapesz katéterek, szondák, branülök és szárnyas tűk rögzítéséhez. Akadálytalan obszervációt biztosít. Sürgősségi esetekben ideális.

Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A Leukoplast termékek elérhetőek a patikákban vagy a drogériákban. Vásárlásukhoz nem szükséges orvosi rendelvény.

Használati útmutató:

Katéterek, szondák, branülök és szárnyas tűk rögzítéséhez vágja vagy tépje le a szükséges hosszúságú ragtapesz csíkot.

A ragtapeszt illessze a rögzítés helyére úgy, hogy annak ragasztós felülete sérült bőrfelülettel ne érintkezzen. Törekedjen a gyűrődésmentes, testfelszínre jól rásimuló felhelyezésre.

A termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja!

Ellenjavallatok:

- A ragtapeszt sérült, irritált bőrfelületen ne alkalmazza!
- Az alkalmazás idejét a kezelőorvos/szakember határozza meg, mely a betegek egyéni tényezőitől függően változó. Ennek hiányában minden esetben biztosítsa a tiszta, fertőzésmentes sebgyógyulás feltételeit, annak megfelelően cserélje a fedőkötést és kötésrögzítőt!
- Amennyiben a kötésrögzítő tapasz használata során bármilyen bőrirritációt, kellemetlenséget, egyéb mellékhatást tapasztal, haladéktalanul keresse fel háziorvosát!

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg
Forgalmazó: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN Medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).