

# LEUKOPLAST RAGTAPASZ – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**Klasszikus ragtapasz normál bőrre orvosi eszközök és kötések rögzítésére.**

**Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!**

A Leukoplast termékek elérhetőek a patikákban vagy a drogériákban. Vásárlásukhoz nem szükséges orvosi rendelvény.

## **Használati útmutató:**

Orvosi eszközök és kötések rögzítéséhez vágja vagy tépje le a szükséges hosszúságú ragtapasz csíkot. A ragtapaszt illessze a rögzítés helyére úgy, hogy annak ragasztós felülete sérült bőrfelülettel ne érintkezzen. Törekedjen a gyűrődésmentes, testfelszínre jól rásimuló felhelyezésre. A termék levegő és vízpára számára átjárható, vízlepergető.

A termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja!

## **Ellenjavallatok:**

- A ragtapaszt sérült, irritált bőrfelületen ne alkalmazza!
- Az alkalmazás idejét a kezelőorvos/szakember határozza meg, mely a betegek egyéni tényezőitől függően változó. Ennek hiányában minden esetben biztosítsa a tiszta, fertőzésmentes sebgyógyulás feltételeit, annak megfelelően cserélje a fedőkötést és kötésrögzítőt!
- Amennyiben a kötésrögzítő tapasz használata során bármilyen bőrirritációt, kellemetlenséget, egyéb mellékhatást tapasztal, haladéktalanul keresse fel háziorvosát!

**Tárolás:** szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

**Gyártó:** BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg  
**Forgalmazó:** Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN Medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).