

OP-Wunden bestmöglich versorgt.

Unter **Operationswunden** (auch: postoperative Wunden) versteht man einen Bereich der Haut, dem meist mit einem Skalpell ein kontrollierter, steriler Schnitt zugefügt wurde. Sie heilen in der Regel primär. Das heißt, nach der Operation positioniert der Arzt die Wundränder so, dass sie glatt beieinanderliegen, und schließt die Wunde fachgerecht mittels chirurgischer Naht, Wundkleber oder Wundnahtstreifen.



Unsere Aufgabe ist es, den Prozess der Wundheilung bestmöglich zu unterstützen. Dazu wird die primär verschlossene, nicht sezernierende OP-Wunde mit sterilen Wundschnellverbänden oder Kompressen für mindestens 2 bis 3 Tage abgedeckt, sodass sie komplikationslos unter Ausbildung einer unauffälligen Narbe heilen kann.



Bei **kleineren Wunden** eignet sich dafür ein steriles Pflaster aus der Leukomed-Produktfamilie. **Größere OP-Wunden** können mit der Vlieskomresse Leukoplast® non-woven oder der Baumwollkomresse Leukoplast® cotton gauze in Kombination mit einer Fixierung geschützt werden.

Vorteil und Nutzen der sterilen Leukoplast®-Wundauflagen:

- Schutz vor Kontaminationen
- Absorption von Wundsekret
- Verfügbar in vielen Größen
- Skin sensitive Varianten: atraumatische Lösung für die empfindliche Haut

Mehr Informationen zur Rezeptierung der entsprechenden Verbandmittel im Sprechstundenbedarf finden Sie auf unserer Internetseite: www.leukoplast.de/praxiswissen/sprechstundenbedarf



Leukoplast®

Wundverschluss



Sterile Kompressen



Fixierung



Sterile Post-OP Pflaster



Leukoplast® wound closure strip, sterile Wundnahtstreifen, weiß, 1 BE mit 10 Peelbtl.					
Abmessung	Wundauflage	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
0,6 cm x 3,8 cm	-	6 Strips/Peelbeutel	1/16	7129200	17875665
0,6 cm x 7,5 cm	-	3 Strips/Peelbeutel	1/16	7129202	17875671
Leukoplast® wound closure strip, sterile Wundnahtstreifen, weiß, 1 BE mit 50 Peelbtl.					
0,6 cm x 3,8 cm	-	6 Strips/Peelbeutel	1/4	7274000	17875719
Leukosan® Adhesive, Hautverschluss, Tube mit 2 Applikatoren					
0,7 ml	-	10	1/8	7254100	6437264
0,36 ml	-	10	1/8	7254101	8745863
Leukoplast® compress cotton gauze (DIN EN 14079), 8fach/17fd, Kompressen					
Abmessung	Steril	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
5,0 cm x 5,0 cm	ja	25 x 2	1/120	7123700	17207886
7,5 cm x 7,5 cm	ja	25 x 2	1/80	7123702	17207900
10,0 cm x 10,0 cm	ja	25 x 2	1/32	7123704	17207917
10,0 cm x 20,0 cm	ja	25 x 2	1/16	7123706	17207923
Leukoplast® compress non-woven, Vlieskompressen, 4-lagig					
10,0 cm x 10,0 cm	ja	50 x 2	1/12	7128809	17207030
Leukoplast® compress non-woven, Vlieskompressen, 6-lagig					
7,5 cm x 7,5 cm	ja	25 x 2	1/60	7128821	17208785
Fixomull® stretch, luftdurchlässiges Klebevlies					
Abmessung	Wundauflage	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
5,0 cm x 10,0 m	-	-	1/24	0908400	4539517
10,0 cm x 10,0 m	-	-	1/24	0908500	4539523
15,0 cm x 10,0 m	-	-	1/24	0908600	4539546
20,0 cm x 10,0 m	-	-	1/24	0908700	4539552
10,0 cm x 2,0 m	-	-	1/12	7002200	8441442
Fixomull® transparent, wasser- und keimdichte Klebefolie					
5,0 cm x 10,0 m	-	-	1/12	7221600	3643158
10,0 cm x 10,0 m	-	-	1/12	7221601	3643201
15,0 cm x 10,0 m	-	-	1/12	7221602	3643218
10,0 cm x 2,0 m	-	-	1/12	7221700	3643282
Fixomull® skin sensitive, luftdurchlässiges Klebevlies					
5,0 cm x 5,0 m	-	-	1/24	7996501	15190928
10,0 cm x 5,0 m	-	-	1/12	7996502	15190934
15,0 cm x 5,0 m	-	-	1/12	7996503	15190940
10,0 cm x 2,0 m	-	-	1/12	7996504	15190880
Leukomed®, sterile Post-OP Verbände, Vlies					
7,2 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,8 cm	50	1/8	7238000	01050690
10,0 cm x 8,0 cm	6,0 cm x 4,0 cm	50	1/6	7238001	01050715
15,0 cm x 8,0 cm	11,0 cm x 4,0 cm	50	1/6	7238002	01050738
20,0 cm x 10,0 cm	16,0 cm x 5,0 cm	50	1/8	7238003	01050827
Leukomed® T plus (transparent), sterile Post-OP Verbände					
7,2 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,8 cm	50	1/8	7238200	01051040
10,0 cm x 8,0 cm	6,0 cm x 4,0 cm	50	1/6	7238201	01051063
15,0 cm x 8,0 cm	11,0 cm x 4,0 cm	50	1/6	7238202	01051092
Leukomed® Control					
7,0 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,0 cm	10	1/28	7323000	11034249
10,0 cm x 7,0 cm	7,0 cm x 4,0 cm	10	1/20	7323001	11034255
15,0 cm x 8,0 cm	11,5 cm x 4,5 cm	10	1/20	7323002	11034290
24,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 6,0 cm	5	1/20	7323003	11034309
35,0 cm x 10,0 cm	31,0 cm x 6,0 cm	5	1/10	7323005	11034338
Leukomed® skin sensitive, sterile Post-OP Verbände, fragile Haut					
7,2 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,8 cm	20	1/10	71723900	17410914
10,0 cm x 8,0 cm	6,0 cm x 4,0 cm	20	1/10	71723901	17410920
15,0 cm x 8,0 cm	11,0 cm x 4,0 cm	20	1/10	71723902	17410966
25,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,0 cm	20	1/12	71723903	17410972
Leukomed® T plus skin sensitive, sterile Post-OP Verbände, fragile Haut					
7,2 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,8 cm	5	1/36	7617800	15862888
10,0 cm x 8,0 cm	6,0 cm x 4,0 cm	5	1/36	7617801	15862894
15,0 cm x 8,0 cm	11,0 cm x 4,0 cm	5	1/36	7617802	15862902
25,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,0 cm	5	1/36	7617803	15862919

Weitere Produktvarianten und -größen erhältlich.

*Hinweis: Aktuelle Informationen finden Sie in der jeweils gültigen SSB-Vereinbarung Ihrer zuständigen KV.



essity

Leukoplast®,
an Essity brand

Essity | BSN medical GmbH · Schützenstraße 1-3 · 22761 Hamburg · www.bsnmedical.de
Tel. +49 (0)40 / 59 36 12-100 · Fax +49 (0)40 / 49 09-66 66



Leukoplast®

Wound care in best hands



Post-OP
Wundversorgung

Leukoplast®


Post-OP Wundversorgung:
Rundum gut versorgt.

Leukoplast®

Wound care in best hands

Ganzheitliche OP-Nachsorge von A bis Z.

Unter einem Dach vereint, finden Sie bei Leukoplast® alles, was Sie für die Versorgung von kleinen und größeren Operationswunden brauchen. Bedienen Sie sich für jede Phase der Nachsorge aus dem professionellen Leukoplast®-Sortiment und vertrauen Sie auf unsere qualitativ hochwertigen Produkte.

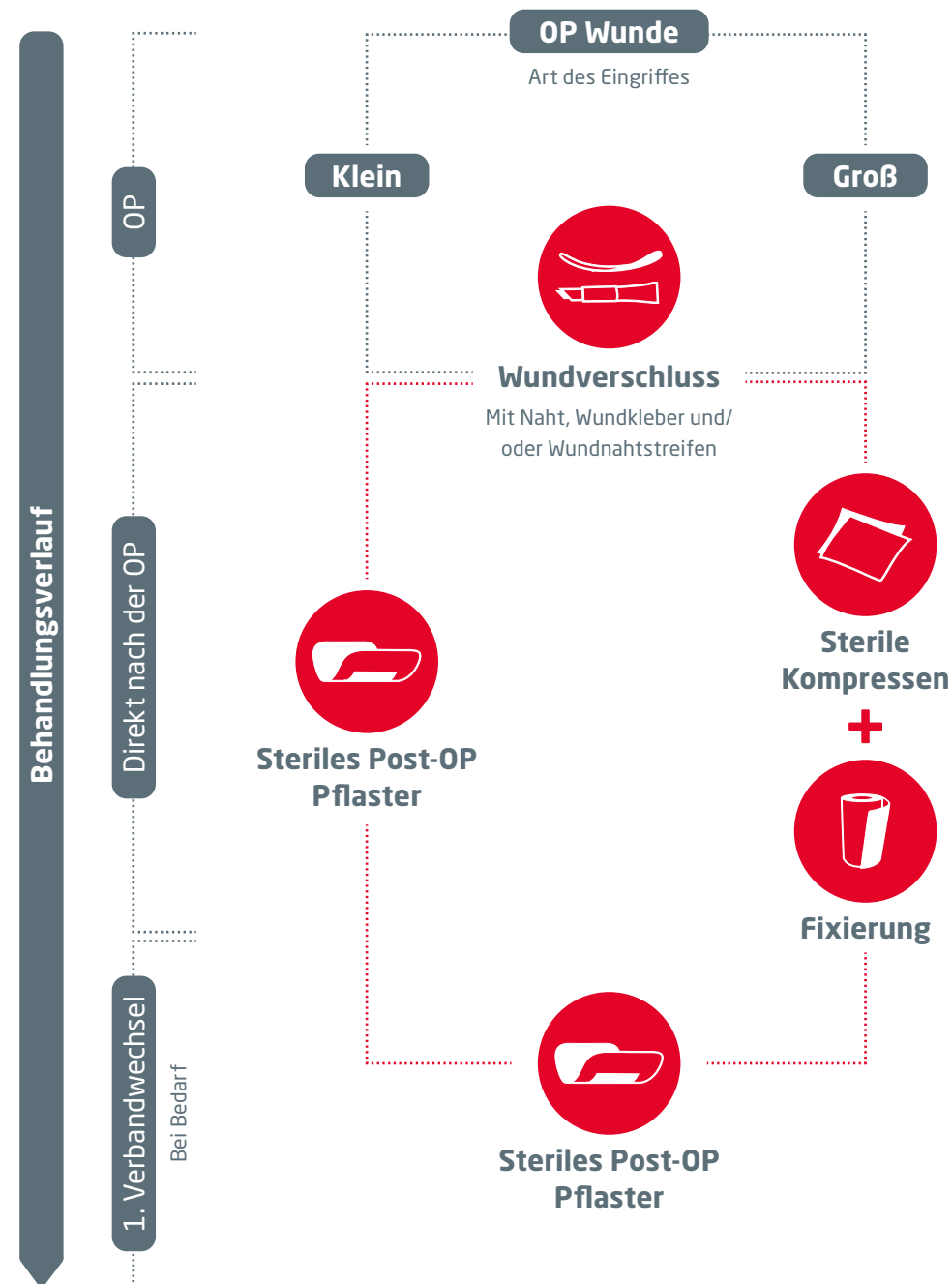

Wundverschluss



steril



Leukoplast® wound closure strip

Die Wundnahtstreifen für einen sicheren Hautverschluss

- Nahezu schmerzfreier Wundverschluss
- Passen sich dank ihrer Elastizität an die Heilungsstadien an
- Verbessern das kosmetische Narbenergebnis



Leukosan® Adhesive

Der Hautkleber mit hoher Viskosität für eine präzise Wundrandadaptation

- Schnelle und einfache Applikation
- Atraumatischer Wundverschluss
- Schützt die Wunde vor Bakterien

Sterile Kompressen



steril



Leukoplast® compress cotton gauze

Die klassische Baumwollkomresse

- Saugstark
- Hautfreundlich
- Atmungsaktiv
- 100% Baumwolle



Leukoplast® compress non-woven

Die weiche Vlieskomresse für empfindliche Haut

- Saugstark
- Verringerte Wundhaftung
- Hautfreundlich aufgrund ihrer Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit

Sterile Post-OP Pflaster - Leukomed®



steril



Leukomed®

Steriler Wundverband aus anschiemigem Vlies.



Leukomed® T plus

Steriler, wasserdichter und saugfähiger Folienverband.



Leukomed® Control

Steriler, vollständig transparenter Wundverband mit Hydropolymergelseln.



Leukomed® skin sensitive

Steriler Wundverband für fragile Haut mit Silikonantrag für atraumatischen Verbandwechsel.



Leukomed® T plus skin sensitive

Steriler, wasserdichter und saugfähiger Folienverband für besonders empfindliche Haut.

Fixierung - Fixomull®



nicht steril



Fixomull® stretch

Besonders flexibler und elastischer Vliesverband für konturierte Körperpartien.



Fixomull® transparent

Der Folienverband unterstützt die Infektionsprävention und ermöglicht das Duschen.



Fixomull® skin sensitive

Der Vliesverband mit Silikonkleber für besonders empfindliche Haut, wie Altershaut oder Babyhaut.