

LEUKOPOR RAGTAPASZ – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A különösen érzékeny bőrű, gyakori kötécserét igénylő betegek számára ideális ragtapasz. Csecsemők, gyerekek és idős emberek számára, valamint sérülékeny bőrhöz. Intenzív terápiás kezelés alatt álló legyengült, sérülékeny betegek bőre is jól tolerálja.

Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A Leukoplast termékek elérhetőek a patikákban vagy a drogériákban. Vásárlásukhoz nem szükséges orvosi rendelvény.

Használati útmutató:

Kötések, segédeszközök rögzítéséhez vágja vagy tépje le a szükséges hosszúságú ragtapasz csíkot.

A ragtapaszt illessze a rögzítés helyére úgy, hogy annak ragasztós felülete sérült bőrfelülettel ne érintkezzen. Törekedjen a gyűrődésmentes, testfelszínre jól rásimuló felhelyezésre.

A termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja!

Ellenjavallatok:

- A ragtapaszt sérült, irritált bőrfelületen ne alkalmazza!
- Az alkalmazás idejét a kezelőorvos/szakember határozza meg, mely a betegek egyéni tényezőitől függően változó. Ennek hiányában minden esetben biztosítsa a tiszta, fertőzésmentes sebgyógyulás feltételeit, annak megfelelően cserélje a fedőkötést és kötésrögzítőt!
- Amennyiben a kötésrögzítő tapasz használata során bármilyen bőrirritációt, kellemetlenséget, egyéb mellékhatást tapasztal, haladéktalanul keresse fel háziorvosát!

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg
Forgalmazó: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN Medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).