

Therapie Empfehlung für Akute Wunden*

Wundart / Wundbild	Behandlungsziel	Behandlungsweg	PRODUKTE	
			Wundversorgung	Alternative
Schürf-wunde 	- Epitheliale Wundheilung – Regeneration - Wundruhe - Atraumatischer Verbandwechsel - Infektionsprophylaxe	- Entfernung von Fremdkörpern - Reinigung der Wunde mit geeigneter Wundspüllösung - Distanzgitter für atraumatischen Verbandwechsel verwenden - Abdeckung mit geeignetem Exsudat-manager (haftend oder nichthaftend)	Wunddistanzgitter - Cuticell®-Sortiment oder Bei erhöhter Infektionsgefahr - Cutimed® Sorbact®-Sortiment Wundabdeckung - Leukoplast® compress cotton gauze - Leukoplast® compress absorbent soft Fixierung - Fixomull®-Sortiment	Wunddistanzgitter - Cuticell®-Sortiment oder Bei erhöhter Infektionsgefahr - Cutimed® Sorbact®-Sortiment Wundverband - Leukomed®-Sortiment
Schnitt-wunde 	- Adaptation der Wundränder - Primärer Wundverschluss - Wenig funktionale Einschränkungen nach Wundheilung - Infektionsprophylaxe	- Reinigung der Wunde mit geeigneter Wundspüllösung - Wundränder adaptieren mit Naht, Kleber oder Wundnahtstreifen - Abdeckung mit Wundschnellverband	Wundnahtstreifen - Leukoplast® wound closure strip Hautkleber - Leukoplast® skin adhesive Wundverband - Leukomed®-Sortiment	Wundnahtstreifen - Leukoplast® wound closure strip Hautkleber - Leukoplast® skin adhesive Wundabdeckung - Leukoplast® compress cotton gauze - Leukoplast® compress absorbent soft Fixierung - Fixomull®-Sortiment - Elastomull®-Sortiment
Platzwunde Risswunde 	- Nach Wundrevision primärer Wundverschluss, wenn das nicht möglich ist, sekundäre Wundheilung - Infektionsprophylaxe - Funktional und kosmetisch gutes Ergebnis	- Reinigung der Wunde mit geeigneter Wundspüllösung - Wundrevision, Débridement - Ist kein Wundverschluss möglich – sekundäre Wundheilung	Wundnahtstreifen - Leukoplast® wound closure strip Hautkleber - Leukoplast® skin adhesive Bei erhöhter Infektionsgefahr - Cutimed® Sorbact®-Sortiment Wundverband - Leukomed®-Sortiment	Wundnahtstreifen - Leukoplast® wound closure strip Hautkleber - Leukoplast® skin adhesive Bei erhöhter Infektionsgefahr - Cutimed® Sorbact®-Sortiment Wundabdeckung - Leukoplast® compress cotton gauze - Leukoplast® compress absorbent soft Fixierung - Fixomull®-Sortiment - Elastomull®-Sortiment
Quetsch-wunde 	- Nach Wundrevision primärer Wundverschluss, wenn das nicht möglich ist, sekundäre Wundheilung - Infektionsprophylaxe (grundsätzlich) - Funktional und kosmetisch gutes Ergebnis	- Reinigung der Wunde mit geeigneter Wundspüllösung - Wundrevision, Débridement - Ist kein Wundverschluss möglich – sekundäre Wundheilung	Wundnahtstreifen - Leukoplast® wound closure strip Infektionsprophylaxe und bei Infektionszeichen - Cutimed® Sorbact®-Sortiment Wundverband - Leukomed®-Sortiment	Wundnahtstreifen - Leukoplast® wound closure strip Infektionsprophylaxe und bei Infektionszeichen - Cutimed® Sorbact®-Sortiment Wundabdeckung - Leukoplast® compress cotton gauze - Leukoplast® compress absorbent soft Fixierung - Fixomull®-Sortiment - Elastomull®-Sortiment
Bisswunde Schnelle medizinische Untersuchung und Behandlung notwendig! Bitte folgen Sie Ihren lokalen Protokollen bei der Behandlung von Bisswunden. Bei Tierbissen, bedenken Sie das Risiko von Rabiesvirus (Tollwut) und Tetanus. Bei Bissen von Menschen, bedenken Sie das Risiko von Hepatitis, HIV und anderen Infektionen. 	Aufgrund der Dringlichkeit sollte hier zuvor ein Arzt konsultiert werden!		Infektionsmanagement - Cutimed® Sorbact®-Sortiment Wundabdeckung - Leukoplast® compress cotton gauze - Leukoplast® compress absorbent soft Fixierung - Fixomull®-Sortiment - Elastomull®-Sortiment	
Skin Tears/ fragile Haut 	- Epitheliale Wundheilung – Regeneration - Wundruhe - Atraumatischer Verbandwechsel	- Reinigung der Wunde mit geeigneter Wundspüllösung - Ggf. Repositionierung des Hautlappens - Unbedingt atraumatischer Wundverband - Fixierung nicht mit klebenden, sondern mit „sanft haftenden“ Produkten	Wunddistanzgitter - Cuticell® Contact Wundabdeckung - Leukoplast® compress cotton gauze - Leukoplast® compress absorbent soft Fixierung - Fixomull® skin sensitive	Wundverband - Leukomed® skin sensitive - Leukomed® T Plus skin sensitive - Cutimed® Siltec® B
Verbrennung Verbrühung Stadium 2a/2b 	- Epitheliale Wundheilung - Schmerzfreier Verbandwechsel, wenig Einschränkungen in Abhängigkeit der Wundlokalisation - Infektionsprophylaxe	- Nach initialer Kühlung (ca. 20°C), Reinigung der Wunde mit geeigneter Wundspüllösung - Eröffnung und Abtragung von Brandblasen - Geeigneter atraumatischer Wundverband Unter Beachtung der Leitlinien der „Deutschen Gesellschaft für Verbrennungsmedizin“	Wunddistanzgitter - Cuticell®-Sortiment oder Infektionsmanagement - Cutimed® Sorbact®-Sortiment Wundabdeckung - Leukoplast® compress non-woven - Leukoplast® compress absorbent soft Fixierung - Fixomull®-Sortiment	Wundverband - Leukomed® Control (nur bei Grad 2a, oberflächliche Verbrennung) oder bei Infektion - Cutimed® Sorbact® Hydroactive B
Post-OP Wunde 	- Primäre Wundheilung - Glatte Wundränder - Unauffällige Narbenbildung - Infektionsprophylaxe Wundheilung	- Wundränder werden nach der OP möglichst so positioniert, dass sie glatt beieinander liegen - Wundverschluss durch Nähte, Klammern oder Strips - Abdeckung der Wunde durch Sterile Wundverbände	Wundnahtstreifen - Leukoplast® wound closure strip Hautkleber - Leukoplast® skin adhesive Infektionsmanagement - Cutimed® Sorbact®-Sortiment Wundabdeckung - Leukoplast® compress cotton gauze - Leukoplast® compress absorbent soft Fixierung - Fixomull®-Sortiment	Wundnahtstreifen - Leukoplast® wound closure strip Hautkleber - Leukoplast® skin adhesive Infektionsmanagement - Cutimed® Sorbact®-Sortiment Wundverband - Leukomed®-Sortiment
Postoperative Naht-dehizensz/ Wund-heilungs-störung 	- Reduzierung und Beseitigung der bakteriellen Belastung - Ungehinderter Exsudatabfluss - Vermeidung infektionsbedingter Komplikationen	- Reinigung der Wunde mit geeigneter Wundspüllösung - Versorgung mit Bakterien-reduzierenden Verbandstoffen (z.B. Versorgung mit bakterien-bindenden Verbandmaterial) - Abdeckung der Wunde abhängig von der Exsudatmenge und der Wundtiefe	Infektionsmanagement - Cutimed® Sorbact®-Sortiment Wundabdeckung (Steril) - Leukoplast® compress cotton gauze - Leukoplast® compress absorbent soft Fixierung - Fixomull®-Sortiment	Infektionsmanagement - Cutimed® Sorbact®-Sortiment Wundverband - Leukomed®-Sortiment

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen zu den Verbänden haben!

*Dieses Poster ist als Informationshilfe gedacht und stellt keine medizinische Fachberatung dar. Die Behandlungspfade sind exemplarisch und ersetzen nicht die lokalen Protokolle. Ausführliche Informationen zum Medizinprodukt, einschließlich Anwendungshinweisen, Kontraindikationen, Wirkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweisen, finden Sie in den Produktspezifischen Gebrauchsanweisungen.