

Der Cutimed® Therapieleitfaden

Für mehr Sicherheit bei der Versorgung von chronischen Wunden

Im Vorfeld der Wundbehandlung ist stets eine Wundspülung und -reinigung durchzuführen.

Dies kann z. B. mit einer Wundspüllösung oder alternativ mit einer unkonservierten Ringerlösung/NaCl-0,9%-Lösung erfolgen.

Bei nekrotischen oder fibrinbelegten Wunden kann bei Bedarf **Cutimed® Sorbact® Gel** zur autolytischen Wundreinigung eingesetzt werden.

Bitte stets auf Wundrandschutz achten (z. B. Cutimed® PROTECT Spray und Applikator).

Je nach Wundverband ist eine zusätzliche Fixierung nötig.

Eine Fixierung kann bspw. mit einem Fensterverband mit Fixomull® stretch/Fixomull® skin sensitive oder Elastomull®/Elastomull® haft erfolgen.



1. NEKROTISCHE WUNDE

Therapieziel:

- ◆ Aufweichen und Lösen von Nekrosen sowie Förderung der Selbstreinigungsmechanismen
- ◆ Schutz vor Austrocknung, Infektionsprophylaxe

Verbandwechsel je nach Wundsituation/Exsudat alle 1–3 Tage

Achtung:

- ◆ In der Regel primär chirurgisches Débridement nach Diagnostik der arteriellen Durchblutung des Wundgebiets
- ◆ Bei pAVK sind trockene Nekrosen erst nach Wiederherstellung der Durchblutung zu behandeln

Exsudatlevel	Oberflächlich	Tief
○○○○–●○○○	Leukomed® T	
●○○○–●●○○	Cutimed® Siltec® Cutimed® Siltec® L Cutimed® Siltec® B Cutimed® Siltec® Plus	Cutimed® Gelling Fiber (bei mäßiger Exsudation) Cutimed® Siltec® Cutimed® Siltec® L Cutimed® Siltec® B Cutimed® Siltec® Plus
●●○○–●●●●	Cutimed® Sorbion® Sachet S Cutimed® Sorbion® Border Cutimed® Sorbion® Sana Cutimed® Sorbion® Carbon+	Cutimed® Gelling Fiber (bei mäßiger bis starker Exsudation) Cutimed® Sorbion® Sachet S Cutimed® Sorbion® Border



2. INFIZIERTE WUNDE


Therapieziel:

- ◆ Reduzierung und Beseitigung der bakteriellen Belastung
- ◆ Ungehindertes Exsudatabfluss
- ◆ Vermeidung infektionsbedingter Komplikationen

Verbandwechsel je nach Wundsituation/Exsudat alle 1–3 Tage

Exsudatlevel	Oberflächlich	Tief
○○○○–●○○○	Cutimed® Sorbact® Hydroactive B	Cutimed® Sorbact® Gel Cutimed® Sorbact® Saugkomresse Leukoplast® compress absorbent soft
●○○○–●●○○	Cutimed® Sorbact® Komresse Cutimed® Sorbact® Gel Cutimed® Siltec® Cutimed® Siltec® L Cutimed® Siltec® Plus Cutimed® Siltec® Sorbact® B Cutimed® Siltec® Sorbact®	Cutimed® Sorbact® Tamponade Cutimed® Sorbact® Gel Cutimed® Siltec® Cutimed® Siltec® L Cutimed® Siltec® Plus
●●○○–●●●●	Cutimed® Sorbact® Komresse Cutimed® Sorbion® Sachet S Cutimed® Sorbion® Border Cutimed® Sorbion® Sana Cutimed® Sorbion® Carbon+ Cutimed® Sorbion® Sorbact®	Cutimed® Sorbact® Tamponade Cutimed® Sorbion® Sachet S Cutimed® Sorbion® Border

ALLE
PRODUKTE SIND
UND BLEIBEN
SICHER
ERSTATTUNGS-
FÄHIG

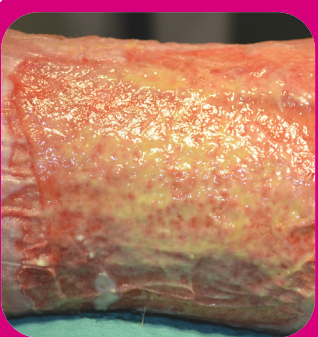


3. FIBRINBELEGTE WUNDE

Therapieziel:

- ◆ Wundreinigung und Förderung der Selbstreinigungsmechanismen
- ◆ Feuchthalten der Wunde, Schutz vor Austrocknung
- ◆ Mechanischer Schutz des neuen Gewebes
- ◆ Überführen in eine sauber granulierende Wunde

Verbandwechsel je nach Wundsituation/Exsudat alle 1–7 Tage

Exsudatlevel	Oberflächlich	Tief
○○○○–●○○○		Leukoplast® compress absorbent soft
●○○○–●●○○	Cutimed® Siltec® Cutimed® Siltec® B Cutimed® Siltec® Plus	Cutimed® Gelling Fiber (bei mäßiger Exsudation) Cutimed® Siltec® Cutimed® Siltec® L Cutimed® Siltec® B Cutimed® Siltec® Plus
●●○○–●●●●	Cutimed® Sorbion® Sachet S Cutimed® Sorbion® Border Cutimed® Sorbion® Carbon+	Cutimed® Gelling Fiber (bei mäßiger bis starker Exsudation) Cutimed® Sorbion® Sachet S Cutimed® Sorbion® Border

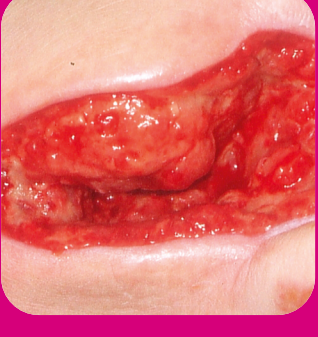

4. GRANULIERENDE WUNDE

Therapieziel:

- ◆ Förderung der Gewebeneubildung zur Defektauffüllung
- ◆ Feuchthalten der Wunde, Schutz vor Austrocknung
- ◆ Mechanischer Schutz des neuen Gewebes, Wundruhe gewährleisten
- ◆ Überführen in eine epithelisierende Wunde oder Vorbereitung für die plastische Deckung

Verbandwechsel je nach Wundsituation/Exsudat alle 3–7 Tage

Exsudatlevel	Oberflächlich	Tief
●○○○–●●○○	Cutimed® Siltec® Cutimed® Siltec® L Cutimed® Siltec® B Cutimed® Siltec® Plus	Cutimed® Gelling Fiber (bei mäßiger Exsudation) Cutimed® Siltec® Cutimed® Siltec® L Cutimed® Siltec® B Cutimed® Siltec® Plus
●●○○–●●●●	Cutimed® Sorbion® Sachet S Cutimed® Sorbion® Border Cutimed® Sorbion® Sana Cutimed® Sorbion® Carbon+	Cutimed® Gelling Fiber (bei mäßiger bis starker Exsudation) Cutimed® Sorbion® Sachet S Cutimed® Sorbion® Border



5. EPITHELISIERENDE WUNDE

Therapieziel:

- ◆ Förderung der Zellteilung und -wanderung im feuchten Milieu
- ◆ Feuchthalten der Wunde, Schutz vor Austrocknung
- ◆ Mechanischer Schutz des neuen Gewebes, Wundruhe gewährleisten
- ◆ Wundverschluss

Verbandwechsel je nach Wundsituation/Exsudat alle 3–7 Tage

Exsudatlevel	Oberflächlich	Tief
○○○○–●○○○	Cuticell® Contact Leukoplast® compress absorbent soft	Cutimed® Siltec® L (bei schwacher Exsudation)
●○○○–●●○○	Cuticell® Contact Leukoplast® compress absorbent soft	Cutimed® Siltec® Cutimed® Siltec® L Cutimed® Siltec® B Cutimed® Siltec® Plus

Wundphase	Exsudat	Wundtiefe	Wundverband
Nekrose	○○○○ Trocken	Oberflächlich	Primärer Wundverband
Infektion	●○○○ Schwach	Tief	Sekundäre Wundabdeckung
Fibrinbelag	●●○○ Mäßig		Alternatives Kombinationsprodukt
Granulation	●●●○ Stark		
Epithelisierung	●●●● Übermäßig		