

Leukoplast STEPS

De complete oplossing voor skin tears #SaveOurSkin

VOORKOMEN

De incidentie van skin tears kan met **50% worden verminderd** als twee keer per dag een vochtinbrengend product wordt gebruikt.¹



TENA ProSkin
Zachte en transparante crème.
Kalmerend en verzorgend.



Cutimed Acute
Huidverzorgende mousse. Hydrateert de huid intensief en voorkomt vochtverlies.



BEHANDELEN


Hoe zien skin tears eruit?



Type 1
Geen huidverlies



Type 2
Gedeeltelijk verlies van huidflap

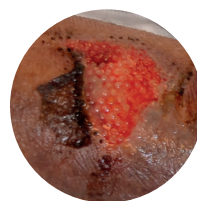

Type 3
Totaal verlies van huidflap

Stappen van de behandeling²

- Stelp het bloeden
- Reinigen en debrideren
- Wees alert op infectie en ontsteking
- Controleer de vochtbalans/exsudaatcontrole
- Beoordeel de wondrand en -sluiting
- Verbanden moeten meerdere dagen kunnen blijven zitten (maar niet langer dan 7 dagen³)

Gebruik een samengestelde oplossing. Dit is het meest geschikt wanneer de huidflap gedeeltelijk los zit en deze teruggeplaatst dient te worden.


Cuticell Contact

Dunne wondcontactlaag op basis van huidvriendelijke siliconen met eenzijdige kleeftlaag.



Leukoplast compress non-woven

Absorberend kompres gemaakt van non-woven materiaal.

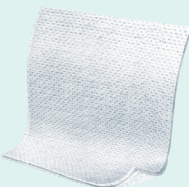

Fixomull skin sensitive

Volvlakfixatie voor het vastzetten van wondverbanden op een kwetsbare huid.




Kies een kant en klare oplossing. Dit is vooral bedoeld voor skin tears waar de huidflap stevig vast zit of als er sprake is van andere huidbeschadigingen.

•••••• Voor weinig tot matig exsudaat



Leukomed skin sensitive

Steriele, absorberende en zachte eilandpleister voor licht tot matig exsuderende wonden.

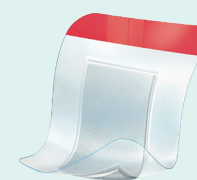

Leukomed T plus skin sensitive

Steriele en waterdichte eilandpleister voor licht tot matig exsuderende wonden.

Beide producten beschikken over een siliconen kleeftlaag.

•••••• Voor matig tot veel exsudaat



Cutimed Siltec B
Schuimverband met suberabsorbers en siliconen wondcontactlaag en border.

Voor oedeem in de onderbenen:
Compressie alleen toepassen na beoordeling van de vaatstatus door een behandelaar.



JOBST Opaque
15-20 mmHg

Dit product is te verkrijgen via de bandagist.



Voor veneuze ziektes en wonden op de onderbenen:



JOBST Compri2
Tweelaags compressie-zwachtelsysteem.



JOBST UlcerCare
Tweelaagse verbandkous met liner.

Leer meer over Leukoplast® STEPS

Skin Tear Effective Protocol and Solutions: Ontdek STEPS, onze complete oplossing voor het identificeren, voorkomen en behandelen van skin tears. Wij zijn er om jou te ondersteunen, zodat jij je kunt richten op de best mogelijke zorg voor jouw patiënten.



¹ Carville K, et al. The effectiveness of a twice-daily skin-moisturising regimen for reducing the incidence of skin tears. *International Wound Journal*. 2014;11: 446-53.

² LeBlanc K, et al. Best practice recommendations for the prevention and management of skin tears in aged skin. *Wounds International*. 2018.

³ Deprez J, et al. Measures that patients living in the community can take for the prevention and treatment of skin tears: A comprehensive review of the literature. *J Wound Management*. 2022;23(2):70-77.



09084358M

Leukoplast®

Wound care in best hands