

Cutimed® Science Card

Cutimed® Epiona® aliviou a dor em 49% dos utentes com úlcera venosa da perna após quatro semanas

Oropallo A et al. Observational study of venous leg ulcer treated with a native collagen-alginate dressing and the impact on wound-related quality of life. Wound Manag Prev. 2024 Dec;70(4).

O que recomendam os especialistas?

Está amplamente reconhecido que as úlceras venosas da perna (UVP) são indicativas de feridas de difícil cicatrização. Estas caracterizam-se frequentemente por um excesso de MMPs*, que afetam o processo de cicatrização ao degradar a matriz extracelular (MEC)** e reduzir a atividade dos fatores de crescimento.

De acordo com as recomendações estabelecidas no documento de consenso internacional de especialistas, é aconselhada a utilização de matrizes biológicas acelulares, como os pensos de colagénio nativo, para acelerar o processo de cicatrização da ferida.¹

O sintoma mais comum associado às UVP é a dor, que tem um impacto significativo na qualidade de vida (QV). Assim, ao desenvolver um plano de tratamento, devem ser abordados não apenas os sintomas da ferida, mas também o seu impacto na qualidade de vida do utente.²

CrITÉrios-chave para resultados ótimos no utente¹



Redução do tamanho da ferida

- ✓ Alcança a cicatrização completa da ferida.




Redução da dor

- ✓ Melhora o conforto do utente e a sua qualidade de vida relacionada com a ferida.



Adaptação à área da ferida

- ✓ Para máxima eficiência.

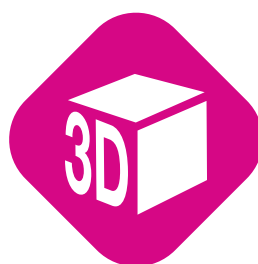

Semelhança com a MEC

- ✓ Mantém a arquitetura natural e os componentes-chave para a cicatrização de feridas.

Referências

1. International consensus. Acellular matrices for the treatment of wounds. An expert working group review. London: Wounds International, 2010.

2. Holloway S et al. Holistic Management of Wound-Related Pain. J Wound Management, 2024;25 (1 Sup1). S1-S84.

* Matrix Metaloproteasas.

** Matriz extracelular.

Estudo

Antecedentes: Estudo observacional, exploratório, de um único centro, sobre o desempenho clínico e a segurança de um penso de colagénio nativo*** em úlceras venosas que não cicatrizam.

Método: Um total de 50 utentes com úlceras venosas da perna foram tratados com um penso de colagénio nativo, um penso secundário e compressão durante 4 semanas/5 visitas ou até se alcançar a cicatrização completa da ferida. A medida primária de resultado foi a redução da área da ferida. Os resultados secundários incluíram a dor reportada pelos utentes e a qualidade de vida relacionada com a ferida, incluindo subpontuações (corpo, bem-estar e vida diária) e a incidência de eventos adversos.


Resultados: A área média da ferida na visita 1 (V1) foi de $17,8 \pm 11,2 \text{ cm}^2$ e diminuiu significativamente para $11,4 \pm 9,0 \text{ cm}^2$ na visita 5 (V5), o que representa uma redução média de 32,2%. Os resultados globais e as subpontuações da qualidade de vida (QV) dos utentes apresentaram uma diminuição significativa na visita final em comparação com a V1, o que indica um aumento significativo da QV. De um modo geral, um valor mais baixo de QV corresponde a uma melhor qualidade de vida. A subpontuação de bem-estar da QV correlaciona-se com a redução do tamanho da ferida. A dor da ferida diminuiu após apenas 2 semanas. O número de utentes sem dor (0 na escala visual analógica/EVA) aumentou progressivamente de 7 utentes (14,9%) na V1 para 23 utentes (48,9%) na V5. A adaptação do penso à área afetada foi classificada pelos profissionais de saúde participantes como “muito boa” nos 50 tratamentos. Não foram reportados eventos adversos.

Resultado do utente

A pontuação da qualidade de vida (QV) dos utentes apresentou uma diminuição significativa e, conseqüentemente, um aumento da qualidade de vida. O número de utentes sem dor aumentou de forma consistente.

49%
sem dor
na V5


Aumento significativo da QV

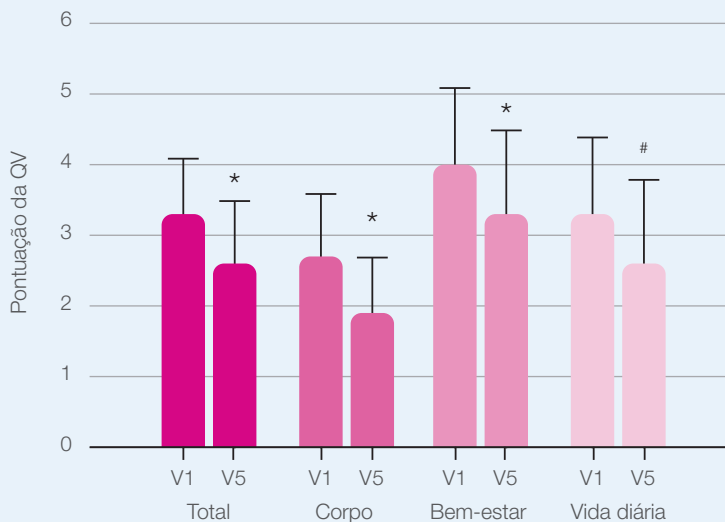

* Significativo entre a linha de base na V1 e a V5 ($p < 0,0001$).

Significativo entre a linha de base na V1 e a V5 ($p < 0,0002$).

Diminuição da dor

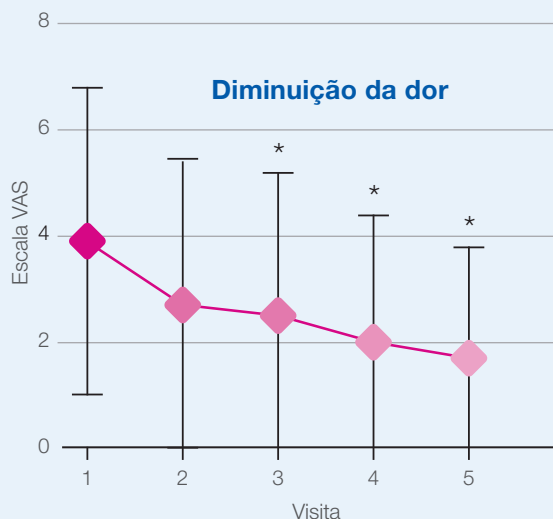

* Diminuição significativa ($p < 0,0001$).

*** Cutimed® Epiona® é uma matriz tridimensional (3D) nativa que contém 90% de colagénio nativo e 10% de alginato de cálcio.

Mais informações

Ligação para a versão completa do estudo original.




Conclusão

O estudo demonstra que tratar os utentes com Cutimed Epiona, em complemento ao tratamento padrão, pode melhorar os resultados das úlceras venosas da perna em termos de redução do tamanho da ferida, dor e qualidade de vida, incluindo em úlceras de difícil cicatrização que anteriormente não tinham respondido à terapêutica habitual. Além disso, não foram reportados efeitos adversos. Em conclusão, Cutimed Epiona promove a cicatrização de feridas em úlceras venosas complexas e de difícil cicatrização e reduz eficazmente a dor do utente. Isto cumpre os requisitos estabelecidos por comités internacionais de especialistas. Ao reduzir a área da ferida e, presumivelmente, a dor associada, o penso tem também um impacto positivo direto na qualidade de vida do utente.



Cutimed® Epiona®

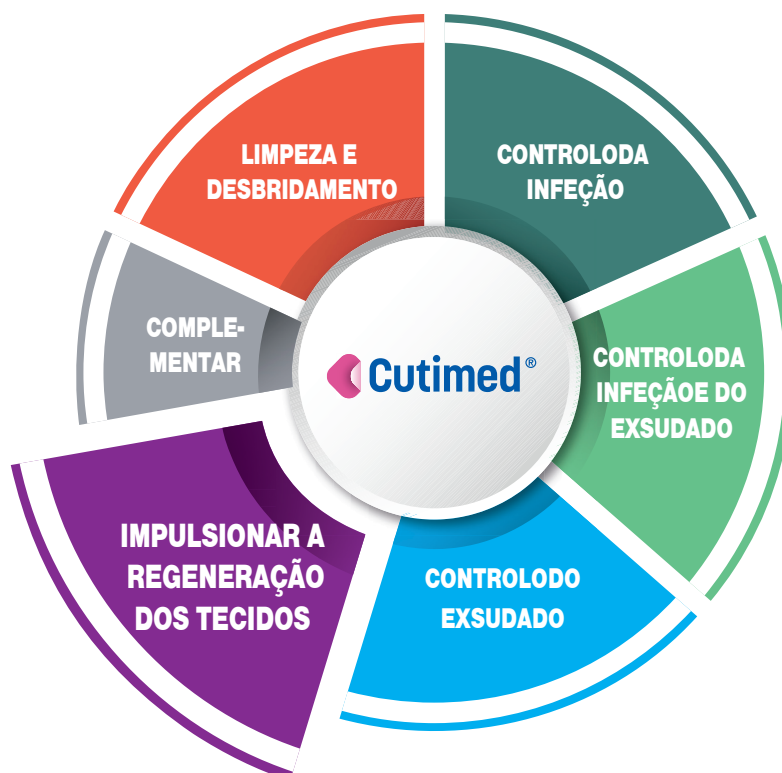

Cutimed® e uma marca registada da Essity.
Sorbact® é uma marca registada de ABIGO Medical AB.

©Informação destinada a Profissionais de Saúde. Os produtos mencionados são Dispositivos Médicos.
Aconselhamos a ler as instruções de utilização e a rotulagem antes da sua utilização.