

Cutimed® Science Card

Cutimed® Siltec® Komfortzone: Erwiesene Anwender- Zufriedenheit von 85%

Studie >>
Seckam
A. 2019

Was Experten empfehlen¹

Die World Union Healing Societies (WUWHS) hat im Juni 2019 ein Konsensus-Papier zu den Grundlagen der effektiven Wundversorgung veröffentlicht. Die WUWHS nennt unter anderem folgende zentrale Anforderungen an eine Wundauflage:



Exudatmanagement

Hintergrund

Absorption und Retention des überschüssigen Exsudats

Nutzen

Verbesserte Wundheilung, (z. B. weniger Mazerationen und geringere oder keine Ausbreitung der Wunde), Steigerung der Lebensqualität (z. B. weniger Geruchsbildung), weniger Pflegeaufwand



Patientenkomfort

Hintergrund

Tragekomfort und Anpassung des Verbandes an die betroffenen Körperregionen

Nutzen

Steigerung der Lebensqualität, kein Verrutschen und vorzeitiger Wechsel des Verbandes



Anwenderfreundlichkeit

Hintergrund

Einfaches Anlegen und Entfernen des Verbandes

Nutzen

Zeitersparnis beim Verbandwechsel, effizienter Materialeinsatz und höhere Compliance des Personals

Die Studie²

Hintergrund


Multicenter-Studie zur Evaluierung von Schaumstoffverbänden; Durchgeführt in: Deutschland und Polen, 2016/2017; Teilnehmer: 129 Patienten mit unterschiedlichen Wunden; Verwendete Produkte: Cutimed® Siltec®/Siltec® B

Methode


Befragung der behandelnden Fachkräfte; drei Visiten pro Patient (Erstbesuch, Verbandswechsel, abschließende Beurteilung); Zeitraum: 14 Tage

Eigenschaften, die mit „sehr gut“ oder „gut“ bewertet wurden


(Stichprobengröße = 146 Wunden; unter Kompressionstherapie: 58 Wunden)

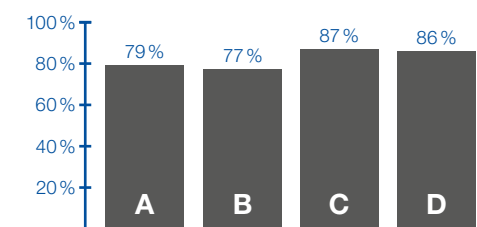

Exudatmanagement
A: Absorption (79 %)
B: Retentionsleistung (77 %)
Exudatmanagement unter Kompression
C: Absorption (87 %)
D: Retentionsleistung (86 %)

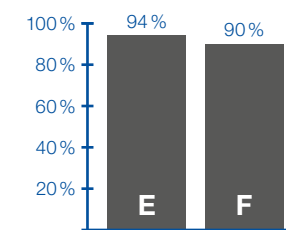

Patientenkomfort
E: Tragekomfort (94 %)
F: Anpassung an unebene Körperkonturen/-formen (90 %)

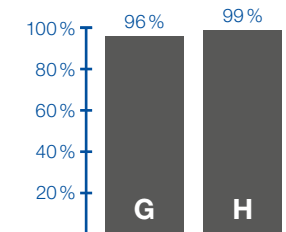

Anwenderfreundlichkeit
G: Einfachheit der Aufbringung (96 %)
H: Einfachheit der Entfernung (99 %)

Hohe


Anwenderzufriedenheit

Zusätzlich zu den unten abgebildeten Ergebnissen: Verbesserte Wundränder und abnehmendes Schmerzempfinden

Fazit für die Praxis

Cutimed® Siltec®/Siltec® B Silikon-Schaumverbände entsprechen den Anforderungen, die Experten empfehlen. Patienten erhalten durch die Anwendung mit **Cutimed® Siltec®** eine bessere Lebensqualität und das Klinikpersonal wird durch einfach anzuwendende, zeitsparende Wundauflagen entlastet.

Gesamtzufriedenheit

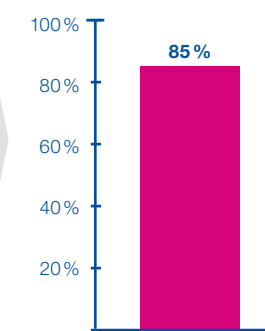


¹World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) (2019). Consensus Document. Wound exudate: effective assessment and management. London: Wounds International


²Seckam A. (2019). A multicentre, observational evaluation of the product characteristics of two absorbent foam dressings. Br J Nurs 28 (Sup. Tissue Viability): S.10–S.17

Cutimed® Siltec® / Siltec® B

Cutimed® Siltec®/Siltec® B Wundverbände erfüllen die Kriterien des Konsensuspapiers der World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Durch ihre Anwendung können Patienten mehr Lebensqualität genießen und das medizinische Fachpersonal wird durch die einfache und zeitsparende Handhabung der Wundauflagen entlastet.

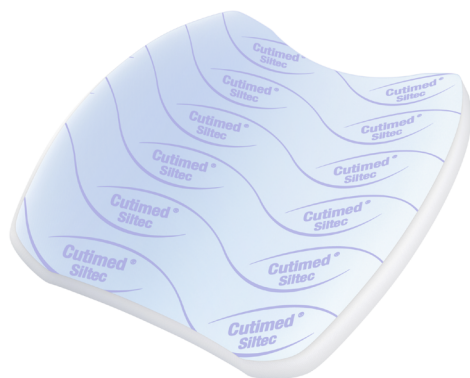

Cutimed® Siltec®

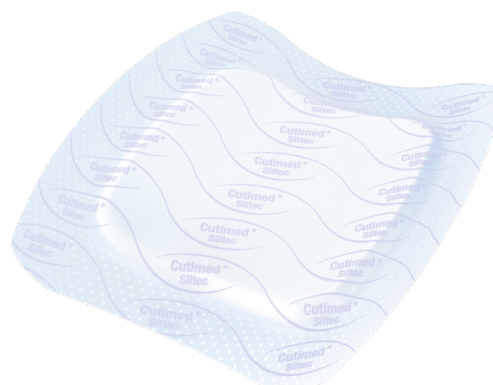

Cutimed® Siltec® B

