



Leukoplast® STEPS

De complete oplossing voor skin tears

#SaveOurSkin

Skin tears zijn specifieke traumatische wonden die te herkennen zijn aan een scheiding van huidlagen. Ze kunnen worden veroorzaakt door onder andere **het verwijderen van klevende verbanden en tapes**.¹ Op siliconen gebaseerde producten, zoals Leukoplast skin sensitive, zorgen voor een atraumatische verwijdering. Dit helpt het risico op verwondingen veroorzaakt door kleeflagen te verminderen.

Skin tears vertegenwoordigen **meer dan één op de tien wonden in verpleeghuizen**.² Als deze niet op de juiste manier worden geclassificeerd en behandeld, kunnen kleine skin tears tot grote problemen leiden zoals infecties, complicaties en complex genezende wonden.

Wat veroorzaakt skin tears?

Skin tears kunnen worden veroorzaakt door verschillende mechanische krachten, zoals:

- Verkeerde transfertechnieken voor verplaatsing of herpositionering
- Stoten tegen een object
- Vallen
- Verwijdering van klevende verbanden of tapes

Wie loopt er risico?

Skin tears vormen een groot risico voor patiënten met een kwetsbare huid:



Ouderen en pasgeborenen



Patiënten met frequente verbandwisselingen



Patiënten met bepaalde medische aandoeningen



Leukoplast STEPS (Skin Tears Effective Protocol & Solutions)

Deze complete oplossing is gebaseerd op de ISTAP (International Skin Tear Advisory Panel) best practice aanbevelingen. Leukoplast STEPS zijn gemakkelijk te volgen richtlijnen en omvat zowel de preventie en behandeling van skin tears als het herstel van de patiënt.

¹ LeBlanc K, et al. Best practice recommendations for the prevention and management of skin tears in aged skin. *Wounds International*. 2018.

² Fraser RDJ, et al. Analysis of real-world data from North American skilled nursing facilities' skin and wound records for skin tear prevalence, healing and treatment. *J Wound Management*. 2022;23(2):87-98.

VOORKOMEN

De incidentie van skin tears kan met **50% worden vermindert** als twee keer per dag een vochtinbrengend product wordt gebruikt.¹



TENA ProSkin
Zachte en transparante crème.
Kalmerend en verzorgend.



Cutimed Acute
Huidverzorgende mousse.
Hydrateert de huid intensief en voorkomt vochtverlies.



BEHANDELEN

Hoe zien skin tears eruit?



Type 1 - Geen
huidverlies



Type 2 - Gedeeltelijk
verlies van huidflap



Type 3 - Totaal verlies
van huidflap

Gebruik een samengestelde oplossing. Dit is het meest geschikt wanneer de huidflap gedeeltelijk los zit en deze teruggeplaatst dient te worden.



Cuticell Contact
Dunne wondcontactlaag op basis van huidvriendelijke siliconen met eenzijdige kleeflaag.



Leukoplast compress non-woven
Absorberend kompres gemaakt van non-woven materiaal.



Fixomull skin sensitive
Volvlakfixatie voor het vastzetten van wondverbanden op een kwetsbare huid.

Kies een kant en klare oplossing. Dit is vooral bedoeld voor skin tears waar de huidflap stevig vast zit of als er sprake is van andere huidbeschadigingen.



Voor weinig tot matig exsudaat



Leukomed skin sensitive
Steriele, absorberende en zachte eilandpleister voor licht tot matig exsuderende wonden.



Leukomed T plus skin sensitive
Steriele en waterdichte eilandpleister voor licht tot matig exsuderende wonden.

Beide producten beschikken over een siliconen kleefrand.



Voor matig tot veel exsudaat



Cutimed Siltec B
Schuimverband met suberabsorbers en siliconen wondcontactlaag en border.



HERSTELLEN

Compressietherapie

moet worden overwogen indien de wond zich op het **onderbeen** bevindt. Voordat compressie wordt toegepast, moet het volledige been beoordeeld worden.²

Voor oedeem in de onderbenen:
Compressie alleen toepassen na beoordeling van de vaatstatus door een behandelaar.



JOBST Opaque
15-20 mmHg

Dit product is te verkrijgen via de bandagist.



Voor veneuze ziektes en wonden op de onderbenen:



JOBST Compriz2
Tweelaags compressie-zwachtelsysteem.



JOBST UlcerCare
Tweelaagse verbandkous met liner.

Stappen van behandeling³

- Stelp het bloeden
- Reinigen en debrideren
- Wees alert op infectie en ontsteking
- Controleer de vochtbalans/exsudaatcontrole
- Beoordeel de wondrand en -sluiting
- Verbanden moeten meerdere dagen kunnen blijven zitten (maar niet langer dan 7 dagen⁴)

Wil je meer weten over skin tears?

Lees meer over onze oplossingen en volg onze gratis E-learning:



³ Carville K, et al. The effectiveness of a twice-daily skin-moisturising regimen for reducing the incidence of skin tears. *International Wound Journal*. 2014;11(4):446-53.

⁴ Deprez J, et al. Measures that patients living in the community can take for the prevention and treatment of skin tears: A comprehensive review of the literature. *J Wound Management*. 2022;23(2):70-77.