

Deine Wunde, zwei Experten

Dein Leitfaden für die Versorgung chronischer Wunden:
schnell und einfach zum richtigen Produkt.



INFEKTIONS- EXPERTISE

Cutimed® Sorbact®



EXSUDAT- EXPERTISE

Cutimed® Sorbion®



Wir bleiben sicher
erstattungsfähig¹

Cutimed® Sorbact® und
Cutimed® Sorbion®

Dein Wundversorgungs-Leitfaden


Spare Zeit: schnell und einfach zum richtigen Produkt



Healing for every body

INFEKTION MANAGEN

INFIZIERTE WUNDE

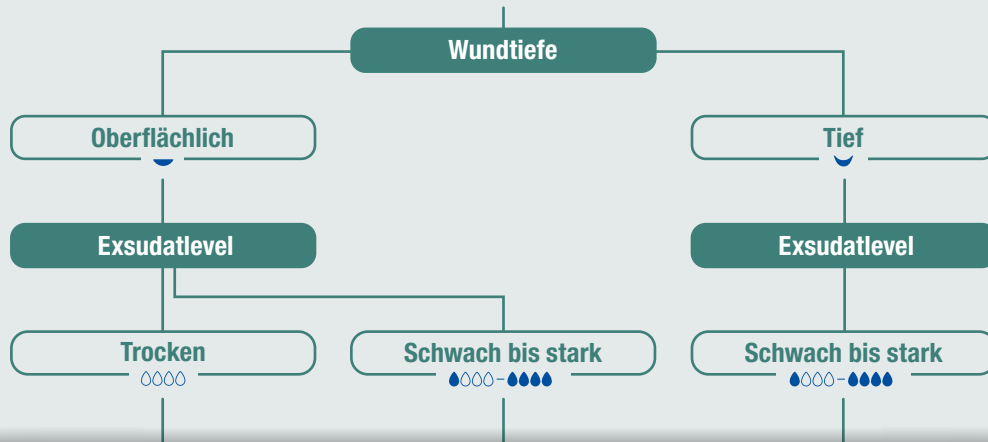

- Reinigt die Wunden von Belägen und nekrotischem Gewebe²
- Sorbact® Technology bindet Keime rein physikalisch³
- Bleibt sicher erstattungsfähig

- Exzellentes Exsudatmanagement dank modernem Schaumverband⁴
- Sorbact® Technology bindet Keime rein physikalisch³
- Bleibt sicher erstattungsfähig
- Duschfest

- DACC-beschichtetes Gewebe schmiegt sich optimal in tiefe Wunden bzw. an oberflächliche Wunden
- Sorbact® Technology bindet Keime rein physikalisch³
- Bleibt sicher erstattungsfähig


+ Sekundärabdeckung notwendig, z. B.
Cutimed® Sorbion® Border oder
Cutimed® Sorbion® Sachet S + Fixomull® stretch

+ Keine Fixierung notwendig dank hautfreundlichem Silikon-Hafrand

+ Sekundärabdeckung notwendig, z. B.
Cutimed® Sorbion® Border oder
Cutimed® Sorbion® Sachet S + Fixomull® stretch

EXSUDAT MANAGEN

NICHT INFIZIERTE WUNDE

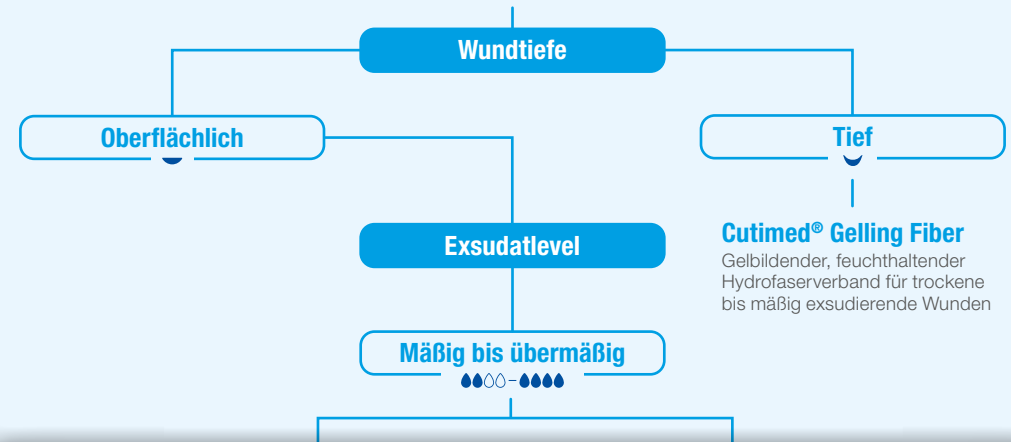

- Effektives, hochabsorbierendes Exsudatmanagement⁵
- Wundreinigungseffekt inklusive⁶
- Sicherheit in der Anwendung durch beidseitige Applikation

- Einfache und sichere Versorgung mit schonendem Hafrand⁷
- Ohne zusätzliche Fixierung
- Zeit- und kostensparend durch einfache Anwendung und längere Verbandstandzeit
- Duschfest

+ Fixierung notwendig, z. B.
Fixomull® stretch

+ Keine Fixierung notwendig dank hautfreundlichem Silikon-Hafrand

1. Durch das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) bestätigt (§ 31 Abs. 1a SGB V).
2. Stephen-Haynes J et al. Cutimed Siltec foam and Cutimed Sorbact gel dressings: a clinical audit. Wounds UK. 2010;6:130–136.
3. Ljungh A et al. Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria. J Wound Care. 2006;15(4):175–180.
4. Hampton S. An evaluation of the efficacy of Cutimed Sorbact in different types of non-healing wounds. Wounds UK. 2007;3(4):113–119.
5. Haycocks S & Chadwick P. Use of DACC-coated dressings in diabetic foot ulcers: a case series. Diabet Foot J. 2011;14:133–137.

5. van Leen M et al. Influence of superabsorbent dressings on non-healing ulcers: a multicentre case series from the Netherlands and the UK. J Wound Care. 2014;23(11):543–550.
6. Romanelli M et al. A pilot study evaluating the wound and skin care performances of the Hydration Response Technology dressing: a new concept of debridement. J Wound Technology. 2009;5:6–8.
7. Essity Group. Commissioned human research study at dermico: Cutimed® Sorbion® border adhesion to skin. 2022.

Wir bleiben sicher
erstattungsfähig¹

Cutimed® Sorbact® und
Cutimed® Sorbion®

Dein Wundversorgungs-Leitfaden


Spare Zeit: schnell und einfach zum richtigen Produkt



Healing for every body

INFEKTION MANAGEN

INFIZIERTE WUNDE

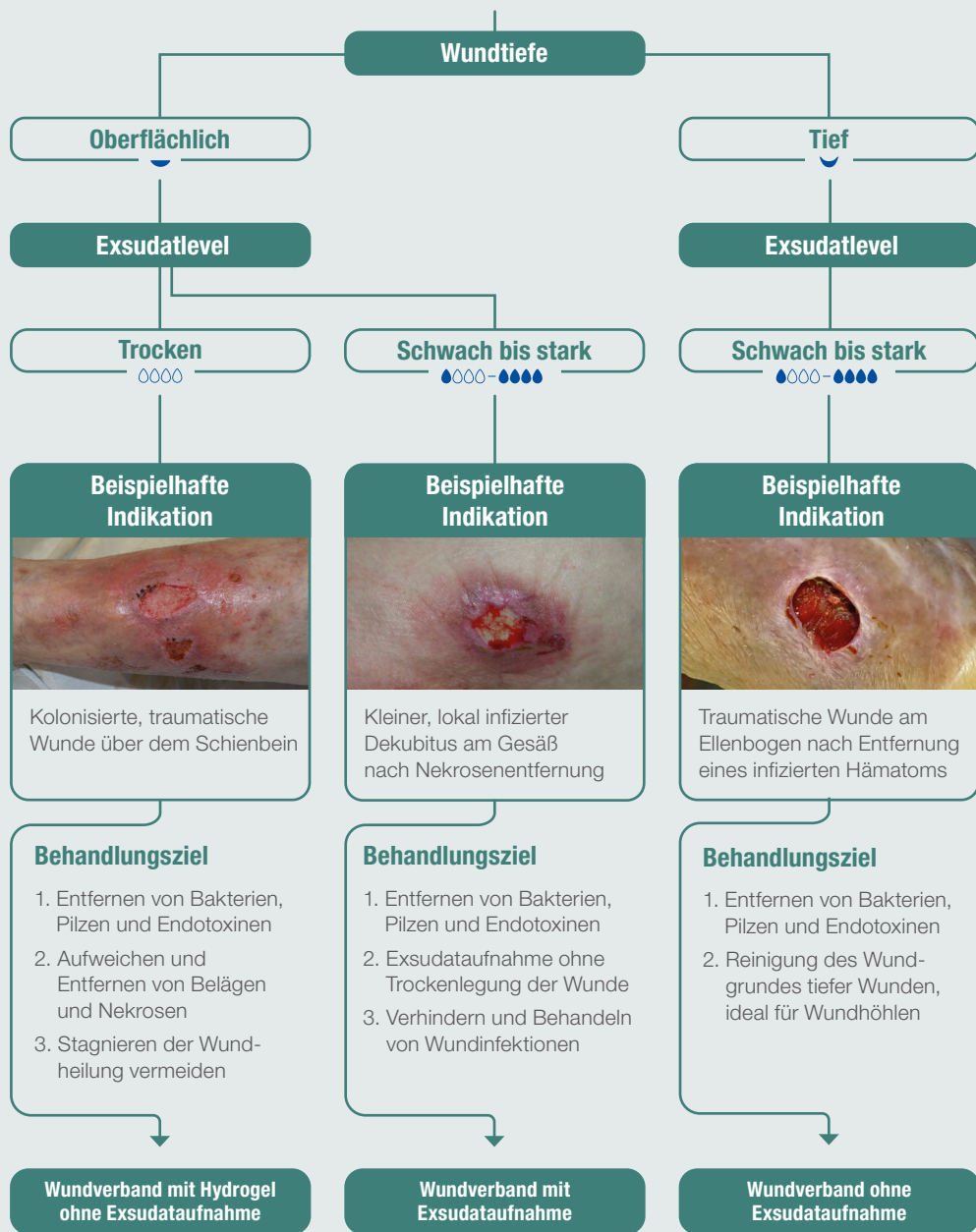

Cutimed® Sorbact® Gel Kompressen

Indikationen

Infizierte oder kolonisierte oberflächliche Wunden

- Ulcus cruris
- Diabetische Fußgeschwüre
- Post-OP-Wunden
- Autolyse von Wundbelag
- Erstbehandlung von traumatisch entstandenen Wunden mit Infektionsgefahr
- Schürf- und Kratzwunden
- Oberflächliche Verbrennungen/Verbrühungen 2. Grades
- Fisteltherapie
- Prophylaxe nach Wundnaht

+ Sekundärverband benötigt, der dem Exsudatlevel entspricht



Cutimed® Siltec® Sorbact® B

Indikationen

Infizierte oder kolonisierte oberflächliche Wunden mit Exsudation

- Ulcus cruris
- Druckgeschwür
- Diabetische Fußgeschwüre
- Post-OP-Wunden wie z. B. Hämatomentleerung, Abszessräumung
- Postoperative Nahtdehiszenz
- Traumatisch entstandene Wunden mit Infektionsgefahr und Exsudation
- Fisteltherapie

+ Kein zusätzlicher Verband notwendig dank hautfreundlichem Silikon-Haftrand



Cutimed® Sorbact® Tamponade/Kompressen

Indikationen


Infizierte oder kolonisierte oberflächliche oder tiefe Wunden mit Exsudation

- Ulcus cruris
- Druckgeschwür
- Diabetische Fuß- und Beingschwüre
- (Tiefe) Post-OP-Wunden
- Traumatisch entstandene Wunden mit Infektionsgefahr
- Pilzinfektion zwischen Zehen

+ Sekundärverband benötigt, der dem Exsudatlevel entspricht

EXSUDAT MANAGEN

NICHT INFIZIERTE WUNDE

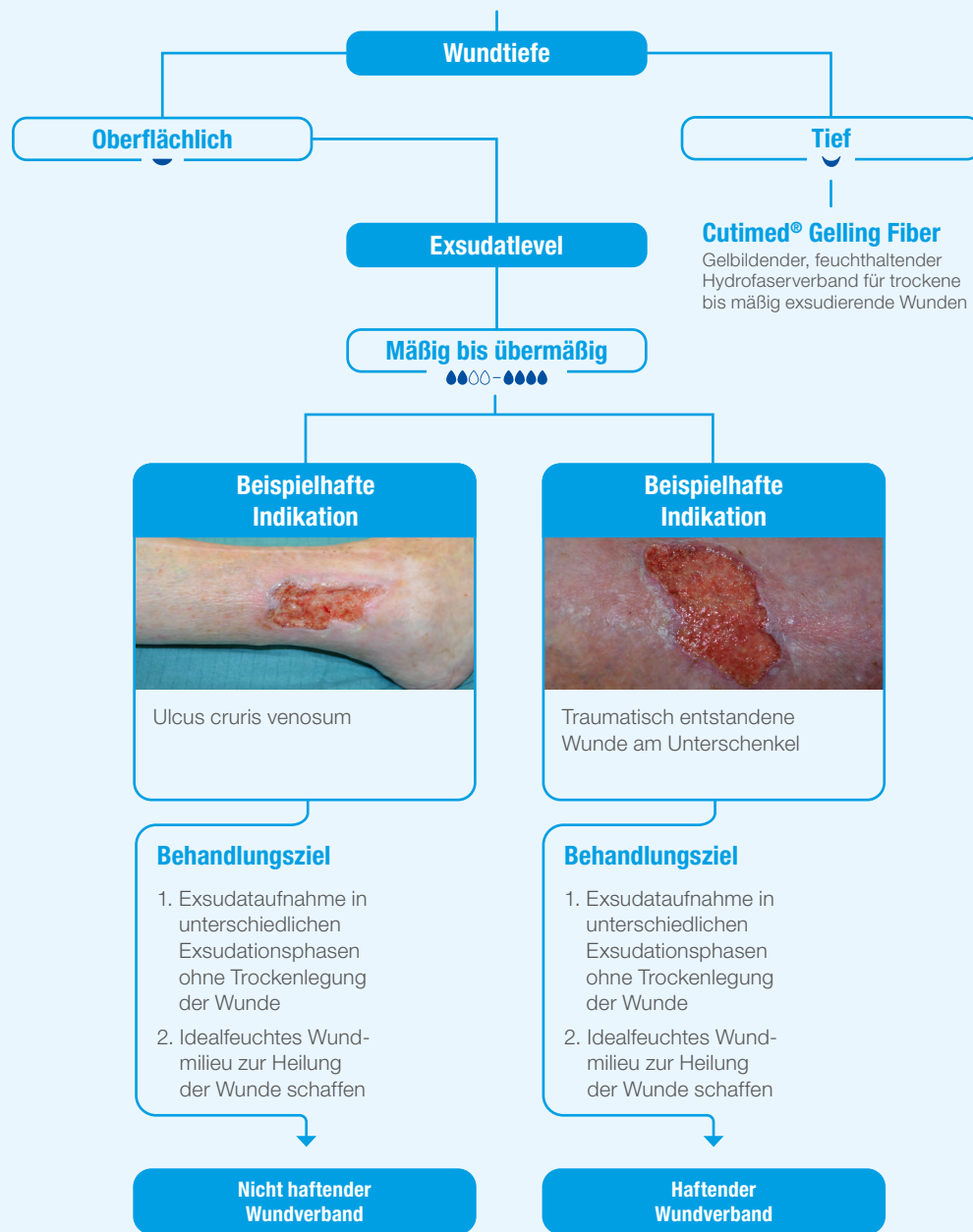

Cutimed® Gelling Fiber

Gelbildender, feuchthaltender Hydrofaserverband für trockene bis mäßig exsudierende Wunden




Cutimed® Sorbion® Sachet S

Indikationen

Mäßig bis übermäßig exsudierende, nicht infizierte Wunden

- Dekubitus
- Ulcus cruris
- Diabetisches Fußgeschwür
- Wunden mit sekundärer Wundheilung
- Nässende Laparotomie-Wunden
- Hautfisteln
- Postoperative Wunddehiszenzen und ähnliche Wunden mit Exsudation

+ Sekundärfixierung benötigt, z. B. als Fensterverband

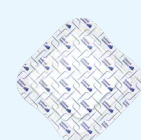

Cutimed® Sorbion® Border

Indikationen

Mäßig bis übermäßig exsudierende, nicht infizierte Wunden

- Dekubitus
- Ulcus cruris
- Diabetisches Fußgeschwür
- Wunden mit sekundärer Wundheilung
- Nässende Laparotomie-Wunden
- Hautfisteln
- Postoperative Wunddehiszenzen und ähnliche Wunden mit Exsudation

+ Kein zusätzlicher Verband notwendig dank hautfreundlichem Silikon-Haftrand

Weitere Informationen:
www.cutimed.de/wendepunkt

Cutimed® PZN-Bestellübersicht für die richtige Verordnung

Produkt	Größe in cm	Wundpad- größe in cm	Bestell-Nr.	Inhalt	BE/VE	PZN
Cutimed® Sorbact® Gel Komresse Mit Hydrogel imprägnierte, bakterienbindende Komresse	7,5 x 7,5	–	7261122	12 St.	1/36	07353434
   0000-0000   	7,5 x 15	–	7261123	12 St.	1/20	07353440
	15 x 20	–	7261127	6 St.	1/8	15637884
Cutimed® Sorbact® Komresse Primäre Wundauflage für oberflächliche und tiefe Wunden	4 x 6	–	7216419	6 St.	1/24	07347215
 0000-0000   	7 x 9	–	7216517	6 St.	1/24	07348640
	10 x 100	–	7269309	12 St.	1/6	18599003
Cutimed® Sorbact® Tamponade Für die Anwendung in tiefen Wunden	2 x 50	–	7216614	12 St.	1/6	15657668
 0000-0000   	5 x 200	–	7216708	12 St.	1/6	07351808
Cutimed® Siltec® Sorbact® B Hochabsorbierender, keimreduzierender Schaumverband mit Silikon-Haftrand	7,5 x 7,5	4 x 4	7325133	12 St.	1/10	07342672
 0000-0000  	10 x 10	6 x 6	7325141	12 St.	1/10	13574412
	12,5 x 12,5	8,2 x 8,2	7325134	12 St.	1/10	07342689
	15 x 15	10 x 10	7325135	12 St.	1/10	07343140
	10 x 22,5	5 x 16,5	7325140	12 St.	1/10	13574398
	17,5 x 17,5	12,3 x 12,3	7325136	6 St.	1/10	07343157
	22,5 x 22,5	16,5 x 16,5	7325137	6 St.	1/10	07343223
Cutimed® Sorbion® Sachet S Superabsorbierende Wundauflage	7,5 x 7,5	–	7323240	12 St.	1/62	11361310
  0000-0000  	5 x 12	–	7323243	12 St.	1/62	11361356
	10 x 10	–	7323244	12 St.	1/62	11361362
	10 x 20	–	7323247	12 St.	1/34	11361391
	15 x 15	–	7323250	12 St.	1/36	11361439
	20 x 20	–	7323252	12 St.	1/22	11361451
	20 x 30	–	7323255	12 St.	1/17	11361505
Cutimed® Sorbion® Border Superabsorbierende Wundauflage mit Silikon-Haftrand für eine schnelle, einfache Applikation	10 x 10	5 x 5	7101009	12 St.	1/28	16792322
  0000-0000  	15 x 15	10 x 10	7101010	12 St.	1/13	16792339
	20 x 20	15 x 15	7101011	12 St.	1/10	16792345
Cutimed® Gelling Fiber Gelbildender Hydrofaserverband mit Verstärkungsfasern als Komresse oder Tamponade für Wundhöhlen und -taschen	5 x 5	–	7121800	10 St.	1/10	16760322
  0000-0000  	10 x 10	–	7121801	10 St.	1/6	16760339
	15 x 15	–	7121802	5 St.	1/8	16760345
	2 x 45	Tamponade	7121806	5 St.	1/20	16760380

Sicher erstattungsfähig¹

LATEX
FREE
FORMULA

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



Bestell dir jetzt
dein kostenloses
Produktmuster:
[www.cutimed.de/
produkte/
kostenloses-muster](http://www.cutimed.de/produkte/kostenloses-muster)

Wundphase
 Infektion
 Nekrose
 Fibrinbelag
 Granulation

Exsudat
0000 Trocken
0000 Schwach
0000 Mäßig
0000 Stark
0000 Übermäßig

Wundtiefe
 Oberflächlich
 Tief
 Oberflächlich
und tief

Extra
 Zuschneidbar
 Beidseitig
applizierbar
 Dustfest

Hinweise zur Applikation sind in der Gebrauchsanweisung zu finden.