

# Leukoplast® Softivel®

## Návod k použití

CS

### Použití

Pro rychlé a bezpečné prvotní ošetření vyčištěné a dezinfikované odřeniny a menší rány.

### Způsob použití

Před použitím protřepat. Držte přibližně 10 cm od rány. Poté co Softivel zaschne, vytvoří ochrannou a průhlednou voděodolnou vrstvu. Je běžné pociťovat mírné pnutí a citlivé pálení.

### Důležité

Neaplikujte na spáleniny nebo infikované rány. Vyhněte se kontaktu s očima, ústy, nosem a genitáliemi. Jen pro vnější použití.

### Tlakové balení

Zahřání obalu může vést k explozi. Chraňte z dosahu tepla, teplých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů ohně. Nekuřte. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotě nad 50°C. Nepochichujte ani nepalte balení po použití. Držte z dosahu dětí. Sprej šetrný k životnímu prostředí.

### Datum použití označen na balení a na spodní části obalu.

Datum poslední revize: březen 2017.



® = registered trademark



Sixtem Life Srl  
Via E.Boni 19  
59100 Prato (PO) - Italy

#### Distributor:

BSN medical GmbH  
Quickbornstrasse 24  
20253 Hamburg - Germany

