

# Bakterier kan ikke stå imot Sorbact® – det er naturens lov

Sorbact® er en unik innovasjon som har vist gode resultater i behandlingen av sår. Bandasjens DACC™-impregnerte overflate har karakteristiske kjennetegn og har hydrofobe egenskaper som forebygger og behandler infeksjon uten å frigjøre aktive stoffer i såret. Bakteriene bindes irreversibelt til den unike overflaten. Sorbact® binder også endotoksiner som kan svekke sårtilhelingen. Basert på en rent fysisk virkemåte fjerner Sorbact® bakterier, sopp og endotoksiner på en trygg måte.



**BINDER**

- Den DACC™-impregnerte overflaten til Sorbact® har spesielle egenskaper og hydrofob virkningsmåte
- Bakterier binder og forankrer seg naturlig til den unike Sorbact® overflaten
- Binder også endotoksiner som kan hemme sårtilhelingen\*



**HEMMER**

- Bakterier blir irreversibelt bundet og veksten hemmes
- Det er bevist at endotoksiner ikke frigjøres fra bakteriene\*
- Det forventes ingen antimikrobiell resistens



**FJERNER**

- Bakterier, sopp og endotoksiner som har festet seg blir trygt fjernet
- Bakterielastningen i sårsengen blir redusert
- Redusert bioblastning støtter naturlig sårtilheling

\*In vitro-data

## Produktserie



### Sorbact® Compress Kompress

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
98128	4 x 6 cm	40	98124	10 x 100 cm (roll)	10
98125	7 x 9 cm	40			



### Sorbact® Gel Compress Gelkompress

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
98136	7.5 x 7.5 cm	10	98180	15 x 20 cm	5
98139	3 x 15 cm	10	98181	20 x 25 cm	5
98137	7.5 x 15 cm	10			



### Sorbact® Ribbon Sårfiller

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
98115-10	1 x 50 cm	10	98120	5 x 200 cm	10
98116-10	2 x 50 cm	10	98119	10 x 200 cm	10




### Sorbact® Surgical Dressing Kirurgisk bandasje

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
98140-50	5 x 7.2 cm	50	98144	10 x 25 cm	20
98141	8 x 10 cm	20	98145	10 x 30 cm	20
98142	8 x 15 cm	20	98146	10 x 35 cm	20
98143	10 x 20 cm	20			



### Sorbact® Superabsorbent Superabsorberende sårbandasje

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
98501	10 x 10 cm	10	98503	20 x 20 cm	10
98502	10 x 20 cm	10	98504	20 x 30 cm	10

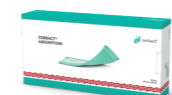

### Sorbact® Absorption Absorberende bandasje

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
72165-71	7 x 9 cm	10	72165-70	10 x 20 cm	10
72165-69	10 x 10 cm	10			



### Cutimed® Siltec® Sorbact® Skumbandasje

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
72767-40	Ø 4,5 cm (spalte)	10	72767-44	10 x 20 cm	10
72767-41	Ø 4,5 cm	10	72767-43	15 x 15 cm	10
72767-39	5 x 6 cm	10	72767-45	20 x 20 cm	5
72767-42	10 x 10 cm	10	72767-47	16 x 24 cm (hæl)	5



### Cutimed® Siltec® Sorbact® B Skumbandasje med silikonleber

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke	Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
73251-76	7.5 x 7.5 cm	10	73251-81	17.5 x 17.5 cm	5
73251-84	10 x 10 cm	10	73251-82	23 x 23 cm	5
73251-78	15 x 15 cm	10			
73251-85	7 x 10 cm (oval)	10			
73251-77	12.5 x 12.5 cm	10			
73251-79	17.5 x 17.5 cm	5			
73251-80	22.5 x 22.5 cm	5			

### Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum

For detaljert produktinformasjon, kontraindikasjoner, forholdsregler og advarsler, les gjeldende bruksanvisning (IFU) før bruk.

**Referanser** 1 Mosti G et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. *J Wound Care*. 2015;24(3):121-127. 2 Kammerlander G et al. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. *Wounds UK*. 2008;4:10-18. 3 Hampton S. An evaluation of the efficacy of Cutimed Sorbact in different types of non-healing wounds. *Wounds UK*. 2007;3:113-119. 4 Husmark J et al. Antimicrobial effects of bacterial binding to a dialkylcarbamoyl chloride-coated wound dressing: an in vitro study. *J Wound Care*. 2022;31:560-570.

Cutimed® er et registrert varemerke som eies av BSN medical GmbH.

Les mer på [sorbact.no](http://sorbact.no)



Sorbact® er et registrert varemerke som eies av Abigo Medical AB  
9342\_0825

Essity Norway AS  
Fredrik Selmers vei 6  
0663 Oslo  
sorbact.no  
+47 22 70 62 00  
info@sorbact.no



# Brukerveiledning

Sorbact®-bandasjer forebygger og behandler sårinfeksjoner



sorbact.no






# Fordeler med Sorbact®

Gjør et bra valg for dine pasienter




- Reduserer bioblastningen i sårene<sup>1</sup>
- Sikker og brukervennlig<sup>2</sup>
- Bidrar til å redusere smerte ved bruk<sup>1</sup>
- Bidrar til å redusere lukt fra såret<sup>3</sup>
- Ingen begrensninger i behandlingstiden<sup>2</sup>
- Effektiv mot multiresistente bakterier<sup>4</sup>

										
										
			<b>Bruksområde</b> For væskende sår. Kan brukes i kombinasjon med NPWT-behandling som sårfiller eller sårkontaktlag.	<b>Bruksområde</b> For tørre til væskende sår. Tilfører fuktighet til såret.	<b>Bruksområde</b> For væskende sår og fistler – eller ved soppinfeksjon (intertrigo) i hudfolder.	<b>Bruksområde</b> For postoperative og traumesår.	<b>Bruksområde</b> For sår med mye eller svært mye sekresjon.	<b>Bruksområde</b> For sår med moderat til kraftig sekresjon.	<b>Bruksområde</b> For sår med lite til moderat sårsekresjon.	<b>Bruksområde</b> For sår med moderat sekresjon. Myke selvklebende silikonkanter.
<b>Kirurgiske snitt</b>						✓			✓	✓
<b>Rent</b>			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kolonisert / Infisert</b>			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Tørt / Fibrinøst</b>				✓						
<b>Overfladisk</b>			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Sårlommer</b>			✓	✓	✓					
<b>Fistler</b>				✓	✓					
<b>NPWT</b>			✓							
<b>Soppinfeksjon i hudfolder</b>					✓					



**Mengde sårveske**

-  Tørt
-  Lite
-  Moderat
-  Sterkt
-  Meget sterkt

**Sårdybde**

-  Overfladisk
-  Dyp
-  Overfladisk + Dyp

**Infeksjonsfase**

-  Infeksjonsforebyggende
-  Infeksjonsbehandling

**Bruksanvisning**  
Påse at bandasjen kommer i direkte kontakt med hele sårflaten.  
**Ved dype sår:** Fold ut en eller flere bandasjer og legg i sårhulen. Unngå tett pakning. Bruk en sekundærbandasje som passer til mengden sårveske, f.eks. polyuretanskum-, absorberende – eller en geldannende fiberbandasje, og fiksér.  
**I kombinasjon med NPWT-behandling:** Følg bruksanvisningen til NPWT-systemet.

**Bruksanvisning**  
Påse at bandasjen kommer i direkte kontakt med hele sårflaten. Bandasjen bør ikke overlape den omkringliggende huden. Bruk en fuktbevarende sekundærbandasje som passer til mengden sårveske, f.eks. polyuretanskum-, absorberende – eller fiberbandasje og fiksér.

**Bruksanvisning**  
Påse at bandasjen kommer i direkte kontakt med hele sårflaten eller det affiserte området.  
**Ved fistler:** Unngå å tett pakning. La alltid enden av bandasjen være utenfor kaviteten/fistelen, slik at den er lett å fjerne. Bruk en sekundærbandasje som passer til mengden sårveske, f.eks. polyuretanskum-, absorberende – eller en geldannende fiberbandasje og fiksér.  
**Ved soppinfeksjon:** Festes med hjelp av undertøy eller en hudvennlig teip. Overlapp til frisk hud.

**Bruksanvisning**  
Fjern beskyttelsesfilmen fra bandasjens sårkontaktside. Påse at den grønne siden av bandasjen kommer i direkte kontakt med hele sårflaten. Press klebekanten mot den omkringliggende huden, og fjern stabiliseringsfilmen.

**Bruksanvisning**  
Bandasjen bør overlape sårkantene med minst 2 cm. Påse at den grønne siden av bandasjen kommer i direkte kontakt med hele sårflaten. Festes med en bandasje. Pass på å feste bandasjen slik at den har mulighet til å ekspandere.

**Bruksanvisning**  
Påse at den grønne siden av bandasjen kommer i direkte kontakt med hele sårflaten. Bandasjen bør overlape sårkantene med minst 2 cm. Fiksér med en elastisk bandasje eller en hudvennlig teip.

**Bruksanvisning**  
Bandasjen bør overlape sårkantene med minst 2 cm. Påse at den grønne siden av bandasjen kommer i direkte kontakt med hele sårflaten. Fest med en passende bandasje.

**Bruksanvisning**  
Skumbandasjen skal overlape sårkantene med 1 cm for å redusere faren for maserasjon. Fjern beskyttelsesfilmen fra bandasjens sårkontakt side. Påse at den grønne siden av bandasjen kommer i direkte kontakt med hele sårflaten. Press forsiktig klebekanten mot den omkringliggende huden.