


HYGIENISCHER

# VERBAND- WECHSEL ZU HAUSE

**BITTE JEDEN VERBAND-  
WECHSEL IMMER GEMÄSS  
ANLEITUNG IHRES ARZTES  
ODER IHRER ÄRZTIN  
DURCHFÜHREN!**

## VORBEREITUNG

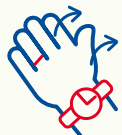

Accessoires (z. B. Schmuck, Uhr oder Schal) in Wundnähe abnehmen.




Hände desinfizieren.



Arbeitsfläche reingen, danach alle Materialien für den Verbandwechsel in Griffnähe legen.



Einmalhandschuhe tragen.

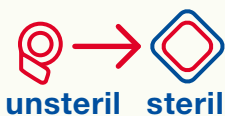

Anordnung von unsteril (nah) zu steril (etwas weiter weg).



Keine Haustiere in der Nähe während des Verbandwechsels.

## DURCHFÜHRUNG



Alten Verband vorsichtig entfernen. Bei verändertem Wundzustand (z. B. Rötung/Schwellung) Arzt/Ärztin oder Pflegepersonal informieren.



Wundauflage sorgsam auf Wunde platzieren. Wenn nötig, zusätzlich fixieren.



Neue Wundauflage auspacken. Dabei nicht auf die sterile Wundkontaktschicht fassen.



Nicht über der Wunde sprechen, da Keime über den Speichel übertragbar sind.

## NACHSORGE



Arbeitsfläche reinigen.



Hände erneut desinfizieren.

**ALLE UTENSILIEN UND STERILGÜTER FÜR  
VERBANDWECHSEL STETS VERSCHLOSSEN  
(Z. B. IN EINER BOX MIT DECKEL) AUFBEWAHREN!**

Stempel / Arztpraxis

**PRAXIS  
HACKS**

**Cutimed®  
Leukoplast®**

**essity**

BSN medical GmbH,  
an Essity company  
Schützenstraße 1–3  
22761 Hamburg

07960170M