

HUIDBESCHADIGING DOOR HET GEBRUIK VAN ZELFKLEVENDE HULPMIDDELEN IS VAAK TE VOORKOMEN.



Huidbeschadiging door het gebruik van medische zelfklevende producten of hulpmiddelen (ook wel MARS_I genoemd: Medical Adhesive-Related Skin Injuries), zoals tape, wondverband, hechtpleisters of hechtstrips, is vaak te voorkomen. Er bestaat echter altijd een risico dat deze producten de huid beschadigen of MARS_I veroorzaken, wat kan leiden tot pijn, een verhoogd risico op infectie, een langdurige ziekenhuisopname en zelfs een verhoogde morbiditeit. Daarom is het belangrijk om het juiste verband te kiezen en de juiste aanbreng- en verwijderstechniek toe te passen.

Wat zijn de risicofactoren voor MARS_I en wie loopt er risico?

Intrinsieke risicofactoren voor MARS_I¹: Mensen met een kwetsbare huid en medische aandoeningen lopen een groot risico op MARS_I.



Oudere patiënten en zuigelingen



Patiënten met een dermatologische aandoening




Patiënten met een kwetsbare huid door ziekte

Extrinsieke risicofactoren voor MARS_I¹:

- Het **herhaaldelijk** verwijderen en aanbrengen van pleisters en andere medische hulpmiddelen
- **Droge huid** (bijv. door agressieve reinigingsmiddelen)
- Langdurige blootstelling aan **vocht**
- Bepaalde **medicatie**
- **Bestralingstherapie**, zonnenschade


Overzicht van verschillende soorten MARS_I

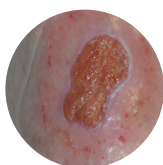


Huidstripping




Skin tears

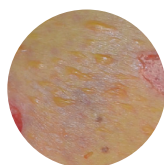


Blaarvorming

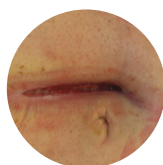

Dermatitis

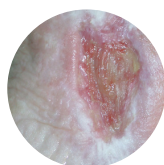

Maceratie

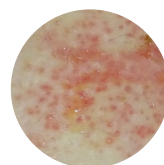

Folliculitis



Leukoplast STEPS


Voorkomen. Behandelen. Herstellen. De deskundige stappen voor een gezonde, onbeschadigde huid. Leukoplast STEPS is een complete verzorgingsoplossing die best practices combineert met hoogwaardige wondverzorgingsproducten voor een vereenvoudigde en effectieve behandeling van de risicogevoelige huid. Wilt u meer weten? Neem contact op met onze Essity-vertegenwoordigers om te ontdekken hoe zij u en uw medewerkers kunnen ondersteunen en de zorg bij huidbeschadiging kunnen verbeteren.

BEHANDELING

Geen tot matig exsudaat


Matig tot overmatig exsudaat

Gebruiksklaar

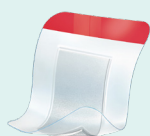

Leukomed T plus skin sensitive


of

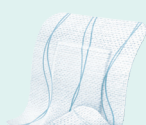

Leukomed skin sensitive



Cutimed Protect

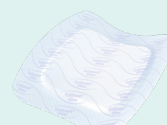

Cutimed Siltec B

Bouw uw eigen



Cuticell Contact

+



Leukoplast compress non-woven

+



Hypafix skin sensitive



Cutimed Protect



Cutimed Siltec

+



Hypafix skin sensitive

of




Cutimed Sorbion Sachet S

+



Hypafix skin sensitive

Met (risico op) infectie:

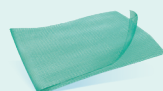

Cutimed Sorbact Contact

+




Leukomed T plus skin sensitive

of



Leukomed Sorbact

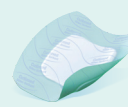

Cutimed Siltec Sorbact

Afhankelijk van het wondtype raden we aan om het Cutimed Sorbact productassortiment te overwegen om het risico op of de aanwezigheid van infecties te helpen verminderen

VOORKOMEN

Regelmatig hydrateren kan helpen om de **beschermende** barrière van de huid te onderhouden.



TENA PROSkin



Cutimed Acute

HERSTELLEN

Overweeg aanvullende compressietherapie*:

- Voor behandeling van oedeem aan wondranden op onderste ledematen
- Voor behandeling van onderliggende ziekten die compressietherapie vereisen

* Als compressietherapie niet gecontra-indiceerd is



JOBST Ulcercare



Kom er meer over te weten -
volg onze gratis eLearning modules voor MARSI:
<https://academieshm.essity.be/learn>

¹ McNichol L et al. Medical adhesives and patient safety: state of the science: consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive-related skin injuries. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2013;40(4):365-E2