

# Leukoplast® STEPS


Der Therapieansatz zur Behandlung von Skin Tears #SaveOurSkin

## PRÄVENTION

Die Inzidenz von Skin Tears  
kann um  
**50%**  
reduziert werden,  
wenn zweimal täglich feuchtigkeits-  
spendende Hautpflege genutzt wird.<sup>3</sup>

## BEHANDLUNG

### Klassifizierung von Skin Tears

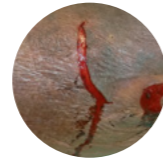

**Typ 1**  
kein  
Hautverlust



**Typ 2**  
Teilverlust  
des Hautlappens



**Typ 3**  
Totaler Verlust  
des Hautlappens

### Die Behandlungs-STEPS<sup>1</sup>

- Blutungen unter Kontrolle bringen
- Reinigen und debridieren
- Infektionsmanagement
- Exsudatmanagement berücksichtigen
- Wundränder / Wundverschluss kontrollieren
- Vorhandene Hautlappen schützen
- Die Verbandzeit der Wundverbände sollte einige Tage betragen (aber nicht länger als 7 Tage<sup>4</sup>)

## GENESUNG

Wenn sich die Wunde am **Unterschenkel** befindet, sollte eine passende Diagnostik abklären, ob und welche **Kompression** angewendet werden kann.<sup>1</sup>



Cutimed Acute  
**Cutimed®**

### Individuelle Lösung:

Wundkontaktschicht  
**Cuticell Contact**



Sekundärauflage  
**Cutisoft**




Fixierung  
**Fixomull skin sensitive**



### Oder ein 2 in 1 - Produkt:

Für schwach bis mässig exsudierende Wunden

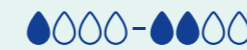


**Leukomed  
skin sensitive**



**Leukomed T plus  
skin sensitive**

Für mäßig bis stark exsudierende Wunden

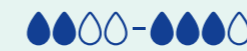

**Cutimed Siltec B**

Für Patienten mit Venenerkrankungen und Wunden an den unteren Extremitäten



**JOBST UlcerCare**



**JOBST Compriz**

Bei chronischer Venenerkrankung



**JOBST Opaque 18-21 mmHg**

### Leukoplast STEPS (Skin Tears Effective Protocol & Solutions)

Der Therapieansatz basiert auf dem Behandlungsleitfaden der ISTAP (International Skin Tear Advisory Panel). Es beinhaltet eine einfache Anleitung zu allen Aspekten in der Behandlung von Skin Tears, sowie eine Orientierungshilfe, wie Sie schnell und einfach das passende Produkt für Ihren Patienten mit seinen individuellen Bedürfnissen auswählen können.



Essity | BSN medical GmbH  
Schützenstraße 1-3  
22761 Hamburg  
www.leukoplast.de  
Tel +49 40 / 49 09-909  
Fax +49 40 / 49 09-6666



<sup>3</sup> Carville K, et al. The effectiveness of a twice-daily skin-moisturising regimen for reducing the incidence of skin tears. *International Wound Journal*. 2014;11(4):446-53.

<sup>4</sup> Deprez J, et al. Measures that patients living in the community can take for the prevention and treatment of skin tears: A comprehensive review of the literature. *J Wound Management*. 2022;23(2):70-77.