

Cutimed® Sorbion® Carbon+

Leistungsstarker Superabsorber
mit signifikanter Geruchsbindung



EXSUDAT MANAGEN

Die innovative
**2-in-1-
Lösung**
für Ihren
Versorgungsalltag

 **Cutimed®**
Your Power to Heal

Cutimed® Sorbion® Carbon+


Die Lösung bei Wundgeruch im Exsudatmanagement

Exsudierende Wunden können durch täglich schwankende Exsudatmengen inkl. Mazerationen zum Problem werden und dadurch die Wundheilung behindern.

Im Versorgungsalltag leiden Patient*innen und Pflegefachkräfte bei exsudierenden Wunden oftmals unter unangenehmem Wundgeruch, der sich infolge schlechter Wundbedingungen entwickeln kann. Dies kann zu sozialer Isolierung der Patient*innen führen.

Für diese Situationen ist es besonders wichtig, eine Wundauflage zu nutzen, die üble Wundgerüche effektiv und zuverlässig reduziert und gleichzeitig das Wundexsudat sicher einschließt, auch unter Kompression.

Die Lösung – ein Produkt, zwei Funktionen: Cutimed® Sorbion® Carbon+ kombiniert auf intelligente Weise effektives Exsudatmanagement mit Geruchskontrolle, um mit Exsudat verbundenen Risiken vorzubeugen und unangenehme Wundgerüche signifikant zu reduzieren. Sicher und einfach in der Anwendung optimiert diese 2-in-1-Lösung Ihren Versorgungsalltag. Und verbessert gleichzeitig das körperliche und gesellschaftliche Wohlbefinden Ihrer Patient*innen.

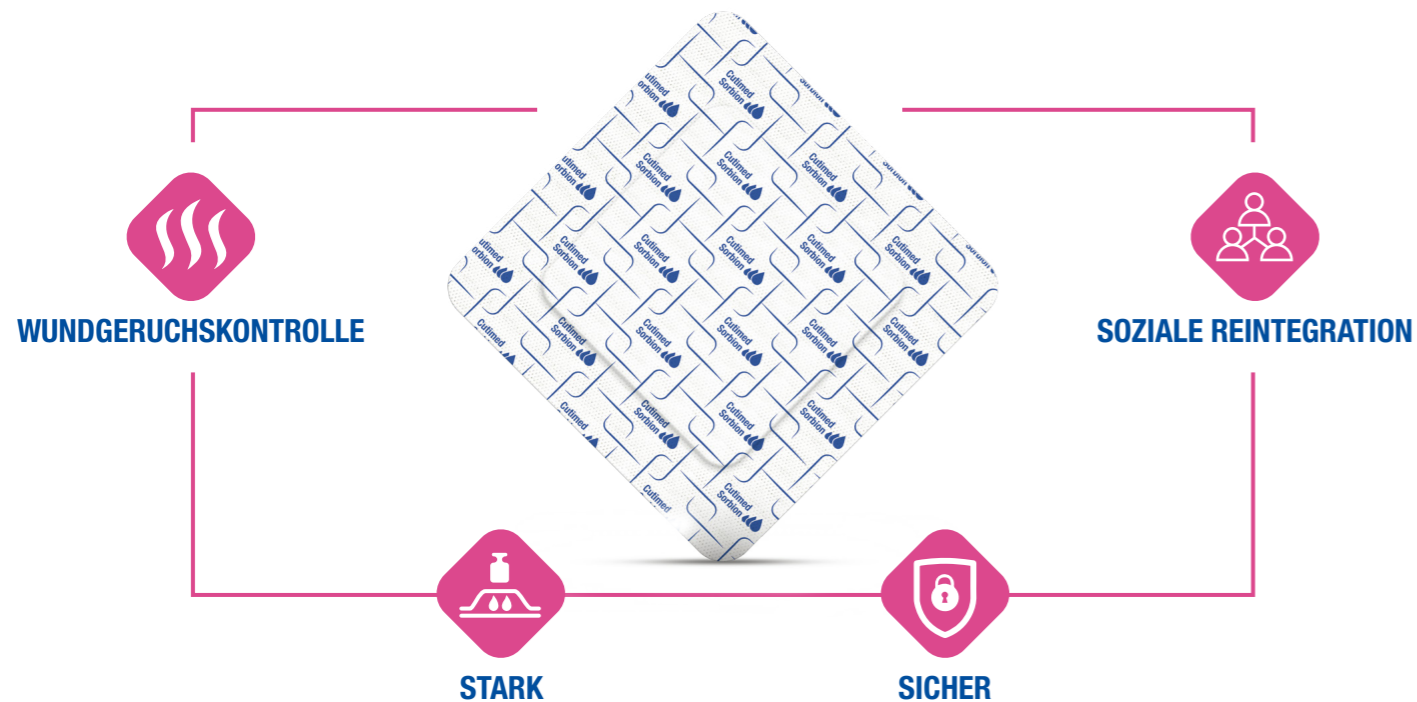

Die Basis für Vertrauen

Genau richtig bei stark exsudierenden Wunden, die mit unangenehmen Wundgerüchen verbunden sind¹

Indikation 1



Ulcer cruris venosum

Indikation 2



Ulzerierender Tumor

Indikation 3



Diabetisches Fußgeschwür

Indikation 4



Exulzerierende Karzinome

¹ Weitere Indikationen siehe Gebrauchsanweisung.



Cutimed® Sorbion® Carbon+

Leistungsstarker Superabsorber mit neuer, innovativer Geruchskontrolle für die lang anhaltende, nachhaltige Reduzierung von Wundgeruch

Wundgeruchskontrolle

- Kombination aus Aktivkohle und dem natürlichen Mineral Zeolith, die Geruchsmoleküle im Produktkern physikalisch bindet
- **Lang anhaltende, signifikante Geruchsreduzierung**

Wundreinigungseffekt inklusive

- Hypoallergene Polypropylen-Wundkontaktschicht sorgt für Soft Débridement: Reduktion des Anteils fibrinöser Beläge
- **Schafft optimale Wundheilungsbedingungen**

Deckschicht mit nicht haftendem Fixierrand

- Bakterienabweisender, duschfester Wäscheschutz aus Polyurethan
- **Schutz & Komfort für Patient und Anwender**

Hydration Response Technology für leistungsstarkes vertikales Exsudatmanagement

- Absorbiert die Wundflüssigkeit und schließt sie zuverlässig im superabsorbierenden Kern ein
 - Bindung von wundheilungshemmenden Faktoren, einschließlich Bakterien und Proteasen
 - Fördert ein feuchtes Wundmilieu, das die körpereigene Wundheilung unterstützt
- **Schutz vor Mazeration**

hydration
RESPONSE
technology

Wirksam unter Kompressionstherapie

- Effektive Retentionsleistung schließt den Großteil des absorbierten Exsudats ein – auch unter Kompression
- **Ganzheitlicher Therapieansatz**

Vorsprung durch innovative Technologie

Ein Produkt, zwei Funktionen

Cutimed® Sorbion® Carbon+ ist die Kombination aus bewährtem leistungsstarkem **Cutimed® Sorbion®** Superabsorber und einer effektiven und lang anhaltend geruchsreduzierenden Schicht.


Die nachhaltig geruchsreduzierenden Eigenschaften dieser Wundauflage gehen auf die Zweifachwirkung von Aktivkohle und der natürlich vorkommenden Zeolith zurück, die geruchsverursachende Moleküle innerhalb des Verbands binden.

Das Cutimed® Sorbion® Carbon+ Wirkprinzip

Zum Wirkprinzip-Video – einfach einscannen!




Vor der Behandlung

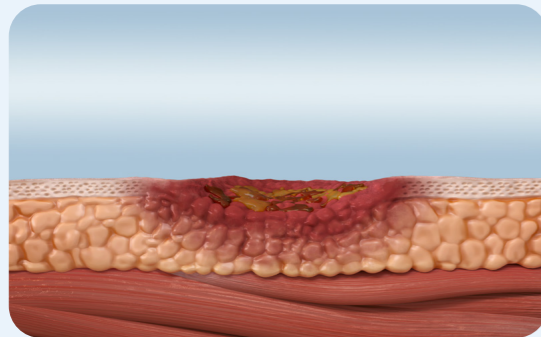


- Die Wunde exsudiert übermäßig und riecht stark
- Sie ist mit Fibrin beschichtet und unangenehme Gerüche werden freigesetzt
- Am Wundrand besteht das Risiko für eine Mazeration

Während der Anwendung

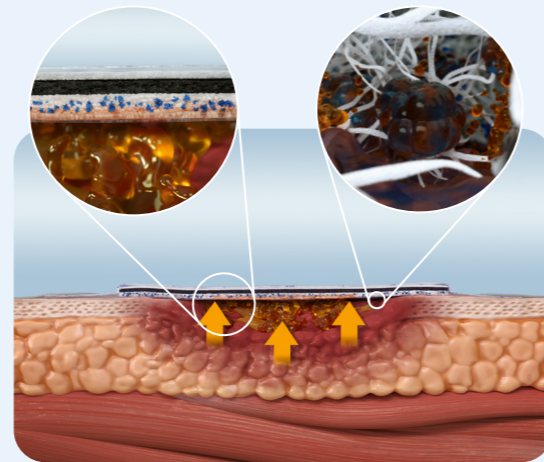

Die Hydration-Response-Technology


- Cutimed® Sorbion® Carbon+ absorbiert vertikal effektiv große Mengen an Exsudat und schließt diese sicher in seinem superabsorbierenden Kern ein – auch unter Kompression
- Wundheilungshemmende Faktoren, einschließlich Bakterien und Proteasen, werden sicher im Produktkern gebunden. Ein Rücknässen in die Wunde wird verhindert und vor Mazeration geschützt

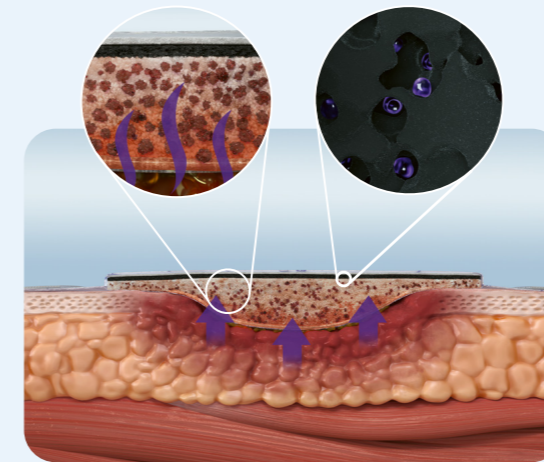

Die Interaktion mit Carbon+

- Die innovative Schicht aus Aktivkohle und Zeolith reduziert effektiv unangenehme Gerüche
- Sie schließt Geruchsmoleküle lang anhaltend in ihrer porösen Struktur ein

Das Ergebnis

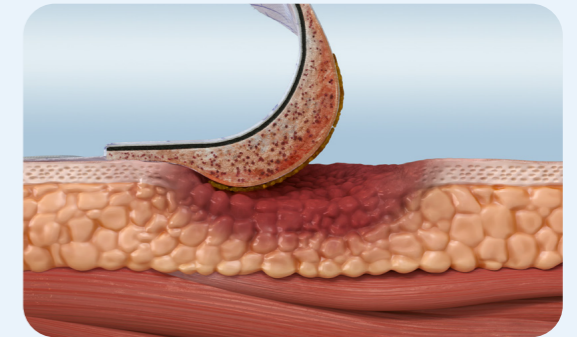

- Wundexsudat wird sicher vertikal aufgenommen und eingeschlossen
- Ein feuchtes Wundmilieu mit einer trockenen wundumgebenden Haut wird gefördert
- Fibrinöse Beläge werden durch Soft Débridement entfernt
- Geruchsverursachende, wundheilungshemmende Faktoren werden minimiert




Cutimed® Sorbion® Carbon+ überzeugt

Leistungsstarkes Exsudatmanagement mit signifikanter Wundgeruchsreduktion


Die **innovative Cutimed® Sorbion® Carbon+ Technologie** ermöglicht Wundgeruchskontrolle und Exsudataufnahmemengen, die über die Leistungsstärke vieler anderer Anbieter hinausgehen.

Geruchskonzentration

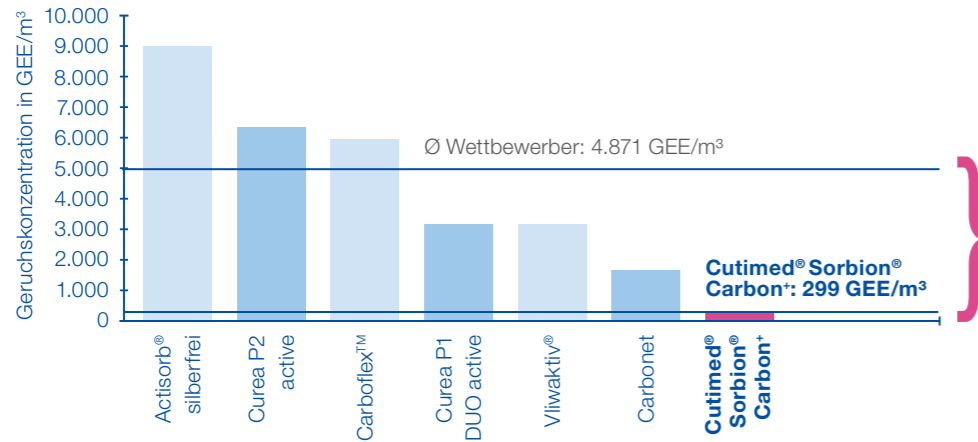


Die gemessene Geruchskonzentration nach 24 Stunden ist mehr als **16x niedriger** als der Durchschnitt der genannten Wettbewerber

Absorption

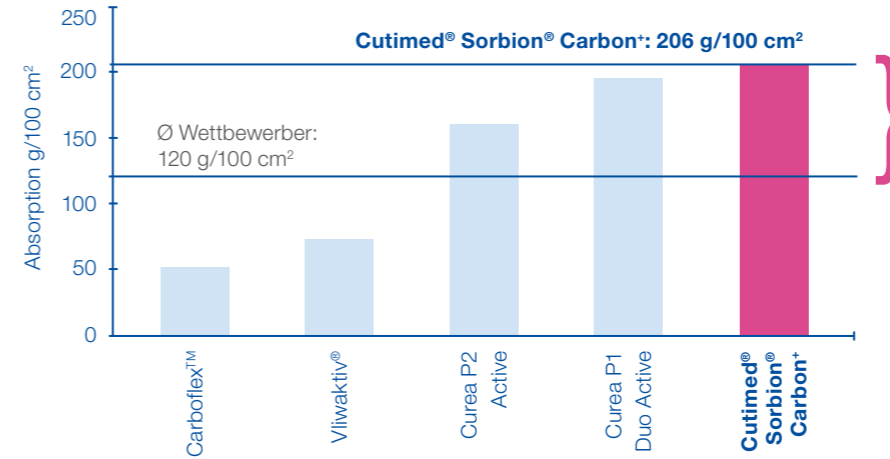

Mittel: **71%** höhere Absorption als die genannten Wettbewerber

Retention

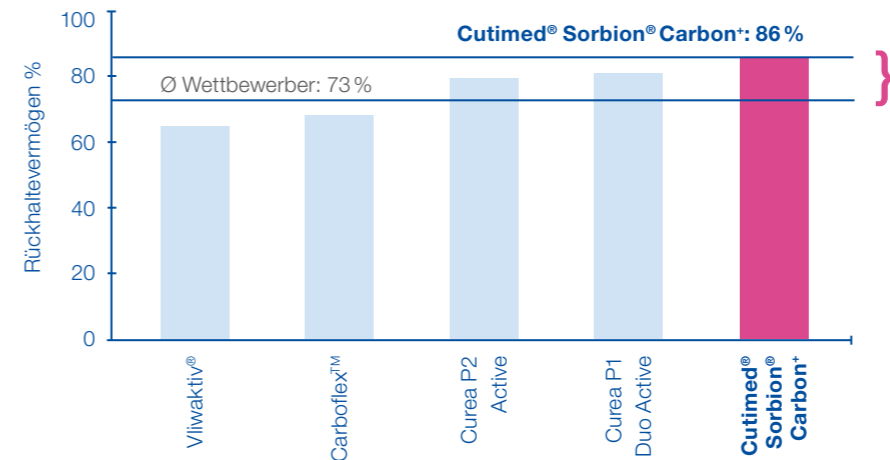

Mittel: **18%** höheres Rückhaltevermögen als die genannten Wettbewerber



Die Bewertung basiert auf DIN EN 13725:2003. Der Test wurde vom unabhängigen Labor Olfasense GmbH (2021) durchgeführt.
GEE/m³ = Einheit für Geruchskonzentration gemäß DIN EN 13725

Die Bewertung basiert auf DIN EN 13726-1:2002. Der Test wurde vom unabhängigen Labor Surgical Material Testings Laboratory (SMTL) (2021) durchgeführt.

Cutimed® Sorbion® Carbon+ überzeugt in der Anwendung


Fallbeispiel zur Wirksamkeit* – Anamnese

- Exulzierendes großzelliges Lymphom, Patient 70 Jahre, befindet sich in kurativer Therapie (T-Zellen Therapie), Adopositas, kardiovaskulär erkrankt
- Wunde: übermäßig und mäßig visköses Exsudat, Wundgröße: 11 x 4 cm Tasche auf 12 Uhr 2 cm auf 6 Uhr 1 cm, Nekrose bis zu 100 %, Umgebungshaut: gesund
- Geruchsbewertung nach TELER: 5-5-5-5
- Täglicher Verbandwechsel
- Mechanisches Debridement



Behandlungsbeginn

Stark riechende und exsudierende Wunde (Geruch nach TELER: 5-5-5-5).
Wundtherapie mit Cutimed® Sorbion® Carbon+.
Therapieziel: Geruchsreduktion

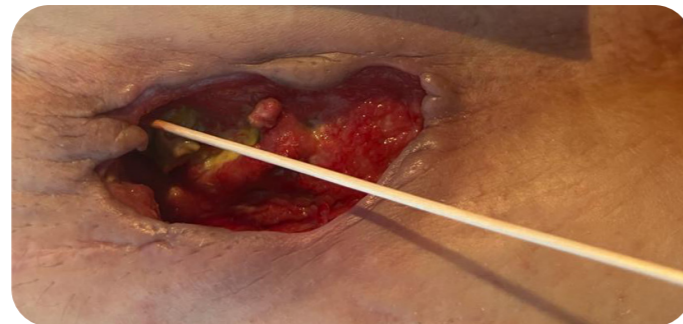

19. Behandlungstag

Erfolgreiches Geruchs- und Exsudationsmanagement (Geruch nach TELER: 2-3-3-3).
Nicht abgeschlossene Wundheilung, da diese die Studiendauer überschreitet.
Das Hauptziel der Geruchsbindung wurde erreicht.

*Angaben zum Fallbeispiel wurden in Zusammenarbeit mit Inga Hoffmann-Tischner erstellt.

Entscheiden Sie sich für Cutimed® Sorbion® Carbon+

Leistungsstarkes Exsudatmanagement und effektive, lang anhaltende Geruchsreduktion



**WUNDGERUCHS-
KONTROLLE**



**LEISTUNGSSTARK
UND SICHER**



**SOZIALE
REINTEGRATION**



Mehr Informationen unter www.cutimed.de

Cutimed® Sorbion® Carbon+ Sortiment

Produkt	Größe inkl. Fixierrand	Wundpadgröße	Bestell-Nr.	Inhalt	BE/VE	PZN
Cutimed® Sorbion® Carbon+ Superabsorber mit effektiver Geruchskontrolle 	15 x 15 cm	10,5 x 10,5 cm	7121900	12 St.	1/14	16792380
	15 x 25 cm	10,5 x 20,5 cm	7121901	12 St.	1/12	16792397
	25 x 25 cm	20,5 x 20,5 cm	7121902	12 St.	1/8	16792405
	25 x 35 cm	20,5 x 30,5 cm	7121903	12 St.	1/6	16792411
	XL 28 x 48 cm	23,5 x 43,5 cm	7121904	12 St.	1/3	16792428

LATEX
FREE
FORMULA

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt


Wundphase

 Nekrose  Fibrinbelag  Granulation

Exsudat

 Mäßig bis übermäßig stark

Wundtiefe

 Oberflächlich



Ergänzungsprodukt zur Fixierung



Bestellinformationen	Größe	Abmessung	Bestell-Nr.	Inhalt	BE/VE	PZN
Fixomull® transparent Transparente, vollflächige Verbandfixierung 	Kleinpackung	2 m x 10 cm	7221700	1 St.	1/12	03643282
		10 m x 5 cm	7221600	1 St.	1/12	03643158
	Standardpackung	10 m x 10 cm	7221601	1 St.	1/12	03643201
		10 m x 15 cm	7221602	1 St.	1/12	03643218

Scannen und Online-Wissen zur Wundversorgung erhalten:



www.cutimed.de



Cutimed YouTube



Cutimed Facebook



Cutimed Instagram



Cutimed®,
an Essity brand



07742329H

03_2024

BSN medical GmbH,
an Essity company
Schützenstraße 1-3
22761 Hamburg

www.cutimed.de
Tel. 0800-3000789
Fax 0800-8501021