

# Eine Wunde, zwei Experten

**INFEKTIONS-  
EXPERTISE**  
Cutimed® Sorbact®



**EXSUDAT-  
EXPERTISE**  
Cutimed® Sorbion®

**Doppelte Kompetenz für die  
chronische Wundversorgung:**

**Cutimed® Sorbact® und  
Cutimed® Sorbion®**

 **Cutimed®**  
Your Power to Heal

# Cutimed® Sorbact® Gel

Infektionsmanagement und autolytisches Débridement



**Sicher erstattungsfähig**  
nach § 31 Absatz 1a SGB V

## Produkt

Mit Hydrogel imprägnierte Kompresse aus Acetatfasern mit einer bakterien- und pilzbindenden DACC™-Beschichtung.

## Einsatzbereich

Zur Versorgung sauberer, kontaminierter, kolonisierter oder infizierter Wunden in trockenem bis leicht nässem Zustand.

### Vorteile



#### Physikalisch wirksam

Bindet, hemmt und entfernt Bakterien, Pilze und Endotoxine



#### Erstattungsfähig

In der Verordnung nach der neuen Verbandmitteldefinition des G-BA



#### Verträgliche Eigenschaften

Keine Freisetzung von antimikrobiellen Substanzen, keine bekannten Mechanismen zur Resistenzbildung



#### Gibt Feuchtigkeit an das Wundbett ab

Durch die Kombination mit dem Hydrogel wird das autolytische Débridement unterstützt sowie Beläge und nekrotisches Gewebe entfernt<sup>1</sup>



## Einzigartige Kombination

Für die Reinigung und gleichzeitige Infektionskontrolle, ohne Wirkstoffe in die Wunde abzugeben.

## Bindet und verankert Bakterien irreversibel

Dank der effektiven Sorbact® Technology.

<sup>1</sup> Stephen-Haynes J et al. Cutimed Siltec foam and Cutimed Sorbact gel dressings: a clinical audit. Wounds UK. 2010;6:130–136.

# Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage und Multi Star

Starkes Exsudatmanagement für die Versorgung vielfältiger Wunden



## Produkt

Superabsorbierende Wundverbände, vielseitig in der Anwendung: für konturierte Körperstellen, z. B. Zehe, Ferse, Sacrum, oder bei Kathetern und Drainagen.

## Einsatzbereich

Zur Versorgung stark bis mäßig exsudierender, chronischer Wunden und sekundär heilender Wunden verschiedener Genese sowie exulzierender Karzinome und ähnlich exsudierender Wunden.

### Vorteile



#### Vielseitiges Sortiment

Zur Anwendung bei schwierig zu versorgenden Körperstellen



#### Leistungsstarkes vertikales Exsudatmanagement

Schutz vor Mazeration



#### Wundreinigungseffekt inklusive

Schafft optimale Wundheilungsbedingungen



#### Wirksam unter Kompressionstherapie

Ganzheitlicher Therapieansatz



## Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage

Superabsorber in geschlitzter Form – speziell für Katheter, Drainagen etc.



## Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star

Superabsorber in flexibler, anpassungsfähiger Form – speziell für konturierte Körperstellen



## Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star

Atraumatischer Superabsorber in flexibler, anpassungsfähiger Form – speziell für konturierte Körperstellen

INFIZIERTE WUNDE

# Ein Diabetischer Fuß – zwei Experten

NICHT INFIZIERTE WUNDE


Unser verlässliches Therapiekonzept für einen Diabetischen Fuß




## Die richtigen Therapieelemente: Schritt für Schritt zum Heilungserfolg

Das Therapiekonzept für diabetische Fußgeschwüre geht weit über die Wundbehandlung hinaus. Die richtige Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung ist von herausragender Bedeutung. Eine ausgewogene Ernährung und die Patientencompliance sind wesentliche Faktoren auf dem Weg zur Genesung.

1. **Nekrose und Beläge entfernen**  
Cutimed® Sorbact® Gel
2. **Feuchtes Milieu erhalten**  
Cutimed® Sorbact® Gel/  
Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage/  
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star
3. **Mikroorganismen binden und inaktivieren**  
Cutimed® Sorbact® Gel
4. **Aufnahme/Handling von Exsudat**  
Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage/  
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star

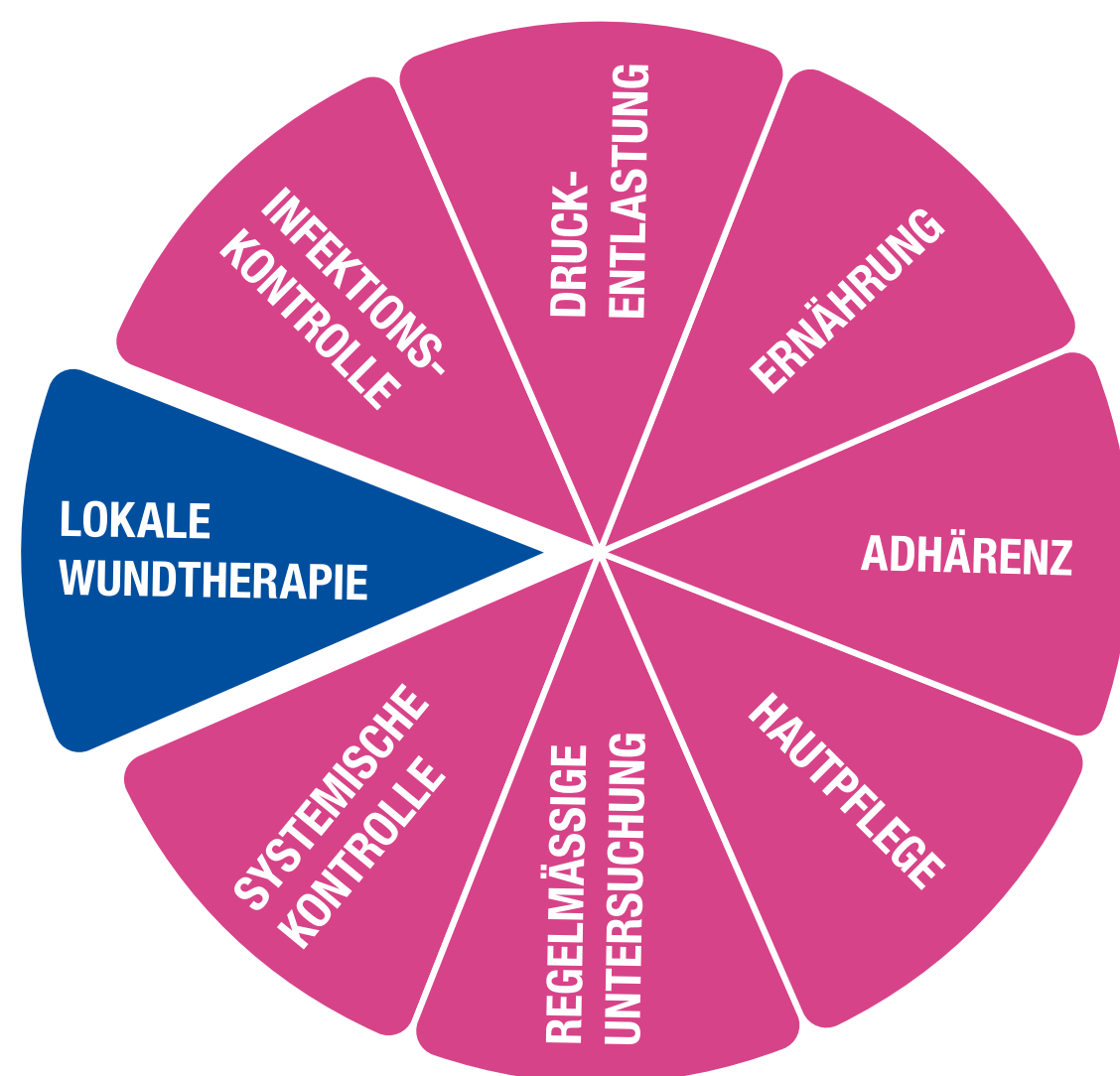

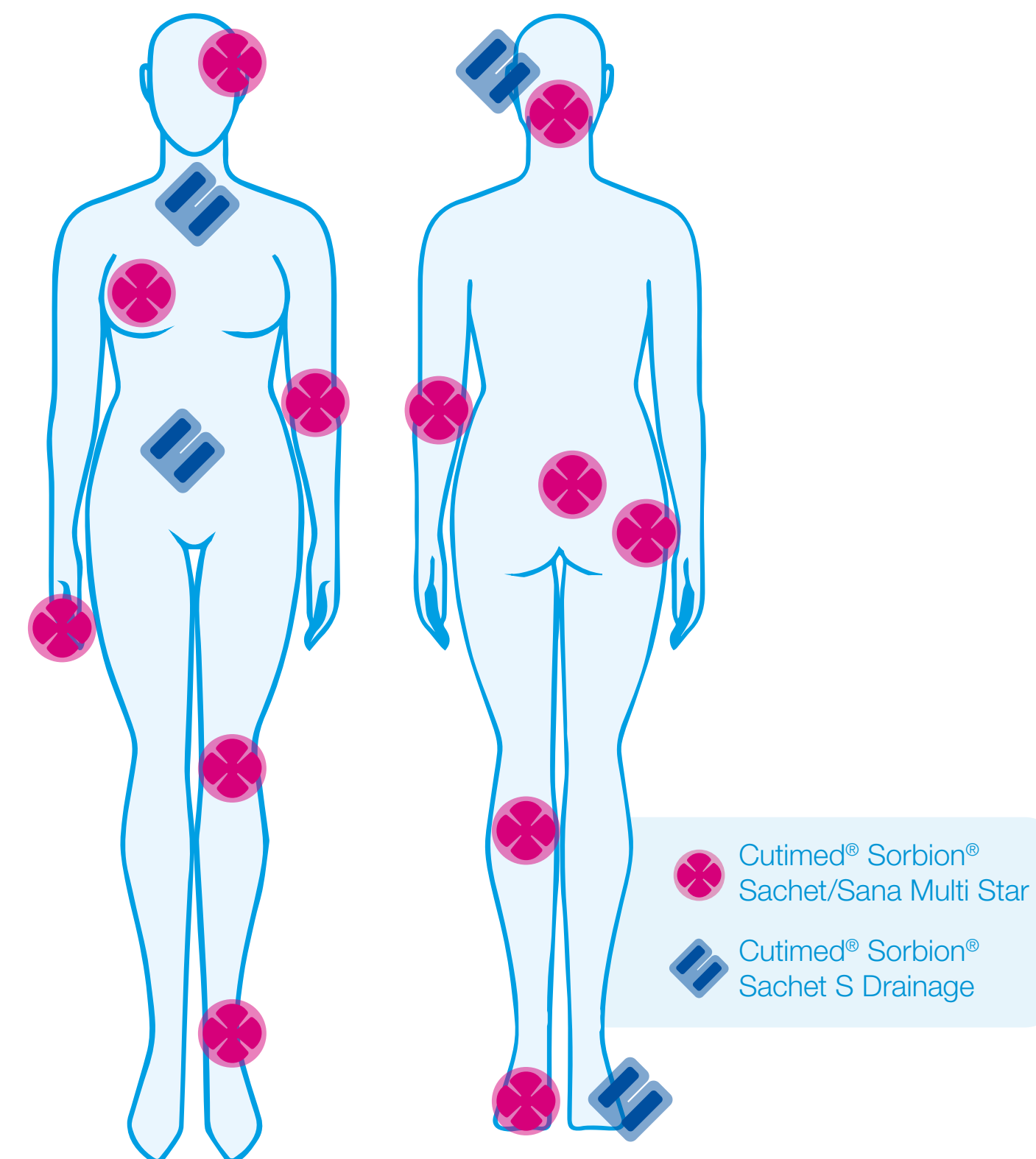


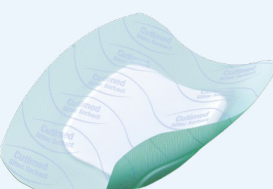

## Individuelles Exsudatmanagement für jede Wunde








## Applikationsmöglichkeiten bei Diabetischem Fuß



# Cutimed® PZN-Bestellübersicht für die richtige Verordnung

Produkt	Größe in cm	Wundpadgröße in cm	Bestell-Nr.	Inhalt	BE/VE	PZN	
 <b>Cutimed® Sorbact® Gel</b> Mit Hydrogel imprägnierte, keimreduzierende Kompresse ■■■   0000-0000   ☹   ✂	7,5 x 7,5	–	7261122	12 St.	1/36	<b>07353434</b>	
	7,5 x 15	–	7261123	12 St.	1/20	<b>07353440</b>	
	15 x 20	–	7261127	6 St.	1/8	<b>15637884</b>	
 <b>Cutimed® Sorbact® Tamponade</b> Für die Anwendung in tiefen Wunden ■   0000-0000   ☹   ✂	2 x 50	–	7216614	12 St.	1/6	<b>15657668</b>	
	2 x 50	–	7216612	24 St.	1/6	<b>07351731</b>	
	5 x 200	–	7216708	12 St.	1/6	<b>07351808</b>	
 <b>Cutimed® Sorbact® Kompresse</b> Primäre Wundauflage für oberflächliche und tiefe Wunden. Zur Verwendung in Kombination mit einer Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) ■   0000-0000   ☹   ✂	4 x 6	–	7216419	6 St.	1/24	<b>07347215</b>	
	4 x 6	–	7216418	42 St.	1/6	<b>07348031</b>	
	7 x 9	–	7216517	6 St.	1/24	<b>07348640</b>	
	7 x 9	–	7216516	42 St.	1/6	<b>07348657</b>	
 <b>Cutimed® Siltec® Sorbact® B</b> Hochabsorbierender, keimreduzierender Schaumverband mit Silikon-Haftrand ■■   0000-0000   ☹   ☹	7,5 x 7,5	4 x 4	7325133	12 St.	1/10	<b>07342672</b>	
	10 x 10	6 x 6	7325141	12 St.	1/10	<b>13574412</b>	
	12,5 x 12,5	8,2 x 8,2	7325134	12 St.	1/10	<b>07342689</b>	
	15 x 15	10 x 10	7325135	12 St.	1/10	<b>07343140</b>	
	10 x 22,5	5 x 16,5	7325140	12 St.	1/10	<b>13574398</b>	
	17,5 x 17,5	12,3 x 12,3	7325136	6 St.	1/10	<b>07343157</b>	
	22,5 x 22,5	16,5 x 16,5	7325137	6 St.	1/10	<b>07343223</b>	
 <b>Cutimed® Siltec® Sorbact® B (Oval)</b> ■■   0000-0000   ☹   ☹	7 x 10	3 x 6	7325142	12 St.	1/10	<b>13574429</b>	
	<b>Cutimed® Siltec® Sorbact® B (Sacrum)</b> ■■   0000-0000   ☹   ☹	17,5 x 17,5	10,6 x 12,5	7325138	6 St.	1/10	<b>07343246</b>
		23 x 23	14 x 16,6	7325139	6 St.	1/10	<b>07343269</b>

Produkt	Größe in cm	Wundpadgröße in cm	Bestell-Nr.	Inhalt	BE/VE	PZN
 <b>Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage</b> Superabsorbierende Wundauflage in geschlitzter Form ■■   0000-0000   ☹   ☹	10 x 10	–	7324101	25 St.	1/34	<b>11361907</b>
		–	7324101	25 St.	1/36	<b>11361793</b>
 <b>Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star</b> Superabsorbierende Wundauflage in flexibler Form ■■   0000-0000   ☹   ☹	Ø 8	–	7323703	10 St.	1/62	<b>11361764</b>
		–	7324101	25 St.	1/36	<b>11361793</b>
 <b>Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star</b> Atraumatische, superabsorbierende Wundauflage in flexibler Form ■■   0000-0000   ☹   ☹	Ø 11	–	7323801	10 St.	1/62	<b>11361801</b>
		–	7323809	10 St.	1/22	<b>11361818</b>
 <b>Cutimed® Sorbion® Sachet S</b> Superabsorbierende Wundauflage ■■   0000-0000   ☹   ☹	7,5 x 7,5	–	7323240	12 St.	1/62	<b>11361310</b>
	5 x 12	–	7323243	12 St.	1/62	<b>11361356</b>
	10 x 10	–	7323244	12 St.	1/62	<b>11361362</b>
	10 x 20	–	7323247	12 St.	1/34	<b>11361391</b>
	15 x 15	–	7323250	12 St.	1/36	<b>11361439</b>
	20 x 20	–	7323252	12 St.	1/22	<b>11361451</b>
	20 x 30	–	7323255	12 St.	1/17	<b>11361505</b>
 <b>Cutimed® Sorbion® Sana</b> Atraumatische, superabsorbierende Wundauflage ■■   0000-0000   ☹   ☹	8,5 x 8,5	–	7323330	12 St.	1/62	<b>11361540</b>
	12 x 12	–	7323333	12 St.	1/62	<b>11361586</b>
	12 x 22	–	7323336	12 St.	1/34	<b>11361617</b>
	22 x 22	–	7323339	12 St.	1/22	<b>11361652</b>

**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Wundphase	Exsudat	Wundtiefe	Extra
■ Infektion	0000 Trocken	☹ Oberflächlich	✂ Zuschneidbar
■ Nekrose	0000 Schwach	☹ Tief	☹ Beidseitig applizierbar
■ Fibrinbelag	0000 Mäßig	☹ Oberflächlich und tief	☹ Duschfest
■ Granulation	0000 Stark		
	0000 Übermäßig		

Hinweise zur Applikation sind in der Gebrauchsanweisung zu finden.

Scannen und Online-Wissen zur Wundversorgung erhalten:



www.cutimed.de



Cutimed YouTube



Cutimed Facebook