

JOBST® VLAKBREI ASSOR- TIMENT



N I E T S H O U D T J E T E G E N



ELVAREX | ELVAREX PLUS | ELVAREX SOFT | ELVAREX SOFT SEAMLESS | CONFIDENCE

ALTIJD EEN OPLOSSING DIE BIJ DE PATIËNT PAST

Het leven van jouw patiënten positief beïnvloeden geeft voldoening. Je helpt ze letterlijk weer op de been. Om hen zo goed mogelijk te helpen om te leven met chronisch oedeem, lymfoedeem of lipoedeem is het belangrijk dat jouw patiënten een compressiehulpmiddel vinden dat optimaal voldoet aan hun behoeften en hen ondersteuning biedt bij de problemen die vaak voorkomen bij de behandeling van de symptomen.

Het vlakbrei assortiment van JOBST staat synoniem voor optimale therapeutische werkzaamheid bij de behandeling van lymfoedeem en lipoedeem.

JOBST® ELVAREX

Een stevige kous voor effectief oedeemmanagement

- **Micromassage:** de structuur van JOBST Elvarex creëert een micromassage-effect op de huid bij elke beweging, mobiliseert oedeem en verbetert hierdoor de lymfedrainage
- **Ademend:** speciale luchtdoorlatende breistruktuur waardoor de huid koel blijft
- **Comfort:** beschikbaar met comfortzones en siliconenboord met micronoppen voor extra gemak

JOBST® ELVAREX SOFT

Een lichte, ademende en huidvriendelijke therapeutische elastische kous, speciaal ontworpen voor patiënten met een gevoelige of kwetsbare huid

- **Extra zacht:** dankzij de geoptimaliseerde breitechniek en zachte garens
- **Ontworpen voor gebruiksgemak:** gemakkelijk aan- en uit te trekken

JOBST® CONFIDENCE

De nieuwe innovatieve kous die meer comfort biedt en een actieve levensstijl ondersteunt

- **Zacht en stevig:** JOBST Confidence is vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar óók stevige ondersteuning biedt
- **Countour fit:** dankzij de unieke breimethode vormt de kous zich goed naar individuele lichaamscontouren. Bij JOBST Confidence kunnen steken op vier posities worden toegevoegd. Dit maakt meer dan ooit een persoonlijke pasvorm van de therapeutische elastische kous mogelijk
- **Vochtbeheer:** geavanceerd vochtregulatiesysteem voor optimaal draagcomfort

INNOVATIES VOOR EXTRA COMFORT

STREVEN NAAR OPTIMAAL DRAAGCOMFORT

Comfort kan een belangrijk aspect zijn voor de patiënt, het kan namelijk helpen om dagelijkse compressietherapie vol te houden. JOBST Elvarex, JOBST Elvarex Soft en JOBST Confidence bieden verschillende productopties die zorgen voor meer draagcomfort.



Elleboogcomfortzone Elvarex armkous

COMFORTZONES

De knie en elleboog kan een gevoelige plek zijn. De **kníe- en elleboogcomfortzones** in de JOBST Elvarex kous bieden een comfortabele oplossing door het speciale zachte garen in combinatie met unieke breitechniek.

Ook biedt de **enkelcomfortzone** extra comfort en voorkomt insnoeren op de wreef.* Forse bovenbenen of een groot lengteverschil tussen lies en bilplooï maken het soms moeilijk om voor AG kousen te kiezen.

De **topcomfortzone** in Elvarex en Elvarex Soft bestaat uit een verhoogd bovenbeendeel aan de voorkant én zijkant. Hierdoor sluit de kous beter aan op de anatomie en neemt de kans op afzakken af.

BOORDOPTIES

De **SoftFit-technologie** is beschikbaar voor JOBST Elvarex, JOBST Elvarex Soft en JOBST Confidence en verhoogt het draagcomfort van de kous dankzij het meegebreide siliconengaren aan de binnenzijde van de boord. Het speciale garen sluit zacht aan op de huid en houdt de kousen op hun plek. SoftFit voorkomt stuwing en zorgt voor graduele compressie die de natuurlijke veneuze bloedstroom en lymfe-afvloed ondersteunt.

Het **Siliconenboord met micronoppen** biedt net als de SoftFit-technologie meer draagcomfort en is zeer geschikt voor de gevoelige huid. De micronoppen zorgen voor een bijzonder goede hechting en voorkomen dat de kous afzakt. Deze boordoptie is optioneel bij Elvarex en Elvarex Soft maatwerk.



* Enkelcomfortzone alleen beschikbaar voor JOBST Confidence

WANNEER ZET JE WELKE JOBST® VLAKBREI COMPRESSIEVOORZIENING IN?

Bij het kiezen van het meest geschikte vlakbreimateriaal kan de ISL-classificatie¹ helpen. Dit geldt ook voor chronisch oedeem bij veneuze aandoeningen. Gebruik het Hulpmiddelenkompas om te bepalen of je patiënt in aanmerking komt voor vlakbreikousen. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met je JOBST Account Manager.

STADIUM VAN LYMFOEDEEM¹

1

ISL classificatie

De aandoening uit zich in het begin door oedeem dat weer verdwijnt als de arm of het been hoog gelegd wordt. Het oedeem kan in dit stadium pitting zijn.

2A

ISL classificatie

Het oedeem gaat nauwelijks weg door de arm of het been hoog te leggen en pitting is goed zichtbaar.

2B

ISL classificatie

In dit stadium verschuift het karakter naar non-pitting en kan fibrose ontstaan.

3

ISL classificatie

Het weefsel voelt hard aan (fibrose). Er ontstaan veranderingen in de huid, zoals verdikkingen, hyperpigmentatie, diepe en harde huidplooiën, vervetting en wratjes.

JOBST ELVAREX SOFT ARM- EN BEENKOUS

JOBST ELVAREX SOFT SEAMLESS HANDSCHOEN EN TEENKAP

JOBST CONFIDENCE

JOBST ELVAREX ARM- EN BEENKOUS

JOBST ELVAREX PLUS HANDSCHOEN EN TEENKAP

Bij lipoeedeem kan het behandeldoel ook vermindering van pijn en/of het verbeteren van mobiliteit zijn. Indien er geen sprake is van (lymf)oedeem kun je ook kiezen voor een kous uit het JOBST rondbrei-assortiment.

¹ Aangepast op grond van: The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema. 2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology (ISL). Lymphology 2016; 49: 170-184

JOBST® ELVAREX® BEENKOUS¹

De sterke vlakbrei kous, geschikt vanaf ISL-classificatie 2B tot en met 3

VOORDELEN VAN JOBST® ELVAREX®

- Sterk en slijtvast materiaal
- Zeer breed assortiment in maatwerk
- Luchtdoorlatend voor meer comfort



ASSORTIMENT BEENKOUSEN


Uitvoering ▼																	
		AA¹	AB	AB1	AD	AF	AG	AG-T	AT	AG-HT	BIG	BD	BG	CG	CG-T	CT-GT	DF
Drukklasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 3: 34 - 42 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 3 forte: 38 - 46 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 4: > 49 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 4 super: > 70 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Boord- afwerking	SoftFit				●												
	Siliconen noppen			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●
	Siliconen micronoppen				●		●										
Opties voet	Rechte voet (open teen of gesloten teen)		●	●	●	●	●	●	●	●							
	Schuine voet (open teen of gesloten teen)		●	●	●	●	●	●	●	●							
	4 tenen, geen kleine teen	●															
	5 tenen	●															
Opties been	Slipvorm				●		●										
	Kniecomfortzone					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
	Topcomfortzone incl. slipvorm						●		●								
	T-hiel																
Opties talleband	Gebreid (standaard)								●	●							●
	Knoopsgatelastiek (verstelbaar)								●	●							●
	Siliconen (noppen of sensitive)								●	●							●
	Fleece (met of zonder klittenband)								●	●							●

Speciale uitvoeringen voor zwangere vrouwen en voor heren met of zonder gulp.

SAMENSTELLING

Klasse	Katoen	Polyamide	Elastodieen	Elastaan
1		72%	12%	16%
2	29%	40%	21%	10%
3	41%	32%	21%	6%
3F	41%	27%	26%	6%
4	39%	26%	30%	5%
4S	39%	24%	32%	5%

KLEUREN

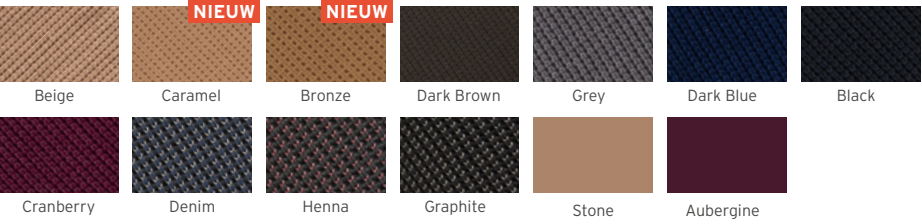

AFWERKING



Voor teenkap AA¹ alleen de volgende kleuren beschikbaar: Beige, Caramel, Bronze, Dark Brown, Black, Dark Blue, Cranberry en Grey

¹ Geschikt bij diepe huidplooiën

JOBST® ELVAREX® ARMKOUS

De sterke vlakbrei kous, geschikt vanaf ISL classificatie 2B tot en met 3

VOORDELEN VAN JOBST® ELVAREX®

- Sterk en slijtvast materiaal
- Perfecte anatomische vorm
- Luchtdoorlatend voor meer comfort



ASSORTIMENT

Uitvoering ▼											
		AC¹	AE	AG	AG¹	AH	CE	CG	CG¹	CH	DF
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 2 forte: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boord- afwerking	SoftFit							●	●		
	Siliconen noppen	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	Siliconen micronoppen			●	●			●	●		
Opties arm	Elleboogcomfortzone							●	●	●	
	Bevestigingsband					●				●	
	BH bevestiging (met of zonder klittenband)					●				●	

Voor model AC¹, AE en AE (schuine rand) hebben we de opties: zonder vingers zonder duim, zonder vingers met duim en met vingers met duim.


SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastodieen	Elastaan
1	73%	12%	15%
2	70%	20%	10%
2F	63%	27%	10%

KLEUREN



AFWERKING

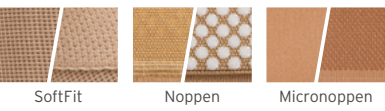

JOBST® ELVAREX® PLUS

Vlakbrei handschoen en teenkap, geschikt vanaf ISL classificatie 2B tot en met 3

VOORDELEN VAN JOBST® ELVAREX® PLUS

- Perfecte pasvorm door 3D-breitechniek
- Maximale bewegingsvrijheid door naadloze afwerking
- Sterk en slijtvast voor effectief oedeemmanagement



ASSORTIMENT

Uitvoering ▼				
		AC¹	AE	AA¹
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●
Opties hand	Met duim, zonder vingers	●	●	
	Met duim, met vingers	●	●	
	Schuin		●	
Opties voet	Open teen (4 tenen, geen kleine teen)			●
	Open teen (5 tenen)			●

SAMENSTELLING HANDSCHOEN

Klasse	Polyamide	Elastodieen	Elastaan
1	73%	12%	15%
2	70%	20%	10%

SAMENSTELLING TEENKAP

Klasse	Katoen	Polyamide	Elastodieen	Elastaan
1		72%	12%	16%
2	29%	40%	21%	10%

KLEUREN HANDSCHOEN



KLEUREN TEENKAP



JOBST® ELVAREX® SOFT

De comfortabele aanpak van oedeem, geschikt vanaf
ISL classificatie 1 tot en met 2A

VOORDELEN VAN JOBST® ELVAREX® SOFT

- Meer draagcomfort door het unieke zachte materiaal
- Meer aantrekgemak
- Luchtdoorlatend voor een aangenaam gevoel



JOBST® ELVAREX® SOFT SEAMLESS

Vlaktbrei handschoen en teenkap, geschikt vanaf
ISL classificatie 1 tot en met 2A

VOORDELEN VAN JOBST® ELVAREX® SOFT SEAMLESS

- Gemaakt van het unieke zachte Elvarex Soft materiaal
- Naadloos voor meer comfort en therapietrouw
- Perfecte anatomische vormgeving



ASSORTIMENT

Uitvoering ▼										
		AD	AG	AG-T	AT	FT	CT	B'T	BT	CG¹
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 3: 34 - 46 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	
Boord- afwerking	SoftFit	●								●
	Siliconen noppen	●	●							●
	Siliconen micronoppen	●	●							●
Opties voet	Rechte voet (open teen of gesloten teen)	●	●	●	●					
	Schuine voet (open teen of gesloten teen)	●	●	●	●					
Opties been	Slipvorm*		●	●	●	●	●	●	●	
	Topcomfortzone incl. slipvorm		●							
	T-hiel	●	●	●	●					
Opties tailleband	Gebreid (standaard)				●	●	●	●	●	
	Knoopsgatelastiek (verstelbaar)				●	●	●	●	●	
	Siliconen (noppen of sensitive)				●	●	●	●	●	
	Fleece (met of zonder klittenband)				●	●	●	●	●	

*De modellen AG, AT, Capri en Bermuda hebben standaard een slipvorm-uitvoering.

SAMENSTELLING BEENKOUS

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	70%	30%
2	65%	35%
3	60%	40%

SAMENSTELLING ARMKOUS

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	70%	30%
2	65%	35%



Ook leverbaar als
confectiekous
Elvarex Soft AD¹.

In drukklasse CCL1 en
CCL2 met open teen,
beige kleur en met
noppenboordafwerking.

KLEUREN



*Macchiato is alleen beschikbaar als armkous

AFWERKING




ASSORTIMENT

Uitvoering ▼				
		AC¹	AE	AA¹
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●
Opties hand	Met duim, zonder vingers	●	●	
	Met duim, met vingers	●	●	
Opties voet	4 tenen (geen kleine teen)			●

SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	70%	30%
2	65%	35%

KLEUREN

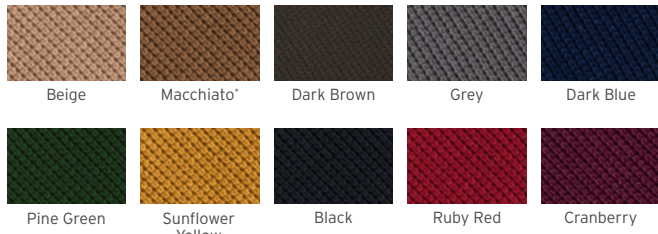

*Macchiato is alleen beschikbaar als handschoen

JOBST® CONFIDENCE BEENKOUS¹

De innovatieve vlakbrei kous, geschikt vanaf
ISL classificatie 2A tot en met 2B

VOORDELEN VAN JOBST® CONFIDENCE

- Sluit zeer goed aan op de lichaamscontouren dankzij de unieke Contour Fit
- Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook stevige ondersteuning biedt



JOBST® CONFIDENCE ARMKOUS

De innovatieve armkous, geschikt vanaf ISL classificatie
2A tot en met 2B

VOORDELEN VAN JOBST® CONFIDENCE

- Sluit zeer goed aan op de lichaamscontouren dankzij de unieke Contour Fit
- Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook stevige ondersteuning biedt



ASSORTIMENT

Uitvoering ▼									
		AB1	AD	AG	AT	AG-HT	B1T	BT	Bermuda
Drukklasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 3: 34-46 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
Boord-afwerking	SoftFit		●						
	Siliconen noppen			●					
	Comfort boord (gebreid verstelbaar)				●	●	●	●	●
Opties voet	Rechte voet (open teen of gesloten teen)	●	●	●	●	●			
	Schuine voet (open teen of gesloten teen)	●	●	●	●	●			
	Hallux valgus zone (links en/of rechts)	●	●	●	●	●			
	Enkelcomfortzone	●	●	●	●	●			
Opties been	Schuine rand (standaard)		●	●					
	Rechte rand		●	●					
	Kniecomfortzone			●	●	●	●	●	
Opties taille-band	Fleece (standaard)				●	●	●	●	●
	Fleece met bloemmotief				●	●	●	●	●
Design-elementen	Deco Line (midden scheenbeen)		●	●	●	●	●	●	
	Gekleurde naad (zilver/goud/meerkleurig)		●	●	●	●	●	●	●
Prints	Empower Yourself / Feel Good / Keep Moving				●	●	●	●	●
	Initialen (max. 2 letters)		●	●	●	●	●	●	

De mannenbroek is zonder gulp. Dit geldt voor AT t/m Bermuda

SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Polypropylene	Elastaan
1	59%	26%	15%
2	48%	32%	20%
3	45%	32%	23%

KLEUREN



AFWERKING

ASSORTIMENT

Uitvoering ▼			
		AG¹	CG¹
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●
Boord- afwerking	SoftFit	●	●
	Siliconen noppen (2,5 cm)	●	●
Opties arm	Elleboogcomfortzone	●	●
	Elleboog hoek 25 graden (standaard)	●	●
	Elleboog hoek 45 graden	●	●
Design- elementen	Deco Line	●	●
	Gekleurde naad (zilver/goud/meerkleurig)	●	●
	Initialen (max. 2 letters)	●	●

SAMENSTELLING


Klasse	Polyamide	Polypropylene	Elastaan
1	59%	26%	15%
2	48%	32%	20%

KLEUREN



AFWERKING

¹Geschikt bij groot verschil in omvangsmaten

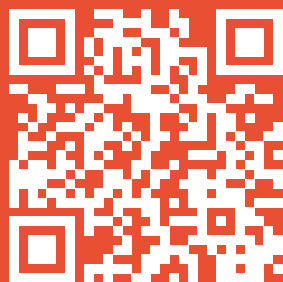

BESTELFORMULIEREN

Scan de QR-code om naar de downloadpagina te gaan.



JOBST®,
an Essity brand

01/2025



ESS000309

Essity Belgium NV
Health & Medical
Berkenlaan 8b bus 3
1831 Machelen

Tel +32(0)2 766 05 05
info.be@essity.com
www.jobst.be