

Deine Wunde, zwei Experten

INFEKTIONS- EXPERTISE

Cutimed® Sorbact®



EXSUDAT- EXPERTISE

Cutimed® Sorbion®



Dein Leitfaden für die Versorgung
chronischer Wunden: schnell und
einfach zum richtigen Produkt.

 **Cutimed®**
Your Power to Heal

Wir bleiben sicher
erstattungsfähig¹

Cutimed® Sorbact® und
Cutimed® Sorbion®


Dein Wundversorgungs-Leitfaden

Spare Zeit: schnell und einfach zum richtigen Produkt



INFEKTION MANAGEN

INFIZIERTE WUNDE

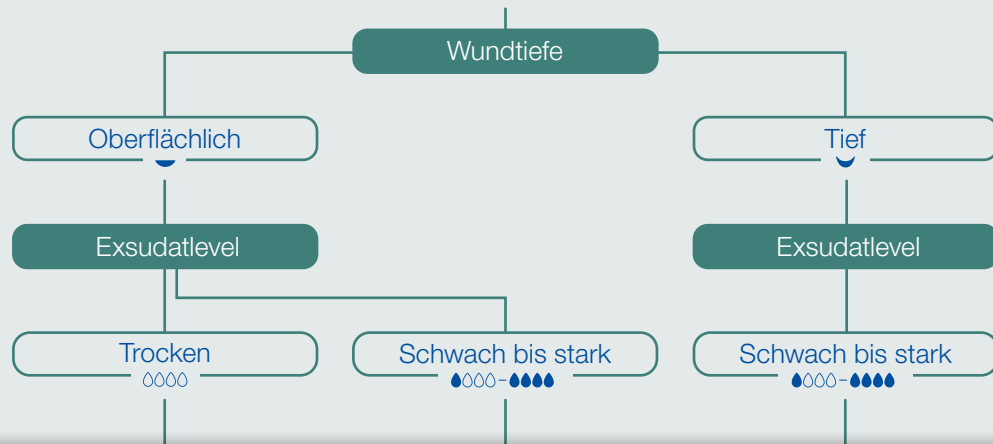

- ◆ Reinigt die Wunden von Belägen und nekrotischem Gewebe¹
- ◆ Sorbact® Technology bindet Keime rein physikalisch²
- ◆ Bleibt sicher erstattungsfähig



- ◆ Exzellentes Exsudatmanagement dank modernem Schaumverband³
- ◆ Sorbact® Technology bindet Keime rein physikalisch²
- ◆ Bleibt sicher erstattungsfähig
- ◆ Duschfest



- ◆ DACC-beschichtetes Gewebe schmiegt sich optimal in tiefe Wunden bzw. an oberflächliche Wunden
- ◆ Sorbact® Technology bindet Keime rein physikalisch²
- ◆ Bleibt sicher erstattungsfähig


+ Sekundärabdeckung notwendig, z. B.
Cutimed® Sorbion® Border oder
Cutimed® Sorbion® Sachet S + Fixomull® stretch

+ Keine Fixierung notwendig dank hautfreundlichem Silikon-Hafrand

+ Sekundärabdeckung notwendig, z. B.
Cutimed® Sorbion® Border oder
Cutimed® Sorbion® Sachet S + Fixomull® stretch

EXSUDAT MANAGEN

NICHT INFIZIERTE WUNDE

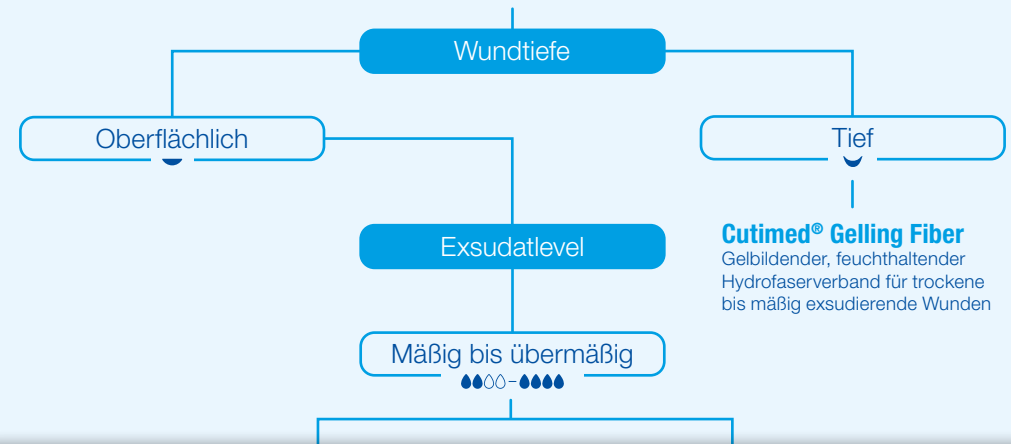

Cutimed® Gelling Fiber
Gelbildender, feuchthaltender
Hydrofaserverband für trockene
bis mäßig exsudierende Wunden



- ◆ Effektives, hochabsorbierendes Exsudatmanagement⁴
- ◆ Wundreinigungseffekt inklusive⁵
- ◆ Sicherheit in der Anwendung durch beidseitige Applikation

+ Fixierung notwendig, z. B.
Fixomull® stretch



- ◆ Einfache und sichere Versorgung mit schonendem Hafrand⁶
- ◆ Ohne zusätzliche Fixierung
- ◆ Zeit- und kostensparend durch einfache Anwendung und längere Verbandstandzeit
- ◆ Duschfest

+ Keine Fixierung notwendig dank hautfreundlichem Silikon-Hafrand

1 Stephen-Haynes J et al. Cutimed Siltec foam and Cutimed Sorbact gel dressings: a clinical audit. Wounds UK. 2010;6:130–136.

2 Ljungh A et al. Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria. J Wound Care. 2006;15(4):175–180.

3 Hampton S. An evaluation of the efficacy of Cutimed Sorbact in different types of non-healing wounds. Wounds UK. 2007;3(4):113–119.

4 Haycocks S & Chadwick P. Use of DACC-coated dressings in diabetic foot ulcers: a case series. Diabet Foot J. 2011;14:133–137.

4 van Leen M et al. Influence of superabsorbent dressings on non-healing ulcers: a multicentre case series from the Netherlands and the UK. J Wound Care. 2014;23(11):543–550.

5 Romanelli M et al. A pilot study evaluating the wound and skin care performances of the Hydration Response Technology dressing: a new concept of debridement. J Wound Technology. 2009;5:6–8.

6 Essity Group. Commissioned human research study at dermico: Cutimed® Sorbion® border adhesion to skin. 2022.

Wir bleiben sicher
erstattungsfähig¹

Cutimed® Sorbact® und
Cutimed® Sorbion®


Dein Wundversorgungs-Leitfaden

Spare Zeit: schnell und einfach zum richtigen Produkt

Cutimed®
Your Power to Heal


INFEKTION MANAGEN

INFIZIERTE WUNDE

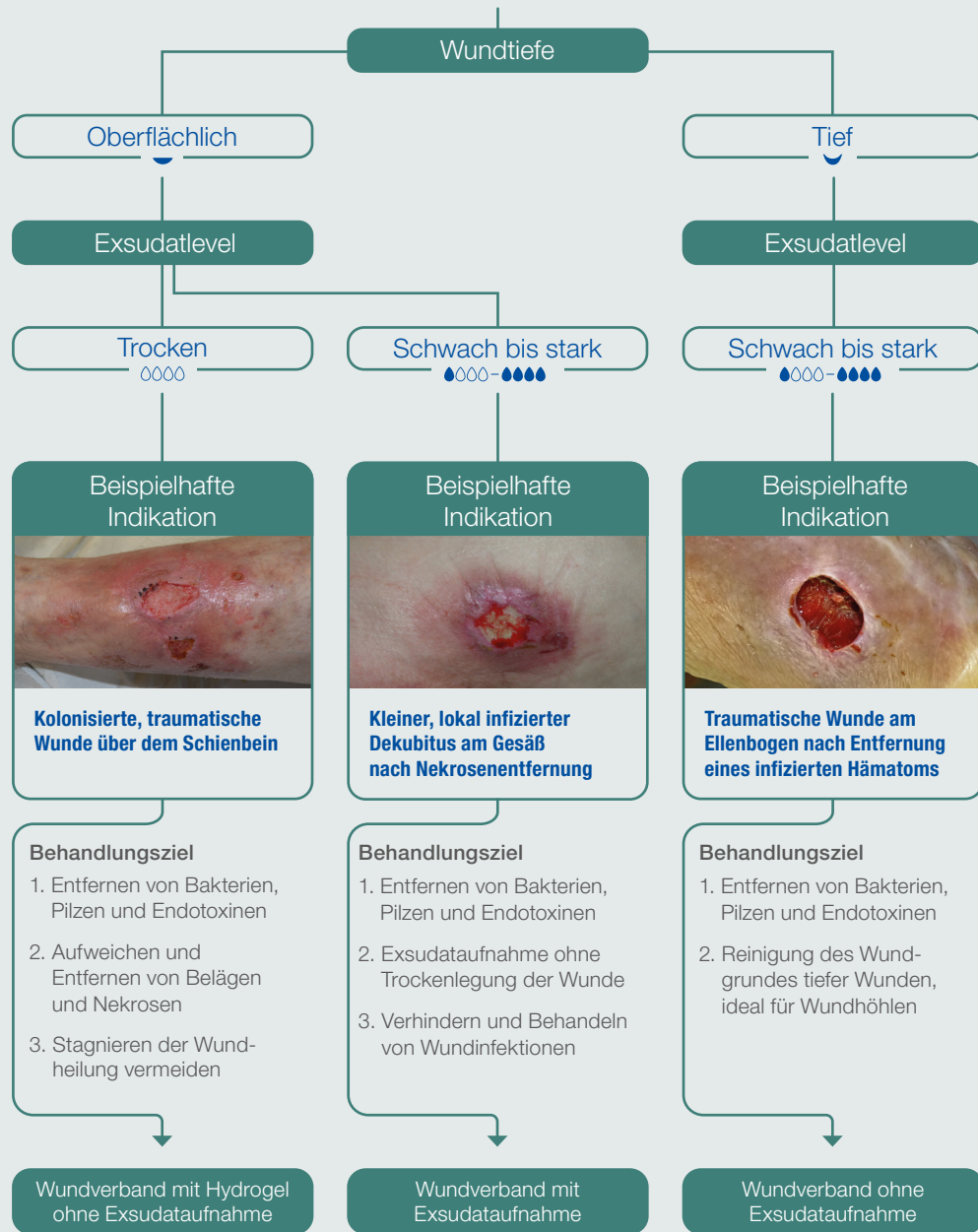

EXSUDAT MANAGEN

NICHT INFIZIERTE WUNDE

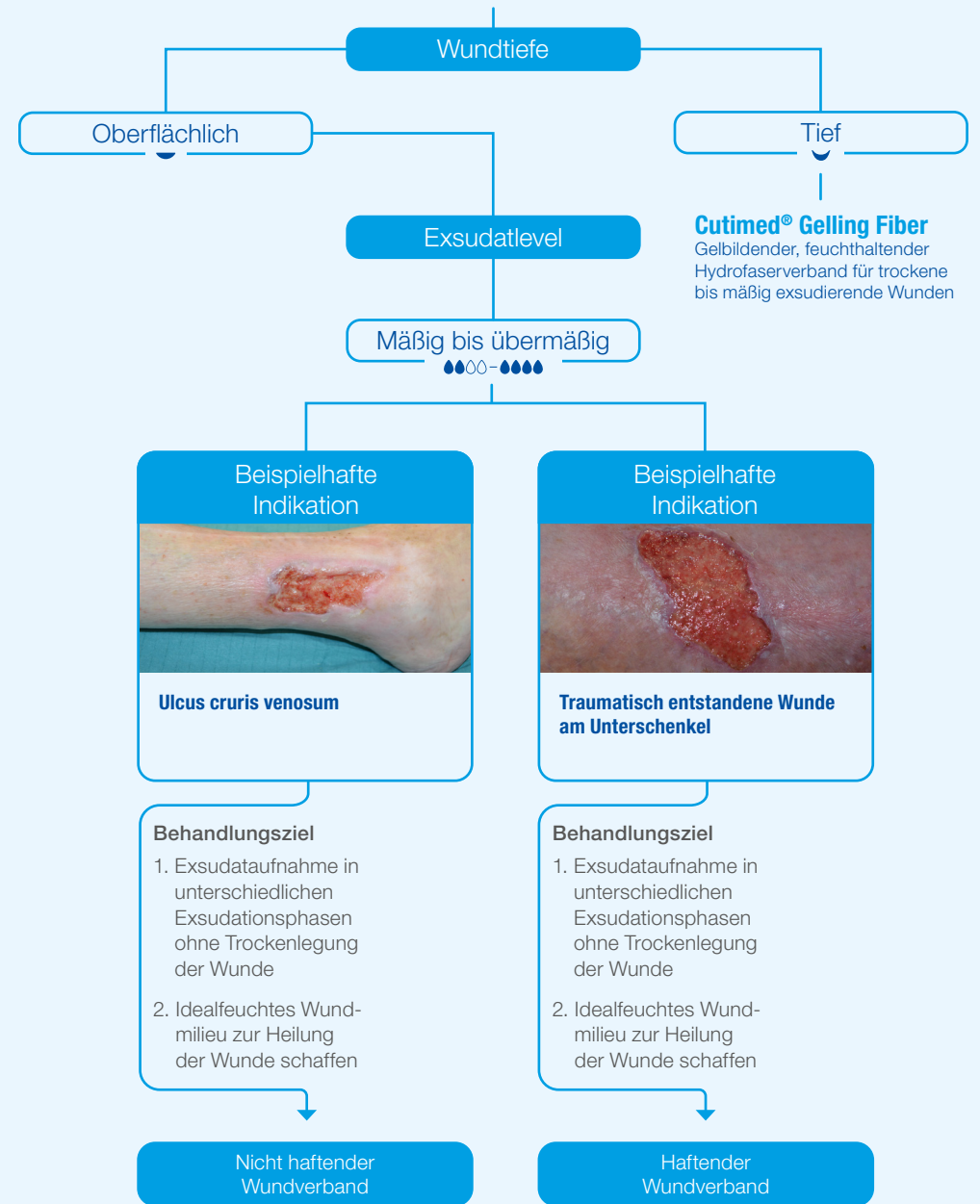


Cutimed® Sorbact® Gel

Indikationen

Infizierte oder kolonisierte oberflächliche Wunden

- Ulcus cruris
- Diabetische Fußgeschwüre
- Post-OP-Wunden
- Autolyse von Wundbelag
- Erstbehandlung von traumatisch entstandenen Wunden mit Infektionsgefahr
- Schürf- und Kratzwunden
- Oberflächliche Verbrennungen/Verbrühungen 2. Grades
- Fisteltherapie
- Prophylaxe nach Wundnaht

+ Sekundärverband benötigt, der dem Exsudatlevel entspricht

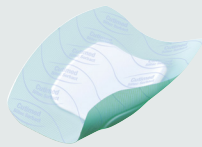

Cutimed® Siltec® Sorbact® B

Indikationen

Infizierte oder kolonisierte oberflächliche Wunden mit Exsudation

- Ulcus cruris
- Druckgeschwür
- Diabetische Fußgeschwüre
- Post-OP-Wunden wie z. B. Hämatomentleerung, Abszessräumung
- Postoperative Nahtdehiszenz
- Traumatisch entstandene Wunden mit Infektionsgefahr und Exsudation
- Fisteltherapie

+ Kein zusätzlicher Verband notwendig dank hautfreundlichem Silikon-Haftrand




Cutimed® Sorbact® Tamponade/Kompresse

Indikationen

Infizierte oder kolonisierte oberflächliche oder tiefe Wunden mit Exsudation

- Ulcus cruris
- Druckgeschwür
- Diabetische Fuß- und Beingschwüre
- (Tiefe) Post-OP-Wunden
- Traumatisch entstandene Wunden mit Infektionsgefahr
- Pilzinfektion zwischen Zehen

+ Sekundärverband benötigt, der dem Exsudatlevel entspricht

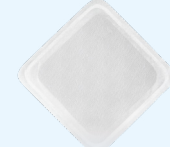


Cutimed® Sorbion® Sachet S

Indikationen

Mäßig bis übermäßig exsudierende, nicht infizierte Wunden

- Dekubitus
- Ulcus cruris
- Diabetisches Fußgeschwür
- Wunden mit sekundärer Wundheilung
- Nässende Laparotomie-Wunden
- Hautfisteln
- Postoperative Wunddehiszenzen und ähnliche Wunden mit Exsudation

+ Sekundärfixierung benötigt, z.B. als Fensterverband

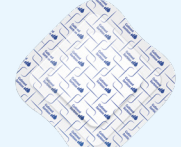

Cutimed® Sorbion® Border

Indikationen

Mäßig bis übermäßig exsudierende, nicht infizierte Wunden

- Dekubitus
- Ulcus cruris
- Diabetisches Fußgeschwür
- Wunden mit sekundärer Wundheilung
- Nässende Laparotomie-Wunden
- Hautfisteln
- Postoperative Wunddehiszenzen und ähnliche Wunden mit Exsudation

+ Kein zusätzlicher Verband notwendig dank hautfreundlichem Silikon-Haftrand

Weitere Informationen:
www.cutimed.de/wendepunkt

Cutimed® PZN-Bestellübersicht für die richtige Verordnung

Produkt	Größe in cm	Wundpad- größe in cm	Bestell-Nr.	Inhalt	BE/VE	PZN
Cutimed® Sorbact® Gel Mit Hydrogel imprägnierte, bakterienbindende Kompresse         	7,5 x 7,5	–	7261122	12 St.	1/36	7353434
	7,5 x 15	–	7261123	12 St.	1/20	7353440
	15 x 20	–	7261127	6 St.	1/8	15637884
Cutimed® Sorbact® Kompresse Primäre Wundauflage für oberflächliche und tiefe Wunden        	4 x 6	–	7216419	6 St.	1/24	7347215
	7 x 9	–	7216517	6 St.	1/24	7348640
	10 x 100	–	7269309	12 St.	1/6	18599003
Cutimed® Sorbact® Tamponade Für die Anwendung in tiefen Wunden        	2 x 50	–	7216614	12 St.	1/6	15657668
	5 x 200	–	7216708	12 St.	1/6	7351808
Cutimed® Siltec® Sorbact® B Hochabsorbierender, keimreduzierender Schaumverband mit Silikon-Haftrand       	7,5 x 7,5	4 x 4	7325133	12 St.	1/10	7342672
	10 x 10	6 x 6	7325141	12 St.	1/10	13574412
	12,5 x 12,5	8,2 x 8,2	7325134	12 St.	1/10	7342689
	15 x 15	10 x 10	7325135	12 St.	1/10	7343140
	10 x 22,5	5 x 16,5	7325140	12 St.	1/10	13574398
	17,5 x 17,5	12,3 x 12,3	7325136	6 St.	1/10	7343157
	22,5 x 22,5	16,5 x 16,5	7325137	6 St.	1/10	7343223

Produkt	Größe in cm	Wundpad- größe in cm	Bestell-Nr.	Inhalt	BE/VE	PZN
Cutimed® Sorbion® Sachet S Superabsorbierende Wundauflage      	7,5 x 7,5	–	7323240	12 St.	1/62	11361310
	5 x 12	–	7323243	12 St.	1/62	11361356
	10 x 10	–	7323244	12 St.	1/62	11361362
	10 x 20	–	7323247	12 St.	1/34	11361391
	15 x 15	–	7323250	12 St.	1/36	11361439
	20 x 20	–	7323252	12 St.	1/22	11361451
	20 x 30	–	7323255	12 St.	1/17	11361505
Cutimed® Sorbion® Border Superabsorbierende Wundauflage mit Silikon-Haftrand für eine schnelle, einfache Applikation      	10 x 10	5 x 5	7101009	12 St.	1/28	16792322
	15 x 15	10 x 10	7101010	12 St.	1/13	16792339
	20 x 20	15 x 15	7101011	12 St.	1/10	16792345
	10 x 23	5 x 18	7101012	12 St.	1/17	16792351
Cutimed® Gelling Fiber Gelbildender Hydrofaserverband mit Verstärkungsfasern als Kompresse oder Tamponade für Wundhöhlen und -taschen      	5 x 5	–	7121800	10 St.	1/10	16760322
	10 x 10	–	7121801	10 St.	1/6	16760339
	15 x 15	–	7121802	5 St.	1/8	16760345
	2 x 45	Tamponade	7121806	5 St.	1/20	16760380

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



Weitere Informationen
und Hilfestellung zur
Produktauswahl findest
du auf unserer Website:

[www.cutimed.de/
wendepunkt](http://www.cutimed.de/wendepunkt)

Wundphase

 Infektion
 Nekrose
 Fibrinbelag
 Granulation

Exsudat

 Trocken
 Schwach
 Mäßig
 Stark
 Übermäßig

Wundtiefe

 Oberflächlich
 Tief
 Oberflächlich
und tief

Extra

 Zuschneidbar
 Beidseitig
applizierbar
 Duschfest

Hinweise zur Applikation sind in der Gebrauchsanweisung zu finden.

1 Durch das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) bestätigt (§ 31 Abs. 1a SGB V).



BSN medical GmbH,
an Essity company
Schützenstraße 1–3
22761 Hamburg

www.cutimed.de
Tel. 0800-3000789
Fax 0800-8501021