


JOBST® PRODUKTBERATUNG FLACHSTRICK: MILDE BIS MODERATE AUSPRÄGUNG

KÖRPERFORM

Lymphödem

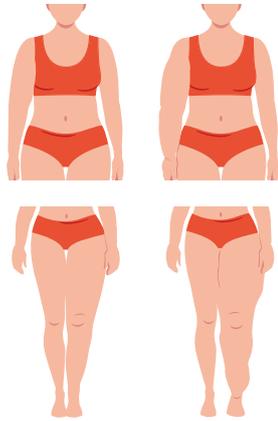


Leichte Verformung:

- Festes Gewebe
- Keine bis geringe Hautfalten

Moderate Verformung

- Weiches Gewebe
- Geringe bis moderate Hautfalten

Lipödem

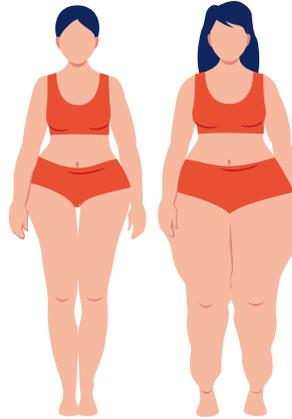

Leichte Verformung:

- Keine bis geringe Hautfalten

Moderate Verformung:

- Geringe bis moderate Hautfalten

Hat Schwierigkeiten beim Anziehen und/oder empfindliche Haut



→ **JOBST® Elvarex® Soft** wurde für ein leichteres Anziehen entwickelt und mit weichen Garnen für Kund*innen mit trockener, empfindlicher oder sensibler Haut hergestellt. Das weichere Material ist angenehm zu tragen.

Wünscht sich mehr Individualisierung



→ **JOBST® Elvarex® Soft** ist in 10 Wohlfühlfarben erhältlich, bei **JOBST® Confidence®** können neben 8 Farben zusätzlich individuelle Optionen, wie ein florales Taillenband oder eingestrickte Initialen, ausgewählt werden.

Wünscht sich sicheren Halt



→ Die **JOBST® SoftFit-Technologie** wurde entwickelt, um die Kompression sicher an ihrem Platz zu halten, ohne unangenehm einzuengen, und kann als Zusatz für einen Kniestrumpf (AD) oder Armstrumpf (CG¹) bestellt werden.

Empfindlich im Gelenkbereich



→ Unsere zahlreichen **Zusätze**, wie Taschen und Futterstoffe bei **JOBST® Elvarex® Soft**, wurden entwickelt, um Hautirritationen zu vermeiden. Bei **JOBST® Confidence®** können zudem Funktionszonen, wie die Funktionszone Knie, dazu beitragen, eine mögliche Faltenbildung oder zirkuläres Einschnüren zu verhindern.

Wünscht sich eine feste Unterstützung



→ **JOBST® Elvarex®** bietet einen starken Halt und damit ein zuverlässiges und effektives Ödem-Management bei moderat bis schwer ausgeprägtem Lymph- und/oder Lipödem.

Ist besonders aktiv/ neigt zum Schwitzen



→ Das Gestrick von **JOBST® Elvarex® Soft** ist atmungsaktiv und ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit. Das hochentwickelte Feuchtigkeitsmanagement-System von **JOBST® Confidence®** hält die Haut deiner Kund*innen angenehm trocken.

JOBST® PRODUKTBERATUNG FLACHSTRICK: SCHWERE AUSPRÄGUNG

N I C H T S H Ä L T D I C H A U F

KÖRPERFORM

Lymphödem



Schwere Verformung:

- Hartes Gewebe und/oder Fibrose
- Ausgeprägte Hautfalten



Lipödem



Schwere Verformung:

- Ausgeprägte Hautfalten

Wünscht sich
sicheren Halt



Die **JOBST® SoftFit-Technologie** wurde entwickelt, um die Kompression sicher an ihrem Platz zu halten, ohne unangenehm einzuengen, und kann als Zusatz für einen Kniestrumpf (AD) oder Armstrumpf (CG) bestellt werden.

Gelenkbeschwerden
und/oder Hautirritationen



Die zahlreichen **Zusätze** (z. B. Funktionszonen, Futterstoffe und Taschen) von **JOBST® Elvarex®** wurden entwickelt, um Hautirritationen vorzubeugen und Faltenbildung zu reduzieren, um so den Komfort in Gelenkbereichen zu erhöhen.

Benötigt starken Halt
und feste Unterstützung



JOBST® Elvarex® bietet einen starken Halt und damit ein zuverlässiges und effektives Ödem-Management bei schwer ausgeprägtem Lymph- und/oder Lipödem.

Wünscht sich
natürliche Materialien



Ab Kompressionsklasse 2 bietet **JOBST® Elvarex®** einen hohen Baumwollanteil.

Wünscht sich
Farbauswahl



JOBST® Elvarex® bietet insgesamt 15 Wohlfühlfarben, die das Outfit deiner Kund*innen strahlen lassen.

