



FLACHSTRICK- SORTIMENT UND KOMPRESSIONS- LÖSUNGEN


NICHTS HÄLT DICH AUF



JOBST® FarrowWrap® | JOBST® UlcerCare | JOBST® Confidence | JOBST® Elvarex®
JOBST® Elvarex® Plus | JOBST® Elvarex® Soft | JOBST® Elvarex® Soft Seamless | JOBST® Relax


www.jobst-austria.at

KUNDENSERVICE

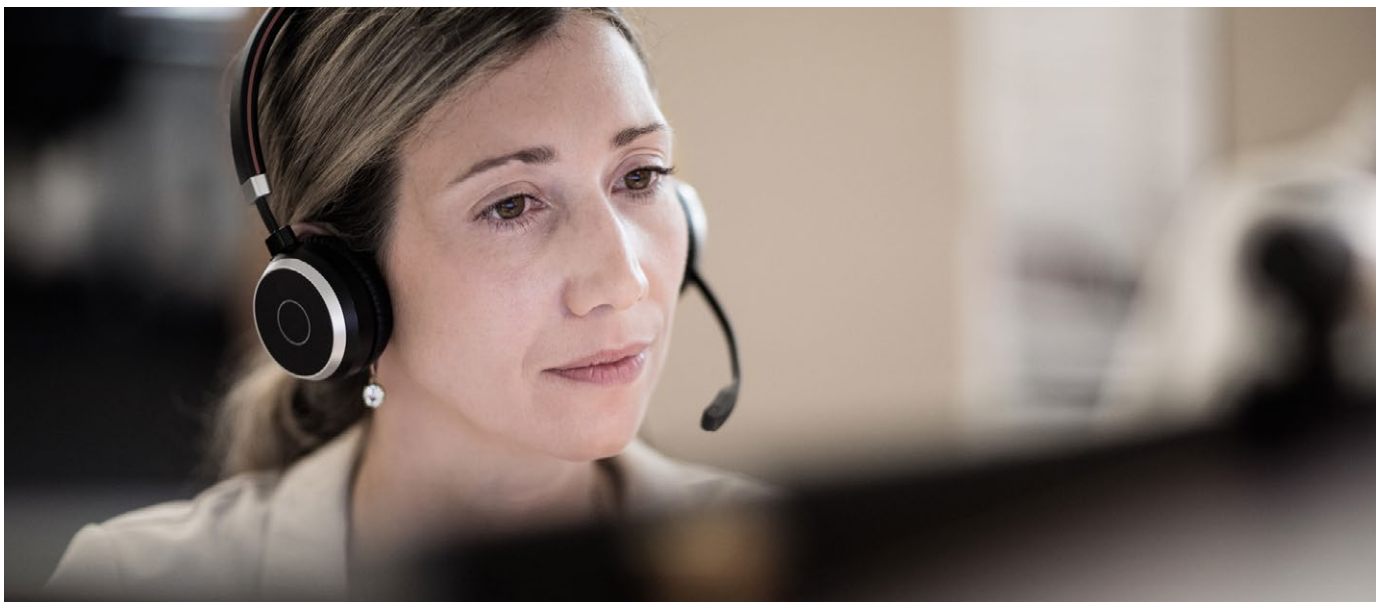

Der JOBST eShop

www.eshop.jobst-austria.at

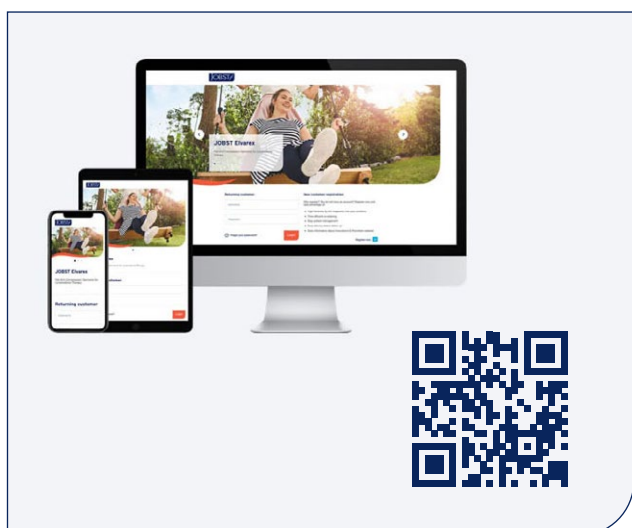

Sie wollen Ihren Arbeitsalltag erleichtern und Ihre Prozesse digitalisieren? Kontaktieren Sie unser Digital-Team:

- Intelligente Patientenverwaltung
- Voll-digitale Dokumentation aller Maße
- Zeiteffiziente Folgebestellung

International

Phlebologie und Lymphologie (ISSE)

Mo - Do 8:00 - 18:00, Fr 8:00 - 17:00

Tel (DE/EN): +49 (0) 2822 607-333

- persönliche Auftragsannahme
- telefonische Sortimentsberatung
- allgemeine Informationen
- Sendungsverfolgung
- Verfügbarkeit der gewünschten Produkte
- Reklamationen

Bestellungen und Kostenvoranschläge

www.eshop.jobst-austria.at

E-Mail: ISSE@essity.com

Fax: +49 (0) 2822 607-199

Österreich

E-Mail: customerservice.hms.at@essity.com

Patientenservice

E-Mail: servicejobst@essity.com

Der Patientenservice von JOBST berät Sie gerne bei Fragen zu Produkten oder allgemeinen Anliegen.



Kundenservice 2

Wir stellen uns vor 4

BERATUNG

Der eShop mit JOBST® Xpert Voice® 6

JOBST® Kompressionslösungen 8

Versorgungsvarianten 10

JOBST® Haftbandvarianten 12

Indikationsübersicht 14

Beratungsansätze Flachstrick 16

Bedeutung der Piktogramme 17

**MEDIZINISCHE ADAPTIVE UND 2-IN-1
KOMPRESSIONSSYSTEME**

JOBST® FarrowWrap® UNTERE UND OBERE EXTREMITÄTEN 18

JOBST® UlcerCare UNTERE EXTREMITÄTEN 22

MEDIZINISCHE KOMPRESSIONSSTRÜMPFE

JOBST® Confidence UNTERE UND OBERE EXTREMITÄTEN 26

JOBST® Elvarex® UNTERE EXTREMITÄTEN 30

JOBST® Elvarex® OBERE EXTREMITÄTEN 36

JOBST® Elvarex® Plus UNTERE UND OBERE EXTREMITÄTEN 40

JOBST® Elvarex® Soft UNTERE UND OBERE EXTREMITÄTEN 42

JOBST® Elvarex® Soft Seamless
UNTERE UND OBERE EXTREMITÄTEN 46

JOBST® Relax UNTERE UND OBERE EXTREMITÄTEN 48

**KOMPRESSIONS BANDAGEN
UND BANDAGENSETS**

Kompressionsbandagen 50

Kompressionssets 52

ZUBEHÖR


Anziehhilfen und Kompressionspflege 54

Serviceprodukte 58

Hautpflegeprodukte 60

Kompression auf einen Blick 62

WIR STELLEN UNS VOR

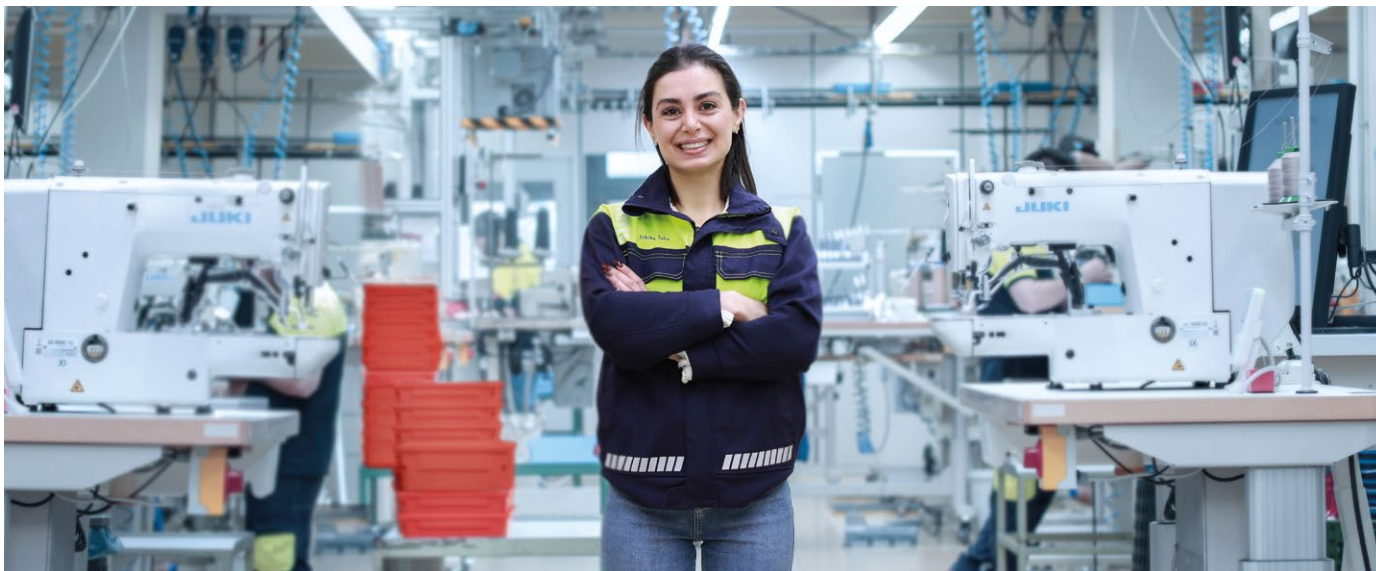

DESIGNED IN GERMANY
MADE IN GERMANY

Wir sind Essity

Zusammen sind wir **Leukoplast®**, **Cutimed®**, **Delta-Cast®**, **Actimove®**, **JOBST®**, **TENA®** und noch mehr. Unser Name setzt sich zusammen aus Essentials (Wesentliches) und Necessities (Notwendigkeiten). Wir setzen uns weltweit für Gesundheit und Wohlbefinden ein. Durch gezielte Initiativen wollen wir helfen, Grenzen und Tabus zu überwinden, die diesem Ziel entgegenstehen.

Wir handeln nachhaltig

Die vereinten Nationen haben die ‚Dekade des Handelns‘ zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele ausgerufen. Als ein weltweit führendes Hygiene- und Gesundheitsunternehmen kommt Essity hier eine wichtige Rolle zu. Zusammen mit unseren Kund*innen und Partnerschaften arbeiten wir gemeinsam daran, dass es den Menschen und dem Planeten besser geht.

www.essity.de/nachhaltigkeit

Wir achten auf Qualität

Um höchste Standards erfüllen zu können, unterliegen unsere JOBST Produkte strengen Qualitätskontrollen. Interviews und Tests mit Patient*innen und medizinischem Personal helfen uns, behandlungsorientierte und auf Patient*innen zugeschnittene Produkte zu entwickeln. JOBST folgt den strengen Qualitätskontrollen der ISO-Normen. Darüber hinaus werden unsere Produkte aus gesundheitsfreundlichen Materialien und ohne schädliche Farbstoffe hergestellt, die alle dem **STANDARD 100 by OEKO-TEX®** entsprechen.

Um die Symptome seiner venösen Insuffizienz zu lindern, gründete Conrad Jobst 1950 JOBST. Seit dem fokussieren wir uns auf die Herstellung hochwertiger, medizinischer Kompressionsversorgungen und setzen uns mit voller Kraft dafür ein, die Lebensqualität von Menschen mit phlebologischen und lymphologischen Erkrankungen sowie Lipödemem zu verbessern.



Wir achten auf unsere Kund*innen, Konsument*innen, die Umwelt und aufeinander.

Unser Beitrag für eine aufgeklärte Gesellschaft

Wir wollen nicht, dass das Lipödem oder Venen- und Lymphkrankheiten ein Tabu bleiben. Deshalb haben wir sechs Personen mit lymphatischen und phlebologischen Erkrankungen vereint. Mit ihren inspirierenden Geschichten wollen wir, dass Patient*innen Mut und Selbstbewusstsein zurückgewinnen. Erfahren Sie im Folgenden mehr über ihre ermutigenden Erfahrungen: www.jobst-austria.at/nichtshaeltdichauf

Unsere Innovationen für ein selbstbestimmtes Leben


Kompressionsstrümpfe sollen in Position bleiben ohne einzuengen. JOBST SoftFit ist unser einzigartig haftender Abschlussbund für spürbar mehr Komfort. Unsere jüngste Innovation trägt den Namen JOBST Confidence. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser nächsten Generation flachgestrickter Kompressionsversorgungen nach Maß, den Tragekomfort für Patient*innen mit einem Lymphödem und Lipödem nachhaltig verbessern.

Wir sagen Danke, denn zusammen können wir Grenzen überwinden

Wir bedanken uns bei allen, die engagiert dazu beitragen mit JOBST Produkten Grenzen und Tabus in der Kompressionstherapie zu überwinden. Dieser Dank gilt Ärzt*innen, medizinischen Expert*innen im Fachhandel, unseren Kund*innen und den Patient*innen sowie unseren Kolleg*innen in den Standorten und Werken. Dieses Engagement ermöglicht es uns, auch in Zukunft für Sie da zu sein und einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden in unserer Gesellschaft zu leisten.

DER eSHOP MIT JOBST® Xpert Voice®

für die Indikationen Lipödem, Lymphödem und Mischformen

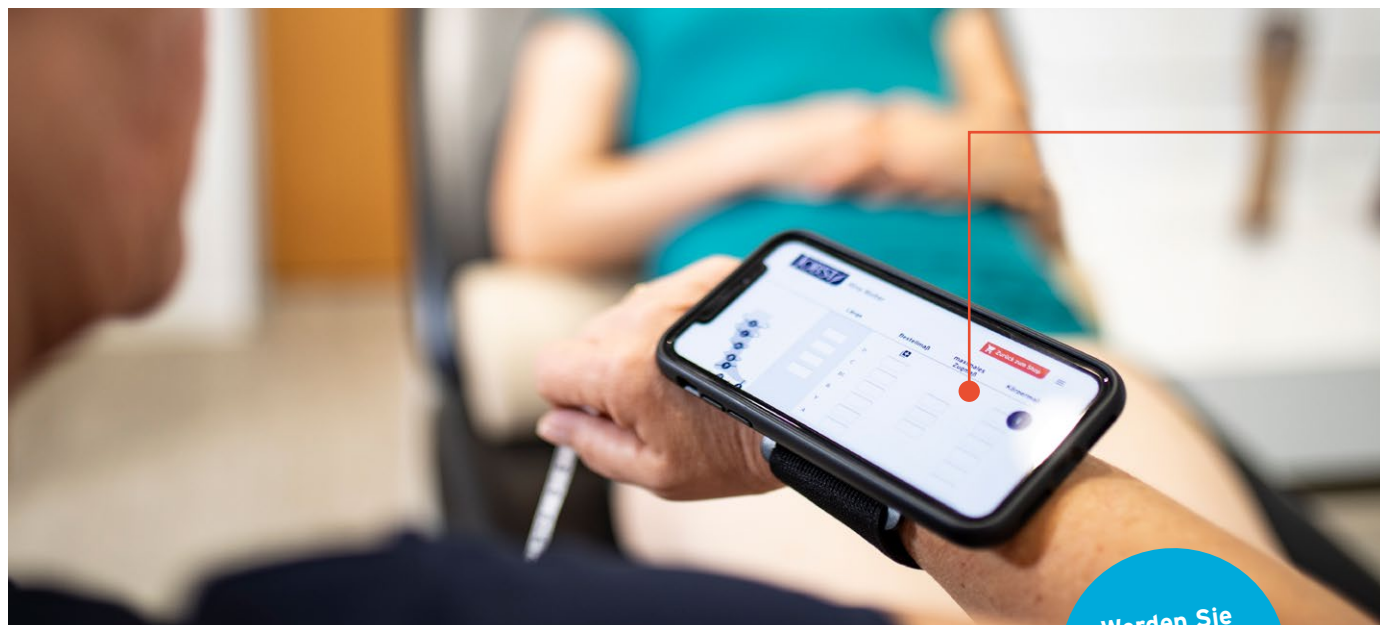

Werden Sie
gemeinsam mit
JOBST digital!

Jetzt wird der Bestellprozess noch einfacher - mit der sprachgesteuerten Maßeingabe im JOBST eShop

Mit JOBST Xpert Voice können Sie die Maße Ihrer Patienten ganz einfach in den JOBST eShop einsprechen. Alles, was Sie benötigen, ist ein Maßband, ein Smartphone oder Tablet und Ihre Stimme.*

Beweisen Sie Kompetenz

Mit dem ersten volldigitalisierten Messprozess für die Rund- und die Flachstrickversorgung werden Sie zum Vorreiter.

Stimme statt Stift

Dank JOBST Xpert Voice entfällt der ständige Wechsel zwischen Maßband und Stift.

Zufriedene Patienten

Durch das einfachere und schnellere Anmessen steht die Beratung Ihrer Patienten im Mittelpunkt.

Für alle Nutzer kostenlos

Wir schalten Ihren Account gerne kostenlos für diese Funktion frei.

SO BEKOMMEN SIE ZUGRIFF ZUM JOBST ESHOP

Sie sind noch kein Kunde im JOBST eShop? Dann melden Sie sich jetzt als Nutzer im JOBST eShop an und profitieren Sie von dem vollumfassenden Service. Durch Klicken auf „Registrieren“ öffnet sich eine Eingabemaske, in die Sie Ihre Daten eintragen müssen. Für die Freischaltung für JOBST Xpert Voice wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Außendienst oder an die +49 (0) 2822 607-360 (JOBST Technik Hotline).





Mit dem Tablet neben der Anmessliege oder dem Smartphone am Handgelenk** haben Sie beide Hände frei fürs Messen.



Einfach den JOBST eShop auf Tablet oder Smartphone öffnen, JOBST Produkt konfigurieren und im Maßblatt JOBST Xpert Voice aktivieren.



Sie können Punkt für Punkt die Maße in das Maßblatt einsprechen.



Kein Wechsel zwischen Maßband und Stift mehr nötig.

Alle Vorteile auf einem Blick:



Voll-digitale Dokumentation aller Maße



Intelligente Patientenverwaltung



Zeiteffiziente Folgebestellung



Weltweit erste sprachgesteuerte Eingabefunktion JOBST Xpert Voice



Keine Fehler oder Rückfragen in der Konfiguration



Kompatibel mit allen Endgeräten, optimal für unterwegs

JOBST® KOMPRESSIÖNSLÖSUNGEN

für die Indikationen Lipödem, Lymphödem und Mischformen



JOBST FarrowWrap



JOBST UlcerCare



JOBST Confidence
untere und obere Extremitäten



JOBST Elvarex
untere und obere Extremitäten



JOBST Elvarex Plus
Hand und Zehen



























JOBST Elvarex Soft
untere und obere Extremitäten



JOBST Elvarex Soft Seamless
Hand und Zehen



JOBST Relax
untere und obere Extremitäten

JOBST FarrowWrap	JOBST UlcerCare	JOBST Confidence	JOBST Elvarex	JOBST Elvarex Plus	JOBST Elvarex Soft	JOBST Elvarex Soft Seamless	JOBST Relax
 Leicht anzulegen	 Therapie-system	 Contour Fit	 Überbrückt Hautfalten	 Ergonomische Anpassung	 Angenehm weich	 Angenehm weich	 Polsterung
 Kurz-zug-Technologie	 Starker Halt	 Weich & Stabil	 Texturierte Oberfläche	 Nahtlos	 Texturierte Oberfläche	 Nahtlos	 Mikro-Massage
 Anpassbar	 Selbst-management	 Feuchtigkeits-management	 Atmungsaktiv	 Atmungsaktiv	 Atmungsaktiv	 Atmungsaktiv	 Atmungsaktiv



Wir bei Essity unterstützen mit unseren ganzheitlichen Behandlungskonzepten erfolgreich Ödemtherapien. Dabei behalten wir neben den Bedürfnissen von Patienten auch die unserer anmessenden Kunden und behandelnden Ärzte im Blick.

Bei **JOBST FarrowWrap** Versorgungen handelt es sich um Kompressionsversorgungen, die der Patient selber – ganz individuell – anpassen kann. **JOBST UlcerCare** ist das einzige 2in1-Kompressionssystem nach Maß, flachgestrickt zur Versorgung venöser Ulzera.

Die Maßversorgungen unserer fünf flachgestrickten Kompressionsstrumpflinien **JOBST Confidence**, **JOBST Elvarex**, **JOBST Elvarex Plus**, **JOBST Elvarex Soft** und **JOBST Elvarex Soft Seamless** sichern eine auf jeden Bedarf ganz individuell abgestimmte Versorgung für den aktiven Lebensstil Ihrer Patienten. So schützen und stützen z. B. **Funktionszonen** die sensiblen Körperbereiche wie das Knie oder den Ellenbogen und **nahtlose Versorgungen** verbessern die Feinsensorik.

Um Ihre Patienten rund um die Uhr versorgen zu können, haben wir unser Sortiment um eine innovative **Ruhe- und Nachtversorgung** ergänzt: **JOBST Relax**.

VERSORGUNGSVARIANTEN

Beinversorgungen				
 AD Knie-/Wadenstrumpf	 AF Halbschenkelstrumpf	 AG Oberschenkelstrumpf	 AG-T Hüftbefestigung rechts-/linksseitig	
 AG-HT Einbeinversorgung mit Hosenteil	 AT Strumpfhose	 AT/UM Strumpfhose mit Schwangerschaftshosenteil		 AT/Herr Strumpfhose mit Suspensorium
 BT Leggings	 B'T Leggings	 CT Caprihose	 ET Bermuda	 FT Radler

Fußversorgungen		
 AA Zehenteil (ohne Zehen)	 AA Zehenteil (mit Zehen)	 AB / AB' Socke



AA Zehenteil
Versorgungsvariante im Überblick
JOBST Elvarex AA Ohne Zehen Mit vier Zehen Mit fünf Zehen
JOBST Elvarex Plus AA Mit vier Zehen Mit fünf Zehen
JOBST Elvarex Soft Seamless AA Mit vier Zehen



Für JOBST Elvarex sind individuelle Lösungen und anatomische Besonderheiten (z.B. Taschen und Zehenanzahl) anfragbar. Schauen Sie hierzu auch auf die Zusätze und die Bemerkungszeilen. Die Bemerkungszeilen finden Sie auf der Innenseite vom Mantelbogen des Maßblockes.

Armversorgungen



CG'

Armstrumpf mit schrägem Abschluss



CH

Armstrumpf mit Kappe und Halterung



AG'

Armstrumpf mit Hand und schrägem Abschluss



AH

Armstrumpf mit Hand, Kappe und Halterung

Handversorgungen



AC'

Handschuh



AE

Langer Handschuh

Varianten für die Versorgung der Finger



ohne Finger,
ohne Daumen



ohne Finger,
mit Daumen,
Länge variabel



mit Finger,
mit Daumen,
Länge variabel

AC' & AE Handversorgungen

Versorgungsvarianten im Überblick

JOBST Elvarex **AC', AE**
Ohne Finger, ohne Daumen
Ohne Finger, mit Daumen
Mit Finger, mit Daumen

JOBST Elvarex Plus **AC', AE**
Ohne Finger, mit Daumen
Mit Finger, mit Daumen

JOBST Elvarex Soft Seamless **AC', AE**
Ohne Finger, mit Daumen
Mit Finger, mit Daumen

JOBST® HAFTBANDVARIANTEN



JOBST SoftFit - der Einzigartige. Eine Revolution für Kompressionsversorgungen

- Ein spezielles System aus Silikonfäden, das direkt in den Bund des Kompressionsstrumpfes eingenäht wird
- Hält die Kompressionsversorgung ohne den Druck zu erhöhen oder einzuschnüren
- Zum Patent angemeldete Technologie sorgt für einen durchgehenden Kompressionsverlauf
- Erhöht gleichzeitig Wirksamkeit und Tragekomfort



Noppe - das Starke

- Aus Silikon bestehende Noppen-Struktur
- Entwickelt um mögliches Rutschen zu verringern
- Hilft den korrekten Halt der Kompressionsversorgung sicherzustellen




Micronoppe - das Sanfte

- Aus Silikon bestehende Micronoppen-Struktur
- Hilft das Verrutschen der Kompressionsversorgung zu verhindern
- Micronoppen wurden für höheren Tragekomfort und weniger Druckstellen auf der Haut entwickelt


Haftbandvarianten



SOFTFIT

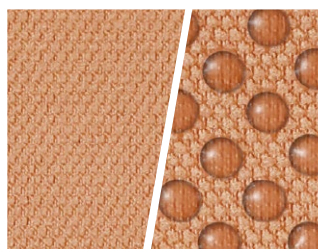

NOPPE

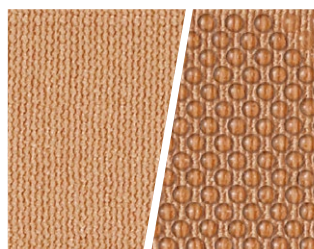

MICRONOPPE

Flachstrick: Beliebte Längentypen

Längentyp	Haftband	JOBST Confidence	JOBST Elvarex	JOBST Elvarex Soft
AD 	SoftFit	Maß	Maß	Maß
	Noppe		Maß & Standard	Maß
	Micronoppe		Maß	Maß
AF 	Noppe		Maß	
	Micronoppe		Maß	
AG 	Noppe	Maß	Maß & Standard	Maß
	Micronoppe		Maß	Maß
CG' 	SoftFit	Maß	Maß*	Maß
	Noppe	Maß	Maß*	Maß
	Micronoppe		Maß*	Maß

Weitere Ausführungen auf www.jobst-ch.com *CG & CG'



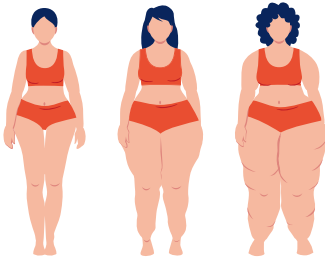
INDIKATIONSÜBERSICHT

Anwendung

Lymphödem, Lipödem, Mischformen

Die wichtigsten Eigenschaften der JOBST Materialien sind Grundlage unserer Produktempfehlungen für die Erhaltungsphase der unterschiedlichen Stadien primärer und sekundärer Lymphödeme sowie für die unterschiedlichen Körperformen von Lipödemem.

Verfügbare Kompressionsklasse je Kompressionsversorgung*

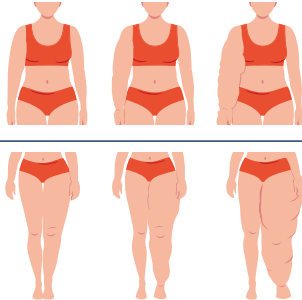Indikation/Diagnose Lymphödem	Stadium
	Stadium 1 Reversibel, weiche teigige Schwellung, Dellen leicht eindrückbar, keine Hautveränderung
	Stadium 2 Spontan irreversibel, beginnende Fibrose (beginnende Hautverhärtung), Dellen eindrückbar, z. T. Hautveränderungen
	Stadium 3 Ausgeprägte Form, Fibrose (Hautverhärtung), Dellen kaum eindrückbar, typische chronische Hautveränderung
Indikation/Diagnose Lipödem	Körperform 
	Hautoberfläche glatt, Unterhautfettgewebe verdickt und weich, ohne Knoten
	Hautoberfläche uneben, Unterhaut verdickt mit kleinen Knoten
	Hautoberfläche sehr uneben, Unterhaut verdickt und verhärtet mit großen Fettwülsten, u. U. Mobilität eingeschränkt
Indikation/Diagnose Mischformen	
Primäres oder sekundäres Lymphödem mit einem Lipödem	
Primäres oder sekundäres Lymphödem mit einer phlebologischen Erkrankung	



Die aktuelle Leitlinie der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften von 2024* sprechen nicht länger von einer Einteilung der Erkrankung in Stadien. Dies liegt vor allem daran, dass die äußerliche Erscheinung des Lipödems nicht immer mit der Stärke der Schmerzen korreliert. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse weisen darauf hin, dass mit Hilfe einer adäquaten Therapie das Fortschreiten verhindert werden kann.

*Quelle: AWMF; S2K Leitlinie Lipödem, 2024

	JOBST FarrowWrap	JOBST Confidence	JOBST Elvarex Soft	JOBST Elvarex Soft Seamless (Hand und Zehen)	JOBST Elvarex	JOBST Elvarex Plus (Hand und Zehen)	JOBST Relax
→	Entstauungsphase	Tagesversorgung					Nachtversorgung
	LITE 20-30 mmHg	KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 1	Arm/Bein KKL 1
		KKL 2	KKL 2		KKL 2		
→	STRONG 30-40 mmHg	KKL 3	KKL 3	KKL 2	KKL 3 KKL 3 forte	KKL 2	Bein KKL 2
					KKL 4 KKL 4 super		

		milde bis moderate Ausprägung			moderate bis schwere Ausprägung		
	initiale Entstauungsphase	•	•	•			•
		•	•	•	•	•	•
					•	•	•

		milde bis moderate Ausprägung			moderate bis schwere Ausprägung		
		•	•	•			•
		•	•	•	•	•	•
					•	•	•

		milde bis moderate Ausprägung			moderate bis schwere Ausprägung		
	initiale Entstauungsphase	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•


*Die erforderliche Kompressionsklasse für die Versorgung des*der einzelnen Patient*in legt in jedem Falle der*die verordnende Ärzt*in fest. Die nachfolgende Aufstellung der einzelnen Diagnosen und zugeordneter Kompressionsversorgungen hat Empfehlungscharakter und ist daher nicht bindend.

BERATUNGSANSÄTZE FLACHSTRICK

Beratungsansätze Flachstrick	Mildes bis moderates Lymph- oder Lipödem	Schweres Lymph- oder Lipödem
Patient*innenbedürfnis	Beratungsansatz	Beratungsansatz
„Ich möchte mich auch mit Kompression viel bewegen können.“	Wählen Sie JOBST Confidence mit Funktionszone(n) zur Verringerung von Faltenbildungen am Knie und Fuß. Bei Armversorgungen unterstützt die Funktionszone Ellenbogen z.B. bei der Arbeit am Computer. Als Haftband unterstützt JOBST SoftFit (AD, CG¹) ideal.	Wählen Sie JOBST Elvarex mit Funktionszone(n) zur Verringerung von Faltenbildungen am Knie und Fuß. Bei Armversorgungen unterstützt die Funktionszone Ellenbogen z.B. bei der Arbeit am Computer. Als Haftband unterstützt JOBST SoftFit (AD, CG¹) ideal.
„Ich möchte aktiv sein, ohne stark unter der Kompression zu schwitzen.“	Wählen Sie JOBST Confidence aufgrund des hochentwickelten Feuchtigkeitsmanagement-Systems für einen optimalen Tragekomfort.	Wählen Sie JOBST Elvarex . Das Material ist großmaschig und maximal atmungsaktiv. Aufgrund des Baumwollanteils (KKL 2-4) bietet die Versorgung zusätzlich einen natürlichen Tragekomfort.
„Ich möchte mich bestmöglich und frei in meinem Alltag bewegen können.“	Wählen Sie JOBST Confidence aufgrund der Contour Fit Technologie zur individuellen Anpassung an Körperformen oder JOBST Elvarex Soft aufgrund der angenehmen Weichheit.	Wählen Sie JOBST Elvarex mit Funktionszone(n). Die Funktionszonen unterstützen die Bewegungsfreiheit bei starkem Halt und verringern Faltenbildungen.

Entscheidungsbaum*: JOBST Elvarex oder JOBST Confidence?

Die Möglichkeiten bei Lymph- oder Lipödem Patient*innen

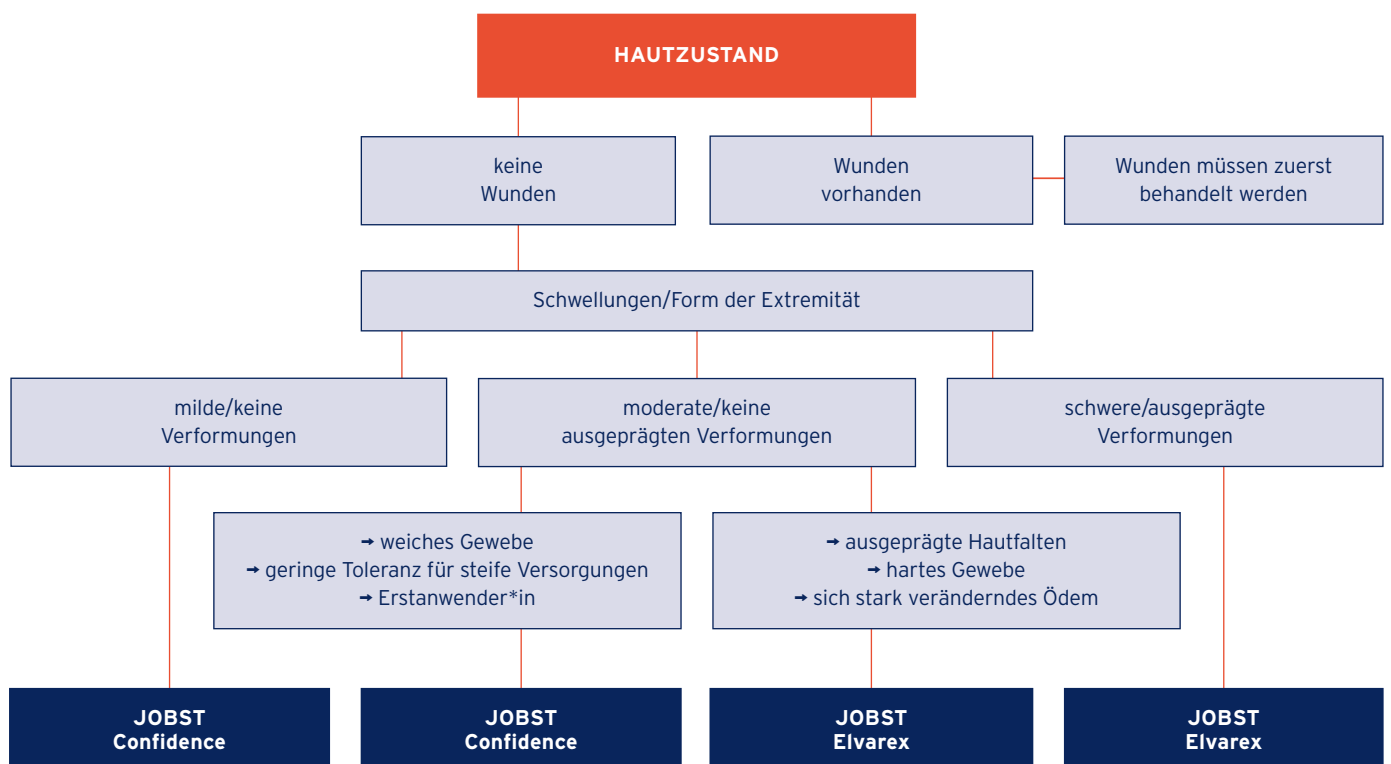

*Entwickelt von Essity basierend auf technischen Merkmalen der Produkte. Die individuellen Bedürfnisse und Bedingungen des*der Patient*in müssen berücksichtigt werden.

BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME



Leicht anzulegen

Klettverschlüsse unterstützen das einfache An- und Ausziehen.



Nahtlos

Reduziert das Risiko von Druckstellen und bietet mehr Bewegungsfreiheit.



Kurzzug-Technologie

Für hohen Arbeitsdruck auch bei niedrigem Ruhedruck.



3D-Technologie

Innovative 3D-Stricktechnik vermittelt das Gefühl einer zweiten Haut.



Anpassbar

Klettverschlussystem ermöglicht eine Nachjustierung der Bänder.



Ergonomische Anpassung

Angepasst an die individuellen Körperkonturen für eine verbesserte anatomische Passform.



Contour Fit

Die innovative Contour Fit Stricktechnologie erlaubt es, die Versorgung optimal an individuelle Körperformen anzupassen.



Angenehm weich

Hautschonende Weichheit für optimalen Tragekomfort.



Weich & Stabil

Hergestellt aus einem geschmeidigen, anpassungsfähigen Gestrick, welches zudem die Sicherheit einer festen Unterstützung gibt.



Einfaches Anziehen für Beine

Material unterstützt das Anziehen.



Feuchtigkeitsmanagement

Hochentwickeltes Feuchtigkeitsmanagement-System mit Doppelschichtaufbau für optimalen Tragekomfort.



Polsterung

Polsterndes Material bietet Komfort.



Funktionszonen

Optionale und diskrete Funktionszonen sorgen für mehr Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.



Einfaches Anziehen für Beine und Arme

Material unterstützt das Anziehen.



Starker Halt

Bietet Stabilität, die hilft, Hautfalten zu überbrücken.



Entstauung

Ödemreduktion und ggf. Wundmanagement.



Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.



Erhaltung

Ödem- und ggf. Wundmanagement.



Prävention

Übergang zur langfristigen Therapie mit Kompressionsstrümpfen.



Mikro-Massage

Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikro-Massage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.



2in1-Therapiesystem

Für eine einfache Handhabung und hohe Compliance der Patient*innen.



JOBST® FarrowWrap®

UNTERE UND OBERE EXTREMITÄTEN

Einfache Anwendung zur Förderung des Selbstmanagements

JOBST FarrowWrap ist ein medizinisches adaptives Kompressions-system (MAK) mit anpassbaren Klettbandagen aus strapazier-fähigen Materialien, das dazu dient Schwellungen an den Extremitäten zu reduzieren und die Abheilung eines Ulcus cruris venosum zu fördern.



LEICHT ANZULEGEN



KURZZUG-TECHNOLOGIE



ANPASSBAR

Indikation: Chronische Venenerkrankung und Ulcus cruris venosum (UCV)

			C3	C4	C5	C6
			Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV	Florides UCV


Indikation: LYMPHÖDEM

ENTSTAUUNGSPHASE	
------------------	--

Die Versorgung in der Übersicht

▼ Ausführungen	Standard								
	Fußteil	Wadenteil	Oberschenkel inkl. Knie teil	Armteil	Handteil	Farrow Hybrid ADI	Farrow Liner AD	Farrow Liner AG	
LITE 20 - 30 mmHg	●	●	●	●	●	●			
STRONG 30 - 40 mmHg	●	●	●						
Liner im Lieferumfang enthalten		2 x AD	2 x AG						
Materialzusammensetzung	LITE: Gewebe: 82% Polyamid, 18% Elasthan; Schaumstoffpolster bei Knie- und Armteil: 100% Polyurethan STRONG: 47% Baumwolle, 16% Polyester, 32% Polyamid, 5% Elasthan; Schaumstoffpolster bei Knie teil: 100% Polyurethan				Gewebe: 89% Polyamid, 11% Elasthan; Schaumstoff: 100% Polyurethan		83% Polyamid, 17% Elasthan	96% Polyamid, 4% Elasthan	85% Baumwolle, 15% Elasthan
Wäsche	LITE: bei 30°C waschbar					bei 40°C waschbar			
Patient*innen wählen auch ...	JOBST WashCARE - Waschmittel								

Farbe Kompressionssystem

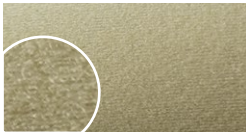

LITE/STRONG - BEIGE

Farbe FarrowHybrid ADI



TAUPE

Farbe Unterziehstrumpf (Liner)



BEIGE (AD)



WEISS (AG)

85 %
der Patient*innen!



Nachgewiesene Patientenzufriedenheit*

Eine Beobachtungsstudie hat gezeigt, dass 85 % der Patient*innen die FarrowWrap-Kompressionssysteme von JOBST einfach an ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen konnten. 73 % der Patient*innen haben die Anwendbarkeit mit gut oder sehr gut bewertet. So kann JOBST FarrowWrap eine geeignete Wahl für die Bewältigung der herausfordernden Probleme sein, welche mit venösen und lymphatischen Erkrankungen verbunden sind.

Bitte beachten Sie:

JOBST FarrowWrap ist in verschiedenen Längentypen und Kompressionsstärken erhältlich.

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Nicht kompressiver Unterziehstrumpf (Liner): JOBST Farrow Liner AD & AG


In Kombination entweder mit JOBST FarrowWrap LITE oder STRONG wird ein Liner empfohlen, damit das Kompressionssystem nicht direkt auf der Haut aufliegt. Der Liner schützt die Haut und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Der Liner ist beim Wadenteil paarweise in der Länge **AD** und beim Knie- inkl. Oberschenkelteil in der Länge **AG** im Lieferumfang enthalten. Zusätzliche Liner können über das Maßblatt paarweise dazu bestellt werden.


Unterziehstrumpf mit Fußkompression: JOBST FarrowHybrid ADI


FarrowHybrid **ADI** von JOBST ist ein Liner mit Fußkompression, der sich für milde bis mäßige Ödeme eignet. Auf den Fuß bis zum Knöchel wird eine Kompression von 20-30 mmHg ausgeübt, während die Wade keine Kompression erfährt. JOBST FarrowHybrid kann mit einem Wadenteil kombiniert werden.




Maßtabellen Untere Extremitäten

JOBST FarrowWrap Fußteil	Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL
	c (A1) Mittelfuß- / Ristumfang	22-24	25-27	28-30	31-34	35-40
	l (A) Fußlänge (standard)	16-17	17-18	19-20	20-21	22-23
	l (A) Fußlänge (lang)	18-19	19-20	21-22	22-23	24-25


JOBST FarrowWrap Wadenteil	Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL
	c (C) Wadenumfang	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68
	c (B) Knöchelumfang	21-25	25-30	30-36	36-42	42-50
	le (A) - (D) standard	33-37	35-39	37-41	39-43	39-43
	le (A) - (D) lang	38-41	40-43	42-45	44-47	44-47


JOBST FarrowWrap Knieteil	Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL	XXL
	c (E) Knieumfang	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80	81-87
	c (C) Wadenumfang	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68	63-73

JOBST FarrowWrap Oberschenkelteil	Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	
	c (G) Oberschenkelumfang	60-70	65-75	70-80	75-90	85-100	95-110	
	c (E) Knieumfang	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80	81-87	
	Länge (in cm)		kurz		standard		lang	
	le (E) - (G)		16-20		21-26		27-31	


JOBST FarrowHybrid ADI Liner mit Fußkompression	Messpunkt (Angaben in cm)	S	M	L	XL	
	Schuhgröße	35-38	38-41	41-44	44-46	
	Länge (in cm)		standard		weit	
	c (A1) Mittelfuß- / Ristumfang	20-27 cm		28-35 cm		

Maßtabellen Obere Extremitäten


JOBST FarrowWrap LITE Armteil	Messpunkt (Angaben in cm)	S	M	L	
	c G	Oberarmumfang	22-31	29-39	32-45
	c E	Ellenbogenumfang	20-27	25-34	30-40
	c C	Handgelenksumfang	14-18	16-21	19-25
	Länge (in cm)		kurz	standard	lang
	le C - G		40-43	44-47	48-51

JOBST FarrowWrap LITE Handteil	Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	
	c A	Umfang an den Fingergrundgelenken*	16-18	18-20	20-22	22-24
	c B	Mittelhandumfang (Höhe Daumenschwimmhaut)	17-19	19-21	21-23	23-26
	c C	Handgelenksumfang	15-18	17-20	19-22	22-24

Messpunkte Untere Extremitäten

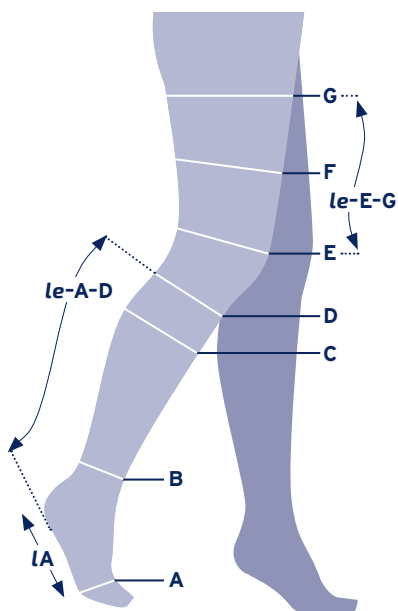

Messpunkte Obere Extremitäten

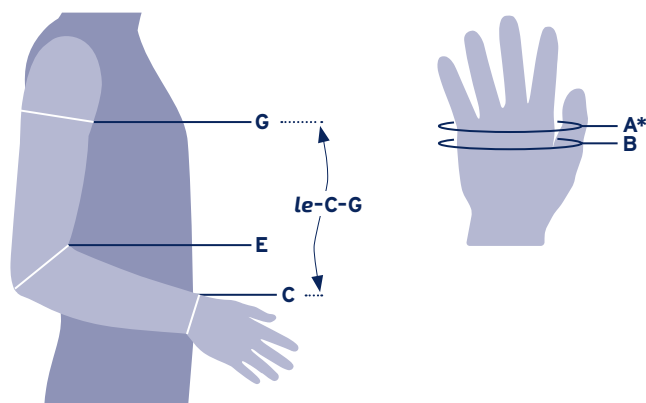

le = Konturmessung (der Kontur folgend) cE = 10 cm oberhalb des Knies zu messen

* Umfang Fingergrundgelenke mit flach aufliegender Hand.

Falls die Maße nicht eindeutig einer Größe zuzuordnen sind, sollte immer die kleinere der in Frage kommenden Größen gewählt werden.

JOBST® UlcerCare

UNTERE EXTREMITÄTEN

Für die effektive Behandlung eines Ulcus cruris venosum

JOBST UlcerCare ist ein 2in1 Kompressionssystem für die Therapie von venösem Ulcus/UCV. Kompressions- und Kompressionsunterziehstrumpf (Liner) erzielen in Kombination den nominalen Druck von 40 mmHG und bieten einen hohen Stiffness Faktor. Der hautfreundliche Liner kann aufgrund seiner leichten Kompression auch während der Ruhe- und Schlafphasen zur Ödemprävention getragen werden und fixiert zusätzlich den Wundverband.



2IN1-THERAPIESYSTEM



STARKER HALT



EINFACHES ANZIEHEN FÜR BEINE

Indikation: Chronische Venenerkrankung und Ulcus cruris venosum (UCV)

						C5	C6
						Abgeheiltes UCV	Florides UCV

Die Versorgung in der Übersicht

		Standard		Maß (Flachstrick)	
▼ Ausführungen		AD Kompressionsstrumpf	AD/U Unterziehstrumpf	AD Kompressionsstrumpf	AD/U Unterziehstrumpf
KKL 1			●		●
KKL 3: 40 mmHg*		●		●	
Optionen	Mit Reißverschluss** links oder rechts	●		●	
	Ohne Reißverschluss	●	●	●	●
Fußspitze	Offen	●		●	
	Geschlossen		●		●
Materialzusammensetzung		76% Nylon/Polyamid, 24% Spandex/Elasthan	79% Nylon/Polyamid, 16% Spandex/Elasthan, 5% Seide	40% Polyamid, 29% Baumwolle, 21% Elastodien, 10% Elasthan	58% Polyamid, 42% Elasthan
Wäsche		bei 40°C waschbar 	bei 60°C waschbar 	bei 40°C waschbar 	bei 40°C waschbar
Patient*innen wählen auch ...		JOBST Griphandschuhe, JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Feuchtigkeitsschaum, Wet Wash Gloves Hautpflege			

*KKL 3 entsteht durch das gleichzeitige Tragen des Unterziehstrumpfes mit dem Kompressionsstrumpf
 **Reißverschluss muss auf die ulkusfreie Seite. AD Maß mit Ziehring am Reißverschluss

Farben Kompressionsstrumpf Standard & Maß



BEIGE



SCHWARZ

Farbe


Unterziehstrumpf (Liner) Standard




WEISS

Farbe

Unterziehstrumpf (Liner) Maß

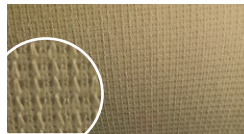

CARAMEL*

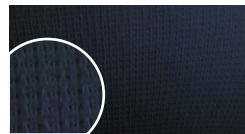

SCHWARZ

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Kompressions- & Unterziehstrumpf im Zusammenspiel

Eine spezielle Gestrick-Struktur im Wadenbereich des Kompressionsstrumpfes und im Schienbeinbereich des Unterziehstrumpfes lässt beide System-Komponenten besonders gut ineinandergreifen. Dies bietet einen hohen Tragekomfort und fördert die Akzeptanz der Patient*innen.

Anwendungshinweise

- JOBST UlcerCare wird als Kompressionssystem nach erfolgreicher Ödemreduktion durch Kompressionsbinden (Seite 50 - 53) empfohlen.
- Offene Wunden müssen vor Anwendung mit einer Wundauflage abgedeckt werden. Therapielösungen für die Versorgung chronischer Wunden finden Sie bei Essity unter der Marke Cutimed®.
- Nach vollständiger Abheilung des venösen Ulcus wird empfohlen, weiterhin medizinische Kompression zu tragen.






Größentabelle Standardsortiment

Umfangmaße in cm							
Messpunkte ▼	Größen						
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Wadenumfang (cC) in cm	29 - 35	34 - 41	40 - 47	46 - 54	48 - 56	50 - 58	52 - 60
Knöchelumfang (cB) in cm	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33	33 - 36	36 - 39

*entspricht farblich dem Beigetönen des Kompressionsstrumpfes




Standardsortiment

Kompressionsklasse 3*

Ausführung		KKL 3*
	Kniestrumpf AD (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	•
	Kniestrumpf AD mit Reißverschluss (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	•
		Leichte Kompression zur Ödemprävention
	3 Unterziehstrümpfe (Liner) AD/U	•

Maß-Sortiment

Kompressionsklasse 3*

Ausführung		KKL 3*
	Kniestrumpf AD (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	•
	Kniestrumpf AD mit schrägem Fuß (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	•
	Kniestrumpf AD mit Reißverschluss (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	•
	Kniestrumpf AD mit Reißverschluss, mit schrägem Fuß (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	•
		Leichte Kompression zur Ödemprävention
	1 Unterziehstrumpf (Liner) AD/U	•

*KKL 3 entsteht durch das gleichzeitige Tragen des Unterziehstrumpfes mit dem Kompressionsstrumpf



JOBST® Confidence

UNTERE UND OBERE EXTREMITÄTEN

Die nächste Generation flachgestrickter Kompression ohne Naht im Leistenbereich

JOBST Confidence wurde mit der innovativen Contour Fit Technologie entwickelt. Die Kompressionsversorgungen lassen sich somit exakt an individuelle Körperformen anpassen und bieten mehr Tragekomfort und ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit.



CONTOUR FIT



WEICH & STABIL



FEUCHTIGKEITS-MANAGEMENT



FUNKTIONSZONEN

Indikation: Lymphödem und Lipödem

MILDE BIS MODERATE AUSPRÄGUNG

Die Versorgung in der Übersicht

		Maß									
▼ Ausführungen		AB ¹	AD	AG	AG-HT	AT	BT/B ¹ T	CT	E ¹ T	CG ¹	AG ¹
KKL 1: 18 - 21 mmHg		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KKL 2: 23 - 32 mmHg		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KKL 3: 34 - 46 mmHg			•	•	•	•	•	•	•		
Haftband	SoftFit		•							•	•
	Noppe			•						•	•
Fußspitze	Offen	•	•	•	•	•					
	Geschlossen	•	•	•	•	•					
Materialzusammensetzung		KKL 1: 59% Polyamid, 26% Polypropylen, 15% Elasthan; KKL 2: 48% Polyamid, 32% Polypropylen, 20% Elasthan; KKL 3: 45% Polyamid, 32% Polypropylen, 23% Elasthan									
Wäsche		Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.									
Patient*innen wählen auch ...		JOBST Griphandschuhe, JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Feuchtigkeitsschaum, Wet Wash Gloves Hautpflege, JOBST Relax für die Nacht									

Farben




BEIGE




CARAMEL



BLACK

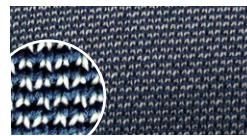

JEANS HEATHER

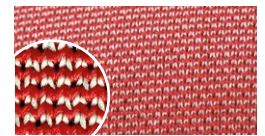

RED HEATHER



ANTHRACITE HEATHER




HAZELNUT / CRANBERRY

Haftbänder AUSSEN/INNEN



SOFTFIT

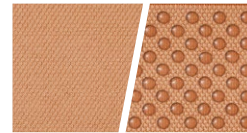

NOPPE




MIT ENTFERNBAREM KORDELSTOPPER

Neu: Farbige Schließnähte!



SILVER

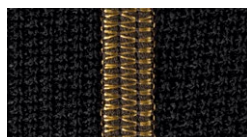

GOLD



MULTICOLOR

Jetzt können Ihre Kund*innen dekorative Schließnähte auswählen. Mit drei unterschiedlich farbigen Nähten können sie ihre Individualität zum Ausdruck bringen.

Neu: Motivierende Prints!



„KEEP MOVING“



„EMPOWER YOURSELF“



„FEEL GOOD“

Ihre Kund*innen können aus drei inspirierenden Prints auswählen, um ihre Kompressionsversorgung noch persönlicher zu gestalten.

INFORMATION ZUM SORTIMENT

Spezielle Maße im Leibteil

Der passgenaue Sitz der JOBST Confidence Strumpfhose mit dem anatomisch geformten Hosenteil wird über spezielle Messpunkte ermöglicht. Hierfür sind die Maße **IL** und **IL¹** erforderlich.

Wir unterstützen Sie beim Maßnehmen und stellen Ihnen gerne unsere JOBST Confidence Messhilfen, bestehend aus einer Anmesskarte, einem Anmessgürtel sowie Maßband-Schiebern zum Anmessen der JOBST Confidence Längentypen mit Hosenteil zur Verfügung. Sprechen Sie gerne den JOBST Außendienst oder das Lymphologie Team im JOBST Kundenservice an: 02822/607 199.


Maße IL und IL¹




JOBST Confidence Messhilfen



Anmesskarte

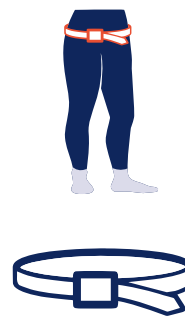



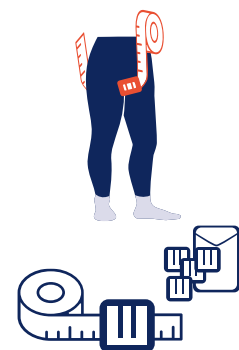





Anmessgürtel



Maßband-Schieber

Maß-Sortiment untere Extremitäten

Kompressionsklasse 1-3

Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2	KKL 3
	Socke AB ¹	Stück	•	•	•
	Wadenstrumpf AD	Stück	•	•	•
	Oberschenkelstrumpf AG	Stück	•	•	•
	+ Noppenhaftband		•	•	•
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring	Stück	•	•	•
	+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		•	•	•
	Bermudahose E ¹ T	Stück	•	•	•
	+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		•	•	•
	Caprihose CT	Stück	•	•	•
	+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		•	•	•
	Leggings BT / B ¹ T	Stück	•	•	•
	+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		•	•	•
	Strumpfhose AT	Stück	•	•	•
	+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		•	•	•

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Anatomisch geformtes Hosenteil



Die JOBST Confidence Strumpfhose verfügt über eine ergonomisch gesetzte und neu entwickelte Nahtführung, die sich der natürlichen Körperform von Patient*innen mit Lymphödem und Lipödem individuell anpasst und durch die **Nahtlosigkeit** für mehr Tragekomfort in der Leistengegend sorgt.



Zusätze untere Extremitäten	AB ¹	AD	AG	AG-HT	AT	B'T/BT/CT	E'T
Haftband (AD SoftFit / AG Noppe)	-	●	●	-	-	-	-
Suspensorium	-	-	-	●	●	●	●
Normales Taillenband	-	-	-	●	●	●	●
Florales Taillenband	-	-	-	●	●	●	●
Neu: Komfort-Taillenband	-	-	-	●	●	●	●
Anatomisch geformtes Hosenteil	-	-	-	●	●	●	●
Funktionszone Knie	-	-	●	●	●	●	-
Slipform (bei AD abwählbar)	-	●	●	●	-	-	-
Funktionszone Fuß / T-Ferse	●	●	●	●	●	-	-
Hallux Valgus Zone (bei Fuß schräg)	●	●	●	●	●	-	-
Fuß schräg	●	●	●	●	●	-	-
Fuß gerade	●	●	●	●	●	-	-
Offene / Geschlossene Fußspitze	●	●	●	●	●	-	-
Decoline Stück	●	●	●	●	●	●	●
Initialen (max. 2 Stück)	●	●	●	●	●	●	●
Neu: Farbige Schließnähte	-	●	●	●	●	●	●
Neu: Motivierende Prints	-	-	-	●	●	●	●

Maß-Sortiment obere Extremitäten

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2
	Armstrumpf CG ¹	Stück	●	●
	inkl. schrägem Abschluss		●	●
	Armstrumpf AG ¹	Stück	●	●
	ohne Finger, mit Daumen inkl. schrägem Abschluss		●	●

Zusätze	Einheit	
Funktionszone Ellenbogen	Stück	●
Hafrand (CG ¹ & AG ¹ SoftFit / Noppenhaftband)	Stück	●
Design-Elemente		Einheit
Deco Line	Stück	●
Initialen	Stück	●
Neu: Farbige Schließnähte	Stück	●



JOBST® Elvarex®

UNTERE EXTREMITÄTEN

Das Original seit 1953 - starke Kompression für eine feste Unterstützung.

Vertrauen Sie unserer bewährten Flachstrickqualität angepasst auf die individuellen Bedürfnisse von Patient*innen mit einem hohen Anteil an natürlichen Fasern aus Baumwolle und Naturkautschuk.



STARKER HALT



ATMUNGSAKTIV



FUNKTIONSZONEN



MIKRO-MASSAGE

Indikation: Lymphödem und Lipödem

MODERATE BIS SCHWERE AUSPRÄGUNG


Die Versorgung in der Übersicht

Ausführungen	Standard*		Maß						
	AD	AG	AA	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT
KKL 1: 18 - 21 mmHg			•	•	•	•	•	•	•
KKL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KKL 3: 34 - 42 mmHg	•	•		•	•	•	•	•	•
KKL 3 forte: 38 - 46 mmHg				•	•	•	•	•	•
KKL 4: > 49 mmHg				•	•	•	•	•	•
KKL 4 super: > 70 mmHg				•	•	•	•	•	•
Haftband	SoftFit			•					
	Noppe		•	•	•	•	•	•	•
	Mikronoppe			•	•	•			
	Volant		•		•	•	•		
Fußspitze	Offen	•	•	•	•	•	•	•	•
	Geschlossen	•			•	•	•	•	•
Material/Wäsche	KKL 1: 72% Polyamid, 16% Elasthan, 12% Elastodien; KKL 2: 40% Polyamid, 29% Baumwolle, 21% Elastodien, 10% Elasthan; KKL 3: 41% Baumwolle, 32% Polyamid, 21% Elastodien, 6% Elasthan KKL 3 forte: 41% Baumwolle, 27% Polyamid, 26% Elastodien, 6% Elasthan KKL 4: 39% Baumwolle, 30% Elastodien, 26% Polyamid, 5% Elasthan; KKL 4 super: 39% Baumwolle, 32% Elastodien, 24% Polyamid, 5% Elasthan								
Patient*innen wählen auch ...	JOBST Griphandschuhe, JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Feuchtigkeitsschaum, Wet Wash Gloves Hautpflege, JOBST Relax für die Nacht								
*JOBST Elvarex Standard nur in beige verfügbar. AD Standard in regular (nur offene Fußspitze) und petite (offene und geschlossene Fußspitze) wählbar.									

Farben



Haftbänder AUSSEN/INNEN

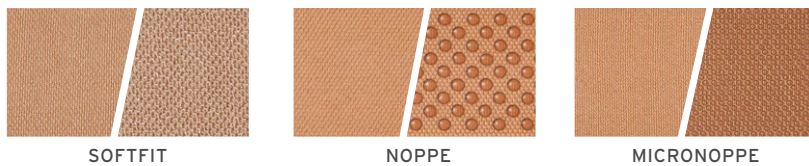

Mehr Details, welches Haftband die beste Wahl ist, finden Sie auf Seite 12 und 13.

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Funktionszonen

Im JOBST Elvarex Sortiment können Funktionszonen für eine verbesserte Passform ausgewählt werden. Funktionszonen verringern Faltenbildungen, schützen besonders sensible Körperstellen und sorgen so für einen verbesserten Tragekomfort und mehr Bewegungsfreiheit. **Für die unteren Extremitäten: Slipform, Oberbein, Knie, T-Ferse, Schräger Fuß.**



FUNKTIONSZONE KNIE

INFORMATION ZUM SORTIMENT

JOBST Elvarex Strumpfhose (AT)

JOBST Elvarex Strumpfhosen (AT) setzen sich aus zwei JOBST Elvarex **AG**-Beinversorgungen und einer JOBST Elvarex Leibbinde zusammen. Bei der Bestellung finden Sie auf Ihren Belegen die Bestandteile einzeln aufgeführt. Die nachfolgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick:



KKL		Bestandteile und KKL
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 1	+	2 x JOBST Elvarex AG , KKL 1
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 2		2 x JOBST Elvarex AG , KKL 2
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 3		2 x JOBST Elvarex AG , KKL 3
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 3 forte		2 x JOBST Elvarex AG , KKL 3 forte
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 3 forte		2 x JOBST Elvarex AG , KKL 4
		2 x JOBST Elvarex AG , KKL 4 super

Bei JOBST Elvarex Strumpfhosen (AT) können unterschiedliche Kompressionsklassen miteinander kombiniert werden. Zum Beispiel: 2x **AG** in der KKL 3 mit einer Leibbinde in der KKL 2. Für maximale Flexibilität können in einer **AG** Versorgung auch unterschiedliche Kompressionsklassen kombiniert werden.


*Die melierten Farben sind nur für Beinversorgungen erhältlich.

Standardsortiment

Kompressionsklasse 2-3

Ausführung		Einheit	KKL 2	KKL 3
	Wadenstrumpf AD	Paar	●	●
	Wadenstrumpf AD mit Pelotten	Paar	●	●
	Oberschenkelstrumpf AG	Paar	●	●
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	●	●

Größentabelle

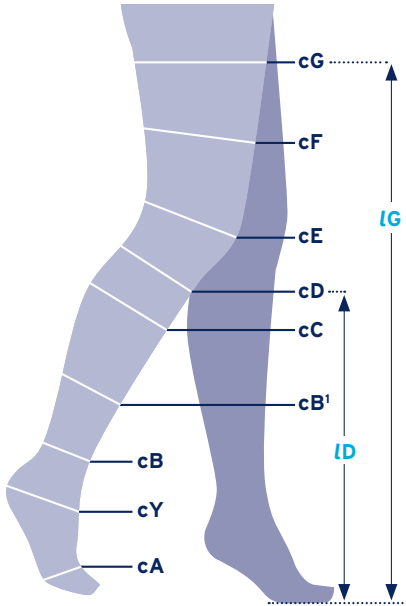
Messpunkte ▼	Umfangmaße in cm						Alle Umfänge und Längen in der Übersicht
	Größen						
	4	5+6	7+8	9+10	11+12	13+14	
cG	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	
cF	39-41	42-44	45-47	48-50	51-53	54-56	
cE	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43	44-46	
cD	26-28	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43	
cC	29-30	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45	
cB'	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34	
cY	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38	
cA+cB	18-19	20-21	22-23	24-25	26-27	28-29	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	ID	Normal	40-43	Verkürzt	36-39	
AG		IG	69-74				
AG-T		IG	70-75				

Maß-Sortiment - Zehenteil

Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2
	Zehenteil AA (ohne Zehen)	Stück	●	●
	Zehenteil AA (mit Zehen)	Stück	●	●


Maß-Sortiment AD

Kompressionsklasse 1-4 super

Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2
	Wadenstrumpf AD	Stück	●	●
			KKL 3	KKL 3 forte
	Wadenstrumpf AD	Stück	●	●
			KKL 4	KKL 4 super
	Wadenstrumpf AD	Stück	●	●

Maß-Sortiment AF und AG

Kompressionsklasse 1-4 super

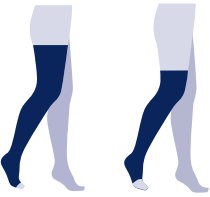Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2
	Halbschenkelstrumpf AF	Stück	●	●
	Oberschenkelstrumpf AG	Stück	●	●
			KKL 3	KKL 3 forte
	Halbschenkelstrumpf AF	Stück	●	●
	Oberschenkelstrumpf AG	Stück	●	●
			KKL 4	KKL 4 super
	Halbschenkelstrumpf AF	Stück	●	●
	Oberschenkelstrumpf AG	Stück	●	●

Zusätze für JOBST Elvarex AD, AF, AG Versorgungen	Einheit	
Kompressionspelotten	Paar	●
Haftband (AF/AG)	Stück	●
Haftbandstücke	Stück	●
SoftFit (AD)	Stück	●
Reißverschluss (AD, AF, AG)	Stück	●
Geschlossene Fußspitze	Stück	●
Schräger Fuß	Stück	●
T-Ferse (KKL 2-3 forte)	Stück	●
Slipform	Stück	●
Funktionszone Knie (KKL 2-4 super)	Stück	●
Funktionszone Oberbein (AF/AG)	Stück	●
Futterstoff*/Tasche** Y-Maß	Stück	●
Futterstoff* Ferse	Stück	●
Futterstoff*/Tasche** Fußrücken	Stück	●
Tasche** Schienbein	Stück	●
Futterstoff*/Tasche** Kniekehle	Stück	●

* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht ** Tasche: eine Seite offen


Maß-Sortiment AG-T

Kompressionsklasse 1-4 super

Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	●	●
			KKL 3	KKL 3 forte
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	●	●
			KKL 4	KKL 4 super
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	●	●


Maß-Sortiment AG-HT

Kompressionsklasse 1-3 forte

Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring inkl. kompr. Leibteil	Stück	●	●
			KKL 3	KKL 3 forte
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring inkl. kompr. Leibteil	Stück	●	●


Maß-Sortiment BT, B'T, CT, ET & FT

Kompressionsklasse 1-4 super

Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2	KKL 3	KKL 3 forte	
	Leggings BT, B'T	Stück	●	●	●	●	
	Caprihose CT	Stück	●	●	●	●	
	Bermudahose ET (> 10 cm)	Stück	●	●	●	●	
	Radler FT (= 10 cm)	Stück	●	●	●		
				KKL 4		KKL 4 super	
	Leggings BT, B'T	Stück		●		●	
	Caprihose CT	Stück		●		●	
	Bermudahose ET	Stück		●		●	

Maß-Sortiment AT

Kompressionsklasse 1-4 super

Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2
	Strumpfhose AT bestehend aus 2x AG Elvarex	Stück	●	●
	+ kompr. Leibteil ohne Beinring	Stück	●	●
			KKL 3	KKL 3 forte
	Strumpfhose AT bestehend aus 2x AG Elvarex	Stück	●	●
	+ kompr. Leibteil ohne Beinring	Stück	●	●
			KKL 4	KKL 4 super
	Strumpfhose AT bestehend aus 2x AG Elvarex	Stück	●	●
	+kompr. Leibteil ohne Beinring (bis maximal KKL 3 forte)	Stück	●	●

Zusätze für JOBST Elvarex AG-T, AG-HT, AT, BT, B'T, CT, ET, FT Versorgungen	Einheit	
Kompressionspelotten (AG-T, AG-HT, AT)	Paar	●
Haftband (exkl. AG-T)	Stück	●
Haftbandstücke	Stück	●
Suspensorium (exkl. AG-T)	Stück	●
Eingriff (exkl. AG-T)	Stück	●
Geschlossene Fußspitze (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	●
Schräger Fuß (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	●
T-Ferse (KKL 2-3 forte, AG-T, AG-HT, AT)	Stück	●
Slipform	Stück	●
Funktionszone Knie (KKL 2-4 super, exkl. ET und FT)	Stück	●
Funktionszone Oberbein (exkl. AG-T, AG-HT)	Stück	●
Futterstoff*/Tasche** Y-Maß (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	●
Futterstoff* Ferse (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	●
Futterstoff*/Tasche** Fußrücken (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	●
Tasche** Schienbein (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	●
Futterstoff*/Tasche** Kniekehle (exkl. ET, FT)	Stück	●

* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht ** Tasche: eine Seite offen



JOBST® Elvarex®

OBERE EXTREMITÄTEN

Das Original seit 1953 - starke Kompression für eine feste Unterstützung.

Vertrauen Sie unserer bewährten Flachstrickqualität angepasst auf die individuellen Bedürfnisse von Patient*innen.



STARKER HALT



ATMUNGSAKTIV



FUNKTIONSZONEN



MIKRO-MASSAGE


Indikation: Lymphödem und Lipödem

MODERATE BIS SCHWERE AUSPRÄGUNG


Die Versorgung in der Übersicht

		Maß							
▼ Ausführungen		AC ¹	AE	AG	AG ¹	AH	CG	CG ¹	CH
KKL 1: 18 - 21 mmHg		•	•	•	•	•	•	•	•
KKL 2: 23 - 32 mmHg		•	•	•	•	•	•	•	•
Haftband	SoftFit						•	•	
	Noppe		•	•	•	•	•	•	•
	Mikronoppe			•	•		•	•	
Materialzusammensetzung		KKL 1: 73% Polyamid, 15% Elasthan, 12% Elastodien, KKL 2: 70% Polyamid, 20% Elastodien, 10% Elasthan							
Wäsche		Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.							
Patient*innen wählen auch ...		JOBST Grifthandschuhe, JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Feuchtigkeitsschaum, Wet Wash Gloves Hautpflege, JOBST Relax für die Nacht							


Farben

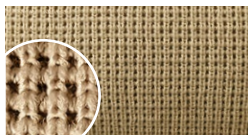


BEIGE

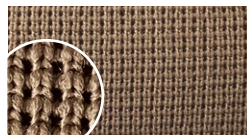

CARAMEL

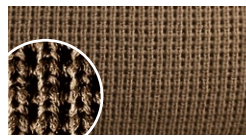


BRONZE

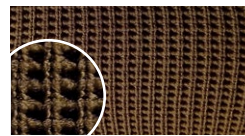

HAZELNUT




SCHWARZ

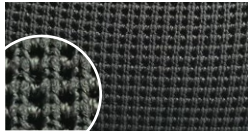


GRAU



DUNKELBLAU

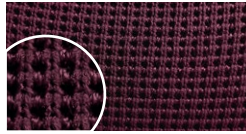

CRANBERRY

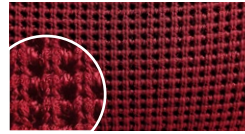


RUBINROT

Haftbänder AUSSEN/INNEN



SOFTFIT

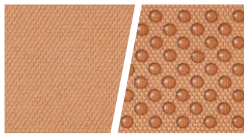

NOPPE



MICRONOPPE



Mehr Details, welches Haftband die beste Wahl ist, finden Sie auf Seite 12 und 13.

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Funktionszonen




Im JOBST Elvarex Sortiment können Funktionszonen für eine verbesserte Passform ausgewählt werden. Funktionszonen verringern Faltenbildungen, schützen besonders sensible Körperstellen und sorgen auf diese Weise für einen verbesserten Tragekomfort und mehr Bewegungsfreiheit.

Für die oberen Extremitäten: Schräger Abschluss und Ellenbogen.



Maß-Sortiment - Armstrumpf

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2
	Armstrumpf CG	Stück	●	●
	Armstrumpf CG¹ inkl. schrägem Abschluss	Stück	●	●
	Armstrumpf CH mit Kappe und BH-Befestigung* inkl. schrägem Abschluss	Stück	●	●
	Armstrumpf CH mit Kappe und Halterung inkl. schrägem Abschluss	Stück	●	●



* mit/ohne Klettverschluss

Zusätze für JOBST Elvarex Armstrumpf-Versorgungen	Einheit	
Haftband	Stück	●
Haftbandstücke	Stück	●
SoftFit (CG¹, CG)	Stück	●
Reißverschluss	Stück	●
Funktionszone Ellenbogen (KKL 2)	Stück	●
Futterstoff* Ellenbogen	Stück	●
Futterstoff* Armbeuge	Stück	●
Tasche** Armbeuge	Stück	●

* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht ** Tasche: eine Seite offen

Maß-Sortiment - Handschuh

Kompressionsklasse 1-2

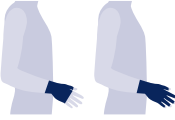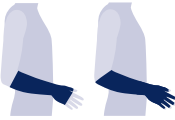Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2	
	AC¹	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück	●	●
		Ohne Finger, mit Daumen	Stück	●	●
		Mit Finger, mit Daumen	Stück	●	●
	AE	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück	●	●
		Ohne Finger, mit Daumen	Stück	●	●
		Mit Finger, mit Daumen	Stück	●	●

Zusätze für JOBST Elvarex Handschuh-Versorgungen	Einheit	
Haftband (AE)	Stück	●
Tasche** Handrücken	Stück	●
Futterstoff* Handrücken	Stück	●
Schräger Abschluss (AE)	Stück	●

* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht ** Tasche: eine Seite offen

Maß-Sortiment - einteiliger Armstrumpf mit Handschuh

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2
	Armstrumpf AG	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück	●
		Ohne Finger, mit Daumen	Stück	●
		Mit Finger, mit Daumen	Stück	●
	Armstrumpf AG ¹ inkl. schrägem Abschluss	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück	●
		Ohne Finger, mit Daumen	Stück	●
		Mit Finger, mit Daumen	Stück	●
	Armstrumpf AH mit Kappe und Halterung inkl. schrägem Abschluss	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück	●
		Ohne Finger, mit Daumen	Stück	●
		Mit Finger, mit Daumen	Stück	●

Zusätze für JOBST Elvarex Armstrumpf- und Handschuh-Versorgungen	Einheit	
Haftband	Stück	●
Haftbandstücke	Stück	●
BH-Befestigung (mit/ohne Klettverschluss)	Stück	●
Halterung	Stück	●
Reißverschluss	Stück	●
Futterstoff* Handrücken	Stück	●
Tasche** Handrücken	Stück	●
Futterstoff* Ellenbogen	Stück	●
Futterstoff* Armbeuge	Stück	●
Tasche** Armbeuge	Stück	●

* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht ** Tasche: eine Seite offen



JOBST® Elvarex® Plus

UNTERE UND OBERE EXTREMITÄTEN

Zuverlässige und nahtlose Kompression

Lassen Sie Ihre Patient*innen den Tragekomfort von JOBST Elvarex Plus erleben, entwickelt mit der nahtlosen 3D-Stricktechnologie, für eine bessere Passform und unbeschwerte Momente.



NAHTLOS



ATMUNGSAKTIV



3D-TECHNOLOGIE







ERGONOMISCHE ANPASSUNG

Indikation: Lymphödem und Lipödem

MILDE BIS MODERATE AUSPRÄGUNG

SCHWERE AUSPRÄGUNG

Die Versorgung in der Übersicht

	Maß		
			
▼ Ausführungen	AC ¹	AE	AA
KKL 1: 18 - 21 mmHg	•	•	•
KKL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•
Materialzusammensetzung	Untere Extremitäten: KKL 1: 72 % Polyamid, 16 % Elasthan, 12 % Elastodien; KKL 2: 40 % Polyamid, 29 % Baumwolle, 21 % Elastodien, 10 % Elasthan Oberer Extremitäten: KKL 1: 73 % Polyamid, 15 % Elasthan, 12 % Elastodien; KKL 2: 70 % Polyamid, 20 % Elastodien, 10 % Elasthan		
Wäsche 	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.		
Patient*innen wählen auch ...	JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Feuchtigkeitsschaum, Wet Wash Gloves Hautpflege		

Farben Handschuh und Zehenkappe



INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Der Handschuh

Die ergonomische Formgebung am Daumenansatz reduziert die Faltenbildung an der Daumenschwimmhaut für einen ungehinderten Griff. Anatomisch geformte Ballen sorgen für einen exakten Sitz durch die genaue Anpassung an die individuellen Erhebungen.



Die Zehenkappe

Stricktechnisch modellierte Zonen in den Zehenzwischenräumen sichern die optimale Formanpassung an sensiblen Stellen. Nahtlos gestrickte Zehenabschlüsse liegen exakt an und sind belastbar.

Maß-Sortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2	
	AC ¹	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	●	●
		Mit Finger, mit Daumen	Stück	●	●
	AE	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	●	●
		Mit Finger, mit Daumen	Stück	●	●
	AA	Mit vier Zehen	Stück	●	●
	AA	Mit fünf Zehen	Stück	●	●
Zusatz		Einheit			
Schräger Abschluss (AE)		Stück	●	●	

*Nur für Handversorgungen. **Nur für Zehenversorgungen.



JOBST® Elvarex® Soft

UNTERE UND OBERE EXTREMITÄTEN

Zuverlässige und hautfreundliche Kompression

JOBST Elvarex Soft ist eine leichte, atmungsaktive und hautfreundliche Kompressionsversorgung, welche speziell für Patient*innen mit empfindlicher Haut entwickelt wurde.



ANGENEHM WEICH



EINFACHES ANZIEHEN
FÜR BEINE



MIKRO-MASSAGE



ATMUNGSAKTIV

Indikation: Lymphödem und Lipödem

MILDE BIS MODERATE AUSPRÄGUNG

Die Versorgung in der Übersicht

		Maß							
▼ Ausführungen		AD	AG	AG-T	AT	BT/B'T	CT	ET	CG ¹
KKL 1: 18 - 21 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●
KKL 2: 23 - 32 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●
KKL 3: 34 - 46 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	
Haftband	SoftFit	●							●
	Noppe	●	●						●
	Mikronoppe	●	●						●
Fußspitze	Offen	●	●	●	●				
	Geschlossen	●	●	●	●				
Materialzusammensetzung		KKL 1: 70% Polyamid, 30% Elasthan; KKL 2: 65% Polyamid, 35% Elasthan; KKL 3: 60% Polyamid, 40% Elasthan							
Wäsche		Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.							
Patient*innen wählen auch ...		JOBST Griphandschuhe, JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Feuchtigkeitsschaum, Wet Wash Gloves Hautpflege, JOBST Relax für die Nacht							

Farben




BEIGE




MACCHIATO*



DUNKELBRAUN

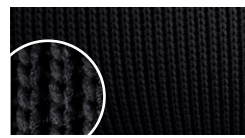


SCHWARZ

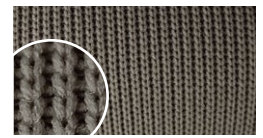

GRAU




DUNKELBLAU

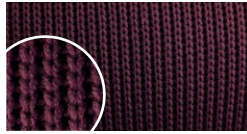


CRANBERRY



RUBINROT

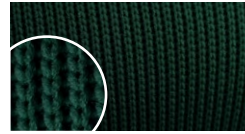

PINE GREEN

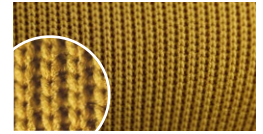


SUNFLOWER YELLOW

Haftbänder AUSSEN/INNEN



SOFTFIT

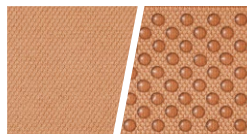

NOPPE



MICRONOPPE



Mehr Details, welches Haftband die beste Wahl ist, finden Sie auf Seite 12 und 13.

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Anatomische Fußspitze

Die Maßprodukte aus dem JOBST Elvarex Soft und dem JOBST Elvarex Sortiment bieten für einen bestmöglichen Tragekomfort eine anatomisch geformte Fußspitze für den geraden als auch für den schrägen Fußabschluss. Bitte geben Sie beim Ausfüllen des Maßblattes immer die Länge **IZ** an!



INFORMATION ZUM SORTIMENT

Farbakzente mit der Schließnaht setzen

Für die Beinversorgungen des Längentyps **AD** und **AG** können bei JOBST Elvarex Soft und JOBST Elvarex mit farbigen Schließnähten modische Akzente gesetzt werden.

JOBST Elvarex Soft Kompressionsstrumpf in Beige und die Schließnaht in den Farben Dunkelbraun, Schwarz, Dunkelblau, Grau oder Cranberry wählen.

JOBST Elvarex Kompressionsstrumpf in Beige, Caramel, Bronze, Dunkelbraun, Schwarz, Grau, Dunkelblau oder Cranberry mit einer Schließnaht in den Farben Beige, Caramel, Bronze, Dunkelbraun, Schwarz, Grau, Dunkelblau oder Cranberry kombinieren.



JOBST ELVAREX SOFT











JOBST ELVAREX

*Nur bei Armversorgungen

Maß-Sortiment untere Extremitäten


Kompressionsklasse 1-3

Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2	KKL 3
	Wadenstrumpf AD	Stück	●	●	●
	Oberschenkelstrumpf AG	Stück	●	●	●
	+ Slipform		-	●	-
	AG-T Hüftbefestigung rechts / links (auch beidseitig)	Stück	●	●	●
	AG-T Hüftbefestigung rechts / links (auch beidseitig) Volle Kompression	Stück	●	●	●
		Stück	-	●	-
	Strumpfhose AT	Stück	●	●	●
	+ Slipform		-	●	-
	Leggings BT, B'T	Stück	●	●	●
	+ Slipform		-	●	-
	Caprihose CT	Stück	●	●	●
	+ Slipform		-	●	-
	Bermudahose ET	Stück	●	●	●
	+ Slipform		-	●	-
	Radler FT	Stück	●	●	●
	+ Slipform		-	●	-

Zusätze	Einheit	
Haftband	Stück	●
Haftbandstücke	Stück	●
SoftFit (AD)	Stück	●
Funktionszone Oberbein (AG)	Stück	●
Schräger Fuß	Stück	●
mit Durchziehgummi	Stück	-
Geschlossene Fußspitze	Stück	●
T-Ferse	Stück	●

Maß-Sortiment obere Extremitäten

Kompressionsklasse 1- 2

Ausführung		Einheit	KKL 1	KKL 2
	Armstrumpf CG ¹ inkl. schrägem Abschluss	Stück	•	•
			•	

Zusätze	Einheit	
Haftband	Stück	•
Haftbandstücke	Stück	•
SoftFit	Stück	•
Futterstoff* Ellenbogen	Stück	•
Futterstoff* Armbeuge	Stück	•

* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht



JOBST® Elvarex® Soft Seamless

UNTERE UND OBERE EXTREMITÄTEN

Zuverlässige und hautfreundliche Kompression

Die innovativen und flachgestrickten JOBST Elvarex Soft Seamless Kompressionsfußkappen und Kompressionshandschuhe werden für einen hohen Tragekomfort nach Maß gefertigt und ganz ohne Naht hergestellt.



NAHTLOS



ANGENEHM WEICH



MIKRO-MASSAGE







ATMUNGSAKTIV

Indikation: Lymphödem und Lipödem

MILDE BIS MODERATE AUSPRÄGUNG

Die Versorgung in der Übersicht

	Maß		
			
▼ Ausführungen	AC ¹	AE	AA
KKL 1: 18 - 21 mmHg	•	•	•
KKL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•
Materialzusammensetzung	KKL 1: 70% Polyamid, 30% Elasthan; KKL 2: 65% Polyamid, 35% Elasthan		
Wäsche 	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.		
Patient*innen wählen auch ...	JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Feuchtigkeitsschaum, Wet Wash Gloves Hautpflege, JOBST Relax für die Nacht		


Farben




BEIGE



MACCHIATO*

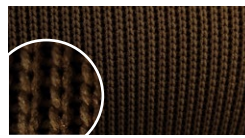

DUNKELBRAUN

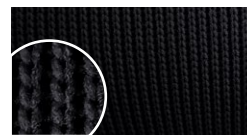

SCHWARZ



GRAU



DUNKELBLAU




CRANBERRY



RUBINROT



PINE GREEN

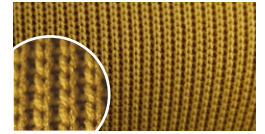

SUNFLOWER YELLOW

INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Optimierte Abschlüsse

Die spezielle Komfortzone im Abschlussbereich ermöglicht ein bequemes Anziehen und Tragen der Versorgung in Verbindung mit Arm- oder Beincompressionsversorgungen.

Finger- und Zehenabschlüsse sind flach verarbeitet, tragen nicht auf und verhindern eine Rollneigung.



Maß-Sortiment

Kompressionsklasse 1-2

	Ausführung	Einheit	KKL 1	KKL 2
	Handschuh AC ¹ ohne Finger, mit Daumen	Stück	●	●
	Handschuh AC ¹ mit Finger, mit Daumen	Stück	●	●
	Langer Handschuh AE ohne Finger, mit Daumen	Stück	●	●
	Langer Handschuh AE mit Finger, mit Daumen	Stück	●	●
	Zehnkappe AA mit vier Zehen	Stück	●	●

*Nur bei Armversorgungen



JOBST® Relax

UNTERE UND OBERE EXTREMITÄTEN

Kompression für die Ruhe- und Nachtphasen

Maßgefertigte und flachgestrickte Kompressionsstrümpfe für das Ödemmanagement in Ruhephasen. JOBST Relax wurde entwickelt, um die Ödemreduktion aufrechtzuerhalten und der Flüssigkeitsansammlung in der Nacht entgegenzuwirken.



POLSTERUNG



MIKRO-MASSAGE



ATMUNGSAKTIV








EINFACHES ANZIEHEN
FÜR BEINE UND ARME


Indikation: Lymphödem / Lipödem

Zeitraum: Nachts

Die Versorgung in der Übersicht

	Maß			
				
▼ Ausführungen	AG ¹	CG ¹	AD	AG
KKL 1	•	•	•	•
KKL 2			•	•
Materialzusammensetzung	KKL 1: 70% Polyamid, 30% Elasthan; KKL 2: 65% Polyamid, 35% Elasthan			
Wäsche 	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.			
Patient*innen wählen auch ...	JOBST WashCARE - Waschmittel, Cutimed Feuchtigkeitsschaum, Wet Wash Gloves Hautpflege, JOBST Relax für die Nacht			

Farben

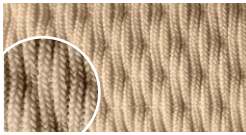

BEIGE



ROSE

Schutz und Aufbewahrung


JOBST Relax wird in einem Satinbeutel mit Kordelzug zum Schutz und zur Aufbewahrung der Kompressionsversorgung geliefert.





INFORMATION ZUR BERATUNG VON PATIENT*INNEN

Monofilament-Zwischenschicht

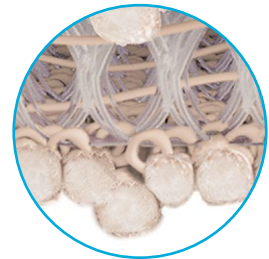

Eine besondere Eigenschaft, die JOBST Relax von anderen Nachtlösungen unterscheidet, ist die Monofilament-Zwischenschicht. Gemeinsam mit feuchtigkeitsregulierenden Garnen werden Wärme und Schweiß auf diese Weise besonders gut von der Haut abtransportiert. Das anpassungsfähige Material sorgt für Bewegungsfreiheit in der Nacht, die Flachstrickeigenschaften reduzieren die Gefahr der Faltenbildung und Einschnürung.



Maß-Sortiment obere Extremitäten

Ausführung	Einheit	Kompressionsdruck
 Armstrumpf AG ¹	Stück	15-20 mmHg
 Armstrumpf CG ¹	Stück	15-20 mmHg

Maß-Sortiment untere Extremitäten

Ausführung	Einheit	Kompressionsdruck
 Wadenstrumpf AD	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg
	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg
 Oberschenkelstrumpf AG	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg
	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg



KOMPRESSIONSBANDAGEN

Kurzzugbinden, Unterpolsterung, Kompressionssysteme

JOBST Kompressionsbinden und Polstermaterialien bieten ein umfassendes Sortiment zur Ödemreduktion und zur individuellen Therapie in jeder Phase der chronisch venösen Insuffizienz.



ENTSTAUUNG



ERHALTUNG



PRÄVENTION

Kurzzugbinden* in der Entstauungsphase

Comprilan®

Textilelastische, hautfreundliche Kurzzugbinde (100 % Baumwolle)

Für Kompressionsverbände bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen geeignet. Längsdehnung von ca. 90 % möglich. Die Binde ist waschbar bis 60° und bis zu 10x wiederverwendbar.



JOBST Comprihaft®

Textilelastische, kohäsive, hautfreundliche Kurzzugbinde (100 % Baumwollgewebe mit selbsthaftender Beschichtung)

Die mikroporöse Beschichtung sorgt für eine Haftung der Bindenlagen aufeinander, nicht aber auf der Haut. Somit wird ein sicherer Sitz ohne Verrutschen auch nach längerer Tragezeit gewährleistet. Längsdehnung 75 %.



*verwendetes Material erhält nach dem Prozess des Standardautoklavierens die therapeutisch relevanten Materialeigenschaften aufrecht.

Kompressionsbinden in der Entstauungsphase

Kurzzugbinden		Abmessung	Bestellnummer	Inhalt
Comprilan** Textilelastische Kurzzugbinde	1 Binde in Faltschachtel	5 m x 6 cm	102600	5 Stück
		5 m x 8 cm	102700	5 Stück
		5 m x 10 cm	102800	5 Stück
		5 m x 12 cm	102900	5 Stück
	Einzelbinde lose im Karton	5 m x 6 cm	4538100	10 Stück
		5 m x 8 cm	4538200	10 Stück
		5 m x 10 cm	4538300	10 Stück
		5 m x 12 cm	4538400	10 Stück
20 Binden in Faltschachtel	10 m x 10 cm	7718800	1 x 20 Stück	
JOBST Comprihaft** Kohäsive Kurzzugbinde	Einzelbinde in Faltschachtel	5 m x 6 cm	4595700	5 Stück
		5 m x 8 cm	4595800	5 Stück
		5 m x 10 cm	4595900	5 Stück
		5 m x 12 cm	4596000	5 Stück

Unterpolsterung für Kompressionsbinden in der Entstauungsphase

Unterpolsterung		Abmessung	Bestellnummer	Inhalt
Tricofix®** Elastischer Schlauchverband	E/6: Oberschenkel und kleine Köpfe	20 m x 8 cm	219700	1 Stück
	F/7: Oberschenkel und große Köpfe	20 m x 10 cm	219800	1 Stück
	G/9: starke Oberschenkel und Kinderrümpfe	20 m x 12 cm	219900	1 Stück
Artiflex®** Hochgebauchte Polsterbinde		3 m x 6 cm	904400	50 Stück
		3 m x 10 cm	904600	30 Stück
		3 m x 15 cm	904700	20 Stück
Artiflex® Nat** Hochgebauchte Polsterbinde		2,7 m x 5 cm	7287000	70 Stück
		2,7 m x 7 cm	7287100	50 Stück
		2,7 m x 15 cm	7287300	20 Stück
JOBST Foam Pad** Schaumgummipolster		1 cm x 9 cm	7849610	1 Stück



Eine adäquate Unterpolsterung des Kompressionsverbandes gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung, schont druckempfindliche Regionen und vermeidet Einschnürungen unter dem Kompressionsverband. Die Empfehlung, eine Bandagierung mit Unterpolsterung vorzunehmen, wurde in die aktuelle Leitlinie S2k aufgenommen. Publiziert auf www.awmf.org, Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), [...]. AWMF-Registernummer: 037/005



KOMPRESSIONSSETS

2-Lagen-Kompressionssysteme, Bandagenset

JOBST bietet für ein effektives Ödemmanagement bei phlebologischen sowie lymphologischen Indikationen bedarfsgerecht zusammengestellte Kompressions- und Bandagensets.



ENTSTAUUNG



ERHALTUNG



PRÄVENTION

Kompressionssets in der Entstauungsphase

In der Entstauungsphase können Kurzzugbinden mit einer zusätzlichen Unterpolsterung, 2-Lagen Kompressionssysteme oder Bandagensets eingesetzt werden.

2-Lagen-Kompressionssysteme mit Druckindikator

JOBST Compri2 | JOBST Compri2 lite

JOBST Compri2 und JOBST Compri2 lite fördern eine effektive Ödemreduktion und bieten Kompression nach Bedarf. Die Sets bestehen jeweils aus einer Polsterwatte sowie einer kohäsiven Kurzzugbinde samt Druckindikator und bieten je nach Indikation die einfache Lösung zum Erreichen der individuell notwendigen Kompression. Die zuverlässige Kompression fördert eine effektive Wundheilung und somit den Therapieerfolg.



Kompressionssysteme / Kompressionsset	Abmessung	Bestellnummer	Inhalt
JOBST Compri2** 2-Lagen Kompressionssystem/ Kompressionsgrad 40 mmHg ABPI >= 0,8	18 - 25 cm	7627100	1 Set
JOBST Compri2 lite** 2-Lagen Kompressionssystem/ Kompressionsgrad 20 - 30 mmHg ABPI 0,5 - 0,8	18 - 25 cm	7627102	1 Set

ANWENDUNG UND EIGENSCHAFTEN DES JOBST OMPRI2 SETS



1

Erste Binde

Polsterwatte auf Polyesterbasis mit Polyurethanschaum beschichtet


- Einfaches Anlegen auch im Fersenbereich aufgrund von 2-dimensionaler Dehnbarkeit.
- Zerreißbar, um bei Bedarf zusätzliche Polsterung anlegen zu können und das Risiko von druckinduzierten Hautdefekten zu verringern.
- Aktives Feuchtigkeitsmanagement führt Feuchtigkeit ins Innere des Systems ab und hält die Haut trocken.
- Die Verwendung einer Unterpolsterung entspricht der Empfehlung in der Leitlinie S2k*



2

Zweite Binde

Kohäsive Kurzzugbinde

- Der Druckindikator visualisiert den korrekten Anlagedruck der Kompressionsbinde.
- Kohäsive Eigenschaften erleichtern die Anlage und ermöglichen eine Korrektur der Wickeltouren.
- Zuverlässiger, rutschsicherer Halt
- Tragedauer bis zu 7 Tagen möglich
- 100 % Baumwolle, luftdurchlässig
- Anwendungsvideo: 

Bandagenset

JOBST LymphCARE Bandagenset

In den JOBST LymphCARE Bandagensets sind alle Materialien, die für einen Kompressionsverband an Arm, Bein oder Unterschenkel erforderlich sind, bedarfsgerecht zusammengestellt. Alle Produkte sind übersichtlich angeordnet, mit einem Griff einsetzbar und leicht zu handhaben.



Kurzzugbinden / Kompressionssysteme	Abmessung	Bestellnummer	Inhalt
JOBST LymphCARE Bandagenset	Arm	7863900	1 Set
	Unterschenkel	7864100	1 Set
	Bein	7864200	1 Set

** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.





ANZIEHHILFEN UND KOMPRESSIONSPFLEGE






Ein sorgsamer Umgang mit Kompressionsversorgungen, der richtige Einsatz von Anziehhilfen, sowie der Gebrauch von Zubehörprodukten können während der Therapie eine wichtige Rolle spielen.

Unterstützung und Schutz beim Anziehen


JOBST GripHandschuhe	Größe	Einheit	Bestellnummer	
Für das leichte und schonende Anziehen der Kompressionsversorgung. 60% Latex, 40% Nylon	XS	1 Paar	77400-00027-00	
	S		77400-00028-00	
	M		77400-00029-00	
	L		77400-00030-00	
	XL		77400-00031-00	

Leichteres über den Fuß ziehen


JOBST Seidenanziehhilfe	Ausführung	Einheit	Bestellnummer	
<p>Nur für Kompressionsversorgungen ohne Spitze.</p> <p>Für ein leichteres und einfacheres über den Fuß ziehen.</p> <p>Reduziert den Widerstand zwischen der Haut des Patienten und der Kompression - für spürbar weniger Irritationen.</p>	Einzelverpackung	Stück	78463-00001-01	

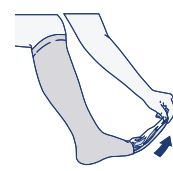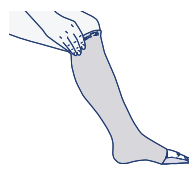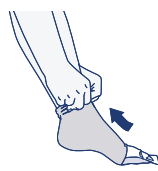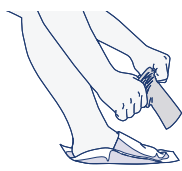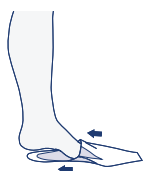

Zur Pflege von Kompressionsversorgungen

JOBST WashCARE	Ausführung	Einheit	Bestellnummer	
<p>JOBST WashCARE ist ein pflegendes Waschmittelkonzentrat, das sich hervorragend für die Reinigung von Kompressionsversorgungen eignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spezielle waschaktive Substanzen und Pflegestoffe reinigen und schützen die hochwertigen Garne. • JOBST WashCARE ist hautfreundlich, pH-neutral und verleiht Kompressionsversorgungen einen angenehm frischen Duft. • Eine Flasche reicht für ca. 125 Handwäschen. 	Theken-display	6 Flaschen à 250 ml	77400-00002-01	
	Sachet	50 Sachets à 15 ml	16923-00020-03	

Zum Schutz von Kompressionsversorgungen

JOBST Wäschenetz	Ausführung	Einheit	Bestellnummer	
<p>Das JOBST Wäschenetz bietet Kompressionsversorgungen einen optimalen Pflegeschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch die feinmaschige Netzstruktur wird das hochwertige Kompressionsgestrick beim Waschen vor mechanischen Einflüssen wirksam geschützt. • Das JOBST Wäschenetz gewährleistet eine besonders schonende und effektive Reinigung, die eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit der Kompressionsversorgung unterstützt. 	Einzelverpackung	1 Netz	77400-00004-00	
	Theken-display	10 Netze	77400-00005-02	

PFLEGEHINWEISE

JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich oder mindestens jeden zweiten Tag gewaschen werden. Verwenden Sie keine Wäschezusätze wie Weichspüler, optische Aufheller oder Fleckentferner. Spülen Sie Ihre Kompressionsstrümpfe gut aus. Rollen Sie die nassen Kompressionsstrümpfe nach dem Wasche in ein Handtuch ein und drücken Sie überschüssiges Wasser aus. Nicht auswringen. Trocknen Sie die Kompressionsstrümpfe nicht auf der Heizung oder in direktem Sonnenlicht. Ob Ihre Kompressionsstrümpfe trocknergeeignet sind, können Sie dem Etikett Ihrer Kompressionsstrümpfe entnehmen.

Pflege des Silikonbandes


Waschen Sie das Silikonband bei Bedarf von Hand, um Creme- und Lotionsreste, Haare und andere Fremdkörper zu entfernen.


Bild: Lymphödem Vereinigung Schweiz, www.lv-schweiz.ch




JOBST® An- und Ausziehhilfen von Arion

Arion Easy-Slide	Ausführung/ Einheit	Größe	Schuhgröße	Bestellnummer
Anziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe mit offener Fußspitze. Reduziert die Körperliche Belastung.				
	Einzelverpackung/ Stück	Extra Small	≤ 33	79658-00003-01
		Small	34 - 36	79658-00004-01
		Medium	37 - 38,5	79658-00002-03
		Large	39 - 41	79659-00002-03
		Extra Large	≥ 42	79660-00001-03

Arion Magnide	Ausführung/ Einheit	Größe	Schuhgröße	Bestellnummer
Anziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe mit geschlossener Fußspitze. Verfügt über eine magnetische Schließung, die die Handhabung vereinfacht.				
	Einzelverpackung/ Stück	Medium	≤ 38	79571-00000-01
		Large	39 - 43	79571-00001-01
		Extra Large	≥ 44	79571-00002-01

Arion Easy-Off	Ausführung/ Einheit	Größe	Schuhgröße	Bestellnummer
Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe mit offener und geschlossener Fußspitze. Besonders robust und einfach zu handhaben.				
	Einzelverpackung/ Stück	Small	34 - 37	79570-00000-01
		Medium	38 - 41	79570-00001-01
		Large	42 - 45	79570-00002-01

Arion Sim-Slide	Ausführung/ Einheit	Größe	Schuhgröße	Bestellnummer
An- und Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe mit offener Fußspitze. Eine zweite Materialschicht auf der Innenseite erleichtert die Anwendung.				
	Einzelverpackung/ Stück	Small	≤ 34 - 36	70633-00001-01
		Medium	37 - 38,5	70633-00002-01
		Large	39 - 41	70633-00003-01
		Extra Large	≥ 42	70633-00004-01

Die Arion Magnide 2in1	Ausführung/ Einheit	Größe	Schuhgröße	Bestellnummer
An- und Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe mit geschlossener Spitze. Durch den Klettverschluss kann sie leicht fixiert werden.				
	Einzelverpackung/ Stück	Medium	≤ 38	79571-00010-01
		Large	39 - 43	79571-00011-01
		Extra Large	≥ 44	79571-00012-01

Arion Easy-Slide Kids	Ausführung/ Einheit	Größe	Länge	Bestellnummer
Anziehhilfe für Arm- oder Beinversorgungen von Kindern. Der besonders geringe Reibungswiderstand macht das An- und Ausziehen kinderleicht.				
	Einzelverpackung/ Stück	Extra Small	29,5 cm	79571-00008-01
		Small	39,5 cm	79571-00009-01

Arion SlideX	Ausführung/ Einheit	Größe	Knöchelumfang	Bestellnummer
Zusätzliche An- und Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe. Die SlideX kann in Kombination mit allen Arion An- und Ausziehhilfen angewendet werden.				
	Einzelverpackung/ Stück	Medium	≤ 40 cm	79571-00006-01
		Large	≤ 60 cm	79571-00007-01

Arion Easy-Slide Arm	Ausführung/ Einheit	Größe	Länge	Bestellnummer
Anziehhilfe für medizinische Armstrümpfe. Das glatte Material sorgt für einen ausgesprochen geringen Reibungswiderstand.				
	Einzelverpackung/ Stück	Medium	59 - 67 cm	79661-00002-03
		Large	> 67 cm	75100-00001-01





SERVICEPRODUKTE


Dekorationshilfen und Anmesshilfen

Für Poster und Stoffbanner kontaktieren Sie bitte Ihren JOBST Außendienst.

Anmesshilfen

JOBST Klapp-Maßbrett	Ausführung	Einheit
 <p>Das Maßbrett für den mobilen Einsatz</p>	Einzelverpackung	Stück

JOBST Mobiles Maßbrett	Ausführung	Einheit
 <p>Das handliche Maßbrett - jederzeit einsatzbereit</p>	Einzelverpackung	Stück

JOBST Holz-Maßbrett	Ausführung	Einheit
 <p>Das stabile Maßbrett für die Anmesskabine</p>	Einzelverpackung	Stück





HAUTPFLEGEPRODUKTE

Unsere Qualitätsprodukte für ein gutes Hautgefühl.

Hautpflege ist eine wichtige Säule in der Therapie. Die Kompressionsbekleidung kann die Haut zusätzlich belasten, denn insbesondere bei Lymphödemen verändert sich auch die Haut durch die Erkrankung. Mit Qualitätsprodukten von Essity können Ihre Patienten die natürliche Barrierefunktion der Haut schützen.

Medizinische Hautpflege mit Urea

Cutimed Acute Hautpflegeschaum mit Urea	Produkt	Einheit	Bestellnummer	
Cutimed® ACUTE eignet sich als Spezialpflege für trockene und stark beanspruchte Haut und kann auch hervorragend als medizinische Hautpflege bei Kompressionstherapie eingesetzt werden. Cutimed® ACUTE mit einer Ureakonzentration von 5% und 10% ist für Diabetiker geeignet.	Schaumcreme mit 5% Urea	1 Flasche à 125 ml	7264128	
	Schaumcreme mit 10% Urea	1 Flasche à 125 ml	7264131	

Pflegend reinigend ohne zusätzliches Wasser

TENA Wet Wash Gloves	Produkt	Einheit*	Bestellnummer	
Weiche, mit Reinigungs lotion versehene Waschhandschuhe für die Ganzkörperreinigung. *Innenverpackung	TENA Wet Wash Glove, milder Duft	8 Stück à 23 x 15 cm	1116	
	TENA Wet Wash Glove, parfümfrei	8 Stück à 23 x 15 cm	1158	



KOMPRESSION AUF EINEN BLICK



Die JOBST Patientenratgeber, Anmessleitlinie und Seminarkalender können Sie über Ihre*n JOBST Ansprechpartner*in oder den JOBST Customer Service bestellen.

Patientenratgeber Lymphödem und Lipödem



FLACHSTRICK- SORTIMENT UND KOMPRESSIONS- LÖSUNGEN

Stand Jänner 2025

240003867/AT 01/2025