

SICHERHEIT – VOM KLEINEN KRATZER BIS ZUM GROSSEN SCHNITT

Wundverschluss mit
Hautkleber und
Wundnahtstreifen



Leukoplast®

Healing for every body

Leukoplast® wound closure strip

Einfach wie ein Pflaster. Sicher wie eine Naht.

„Das muss genäht werden“ – für viele Patient*innen ein Stressmoment: Angst vor Nadeln, Betäubung oder vor sichtbaren Narben. Doch gerade bei kleinen Wunden und Inzisionen bieten Wundnahtstreifen von Leukoplast® eine sichere, atraumatische und nahezu schmerzfreie Alternative. Das verringert nicht nur Stress bei Ihren Patient*innen, sondern auch in der Praxis.

Indikationen

- Atraumatischer Verschluss von kleinen Wunden und Inzisionen
- Zusätzliche Spannungsentlastung bei Wunden, die mit intrakutanen Nähten geschlossen wurden
- Als Ergänzung zur Hautnaht

Vorteile auf einen Blick:



**REDUZIERTES
INFEKTIONSRISIKO***




**NAHEZU
SCHMERZFREI***



**BESSERE KOSMETISCHE
ERGEBNISSE***



**INTELLIGENTE
MATERIALSTRUKTUR**

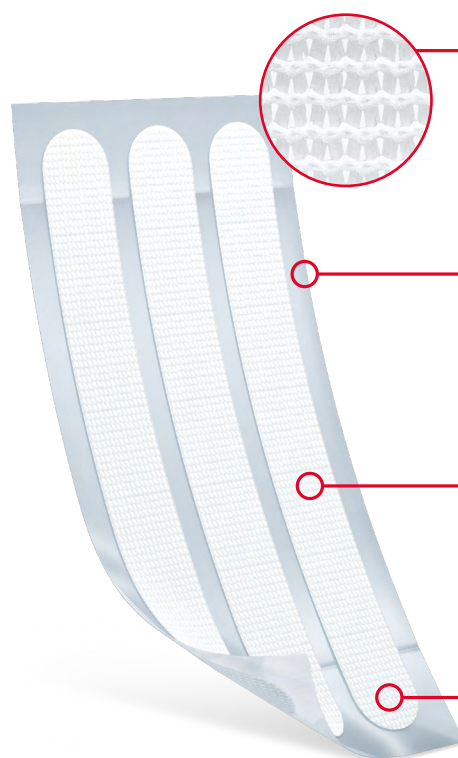

Hohe Luft- durchlässigkeit

Hilft, ein Aufweichen
der Haut zu verhindern

Einfache und genaue Applikation

Durch die transparente
Applikationskarte

Zuverlässige Klebkraft


Starker, gut verträglicher
Klebstoff

Abgerundete Enden


Verhindert das Aufrollen
des Materials

Intelligente Materialstruktur


Ermöglicht die Anpassung der Streifen an die ödembedingte Ausdehnung des Wundgewebes bei gleichzeitiger Vermeidung von Einschnürungen.

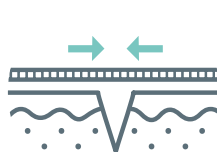

Ausgangspunkt
kurz nach der
Applikation

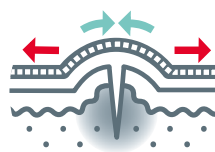

Expansion
während der
Ödemphase

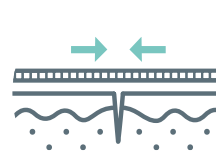

Kontraktion
im fortgeschrittenen
Stadium der Heilung

Leukoplast® skin adhesive

Schnell aufzutragen. Praktisch aufzubewahren.

Kleine Wunden einfach zukleben? Ja, mit Leukoplast® skin adhesive ist die Wundversorgung tatsächlich so unkompliziert. Der hochvisköse Hautkleber ermöglicht präzises Auftragen, verschließt Wundränder und ist für kleine wie große Patient*innen geeignet.

Indikationen

- Oberflächliche Schnitt- und Platzwunden
- Saubere Risswunden
- Chirurgische Inzisionen
- Subkutan genähte Wunden als zusätzlicher Wundverschluss
- Katheterfixierung

Vorteile auf einen Blick:



**HOHE
VISKOSITÄT**



**SCHNELLE
POLYMERISATION**



**FLEXIBEL BEI
BEWEGUNGEN**



**MINIMALE WÄRME-
ENTWICKLUNG**

Lagerung
ohne Kühlung bei
Raumtemperatur
(bis zu 30 °C)
möglich.

2-in-1-Applikator



Feine Spitze
für präzisen Wundver-
schluss



Breiterer Bereich
für einen breiteren
Schutzfilm

Handhabung wie ein Stift

Kaum Übung erforderlich

Tube und Applikator sind bereits verbunden

Kein Zurückziehen des
Klebers in den Applikator
nach Druckentlastung

Erhältlich in Blisterverpackung

Zur sicheren Aufbewahrung



Leukoplast®

Healing for every body

Sicherer Wundverschluss im Überblick

Bestellinformationen



Leukoplast® wound closure strip, steril, weiß, 1 BE mit 10 Peelbtl.

Abmessung in mm	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
38 x 6	6 Streifen/Peelbeutel	1/16	7129200	17875665
75 x 6	3 Streifen/Peelbeutel	1/16	7129202	17875671
100 x 6	10 Streifen/Peelbeutel	1/16	7129203	17875688
100 x 12	6 Streifen/Peelbeutel	1/16	7129204	17875694

Leukoplast® wound closure strip, steril, weiß, 1 BE mit 50 Peelbtl.

38 x 6	6 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274000	17875719
75 x 3	5 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274001	17875725
75 x 6	3 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274002	17875731
100 x 6	10 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274003	17875748
100 x 12	6 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274004	17875754

Leukoplast® wound closure strip, steril, weiß, 1 BE mit 25 Peelbtl.

100 x 25	4 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274005	17875760
----------	-----------------------	-----	---------	----------



Leukoplast® wound closure strip, steril, beige, 1 BE mit 2 Peelbtl.

38 x 6	6 Streifen/Peelbeutel	16/16	7129214	17875702
75 x 6	3 Streifen/Peelbeutel			

Leukoplast® wound closure strip, steril, beige, 1 BE mit 50 Peelbtl.

38 x 6	6 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274006	17875777
75 x 6	3 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274007	17875808
100 x 12	6 Streifen/Peelbeutel	1/4	7274008	17875814



Leukoplast® skin adhesive, steril

Menge in ml	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
0,7	10	1/8	7254104	18240012
0,36	10	1/8	7254105	18240029

Noch nicht genug? Jetzt scannen!

Wir unterstützen Ihr Wissen rund um die Behandlung kleiner, aber auch großer Wunden. Fallbeispiele und Videos zur Wundversorgung mit den **Leukoplast® Wundnahtstreifen** finden Sie unter folgendem QR-Code:

www.leukoplast.de/wundverschluss



PRAXIS
HACKS



GIB DIR

SICHER-
HEIT

Hacks für deinen
Praxisalltag

www.leukoplast.de/praxishacks/sicherheit



essity

Leukoplast®,
an Essity brand



Essity I BSN medical GmbH
Schützenstraße 1-3
22761 Hamburg

Tel. +49 (0)511 / 6781-110
Fax +49 (0)511 / 6781-132
www.leukoplast.de

Leukoplast®
Healing for every body