

I stedet for
krem eller
salver



Problemer med sopp i hudfolder?

Effektiv behandling mot sopp i hudfolder

Til bruk f.eks. i magefold, under bryst eller i lysken

Med Sorbact Fungi er det enkelt å behandle soppinfeksjon i hudfolder uten klebrige salver eller kremer. Sopp bindes til Sorbact-overflaten og fjernes fra huden ved bandasjebytte.

Les mer på sorbact.no



Bruksanvisning

1. Åpne den sterile forpakningen.
2. Klipp til ønsket lengde. Legges i direkte kontakt med det infiserte området.
3. Festes med bh, undertøy eller en hudvennlig tape på frisk hud.

Skift bandasjen en gang daglig.
Behandlingstid ca 7–10 dager.
Fortsett noen dager etter at symptomene er borte.

Obs!

Skal ikke brukes i kombinasjon med kremer eller salver.

Sorbact® Fungi fås på utvalgte apotek

Produkt	Størrelse	Stk./pakke
Sorbact® Fungi	10x200 cm	1

Sorbact® Fungi selges på apotek og er det samme som Sorbact® Ribbon Gauze som brukes i helsevesenet.

