

ENKEL Å BRUKE


MYK OG FLEKSIBEL



Sorbact® Fungi

For behandling av soppinfeksjoner i hudfolder

Mikroorganismene bindes til bandasjens overflate og fjernes når bandasjen skiftes.

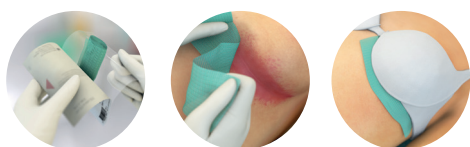

Bruk: I hudfolder, f.eks. på magen, under brystet, mellom tærne og i lysken.

Bruksanvisning: Klipp til ønsket lengde. Legges i direkte kontakt med infisert område. Fikser med bh, bukse, truse eller hudvennlig teip på sunn hud med f.eks. Leukoplast skin sensitive. Bytt 1 gang daglig. Behandlingstid ca. 7–10 dager. Fortsett å bruke bandasjen i noen dager etter at soppinfeksjonen ikke lenger er synlig.

Obs: Skal ikke brukes i kombinasjon med salver og kremer.

Materiale: Bomullsbasert Sorbact®-vev.

Produkt	Str.	Stk./pakning
Sorbact® Fungi	10x200 cm	1



- Kan brukes av barn, gravide og ammende
- Ingen risiko for resistensutvikling er beskrevet