



JETZT NEU:
Verbesserte
Passform für das
anatomisch
geformte
Hosenteil!


**ALLES
AUF
EINEN
BLICK**

JOBST® Confidence

Die richtige Messtechnik bei Kompressionsversorgungen mit anatomisch geformten Hosenteil


JOBST Confidence ist eine flachgestrickte Kompressionsversorgung für Patient*innen mit einem milden bis moderaten Lymphödem und Lipödem. Damit die Versorgung ihren optimalen Kompressionsdruck ausüben kann, ist das präzise Anmessen für eine genaue Passform notwendig.

Bitte
verwenden
Sie stets zum
Anmessen unserer
JOBST Confidence
Versorgungen
die JOBST
Messhilfen!*

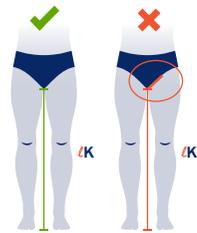


Länge l_K messen

- Anmesskarte im Querformat möglichst weit in den Schritt einsetzen
- **Lotrecht** vom Boden bis zum oberen Rand der Anmesskarte messen

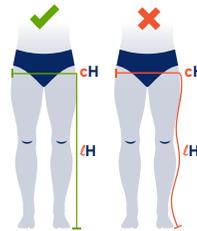


Länge l_H messen

- Den Gürtel um die **stärkste Stelle** des Gesäßes legen
- **Lotrecht** vom Boden bis zum oberen Rand des Gürtels messen

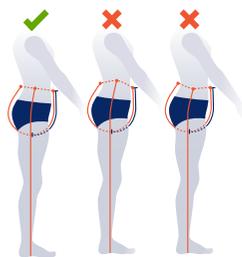

Umfang c_H/c_T & Länge l_H/l_T messen

- Der Anmessgürtel sollte in der Taille und um die Hüfte eine gerade Linie bilden
- Am Bauch zu hoch oder am Rücken zu tief sorgt für eine ungenaue Passform

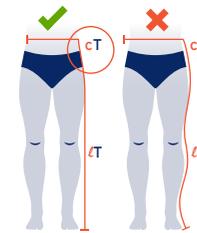


Länge l_T messen

- Den Gürtel auf gewünschter Bundhöhe platzieren (ca. Bauchnabel)
- **Lotrecht vom Boden bis zur Hüfte** und ab der Hüfte **konturnah bis zum oberen Rand** des Anmessgürtels messen



Länge l_L/l_{L^1} messen

- Das Maßband mit Maßband-Schieber am oberen Rand des Gürtels am Bauch anlegen
- Das Maßband für die Gesamtlänge l_L mit **leichter Spannung mittig durch die Gesäßfalte** (nicht über das Gesäß) zum oberen Rand des Gürtels auf dem Rücken ziehen
- Der Patient platziert den Maßband-Schieber mittig im Schritt
- Das Maßband lösen und an der Stelle des Maßband-Schiebers das l_{L^1} -Maß ablesen

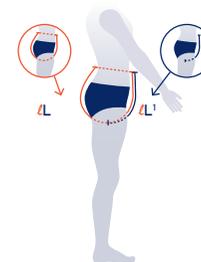

**Scannen.
Anschauen.
Maß nehmen.**

JOBST Confidence Versorgungen sollten anmodelliert und nicht zu stark hochgezogen werden




JOBST Logo
ca. 3cm lang



JOBST Logo
> 3cm lang



Um die optimale Passform sicherzustellen, beachten Sie bitte die unterschiedlichen Zugstärken für die Umfangsmessungen

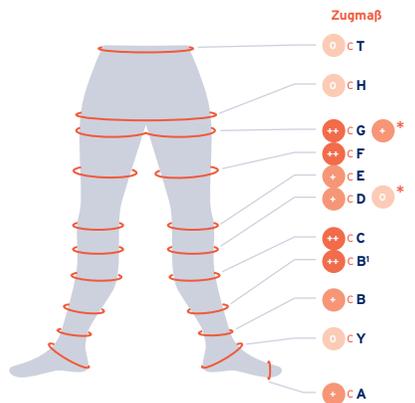

Welche Körpermaße eignen sich für JOBST Confidence?

Aufgrund des weichen Materials eignen sich einige Patient*innen besser und andere weniger gut für eine JOBST Confidence Kompressionsversorgung.

JOBST Confidence eignet sich für Patient*innen, ...

- ... mit einem milden bis moderaten Lipödem und Lymphödem ohne ausgeprägte Hautfalten oder Verformungen.
- ... die einen leichten Push-Up Effekt am Gesäß wünschen.
- ... denen aufgrund von Vorerkrankungen oder körperlichen Einschränkungen ein leichtes Anziehverhalten wichtig ist.
- ... die sportlich und aktiv sind.

JOBST Confidence eignet sich nicht für Patient*innen, ...

- ... die einen starken Druck spüren wollen.
- ... die sich eine Bauchweg- oder Shaping-Hose wünschen.
- ... mit Kalibersprüngen.
- ... mit Bauchüberhängen.
- ... mit Bauchfalten.

Hinweis: Möglicherweise eignet sich eine Kompressionsversorgung von JOBST Elvarex oder JOBST Elvarex Soft. Sprechen Sie uns gerne an.

Messpunkte	min./max. Maße	Hinweise
Umfangsmaße		
cG	max. 90cm	Wir empfehlen bei größeren Umfangsmaßen eine Versorgung mit JOBST Elvarex bzw. JOBST Elvarex Soft.
cH	bis 140cm	Eine Versorgung mit JOBST Confidence ist auch für größere Umfänge möglich, allerdings können diese einen Einfluss auf die optimale Passform haben.
Längenmaße		
ℓB	min. 7cm	Eine geringere Länge ist unrealistisch.
ℓL	max. 100cm	Wir empfehlen bei größeren Längenmaßen eine Versorgung mit JOBST Elvarex bzw. JOBST Elvarex Soft.
ℓL'	max. 45cm	ℓL' muss immer geringer als ℓL sein und darf maximal 45% der Gesamtlänge (ℓL) aufweisen.
Verhältnisse Maße zueinander		
ℓG zu ℓK		Längere Maße als 6cm bis 7cm sind unüblich und können zu mehr Material am Bein und somit zu Faltenbildung führen. In manchen Fällen können ℓG und ℓK dieselbe Länge aufweisen.
ℓK zu ℓH	min. 4cm	Ein geringerer Abstand ist unrealistisch.
ℓH zu ℓT	min. 7cm	Das Taillenband benötigt ca. 4cm bis 5cm. Mindestens 2cm Gestrick müssen außerdem noch hinzukommen.

Sollten Sie Fragen haben, beantwortet Ihnen unser Lymphologie Team diese auch gerne telefonisch unter: +49 (0) 2822 607-111.



JOBST®, an Essity brand

Deutschland:
BSN-JOBST GmbH
Beiersdorfstraße 1
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland
www.jobst.de
Tel. +49(0) 2822 607-100
Fax +49(0) 2822 607-199
jobstgmbh@essity.com

Österreich:
BSN-JOBST GmbH
Beiersdorfstraße 1
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland
www.jobst-austria.at
Tel. +49(0) 2822 607-333
Fax +49(0) 2822 607-199
ISSE@essity.com



01747013H