

COMPRESSIE & ZWACHTELEN

HANDIGE TIPS & TRICKS VOOR DE PRAKTIJK

HUID & VOORBEREIDING

- Zorg dat het been goed gewassen en geïnspecteerd is voordat je een nieuwe zwachtel of compressiesysteem aanbrengt.
- Verzorg de omliggende huid met **Cutimed® Acute**. Dit helpt een droge huid tegen te gaan.
- **Cutimed® Acute** kan ook onder therapeutisch elastische kousen worden gebruikt.

ONDERLAAG & TOLERANTIE

- De onderlaag van het JOBST Compri2 systeem wordt doorgaans **erg goed verdragen**.
- Deze onderlaag wordt zelfs onder bijna elk gips gebruikt – dat onderstreept de huidvriendelijkheid en betrouwbaarheid.

AANLEGGEN & SYSTEEMKENMERKEN

- Je kunt **Compri2 niet te ver uitrekken** tijdens het aanleggen, dat signaal helpt een gelijkmatige drukopbouw te behouden.
- Compri2 vormt na aanleg een **goede, stevige buis**, wat bijdraagt aan stabiliteit.
- De aanlegmethode is **hetzelfde bij alle zwachtels**, zowel Compri2 als Compri2 Lite.
- De zwachtel **zakt niet af**, ook niet bij forse oedeemafname.
- Alle genoemde zwachtels zijn **latexvrij**.
- Ulcercare is ook beschikbaar **met rits**, wat het aantrekken nog makkelijker maakt.

MATERIAALKEUZE & INDICATIES

- Gebruik alleen een **liner bij arterieel vaatlijden** of wanneer mild zwachtelen is voorgeschreven.
 - Dit is een beter alternatief dan (dubbele) Tensogrip of niet medische steunkousjes, wat nog vaak wordt gedaan.
- Overweeg **Gelostretch** bij jeuk of huidproblematiek, zoals eczeem.



WIST JE DAT?

Er **Nederlandse instructievideo's** beschikbaar zijn voor het aanleggen van een Compri2 en de Comprilan? We geven daarnaast ook training op locatie voor teams en individuele therapeuten.

MEER WETEN OF PROBEREN? KRIJG ONDERSTEUNING.

Ben je benieuwd naar de Compri2 (lite), de UlcerCare of wil je graag een **training volgen**? Neem dan contact op met wondzorg.nl@medical.essity.com.