

2026

N I C H T S H Ä L T D I C H A U F



JOBST®

LYMPHOLOGIE
JOBST Sortimentsübersicht

DEINE ARBEITSSEITE FÜR DIE KUNDENBERATUNG

Am besten als Lesezeichen zur Produktseite nutzen.

REZEPTEBESPIEL

Krankenkasse bzw. Kostensträger		BVG Hilf- Impf- Spz-Si. Begr- Apotheken-Nummer / IK						
Geburtsj.	geb.	6	7	8	9	mittl. gest. - Befrei.		
Geb.-pfl.								
noch								
Zeitung								
Name, Vorname des Versicherten	geb. am							
JOBST	06.11.89							
Caroline								
Beiersdorfstraße 1								
46446 Emmerich								
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status						
Unfall								
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum						
Arbeits- und								
auf dem	Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)							
auf dem	1 Stück AT-Strumpfhose KKL 2,							
auf dem	Offene Fußspitze, Slipform, kompr. Leibteil							
auf dem	Maßfertigung, flachgestrickt							
auf dem	Diagnose: E88.21 Lipödem der unteren Extremitäten							
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)						
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer							

Erstversorgung

Wurde an eine Wechselversorgung gedacht?

Folgeversorgung

Wann gab es die letzte Versorgung?

Krankheitsbild

schlechter

gleich

besser

keine Änderung

Gewohnheiten
Sport,
Sitzen/Stehen,
Gartenarbeit

Hindernisse
Anziehen,
Waschen,
tägl. Tragen,
Allergien,
Schwitzen

Anspruch
Mode,
Zuzahlung,
Belastbarkeit,
Verträglichkeit,
Zusätze

Produktberatung

PRODUKTBERATUNG FLACHSTRICK

Hat Schwierigkeiten beim Anziehen und/oder empfindliche Haut



JOBST Elvarex Soft wurde für ein leichteres Anziehen entwickelt und mit weichen Garnen für Kund*innen mit trockener, empfindlicher oder sensibler Haut hergestellt. Das weichere Material ist angenehm zu tragen.

Wünscht sich mehr Individualisierung



JOBST Elvarex Soft ist in 10 Wohlfühlfarben und **JOBST Elvarex** in 15 Wohlfühlfarben erhältlich. Bei **JOBST Confidence** können neben 8 Farben zusätzlich individuelle Optionen, wie ein florales Taillenband oder eingestrickte Initialen, ausgewählt werden.

Wünscht sich sicheren Halt



Die **JOBST SoftFit-Technologie** wurde entwickelt, um die Kompression sicher an ihrem Platz zu halten, ohne unangenehm einzuschnüren, und kann als Zusatz für einen Kniestrumpf (AD) oder Armstrumpf (CG¹ und AG¹) bestellt werden.

Empfindlich im Gelenkbereich



Die zahlreichen Zusätze von **JOBST Elvarex** und **JOBST Elvarex Soft** (z. B. Funktionszonen, Futterstoffe und Taschen) sowie Funktionszonen von **JOBST Confidence** wurden entwickelt, um Hautirritationen vorzubeugen und Faltenbildung zu reduzieren, um so den Komfort im Gelenkbereich zu erhöhen.

Wünscht sich eine feste Unterstützung



JOBST Elvarex bietet einen starken Halt und damit ein zuverlässiges und effektives Ödem-Management bei einem moderat bis schwer ausgeprägtem Lymph- und/oder Lipödem. Die zusätzlichen Kompressionsklassen 3 Forte und 4 Super geben deinen Kund*innen die Freiheit noch individueller den Kompressionsdruck auf ihre Bedürfnisse anzupassen.

Ist besonders aktiv/ neigt zum Schwitzen



Das hochentwickelte Feuchtigkeitsmanagement-System von **JOBST Confidence** hält die Haut deiner Kund*innen angenehm trocken. Das Gestrick von **JOBST Elvarex Soft** und **JOBST Elvarex** ist atmungsaktiv und ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.

Wünscht sich natürliche Materialien



Ab Kompressionsklasse 2 bietet **JOBST Elvarex** einen hohen Baumwollanteil.

JETZT DIGITAL DURCH- STARTEN!

Bei Fragen erreichst
du unser Team Digital
unter
02822 / 607 - 360



Jetzt scannen
und kostenlos
anmelden!



ALLE VORTEILE VOM JOBST eShop



Sofortiger Aufruf deiner
Kostenvoranschläge



Einfaches
Retourenmanagement



Intelligente Verwaltung
von Kund*innen



Voll-digitale
Dokumentation aller Maße



Zeiteffiziente
Folgebestellungen



Sprachgesteuerte
Maßeingabe mit JOBST
Xpert Voice® möglich





Keine Fehler oder
Rückfragen in
der Konfiguration



1 % elektronischer
Bestellrabatt auf
alle Produkte



Kompatibel mit allen
Endgeräten, optimal für
unterwegs

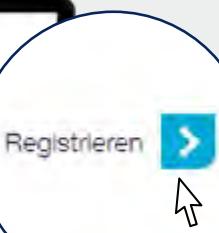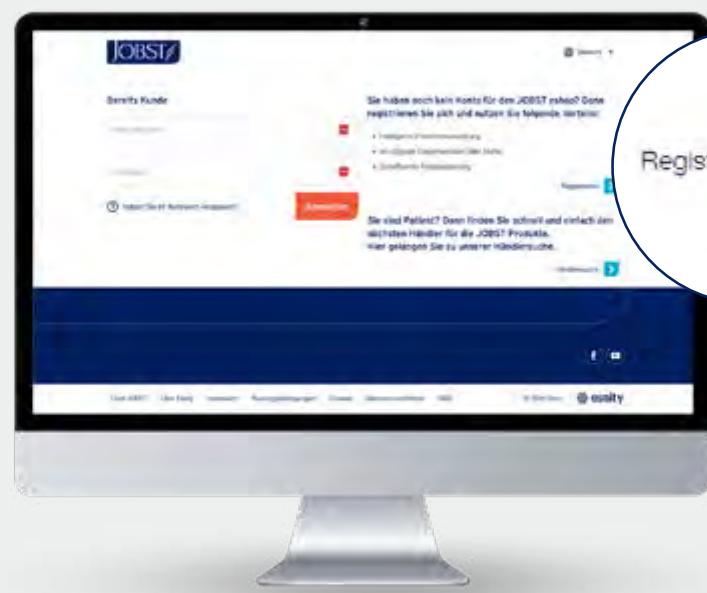

Registrierung unter eshop.jobst.de



Video entdecken



ALLE INHALTE AUF EINEN BLICK

Kundenservice	Seite 9
1. Beratung	
1.1 Versorgungsvarianten	Seite 12
1.2 Indikationsübersicht Flachstrick	Seite 14
1.3 Beratungsansätze	Seite 16
1.4 Zusätze	Seite 18
1.5 Haftbandvarianten	Seite 19
2. Medizinische Kompressionsversorgungen für spezielle medizinische Anwendungen	
2.1 JOBST FarrowWrap	Seite 20
3. Medizinische Kompressionsstrümpfe Flachstrick	
3.1 JOBST Confidence	Seite 24
3.2 JOBST Elvarex® Soft	Seite 36
3.3 JOBST Elvarex® Soft Seamless	Seite 50
3.4 JOBST Elvarex® untere Extremitäten	Seite 52
3.5 JOBST Elvarex® obere Extremitäten	Seite 72
3.6 JOBST Elvarex® Plus	Seite 82
3.7 JOBST Relax	Seite 86
4. Medizinische Kompressionsstrümpfe Flachstrick	
4.1 JOBST Bellavar®	Seite 88
5. Anziehhilfen und Pflege	
5.1 JOBST Hautpflege und Hautkleber	Seite 92
5.2 Arion An- und Ausziehhilfen	Seite 94
5.3 JOBST Anziehhilfen	Seite 96
5.4 JOBST Kompressionspflege	Seite 97
6. Ambulante u. stationäre Kompressionsversorgung	
6.1 Kurzzugbinden, Unterpolsterung, Kompressionssysteme	Seite 98
6.2 2-Lagen-Kompressionssysteme, Bandagenset	Seite 100
7. Verordnung	
7.1 Ärztliche Verordnung	Seite 102
7.2 Kompressionsklassen, Indikationen, Kontraindikationen	Seite 94
7.3 Positionsnummern Flachstrick	Seite 96
Allgemeine Geschäftsbedingungen	Seite 108

WIR STELLEN UNS VOR

Um die Symptome seiner venösen Insuffizienz zu lindern, gründete Conrad Jobst 1950 JOBST. Seitdem fokussieren wir uns auf die Herstellung hochwertiger, medizinischer Kompressionsversorgungen und setzen uns mit voller Kraft dafür ein, die Lebensqualität von Menschen mit phlebologischen und lymphologischen Erkrankungen sowie Lipödemen zu verbessern.

Wir sind Essity

Zusammen sind wir Leukoplast®, Cutimed®, Delta-Cast®, Actimove®, JOBST®, TENA® und noch mehr. Unser Name setzt sich zusammen aus Essentials (Wesentliches) und Necessities (Notwendigkeit). Wir setzen uns weltweit für Gesundheit und Wohlbefinden ein. Durch gezielte Initiativen möchten wir helfen, Grenzen und Tabus zu überwinden, die diesem Ziel entgegenstehen.



Wir handeln nachhaltig

Die vereinten Nationen haben die ‚Dekade des Handelns‘ zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele ausgerufen. Als ein weltweit führendes Hygiene- und Gesundheitsunternehmen kommt Essity hier eine wichtige Rolle zu. Zusammen mit unseren Kund*innen und Partnerschaften arbeiten wir gemeinsam daran, dass es den Menschen und dem Planeten besser geht.

www.essity.de/nachhaltigkeit



Wir achten auf Qualität

Um höchste Standards erfüllen zu können, unterliegen unsere JOBST Produkte strengen Qualitätskontrollen. Interviews und Tests mit Patient*innen und medizinischem Personal helfen uns, behandlungsorientierte und auf Patient*innen zugeschnittene Produkte zu entwickeln. JOBST folgt den strengen Qualitätskontrollen der ISO-Normen. Darüber hinaus werden unsere Produkte aus gesundheitsfreundlichen Materialien und ohne schädliche Farbstoffe hergestellt, die alle dem STANDARD 100 by OEKO-TEX® entsprechen.



Unser Beitrag für eine aufgeklärte Gesellschaft

Wir wollen nicht, dass das Lipödem oder Venen- und Lymphkrankheiten ein Tabu bleiben. Deshalb haben wir sechs Personen mit lymphatischen und phlebologischen Erkrankungen vereint. Mit ihren inspirierenden Geschichten wollen wir, dass Patient*innen Mut und Selbstbewusstsein zurückgewinnen. Erfahre im Folgenden mehr über ihre ermutigenden Erfahrungen: www.jobst.de/nichtshaeletdichauf



Wir verpflichten uns zu fairem Wettbewerb

Wir bei JOBST haben uns dem eurocom-Kodex sowie dem MedTech Europe Code of Ethical Business Practice verpflichtet, um zu einem fairen Wettbewerb beizutragen. Der eurocom-Kodex basiert auf vier Grundprinzipien des Handelns: Transparenz von Kooperationen und Leistungen, keine Beeinflussung durch Geschenke, Ausgewogenheit von Leistungen und Gegenleistungen sowie die Dokumentation der Zusammenarbeit mit Partnern. MedTech Europe regelt alle Aspekte der Beziehungen zwischen der Branche und Healthcare Professionals sowie Organisationen des Gesundheitswesens, um sicherzustellen, dass diese jederzeit ethisch und professionell handeln.



Wir sagen Danke, denn zusammen können wir Grenzen überwinden

Wir bedanken uns bei allen, die engagiert dazu beitragen, mit JOBST Produkten Grenzen und Tabus in der Kompressionstherapie zu überwinden. Dieser Dank gilt Ärzt*innen, medizinischen Expert*innen im Fachhandel, unseren Kund*innen und den Patient*innen sowie unseren Kolleg*innen in den Standorten und Werken. Dieses Engagement ermöglicht es uns, auch in Zukunft für dich da zu sein und einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden in unserer Gesellschaft zu leisten.

**Wir achten auf
unsere Kund*innen,
Konsument*innen,
die Umwelt und
aufeinander.**



SERVICE

Bei Essity arbeiten wir in Emmerich, Hamburg und deutschlandweit im Außendienst daran mit JOBST Produkten das Leben von Menschen zu verbessern und für dich ein wertvoller Fachhandelspartner zu sein. Unser Service ist deshalb auf dich zugeschnitten.

Unser Service



Online bestellen

Bestelle jederzeit online im JOBST eShop und profitiere von vielen Möglichkeiten: direkte Nachbestellungen, Zugriff auf Kostenvoranschläge, sprachgesteuerte Maßeingabe mit JOBST Xpert Voice®.



Expressversand

Bei Anfrage bringen wir deine Bestellung auch per Express auf den Weg. Hierfür berechnen wir zusätzlich für eine Zustellung bis 12 Uhr 10€ und für eine Zustellung bis 10 Uhr 20€.



Retouren

Für unsere stets lösungsorientierte Retourenabwicklung sichern wir dir eine kostenfreie Retoure in Garantiefällen zu. Für einen Abholservice in Kulanzfällen berechnen wir einmalig 6,90€.



NEU!
Retourenmanagement
im eshop.jobst.de

Video-Link



Schneller Versand

Bei Bestellung von Lagerware am Vormittag erfolgt der Versand noch am selben Tag. Bestellungen von Maßware versenden wir mehrheitlich innerhalb von 2 Werktagen. Die Versandkostenpauschale von 5,90€ berechnen wir maximal einmal am Tag. Nachlieferungen sind selbstverständlich kostenlos. Du erhältst auf Wunsch eine Sendungsbestätigung per E-Mail.



Kostenfreie Anmesshilfen & Maßblöcke

Bestelle bei Bedarf jederzeit über unseren Kundenservice Anmesshilfen sowie die aktuellen Maßblöcke für unsere JOBST Rundstrick- und Flachstrickversorgungen. Die stets aktuellen JOBST Maßblätter findest du auch unter:

www.jobst.de/fachhandel

KUNDENSERVICE

Du erreichst uns persönlich montags bis donnerstags von 8:00 bis 18:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr.

Deine Telefonnummer
für alle Fragen:

02822 / 607 - 100

Team Customer Service

Auftragsannahme Sortimentsberatung Sendungsverfolgung Produktverfügbarkeiten	 02822 / 607 - 100  +49 2822 / 607 - 333	 jobstgmbh@essity.com  ISSE@essity.com
Auftragserfassung	 02822 / 607 - 199	
Kostenvoranschläge	 02822 / 607 - 208	

Team Lymphologie

Sortimentsberatung speziell für unsere lymphologischen Versorgungen	 02822 / 607 - 111	jobstgmbh@essity.com
---	--	----------------------

Team Digital

Unterstützung speziell für den JOBST eShop und digitale Messsysteme	 02822 / 607 - 360	eshopjobst@essity.com
---	---	-----------------------

Retourenservice

Änderungen- und Retourenannahme	 02822 / 607 - 222	produktservice@essity.com
------------------------------------	---	---------------------------

Patient*innenservice

Unterstützung für Patient*innen	 02822 / 693 - 9009	servicejobst@essity.com
---------------------------------	--	-------------------------

Webseite für den Fachhandel

www.jobst.de/fachhandel



- Download von Produktinformationen, Bestellformularen und Maßblättern
- Informationen zum JOBST eShop
- Trainings & Events
- Neuigkeiten



ZUGMATRIX

Um die optimale Passform unserer Flachstrickversorgungen zu erreichen, müssen Umfangsmessungen mit unterschiedlichem Zugmaß durchgeführt werden.

Wie hier dargestellt, reicht das Zugmaß von 0 (Anlegen/ohne Zug) bis +++ (maximaler Zug).

Die Messung für JOBST Flachstrickversorgung umfasst Zugmaße von 0 bis ++ Zug.

Das maximale Zugmaß von +++ ist hier dargestellt, um dir einen Anhaltspunkt zu geben.

Es wird beim Ausmessen von deinen Kund*innen normalerweise nicht verwendet. Je nach Ausprägung des Ödems kann es zum Einsatz kommen.

0

Ohne Zug (Anlegen)

++

stärkerer Zug bis zum zweiten Widerstand

+

leichter Zug bis zum ersten Widerstand

+++


Maximaler Zug

JOBST FLACHSTRICK

Übersicht über das Zugmaß je Messpunkt


- Für jede der Umfangsmessungen, die für eine JOBST Flachstrickversorgung erforderlich ist, wird ein bestimmtes Zugmaß verwendet.
- Die Grafik zeigt dir das Gesamtbild und enthält die Symbole der Zugmatrix neben dem jeweiligen Messpunkt.
- Diese Zugmatrix gilt für alle JOBST Flachstrickversorgungen und muss für Lymphödem- und Lipödem-Patient*innen angewendet werden.
- Bitte berücksichtige beim Anmessen die Schmerztoleranz der Kund*innen.

UNTERE EXTREMITÄTEN

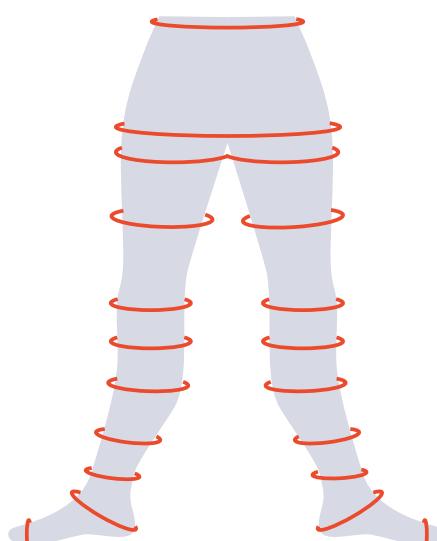

* mit Silikonband und geradem Abschluss
** für JOBST Confidence

OBERE EXTREMITÄTEN

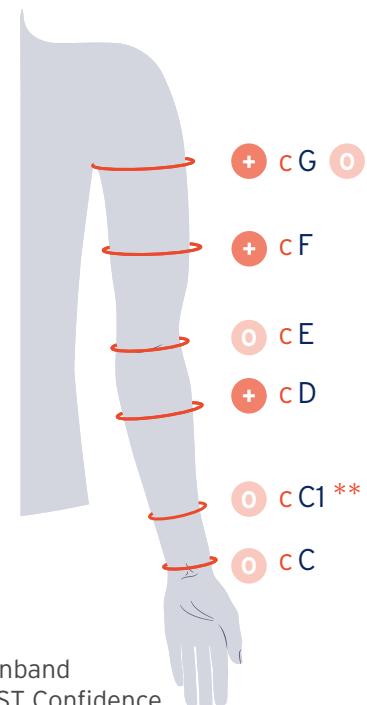

* mit Silikonband
** für JOBST Confidence

EINFACHES ANMESSEN



www.youtube.com/@JOBSTDeutschland

JOBST AUF YOUTUBE

Du bist auf der Suche nach weiteren Tipps & Tricks für das richtige Anmessen von flachgestrickten Kompressionsversorgungen? Dann besuche jetzt unseren YouTube Kanal und schaue dir Schritt-für-Schritt-Anleitungen an, um die richtigen Techniken zu lernen und deine Fähigkeiten für eine noch bessere Patientenversorgung zu verbessern!

JOBST ANMESSLEITLINIE UND MASSBLÄTTER

Auf unserer Website findest du die JOBST Anmessleitlinie, die als Richtlinie für das Anmessen unserer Flachstrickversorgungen dient, sowie die aktuellen Maßblätter und Bestellformulare.



Online immer verfügbar unter www.jobst.de/fachhandel/downloads
oder direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de bestellen.

VERSORGUNGSVARIANTEN

Beinversorgungen				
				
AD Knie- / Wadenstrumpf	AF Halbschenkelstrumpf	AG Oberschenkelstrumpf		AG-T Hüftbefestigung rechts-/linksseitig
				
AG-HT Einbeinversorgung mit Hosenteil	AT Strumpfhose	AT/UM Strumpfhose mit Schwangerschaftshosenteil		AT/Herr Strumpfhose mit Hodensack
				
BT Leggins	B'T Leggins	CT Caprihose	ET Bermuda	FT Radler
MÖGLICHE KOMBINATIONSVERSORGUNGEN: Begründete Versorgungssituationen können die Kombination verschiedener Strumpfausführungen erfordern				
				
AT*+AA Leggins	BT+AD Leggins	CT+AD Caprihose	ET+AF Bermuda	FT+AG Radler

Fußversorgungen		
		
AA Zehenteil (mit vier Zehen)		AA Zehenteil (mit fünf Zehen)
		
		AB / AB¹ Socke

AA Zehenteil		
Versorgungsvariante im Überblick		
JOBST Elvarex AA Offene Zehen Mit vier Zehen Mit fünf Zehen	JOBST Elvarex Plus AA Mit vier Zehen Mit fünf Zehen	JOBST Elvarex Soft Seamless AA Mit vier Zehen

Armversorgungen

CG¹
Armstrumpf
mit schrägem Abschluss



CH
Armstrumpf
mit Kappe und Halterung




AG¹
Armstrumpf mit
Hand und schrägem Abschluss



AH
Armstrumpf mit
Hand, Kappe und Halterung

MÖGLICHE KOMBINATIONSVERSORGUNGEN: Begründete Versorgungssituationen können die Kombination verschiedener Strumpfausführungen erfordern

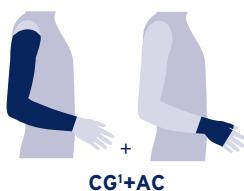

CG¹+AC

Handversorgungen

AC¹
Handschuh



AE
Langer Handschuh

Varianten für die Versorgung der Finger

ohne Finger,
ohne Daumen



ohne Finger,
mit Daumen,
Länge variabel





mit Finger,
mit Daumen,
Länge variabel

INDIKATIONSÜBERSICHT FLACHSTRICK

Lymphödem, Lipödem, mehrere Indikationen

Die wichtigsten Eigenschaften der JOBST Materialien sind Grundlage unserer Produkt-Empfehlungen für die Erhaltungsphase der unterschiedlichen Stadien primärer und sekundärer Lymphödeme sowie für die unterschiedlichen morphologischen Ausprägungen des Lipödems.

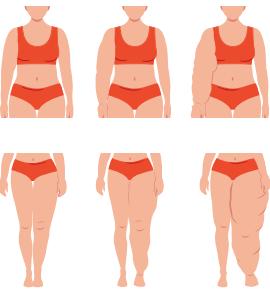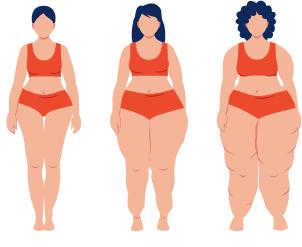Indikation / Diagnose	Zeitraum	Verfügbare Kompressionsklasse je Kompressionsversorgung*
LYMPHÖDEM		
	Stadium 1 Reversibel, weiche teigige Schwellung, Dellen leicht eindrückbar, keine Hautveränderung	
	Stadium 2 Spontan irreversibel, beginnende Fibrose (beginnende Gewebeverhärtung), Dellen eindrückbar	
	Stadium 3 Ausgeprägte Form, Fibrose (Gewebeverhärtung), Dellen kaum eindrückbar, typische chronische Hautveränderung	
LIPÖDEM		
	<ul style="list-style-type: none"> Symmetrische, disproportionale Vermehrung des Fettgewebes der Beine (seltener der Arme) und Schmerzen (Druck- und Berührungsschmerz, Spontanschmerz) sind die diagnostischen Kriterien. Fettvermehrung ist homogen über Ober- und/oder Unterschenkel, Ober- und/oder Unterarm oder nur Ober- oder Unterschenkel. Die Füße/Hände sind nicht betroffen Die morphologische Ausprägung ist kein Hinweis auf den Schweregrad, eine Stadieneinteilung entspricht nicht länger dem wissenschaftlichen Stand. 	
KOMORBIDITÄTEN		
Lipödem mit einem primären oder sekundären Lymphödem		
Phlebologische Erkrankung mit einem primären oder sekundären Lymphödem		

*Die erforderliche Kompressionsklasse für die Versorgung des*der einzelnen Patient*in legt in jedem Falle der*die verordnende Ärzt*in fest. Die nachfolgende Aufstellung der einzelnen Diagnosen und zugeordneter Kompressionsversorgungen hat Empfehlungscharakter und ist daher nicht bindend. Die Auswahl der Kompressionsklasse ist abhängig von Alter und Mobilität des*der Patient*in, Umfängen der betroffenen Extremität, eventuellen Begleiterkrankungen und individueller Druckempfindlichkeit des*der Patient*in.

JOBST FarrowWrap	JOBST Confidence	JOBST Elvarex Soft	JOBST Elvarex Soft Seamless (Hände & Zehen)	JOBST Elvarex	JOBST Elvarex Plus (Hand & Zehen in KKL 1,2)	JOBST Relax
Entstauungsphase	Tagesversorgung					Nachtversorgung
LITE 20-30 mmHg	KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 1	Arm 15-20 mmHg Bein 15-20 & 20-30 mmHg
	KKL 2	KKL 2		KKL 2		
CLASSIC 30-40 mmHg	KKL 3	KKL 3	KKL 2	KKL 3 & 3 forte	KKL 2	
				KKL 4 & 4 super		
initiale Entstauungs- phase	●	●	●			●
	●	●	●	●	●	●
				●	●	●
initiale Entstauungs- phase	●	●		●		

FINDE DIE RICHTIGE VERSORGUNG

		LYMPHÖDEM					
		Stadium 1		Stadium 2		Stadium 3	
Produktempfehlung	Ausprägung		Leichte Verformung		Moderate Verformung		Schwere Verformung
	Gewebe-eigenschaften		Festes Gewebe		Weiches Gewebe		Hartes Gewebe und/oder Fibrose
	Hautfalten		Keine bis geringe Hautfalten		Geringe bis moderate Hautfalten		Ausgeprägte Hautfalten
Produktempfehlung	JOBST Confidence						
	JOBST Elvarex Soft						
	JOBST Elvarex Seamless						
	JOBST Elvarex						
Produktempfehlung	JOBST Elvarex Plus						
	Kunden-wunsch nach festem Halt/Wandstabilität						

Hinweis: Unsere flachgestrickten Kompressionsversorgungen dienen der Therapie zuvor maximal entstauter Extremitäten. Zur Entstauungstherapie empfehlen wir unser Kompressionsbinden-Sortiment oder JOBST FarrowWrap. Die hier abgebildeten Empfehlungen dienen lediglich der Orientierung bei der Wahl der Kompressionsversorgung. Bitte stets die individuellen Patientenbedürfnisse beachten. Nicht immer gilt jede Angabe für jede Kund*in.

		LIPÖDEM					
		Leichte Verformung		Moderate Verformung		Schwere Verformung	
Produktempfehlung	Körperform		Leichte Verformung		Moderate Verformung		Schwere Verformung
	Hautfalten		Keine bis geringe Hautfalten		Geringe bis moderate Hautfalten		Ausgeprägte Hautfalten
	JOBST Confidence						
Produktempfehlung	JOBST Elvarex Soft						
	JOBST Elvarex						
	Kunden-wunsch nach festem Halt/Wandstabilität						

Hinweis: Die morphologische Ausprägung ist kein Hinweis auf den Schweregrad, eine Stadieneinteilung entspricht nicht länger dem wissenschaftlichen Stand. Die hier abgebildeten Empfehlungen dienen lediglich der Orientierung bei der Wahl der Kompressionsversorgung. Bitte stets die individuellen Patientenbedürfnisse beachten. Nicht immer gilt jede Angabe für jede Kund*in.

PATIENTENBEISPIELE



Name: Anna | **Alter:** 28 Jahre | **Beruf:** Büroangestellte

Diagnose: Milde bis moderate Ausprägung von Lymphödem und/oder Lipödem

Lebensstil: Während Anna tagsüber in ihrer sitzenden Tätigkeit vor allem Tragekomfort wichtig ist, muss sich ihre Kompressionsversorgung beim Yoga mit einem hohen Grad an Bewegungsfreiheit und auch mit Schwitzen unter Beweis stellen.

Warum JOBST Confidence? Die innovative Contour Fit Technologie von JOBST Confidence bietet Anna eine maßgeschneiderte Passform, die ihre Bewegungsfreiheit nicht einschränkt. Das weiche und stabile Gestrick sorgt für die notwendige Unterstützung und gleichzeitig für hohen Tragekomfort. Das fortschrittliche Feuchtigkeitsmanagement-System hält ihre Haut trocken, während die diskreten Funktionszonen zusätzlichen Komfort bieten.



Name: Martina | **Alter:** 45 Jahre | **Beruf:** Lehrerin

Diagnose: Milde bis moderate Ausprägung von Lymphödem und/oder Lipödem

Lebensstil: Martina ist eine engagierte Lehrerin, die viel Zeit im Stehen und Gehen verbringt. Ihre empfindliche Haut und der morgendliche Zeitdruck stellen sie manchmal vor Herausforderungen, ihre Kompressionsversorgung wirklich täglich zu tragen.

Warum JOBST Elvarex Soft? JOBST Elvarex Soft bietet Martina eine leichte und atmungsaktive Kompressionsversorgung, die speziell für empfindliche Haut entwickelt wurde. Die hautschonende Weichheit und Atmungsaktivität sorgen für angenehmen Tragekomfort, während die strukturierte Oberfläche einen Mikro-Massage-Effekt bietet, der den Lymphabfluss unterstützt. Das Material erleichtert ihr das An- und Ablegen, was Zeit am Morgen und Abend spart!



Name: Jürgen | **Alter:** 58 Jahre | **Beruf:** Grafikdesigner

Diagnose: Stark ausgeprägtes Lymphödem am Bein

Lebensstil: Jürgen ist eine kreative Person, die viel Zeit am Computer verbringt. In seiner Freizeit malt er gerne und macht leichte Fitnessübungen. Aufgrund seines sekundären Lymphödems nach einer erfolgreichen Krebstherapie ist er auf die Zuverlässigkeit einer festen Kompressionsversorgung angewiesen.

Warum JOBST Elvarex? JOBST Elvarex bietet Jürgen eine zuverlässige Kompression für eine feste Unterstützung. Die bewährte Flachstrickqualität passt sich optimal an seine individuellen Bedürfnisse an. Die strukturierte Oberfläche bietet Stabilität und hilft, Hautfalten zu überbrücken, während der Mikro-Massage-Effekt den Lymphabfluss unterstützt. Die zusätzlichen Funktionszonen ermöglichen Jürgen eine maximale Bewegungsfreiheit - auch bei langem Sitzen am Computer.

OPTIMAL SITZENDE FLACHSTRICK-VERSORGUNGEN

Der Schlüssel zur Therapietreue ist ein optimaler und komfortabler Sitz der medizinischen Kompressionsversorgungen. Einen wichtigen Beitrag hierzu leistet die richtige Wahl des Hosenbundes. Das vielfältige Flachstrick-Sortiment von JOBST bietet die passende Lösung für die individuellen Bedürfnisse Ihrer Patient*innen.



Strickrand Klassisch

Das Gestrick wird mit einer einfachen Naht abgeschlossen. Optional ist es auch mit Reißverschluss erhältlich.



Durchziehgummi Individuell

Das in den Strickrand eingefasste Durchziehgummi lässt sich individuell justieren. Optional ist es auch mit Reißverschluss erhältlich.



Haftband Sicher

Ein flexibles Textilband mit Silikon in verschiedenen Ausführungen sorgt für sicheren Halt, besonderen Komfort und verhindert das Verrutschen selbst bei Bewegung.



Taillenband Komfortabel

Ein besonders weiches Abschlussband fühlt sich angenehm auf der Haut an und bietet einen modischen Zusatz. Optional ist es auch mit Reißverschluss oder Klettverschluss erhältlich.

VERBESSERTE PASSFORM UND MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT



Oben schräg
Spezielle Ausformung für eine anatomisch angepasste Kompressionswirkung bis an die Basis des Schultergelenks.

Funktionszone

Ellenbogen
Aus weichen Garnen zirkulär eingestrickte Zone in Höhe des Ellenbogens zur Verringerung von Faltenbildungen und damit verbundenen Einschnürungen.



Slipform

Außen höher geformtes Gestrick für einen besseren Halt und Sitz. Zur Vermeidung zirkulärer Einschnürungen.

Oberbeinerhöhung

Vorne erhöhtes und nach hinten keilförmig zulaufendes Gestrick. Für eine bessere Passform von der Leiste bis zum Gesäß.

Funktionszone Knie

Aus weichen Garnen gestrickte Zone wirkt zu hohem Druck sowie Einschnürungen entgegen.

Schräger Fuß

Anatomisch angepasste Kompressionswirkung bis an die Zehengrundgelenke.


T-Ferse

Dient der Entlastung des Fußrückens.

	JOBST Confidence	JOBST Elvarex Soft	JOBST Elvarex
Untere Extremitäten			
Hosenbund			
Strickrand		●	●
Durchziehgummi	●	●	●
Haftband			●
Taillenband	●*	●	●**
Slipform	Anatomisch geformtes Hosenteil		
Oberbeinerhöhung	●	● (AG)	●
Funktionszone Knie	●		●
T-Ferse	●	●	●
Schräger Fuß	●	●	●
Obere Extremitäten			
Schräger Abschluss	●	●	●
Funktionszone Ellenbogen	●		●

* Optional auch als florales oder mit motivierenden Prints bedrucktes Taillenband.

** Optional auch mit Klettverschluss.

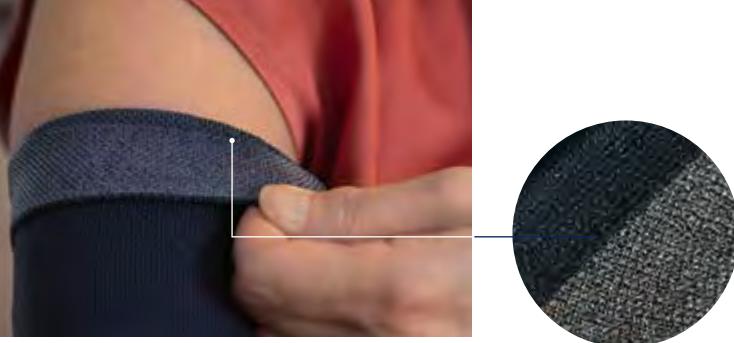


JOBST SoftFit BLEIBT IN POSITION, OHNE EINZUENGEN

JOBST SoftFit - Der Einzigartige

Eine Revolution für Kompressionsversorgungen

- Ein spezielles System aus Silikonfäden, das direkt in den Abschlussbund des Kompressionsstrumpfes eingestrickt wird.
- Hält die Kompressionsversorgung ohne den Druck zu erhöhen oder einzuschnüren.
- Die patentierte Technologie sorgt für einen durchgehenden Kompressionsverlauf.
- Erhöht gleichzeitig Wirksamkeit und Tragekomfort.

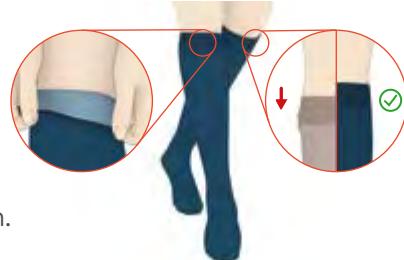

Noppe - Das Starke



Entwickelt für weiches Bindegewebe.

- Aus Silikon bestehende Noppen-Struktur.
- Entwickelt um mögliches Rutschen zu verringern.

LATEX FREE FORMULA 50% Nylon, 35% Silikon

Micronoppe - Das Sanfte



Speziell entwickelt für Menschen mit empfindlicher Haut.

- Aus Silikon bestehende Micronoppen-Struktur.
- Hilft das Verrutschen der Kompressionsversorgung zu verhindern.
- Micronoppen wurden für höheren Tragekomfort und weniger Druckstellen auf der Haut entwickelt.


LATEX FREE FORMULA 50% Nylon, 35% Silikon

FLACHSTRICK


Beliebte Längentypen

Längentyp	Haftband	JOBST Confidence	JOBST Elvarex Soft	JOBST Elvarex
AD	SoftFit	Maß	Maß	Maß
	Noppe		Maß	Maß
	Micronoppe		Maß	Maß
AG	Noppe	Maß	Maß	Maß
	Micronoppe		Maß	Maß
CG ¹	SoftFit	Maß	Maß	Maß*
	Noppe	Maß	Maß	Maß*
	Micronoppe		Maß	Maß*

VARIANTEN

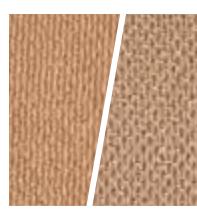

SoftFit

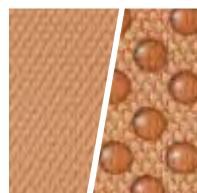

Noppe



Micronoppe



JOBST FarrowWrap

Einfache Anwendung zur Förderung des Selbstmanagements

JOBST FarrowWrap ist ein medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK) mit anpassbaren Klettbandagen aus strapazierfähigen Materialien, das dazu dient Schwellungen an den Extremitäten zu reduzieren und die Abheilung eines Ulcus cruris venosum zu fördern.



Leicht anzulegen

Klettverschlüsse unterstützen das einfache An- und Ablegen.



Kurzzug-Technologie

Für hohen Arbeitsdruck auch bei niedrigem Ruhedruck.



Anpassbar

Klettverschlussystem ermöglicht eine Nachjustierung der Bänder.

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG UND ULCUS CRURIS VENOSUM (UCV)

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
			Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV	Florides UCV

INDIKATION: LYMPHÖDEM

Entstauungsphase

KUNDENWUNSCH NACH ...¹

- Einfachem An- und Ablegen Angenehmen Tragen ohne zu verrutschen

SELBSTMANAGEMENT:

90%

der Patient*innen schätzen JOBST FarrowWrap wegen seiner einfachen Handhabung und der besseren Möglichkeit zur Eigenhygiene.²

HANDHABUNG:

85%

der Patient*innen können das MAK leicht an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.³

SCHNELLERE ANWENDUNG:

**1:36
min**

können bei der Anlegezeit mit JOBST FarrowWrap eingespart werden (im Vergleich Anlegezeit 2-Lagen-Kompressionssystem 2:39 min vs. JOBST FarrowWrap 1:03 min).⁴

1: Harding, K., Dowsett, C., Flas, L et al. Simplifying venous leg ulcer management: consensus recommendations. Wounds International, 2015. <https://tinyurl.com/jrxfcjr> (accessed 26 February 2017). Properties of an ideal compression system. 2: Boxall SL, et al. Adjustable Velcro® compression devices as compared to 4-layer compression bandages for the treatment of venous leg ulcers and optimisation of patient satisfaction. Wound Practice and Research. 2024;32(3):120-128. DOI 10.33235/wpr.32.3.8-120-128. 3: Observational study JOBST FarrowWrap 2019. Data on file. 4: Internal video, 2024 data on file.

FARBE KOMPRESSIONSSYSTEM



LITE - Beige



CLASSIC - Beige

FARBE UNTERZIEHSTRUMPF (LINER)



Beige (AD)



Weiß (AG)

FARBE FARROWHYBRID ADI



Taupe

Bitte beachten:

JOBST FarrowWrap ist in verschiedenen Längentypen und Kompressionsstärken erhältlich. Es muss immer die gesamte Extremität mit medizinischer Kompression versorgt werden.

Information zur Beratung von Patient*innen

Nicht kompressiver Unterziehstrumpf (Liner): JOBST Farrow Liner AD & AG

In Kombination entweder mit JOBST FarrowWrap LITE oder CLASSIC wird ein Liner empfohlen, damit das Kompressionssystem nicht direkt auf der Haut aufliegt. Der Liner schützt die Haut und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Der Liner ist beim Wadenteil paarweise in der Länge AD und beim Knie- inkl. Oberschenkelteil in der Länge AG im Lieferumfang enthalten. Zusätzliche Liner können über das Maßblatt paarweise dazu bestellt werden.



Unterziehstrumpf mit Fußkompression: JOBST FarrowHybrid ADI

JOBST FarrowHybrid ADI ist ein Liner mit Fußkompression, der sich für milde bis mäßige Ödeme eignet. Auf den Fuß bis zum Knöchel wird eine Kompression von 20-30 mmHg ausgeübt, während die Wade keine Kompression erfährt. JOBST FarrowHybrid ADI kann mit einem Wadenteil kombiniert werden.

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

		Standard							
Ausführungen ▼		Fußteil	Wadenteil	Oberschenkel- inkl. Kniesteil	Armteil	Handteil	Farrow Hybrid ADI	Farrow Liner AD	Farrow Liner AG
Kompression	LITE 20-30 mmHg	●	●	●	●	●	●		
	CLASSIC 30-40 mmHg	●	●	●					
Liner	Im Lieferumfang enthalten		2x AD	2x AG					
Informationen	Materialzusammensetzung	LITE: Gewebe: 82% Polyamid, 18% Elasthan; Schaumstoffpolster bei Knie- und Armtteil: 100% Polyurethan. CLASSIC: 47% Baumwolle, 16% Polyester, 32% Polyamid, 5% Elasthan; Schaumstoffpolster bei Kniesteil: 100% Polyurethan.				Gewebe: 89% Polyamid, 11% Elasthan. Schaumstoff: 100% Polyurethan.	83% Polyamid, 17% Elasthan.	96% Polyamid, 4% Elasthan.	85% Baumwolle, 15% Elasthan.
	Wäsche	LITE: bei 30°C waschbar CLASSIC: Handwäsche 				bei 40°C waschbar 			
	Patient*innen entscheiden sich auch für...	• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 81							

JOBST FarrowWrap

MAßTABELLEN UNTERE EXTREMITÄTEN



JOBST FarrowWrap Fußteil

LITE: HiMi-Nr. 17.06.23.3006
CLASSIC: HiMi-Nr. 17.06.23.3007

Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL
c A1 Mittelfuß- / Ristumfang	22-24	25-27	28-30	31-34	35-40
I A Fußlänge (standard)	16-17	17-18	19-20	20-21	22-23
I A Fußlänge (lang)	18-19	19-20	21-22	22-23	24-25



JOBST FarrowWrap Wadenteil

LITE: HiMi-Nr. 17.06.23.2006
CLASSIC: HiMi-Nr. 17.06.23.2007

Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL
c C Wadenumfang	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68
c B Knöchelumfang	21-25	25-30	30-36	36-42	42-50
le A-D standard	33-37	35-39	37-41	39-43	39-43
le A-D lang	38-41	40-43	42-45	44-47	44-47



JOBST FarrowWrap Kniesteil

LITE und CLASSIC
(bei Oberschenkelteil inkludiert)

Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL	XXL
c E Knieumfang	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80	81-87
c C Wadenumfang	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68	63-73



JOBST FarrowWrap Oberschenkelteil

LITE: HiMi-Nr. 17.06.23.4002
CLASSIC: HiMi-Nr. 17.06.23.4003

Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL	XXL
c G Oberschenkelumfang	60-70	65-75	70-80	75-90	85-100	95-110
c E Knieumfang	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80	81-87
Länge (in cm)	kurz		standard		lang	
le E-G	16-20		21-26		27-31	



JOBST FarrowHybrid ADI Liner mit Fußkompression

Messpunkt (Angaben in cm)	S	M	L	XL
Schuhgröße	35-38	38-41	41-44	44-46
Länge (in cm)	standard		weit	
c A1 Mittelfuß- / Ristumfang	20-27 cm		28-35 cm	

MAßTABELLEN OBERE EXTREMITÄTEN



JOBST FarrowWrap LITE Armteil

Messpunkt (Angaben in cm)		S	M	L
<i>c</i> (G)	Achselumfang	22-31	29-39	32-45
<i>c</i> (E)	Ellenbogenumfang	20-27	25-34	30-40
<i>c</i> (C)	Handgelenksumfang	14-18	16-21	19-25
Länge (in cm)		kurz	standard	lang
<i>le</i> (C)- (G)		40-43	44-47	48-51



JOBST FarrowWrap LITE Handteil


Messpunkt (Angaben in cm)		XS	S	M	L
<i>c</i> (A)	Umfang an den Fingergrundgelenken*	16-18	18-20	20-22	22-24
<i>c</i> (B)	Mittelhandumfang (Höhe Daumenschwimmhaut)	17-19	19-21	21-23	23-26
<i>c</i> (C)	Handgelenksumfang	15-18	17-20	19-22	22-24

Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter
www.jobst.de/fachhandel/downloads
oder bestelle direkt im JOBST eShop
unter eshop.jobst.de




MESSPUNKTE

Untere Extremitäten

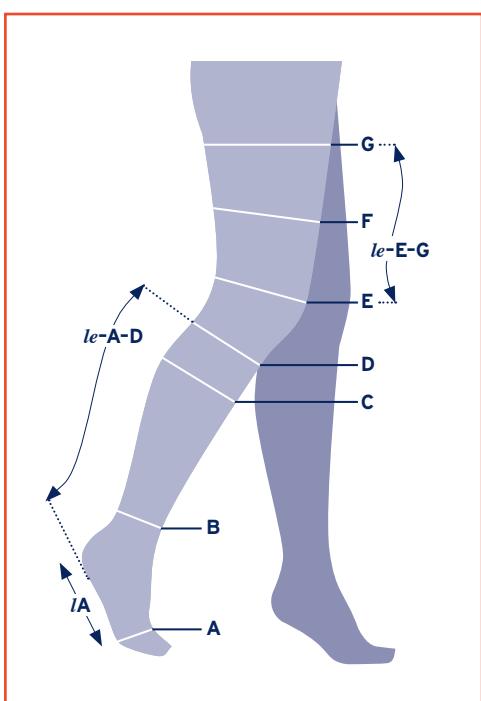

Obere Extremitäten

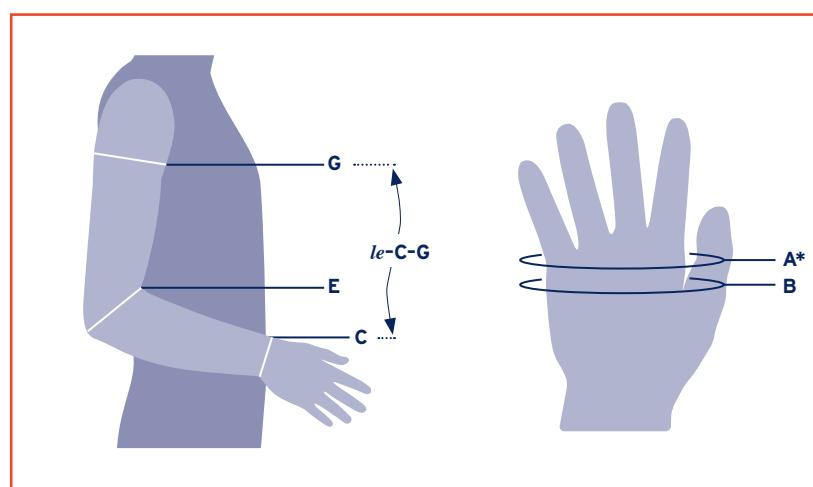

le = Konturmessung (der Kontur folgend)
cE ist 10 cm oberhalb des Knies zu messen.
*Umfang Fingergrundgelenke mit flach aufliegender Hand.
Falls die Maße nicht eindeutig einer Größe zuzuordnen sind, sollte immer die kleinere der in Frage kommenden Größen gewählt werden.



JOBST CONFIDENCE

Die nächste Generation flachgestrickter Kompression

JOBST Confidence wurde mit der innovativen Contour Fit Technologie entwickelt. Die Kompressionsversorgungen lassen sich somit exakt an individuelle Körperperformen anpassen und bieten mehr Tragekomfort und ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit.



Contour Fit

Die innovative Contour Fit Stricktechnologie erlaubt es, die Versorgung optimal an individuelle Körperperformen anzupassen.



Weich & Stabil

Hergestellt aus einem geschmeidigen, anpassungsfähigen Gestrick, welches zudem die Sicherheit einer festen Unterstützung gibt.



Feuchtigkeitsmanagement


Hochentwickeltes Feuchtigkeitsmanagement-System mit Doppelschichtaufbau für optimalen Tragekomfort.



Funktionszonen

Optionale und diskrete Funktionszonen sorgen für mehr Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.

INDIKATION: LYMPHÖDEM UND LIPÖDEM
Ohne ausgeprägte Hautfalten und Verformungen

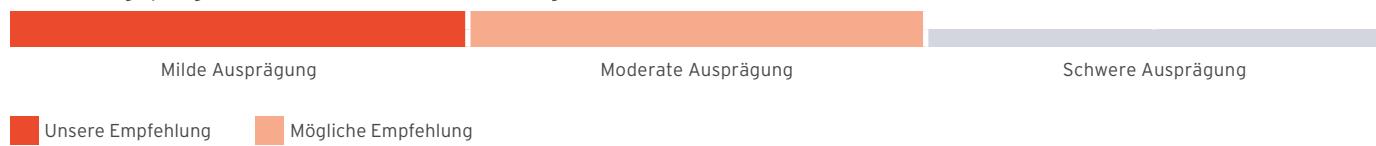

KUNDENWUNSCH NACH ...

Hoher Bewegungsfreiheit¹

Weniger Schwitzen²

Hohem Tragekomfort²

BEWEGUNGSFREIHEIT: ¹

85% der befragten Patient*innen sagen, dass sie sich mit JOBST Confidence frei bewegen können.

FEUCHTIGKEITSMANAGEMENT: ¹

92% der befragten Patient*innen stimmen zu, dass JOBST Confidence ihre Haut trocken hält.

ALLGEMEINER TRAGEKOMFORT: ¹

84% der befragten Patient*innen bewerten den Tragekomfort von JOBST Confidence mit gut oder sehr gut.

ZUFRIEDENHEIT: ¹

7 von 10 der befragten Patient*innen würden JOBST Confidence empfehlen.

¹Hirsch T et al. An innovative flat-knit compression garment for lymphoedema patients led to better outcomes: a multicentre study. J Wound Care. 2024 Apr 2;33(4):220-228.

²Essity Marktforschung in Deutschland 2024. Befragung von 100 Patient*innen mit phlebologischer Diagnose, 100 Lymphödempatient*innen, 100 Lipödempatient*innen.

FARBEN




Beige

Caramel

Black

Hazelnut

Cranberry

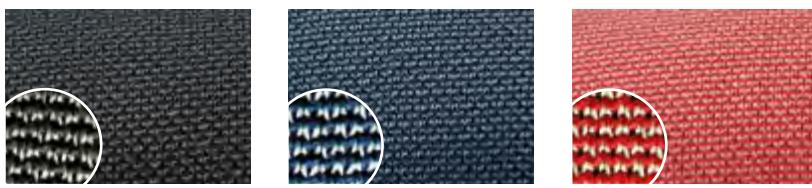

Anthracite Heather

Jeans Heather

Red Heather

HAFTBÄNDER Außen/Innen



SoftFit

Noppe

DESIGN-OPTIONEN



Deco Line

Initialien

Florales Taillenband

Motivierende Prints

Farbige Schließnähte


DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼	Maß										
	AB ¹	AD	AG	AG-HT	AT	BT / B'T	CT	E'T	CG ¹	AG ¹	
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	KKL 3: 34 - 46 mmHg		●	●	●	●	●	●			
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 59 % Polyamid, 26 % Polypropylen, 15 % Elasthan KKL 2: 48 % Polyamid, 32 % Polypropylen, 20 % Elasthan KKL 3: 45 % Polyamid, 32 % Polypropylen, 23 % Elasthan									
	Wäsche	洗衣机 洗涤剂 柔顺剂 漂白剂	Die Trocknereignung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.								
	Patient*innen entscheiden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> • JOBST Griphandschuhe, Seite 96 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 96 • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 97 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 93 									


JOBST Confidence

Kompression für alle, die sich gerne frei bewegen.

Im Gegensatz zu konventionellen Flachstrickversorgungen, bei denen die Anpassung über eine Position erfolgt, ermöglicht die innovative Contour Fit Technologie die Anpassung der Kompressionsversorgung an insgesamt vier unterschiedlichen Positionen. Wahrnehmbar wird dies durch die einzigartigen Contour Points, mittels der JOBST Confidence die Anatomie nachahmt, um sich exakt an die individuellen Körpermaße anzupassen. Ein spürbarer Effekt für mehr Bewegungsfreiheit und Tragekomfort.

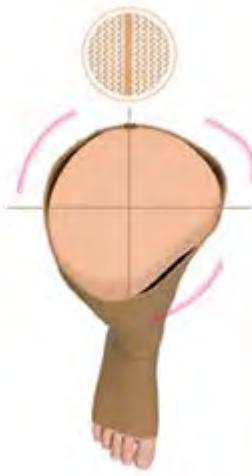

Konventioneller
Flachstrick

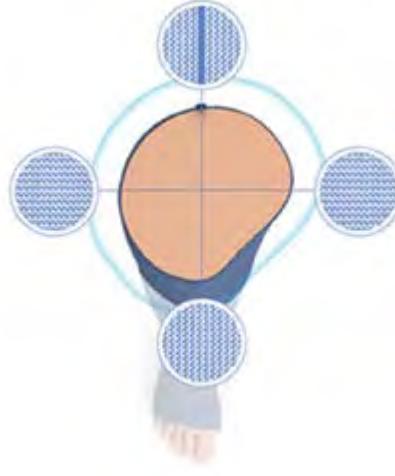

Flachstrick mit
Contour Fit




Contour Fit



Kein Contour Fit

Für ein trockenes Hautgefühl

JOBST Confidence geht einen Schritt weiter - das Produkt vereint einen einzigartigen Gestrickaufbau und eine spezielle Garnkombination, um ein optimales Feuchtigkeitsmanagement zu bieten. Nur JOBST Confidence verwendet ein hochentwickeltes Doppelschichtgestrick, um Feuchtigkeit von der Haut nach außen abzuleiten. Dies hält die Haut trocken und gibt deinen Kund*innen während des ganzen Tages ein angenehmes Tragegefühl.

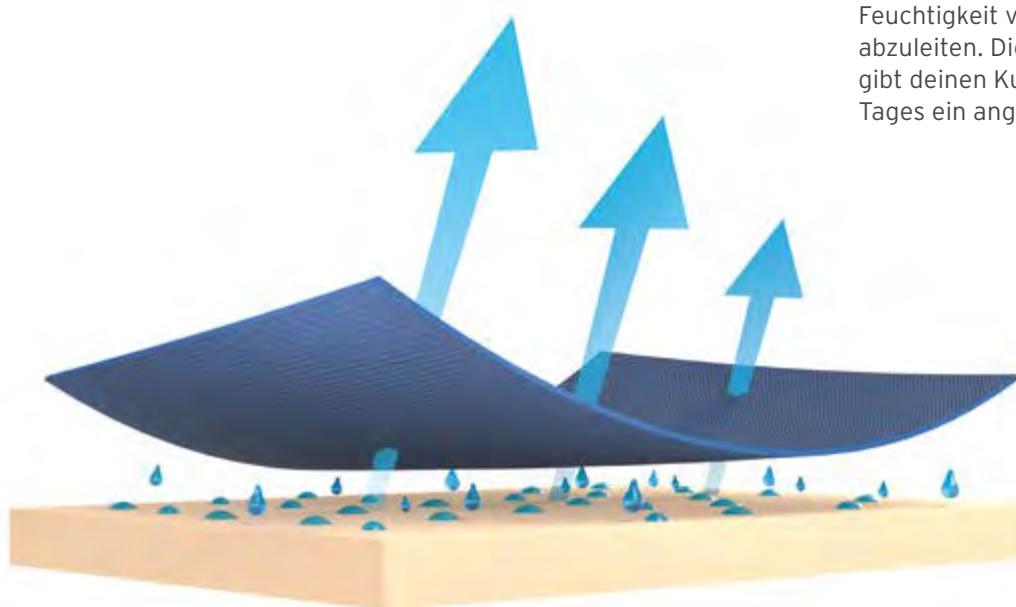



Information zur Beratung von Patient*innen

Einzigartiges Hosendesign

Die JOBST Confidence Strumpfhose zeichnet sich durch ihr anatomisch geformtes Hosenteil aus, das sich mit der ergonomisch gesetzten und neu entwickelten Nahtführung präzise den natürlichen Körperformen anpasst.

Die JOBST Confidence Strumpfhose kommt ohne Nähte in der Leistenregion aus, wodurch mehr Bewegungsfreiheit und ein Beitrag zur Reduzierung von Beschwerden und Einschränkungen deiner Kund*innen im Alltag ermöglicht wird.



Information zum Sortiment

JOBST Confidence Messhilfen

Für einen passgenauen Sitz der JOBST Confidence Versorgungen mit Hosenteil stellen wir dir drei Messhilfen zum einfachen Anmessen zur Verfügung: eine Anmesskarte, einen Anmessgürtel und einen Maßband-Schieber. Weitere Informationen zum richtigen Anmessen von JOBST Confidence findest du in der JOBST Anmessleitlinie.

Sprich gerne den JOBST Außendienst oder das Lymphologie Team im JOBST Kundenservice an: 02822 / 607 - 111.



Anmesskarte



Anmessgürtel



Maßband-Schieber

JOBST Confidence

Untere Extremitäten (Beinversorgung)

								Maß							
								AB ¹	AD	AG	AG-HT	AT	B'T, BT	CT	ET
Ausführung Leibteil	Anatomisch geformtes Hosenteil (inkl. Slipform / schräger Abschluss)					•	•					•		•	•
	Gerader Abschluss (Leibteil)														
Abschluss Leibteil	Hodensack					•	•					•		•	•
	Strickrand														
	Taillenband					•	•					•		•	•
	Florares Taillenband					•	•					•		•	•
	Taillenband (inkl. motivierende Prints)					•	•					•		•	•
	Komfort-Taillenband					•	•					•		•	•
	Slipform / schräger Abschluss		•	•	•	•	•					•		•	•
	Funktionszone Oberbein & Slipform					•	•					•		•	•
	Gerader Abschluss		•	•											
	Funktionszone Knie			•	•	•	•					•		•	
	SoftFit		•												
	Noppenhaftband oben				•										
Ausführung Fuß	Funktionszone Fuß (T-Ferse)	•	•	•	•	•	•								
	Hallux Valgus Zone	•	•	•	•	•	•								
	Schräger Fuß	•	•	•	•	•	•								
	Gerader Fuß	•	•	•	•	•	•								
	Offene Spitze	•	•	•	•	•	•								
	Geschlossene Spitze	•	•	•	•	•	•								

JOBST Confidence

Obere Extremitäten (Armversorgung)

		Maß	
			
	AG ¹		CG ¹
Ausführung Arm	Funktionszone Ellenbogen	●	●
Befestigung Arm	SoftFit	●	●
Ausführung Hand	Noppenhaftband 2,5 cm oben	●	●
	Noppenhaftbandstück 2,5 cm innen (1/2 Umfang)	●	●
	Handteil ohne Finger mit Daumenansatz	●	

JOBST Confidence

Maßsortiment untere Extremitäten

Kompressionsklasse 1-3

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer		
		KKL 1	KKL 2	KKL 3
 Socke AB¹	Stück	kassenspezifische Regelung		-
 Wadenstrumpf AD	Stück	17.06.14.0022	17.06.14.1033	17.06.14.2030
 Oberschenkelstrumpf AG	Stück	17.06.16.0022	17.06.16.1033	17.06.16.2030
+ Noppenhastrand		17.99.99.2008		
 Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring	Stück	17.06.16.0022 17.99.99.2009	17.06.16.1033 17.99.99.2009	17.06.16.2030 17.99.99.2009
+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		17.99.99.2026 17.99.99.2003		
+ Funktionszone Oberbein		17.99.99.2027		
 Bermudahose E'T	Stück	17.06.19.0020	17.06.19.1029	17.06.19.2025
+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		17.99.99.2026 17.99.99.2003		
+ Funktionszone Oberbein		17.99.99.2027		
 Caprihose CT	Stück	17.06.18.0020	17.06.18.1028	17.06.18.2024
+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		17.99.99.2026 17.99.99.2003		
+ Funktionszone Oberbein		17.99.99.2027		
 Leggins BT/B'T	Stück	17.06.21.0020	17.06.21.1023	17.06.21.2020
+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		17.99.99.2026 17.99.99.2003		
+ Funktionszone Oberbein		17.99.99.2027		
 Strumpfhose AT	Stück	17.06.17.0023	17.06.17.1032	17.06.17.2027
+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		17.99.99.2026 17.99.99.2003		
+ Funktionszone Oberbein		17.99.99.2027		

Zusätze	Einheit	Hilfsmittelnummer
Geschlossene Fußspitze	Stück	17.99.99.2025
Schräger Fuß	Stück	kassenspezifische Regelung
Hallux Valgus Zone	Stück	kassenspezifische Regelung
Funktionszone Fuß/T-Ferse	Stück	17.99.99.2030
Funktionszone Knie	Stück	17.99.99.2028
Haftrand (AD: SoftFit/AG: Noppenhastrand)	Stück	17.99.99.2008
Komfort-Taillenband	Stück	-
Komprimierendes Leibteil	Stück	17.99.99.2003
Funktionszone Oberbein	Stück	17.99.99.2027
Slipform/schräger Abschluss (AD und AG)	Stück	17.99.99.2026
Hodensack	Stück	17.99.99.2017
Eingriff	Stück	17.99.99.2018
Design-Elemente	Einheit	
Deco Line	Stück	kostenfreier Zusatz
Initialen	Stück	kostenfreier Zusatz
Florales Taillenband	Stück	-
Farbige Schließnähte	Stück	-
Motivierende Prints	Stück	-

JOBST Confidence

Maßsortiment obere Extremitäten

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
Armstrumpf CG¹ inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.04.0043 17.99.99.2026	17.10.04.1046
Armstrumpf AG¹ ohne Finger, mit Daumen inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.06.0022 17.99.99.2011 17.99.99.2026	17.10.06.1024 17.99.99.2011 17.99.99.2026

Zusätze	Einheit	Hilfsmittelnummer
Funktionszone Ellenbogen	Stück	17.99.99.2029
Haftrand (CG ¹ & AG ¹ SoftFit / Noppenhaftband)	Stück	17.99.99.2008
Design-Elemente	Einheit	
Deco Line	Stück	kostenfreier Zusatz
Initialen	Stück	kostenfreier Zusatz
Farbige Schließnähte	Stück	-

Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt findest du unter
www.jobst.de/fachhandel/downloads
oder bestelle direkt im JOBST eShop
unter eshop.jobst.de

FACHHANDEL NEWS



Sei immer auf dem aktuellsten Stand mit
einen Blick auf
die JOBST Fachhandel News.
www.jobst.de/fachhandel/news

BESCHREIBUNGEN DER ZUSÄTZE


Im Folgenden findest du Zusätze, die wir für die unteren und oberen Extremitäten von JOBST Confidence anbieten. Die kurze Beschreibung und Empfehlung helfen dir bei der richtigen Wahl. Bitte beachte, dass dies nur ein Auszug aus unserem Gesamtportfolio ist. Gerne gehen wir auch auf individuelle Sonderwünsche ein, um den spezifischen Anforderungen deiner Kund*innen gerecht zu werden.

 Zur besseren Sichtbarkeit wurden Funktionszonen, Taschen und Futterstoffe grafisch hervorgehoben.

Ausführung Leibteil

Zusätze	Beschreibung
 Anatomisch geformtes Hosenteil	<p>Das anatomisch geformte Hosenteil inklusive Slipform weist eine innovative Nahtführung auf. Die nahtlose Leistenregion ermöglicht eine durchgehende Kompressionswirkung entlang der Leiste zu den inguinalen Lymphknoten und kann ein Abschnüren verhindern.</p> <p>Das anatomisch geformte Hosenteil inklusive Slipform ist fester Bestandteil aller JOBST Confidence Versorgungen mit Hosenteil und ermöglicht Kund*innen einen hohen Tragekomfort.</p>
 Hodensack ohne Eingriff	<p>Option für das Leibteil - ohne Eingriff.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2026 17.99.99.2003</p>
 Hodensack mit Eingriff	<p>Option für das Leibteil - mit Eingriff.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2017</p>

Befestigung Leibteil

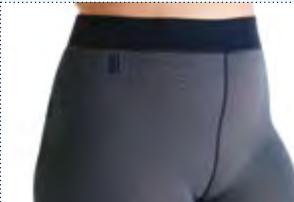Zusätze	Beschreibung
 Taillenband ohne Klett	<p>Taillenband für Leibbinden und Hosen aus weichem, elastischen Stretchmaterial. Es gewährleistet dauerhaft den korrekten Sitz der Versorgung.</p>
 Komfort-Taillenband	<p>Das in den Strickrand eingefasste Komfort-Taillenband mit Korderstopper lässt sich individuell nachjustieren und gewährleistet dauerhaft den korrekten Sitz der Versorgung.</p>

Ausführung Bein

Zusätze	Beschreibung
 <p>Slipform / schräger Abschluss</p>	<p>Mit der Slipform wird der Strumpf außen höher gestrickt, um sich der anatomischen Form anzupassen. Standardmäßig beträgt sie 10% vom Oberschenkelumfang (cG-Maß) bei einem Oberschenkelstrumpf (AG) bzw. 4 cm bei einem Wadenstrumpf (AD). Bei Bedarf kann im Kommentarfeld die Höhe geändert werden.</p> <p>Empfohlen für alle Kund*innen mit Lymph- und/oder Lipödem.</p> <p>Hinweis: Die BUFA empfiehlt zur Vermeidung zirkulären Einschürens die Verwendung von schrägen Abschlüssen (Slipform). Diese verhindern ein Abschnüren der Lymphabflussgefäße im Knie- und Leistenbereich.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2026</p>
 <p>Gerader Abschluss</p>	<p>Ein gerader Abschluss kann eine Option für Kund*innen sein, bei denen der Schritt nicht höher liegt als die Gesäßfalte (kein Unterschied zwischen IG und IK), bei denen eine höhere Festigkeit bei cG benötigt wird und deren anatomische Ausprägung eine Slipform nicht zulassen.</p> <p>Hinweis: BUFA empfiehlt zur Vermeidung zirkulären Einschürens die Verwendung von schrägen Abschlüssen (Slipform).</p>
 <p>Funktionszone Oberbein</p>	<p>Die Funktionszone Oberbein dient zur proximalen Fixierung und empfiehlt sich für Patient*innen mit voluminiösen, ödembetonten Oberschenkeln und/oder weichem Gewebe. Sie passt sich an den anatomischen Verlauf der Leisten und Gesäßfalten an und verhindert Einschnürungen am Oberschenkel. Des Weiteren dient sie dem Ausgleich eines deutlichen Längenunterschieds zwischen den Messpunkten G und K.</p> <p>Hinweis: Die Funktionszone Oberbein ist fester Bestandteil aller JOBST Confidence Versorgungen mit Hosenteil, bei denen ein Längenunterschied zwischen den Messpunkten IG und IK besteht.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2027</p>
 <p>Funktionszone Knie</p>	<p>Eine spezielle Strickkonstruktion hilft, Hautirritationen, Hautverletzungen, Einschnürungen und Druckstellen im Kniekehlenbereich vorzubeugen sowie Faltenbildung zu verringern. Dies sorgt insbesondere bei vorwiegend sitzenden Tätigkeiten für einen angenehmeren Tragekomfort und gewährleistet die Gelenkfunktionalität bei Aufrechterhaltung des Kompressionsdrucks.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2028</p>

3. Medizinische Kompressionsstrümpfe Flachstrick


Befestigung Bein

Zusätze	Beschreibung
 <p>Noppenhaftband / Haftband oben</p>	<p>Das starke Haftband, entwickelt für weiches Bindegewebe, verringert dank der Silikon-Noppen-Struktur mögliches Rutschen. Das Haftband ist in der Strumpflänge inkludiert und in den Breiten 5 cm erhältlich.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 <p>SoftFit (nur AD)</p>	<p>Die feinen Silikonfäden der JOBST SoftFit Technologie werden direkt in den Abschlussbund des Wadenstrumpfes eingestrickt. So bleibt der Strumpf in Position ohne in die Haut einzuschären und der durchgehende Kompressionsdruckverlauf bleibt erhalten. Dies sorgt für einen angenehmen Tragekomfort und sicheren Halt.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>

Ausführung Fuß

Zusätze	Beschreibung
 <p>Hallux Valgus Zone</p>	<p>Dient der Druckentlastung im Bereich des Überbeins am großen Zeh. Empfehlenswert für Kund*innen mit Hallux Valgus.</p>
 <p>T-Ferse</p>	<p>Entwickelt, um die Faltenbildung auf dem Spann zu vermindern, wodurch das Risiko von Einschnürung, Hautreizung und -verletzung sowie Druckstellen verringert wird. Unterstützt die Gelenkfunktionalität.</p> <p>Empfohlen für Kund*innen mit Lymph- und/oder Lipödem und prominenten Extensorensehnen, Hautfalten im Y-Maß bzw. ausgeprägten anatomischen Fersen.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2030</p>
 <p>Schräger Fuß, offene Spitze</p>	<p>Der Abschluss verläuft schräg und gewährleistet so den erforderlichen Druckverlauf entlang der Zehengrundgelenke. Zirkuläre Einschnürung und die Entstehung eines Vorfußödems können vermieden werden.</p> <p>Ein Strumpf ohne Fußspitze bzw. mit offener Spitze kann in Kombination mit einer Zehenkappe getragen werden. Ermöglicht die Verwendung einer einfachen Anziehhilfe.</p> <p>Hinweis: Die BUFA empfiehlt grundsätzlich für alle Lymphödem-Patient*innen die Verwendung von schrägen Fußabschlüssen.</p>
 <p>Schräger Fuß, geschlossene Spitze</p>	<p>Der Abschluss verläuft schräg und gewährleistet so den erforderlichen Druckverlauf entlang der Zehengrundgelenke. Zirkuläre Einschnürung und die Entstehung eines Vorfußödems können vermieden werden.</p> <p>Ein Strumpf mit Fußspitze bzw. mit geschlossener Spitze verringert ein mögliches Rutschen des Strumpfes nach hinten während des Gehens. Die Fußspitze wird aus weichem Material gestrickt und übt keinen Kompressionsdruck auf den Fuß aus.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2025</p>

Ausführung Fuß

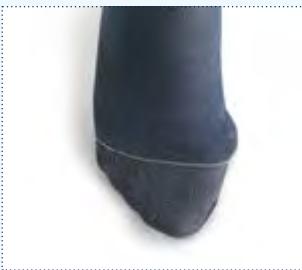Zusätze	Beschreibung
 <p>Gerader Fuß, offene Spitze</p>	<p>Die Kompression endet in einer geraden Linie, beginnend an der Basis des kleinen Zehs. Mit offener oder geschlossener Fußspitze erhältlich.</p> <p>Ein Strumpf ohne Fußspitze bzw. mit offener Spitze kann in Kombination mit einer Zehenkappe getragen werden. Ermöglicht die Verwendung einer einfachen Anziehhilfe.</p> <p>Hinweis: Die BUFA empfiehlt grundsätzlich für alle Lymphödem-Patient*innen die Verwendung von schrägen Fußabschlüssen.</p>
 <p>Gerader Fuß, geschlossene Spitze</p>	<p>Die Kompression endet in einer geraden Linie, beginnend an der Basis des kleinen Zehs. Ein Strumpf mit Fußspitze bzw. mit geschlossener Spitze verringert ein mögliches Rutschen des Strumpfes nach hinten während des Gehens. Die Fußspitze wird aus weichem Material gestrickt und übt keinen Kompressionsdruck auf den Fuß aus.</p> <p>Ein Strumpf ohne Fußspitze bzw. mit offener Spitze kann in Kombination mit einer Zehenkappe getragen werden. Ermöglicht die Verwendung einer einfachen Anziehhilfe.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2025</p>

Ausführung Arm

Zusätze	Beschreibung
 <p>Funktionszone Ellenbogen</p>	<p>Eine spezielle Strickkonstruktion hilft, Hautirritationen im Ellenbogenbereich vorzubeugen und Faltenbildung zu verringern. Wurde zur Verbesserung der Mobilität und Gelenkfunktionalität bei Aufrechterhaltung des Kompressionsdrucks entwickelt.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2029</p>

Befestigung Arm

Zusätze	Beschreibung
 <p>SoftFit</p>	<p>Die feinen Silikonfäden der JOBST SoftFit Technologie werden direkt in den Abschlussbund des Armstrumpfes eingestrickt. So bleibt der Strumpf in Position ohne in die Haut einzuschüren und der durchgehender Kompressionsdruckverlauf bleibt erhalten. Dies sorgt für einen angenehmen Tragekomfort und sicheren Halt.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 <p>Noppenhaftband / Haftband oben</p>	<p>Das starke Haftband, entwickelt für weiches Bindegewebe, verringert dank der Silikon-Noppen-Struktur mögliches Rutschen. Das Haftband ist in der Strumpflänge inkludiert und in der Breite 2,5 cm erhältlich.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2008</p>



JOBST ELVAREX SOFT

Zuverlässige und hautfreundliche Kompression

JOBST Elvarex Soft ist eine leichte, atmungsaktive und hautfreundliche Kompressionsversorgung, welche speziell für deine Kund*innen mit empfindlicher Haut entwickelt wurde.



Angenehm weich

Hautschonende Weichheit für optimalen Tragekomfort.



Einfaches An- und Ausziehen

Entwickelt für einfacheres An- und Ausziehen als herkömmliche Flachstrickversorgungen.



Mikro-Massage

Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikromassage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.

INDIKATION: LYMPHÖDEM UND LIPÖDEM
Ohne ausgeprägte Hautfalten und Verformungen

Milde Ausprägung

Moderate Ausprägung

Schwere Ausprägung

 Unsere Empfehlung

 Mögliche Empfehlung

KUNDENWUNSCH NACH ...

Flachstrick Einsteigerprodukt

Hautfreundlichem Produkt

Einfachem An- und Ausziehen

PATIENTENZUFRIEDENHEIT:

Bis zu
35%

geringere Reklamationsquote als der Marktdurchschnitt.¹


TRAGEKOMFORT:

Patient*innen und Kompri-Expert*innen schätzen JOBST Elvarex Soft als weiches, bequemes und hautfreundliches Produkt, das sich leicht anziehen lässt.²

¹: Vergleich interner Daten zum Reklamationsaufkommen bei JOBST Elvarex Soft mit den Ergebnissen einer postalischen Befragung von 4.902 Barmer-Versicherten von Februar bis März 2022. Hinweis: Das Aufkommen eines Reklamationsprozess resultiert nicht zwingend aus einem Produktmangel.

²: FMR Research: JOBST Lymphology LIVE Segment Portfolio Re-Alignment Qualitative study. 2023

FARBEN

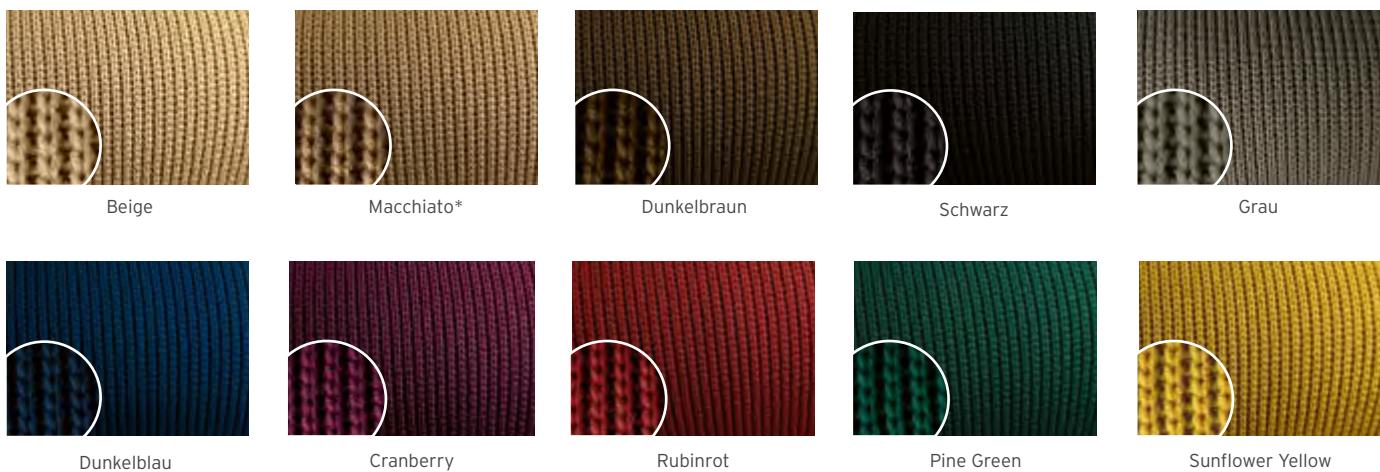

*Nur bei Armversorgungen

HAFTBÄNDER Außen/Innen




Mehr Details, welche Haftband die beste Wahl ist, findest du auf Seite 19.

Information zum Sortiment

Farbakzente mit der Schließnaht setzen

Setzen Sie mit farbigen Schließnähten modische Akzente. Erhältlich für die Beinversorgung in Beige der Längen AD und AG in folgenden Schließnaht-Farben: Dunkelbraun, Schwarz, Dunkelblau, Grau oder Cranberry.

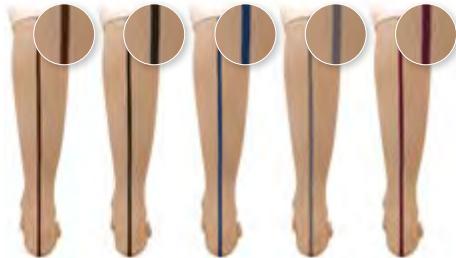

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

	Ausführungen ▼	Maß									
		AD	AG	AG-T	AT	BT & B'T	CT	ET	FT	CG ¹	
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	KKL 3: 34 - 46 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●		
Informationen	Materialzusammensetzung	Untere Extremitäten: KKL 1: 84 % Polyamid, 16 % Elasthan KKL 2: 80 % Polyamid, 20 % Elasthan KKL 3: 76 % Polyamid, 24 % Elasthan Obere Extremitäten: KKL 1: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan KKL 2: 65 % Polyamid, 35 % Elasthan									
	Wäsche	40°C	☒	☒	☒	Die Trocknereignung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.					
	Patient*innen entscheiden sich auch für...	• JOBST Griphandschuhe, Seite 96 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 96					• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 97 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 93				

JOBST Elvarex Soft

Untere Extremitäten (Beinversorgung)

								
	AD	AG	AG-T	AT	BT, BT'	CT	ET	FT
Ausführung Leibteil	Slipform / schräger Abschluss			●	●	●	●	●
	Gerader Abschluss							
	Hodensack							
	Standard-Zwickel			●	●	●	●	●
	Zwickel aus Netzmaterial			●	●	●	●	●
Abschluss Leibteil	Strickrand			●	●	●	●	●
	Durchziehgummi			●	●	●	●	●
	Taillenband ohne Klett			●	●	●	●	●
Ausführung Bein	Slipform / schräger Abschluss	●	●	●	●	●	●	●
	Gerader Abschluss	●						
	Funktionszone Oberbein & Slipform		●					
	Futterstoff Achillessehne	●	●	●	●			
	Futterstoff Kniekehle		●	●	●	●		
Befestigung Bein	SoftFit	●						
	Noppenhaftband oben	●	●					
	Noppenhaftbandstück innen	● <small>(nur wenn auch oben)</small>	● <small>(nur wenn auch oben)</small>	●	●	●	●	●
	Micronoppenhaftband oben	●	●					
	Micronoppenhaftbandstück innen	● <small>(nur wenn auch oben)</small>	● <small>(nur wenn auch oben)</small>					

JOBST Elvarex Soft

Untere Extremitäten (Beinversorgung)

	AD	AG	AG-T	AT	BT, B'T	CT	ET	FT
Ausführung Fuß	T-Ferse	•	•	•	•			
	Schräger Fuß	•	•	•	•			
	Gerader Fuß	•	•	•	•			
	Offene Spitz	•	•	•	•			
	Geschlossene Spitz	•	•	•	•			
	Futterstoff Ferse	•	•	•	•			
	Tasche Fußrücken	•	•	•	•			
	Futterstoff Fußrücken	•	•	•	•			
	Tasche Y-Maß	•	•	•	•			
	Futterstoff Y-Maß	•	•	•	•			
	Futterstoff Hallux	•	•	•	•			

JOBST Elvarex Soft

Obere Extremitäten (Armversorgung)

	CG ¹	
Ausführung Arm	Tasche Armbeuge	•
Befestigung Arm	Futterstoff Armbeuge	•
	SoftFit	•
	Noppenhaftband oben	•
	Noppenhaftband innen	•
	Micronoppenhaftband oben	•
	Micronoppenhaftbandstück innen	(nur wenn auch oben)

JOBST Elvarex Soft

Maßsortiment untere Extremitäten

Kompressionsklasse 1-3

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer		
		KKL 1	KKL 2	KKL 3
 Wadenstrumpf AD	Stück	17.06.14.0015	17.06.14.1020	17.06.14.2021
 Oberschenkelstrumpf AG inkl. Slipform	Stück	17.06.16.0015 17.99.99.2026	17.06.16.1020 17.99.99.2026	17.06.16.2021 17.99.99.2026
 AG-T		17.06.16.0015	17.06.16.1020	17.06.16.2021
 Hüftbefestigung rechts / links (auch beidseitig)	Stück		17.99.99.2006	
 AG-T	Stück	17.06.16.0015	17.06.16.1020	17.06.16.2021
 Hüftbefestigung rechts / links (auch beidseitig) Volle Kompression			17.99.99.2006 17.99.99.2003	
 Strumpfhose AT	Stück	17.06.17.0015	17.06.17.1018	17.06.17.2018
+ Slipform +kompr. Leibteil ohne Beinring			17.99.99.2026 17.99.99.2003	
 Leggins BT, B'T	Stück	17.06.21.0013	17.06.21.1015	17.06.21.2014
+ Slipform +kompr. Leibteil ohne Beinring			17.99.99.2026 17.99.99.2003	
 Caprihose CT	Stück	17.06.18.0013	17.06.18.1016	17.06.18.2016
+ Slipform +kompr. Leibteil ohne Beinring			17.99.99.2026 17.99.99.2003	
 Bermudahose ET	Stück	17.06.19.0013	17.06.19.1016	17.06.19.2016
+ Slipform +kompr. Leibteil ohne Beinring			17.99.99.2026 17.99.99.2003	
 Radler FT	Stück	17.06.22.0011	17.06.22.1012	17.06.22.2014
+ Slipform +kompr. Leibteil ohne Beinring			17.99.99.2026 17.99.99.2003	

Zusätze	Einheit	Hilfsmittelnummer	
Haftband	Stück		17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück		17.99.99.2016
SoftFit (AD)	Stück		17.99.99.2008
Funktionszone Oberbein (AG)	Stück		17.99.99.2027
Schräger Fuß	Stück	kassenspezifische Regelung	
mit Durchziehgummi	Stück	-	
Geschlossene Fußspitze	Stück	17.99.99.2025	
T-Ferse	Stück	17.99.99.2030	

JOBST Elvarex Soft

Maßsortiment untere Extremitäten

Kompressionsklasse 1- 2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 Armstrumpf CG¹ inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.04.0028	17.10.04.1029
		17.99.99.2026	

Zusätze	Einheit	Hilfsmittelnummer
Haftband	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
SoftFit	Stück	17.99.99.2008
Futterstoff* Ellenbogen	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Armbeuge	Stück	17.99.99.2031

*Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt findest du unter
www.jobst.de/fachhandel/downloads
 oder bestelle direkt im JOBST eShop
 unter eshop.jobst.de

BESCHREIBUNGEN DER ZUSÄTZE

Im Folgenden findest du eine Auswahl an Zusätzen, die wir bei JOBST Elvarex Soft für die unteren und oberen Extremitäten anbieten. Die kurze Beschreibung und Empfehlung helfen dir bei der richtigen Wahl. Bitte beachte, dass dies nur ein Auszug aus unserem Gesamtportfolio ist. Gerne gehen wir auch auf individuelle Sonderwünsche ein, um den spezifischen Anforderungen deiner Kund*innen gerecht zu werden.

 Zur besseren Sichtbarkeit wurden Funktionszonen, Taschen und Futterstoffe grafisch hervorgehoben.



Ausführung Leibteil

Zusätze	Beschreibung
 <p>Slipform / schräger Abschluss</p>	<p>Mit der Slipform wird der Strumpf außen höher gestrickt, um sich der anatomischen Form anzupassen. Standardmäßig beträgt sie 10% vom Oberschenkelumfang (cG-Maß). Bei Bedarf kann im Kommentarfeld die Höhe geändert werden.</p> <p>Empfohlen für alle Patient*innen mit Lymph- und/oder Lipödem.</p> <p>Hinweis: Die Bundesfachschule Orthopädie-Technik (BUFA) empfiehlt zur Vermeidung zirkulären Einschürens die Verwendung von schrägen Abschlüssen (Slipform). Diese verhindern ein Abschnüren der Lymphabflussgefäße im Knie- und Leistenbereich.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2026</p>
 <p>Damenwickel aus Elvarex Material</p>	<p>Empfohlen bei einem Ödem im Genitalbereich.</p>
 <p>Zwickel aus Netzmaterial</p>	<p>Option für besonders hohe Luftdurchlässigkeit bei starkem Schwitzen.</p>

Befestigung Leibteil

Zusätze	Beschreibung
 <p>Strickrand</p>	Das Gestrick wird mit einer einfachen Naht abgeschlossen. Optional auch mit Reißverschluss erhältlich.
 <p>Durchziehgummi</p>	Das in den Strickrand eingefasste Durchziehgummi lässt sich individuell justieren und gewährleistet dauerhaft den korrekten Sitz der Versorgung. Optional auch mit Reißverschluss erhältlich.
 <p>Taillenband ohne Klett</p>	Taillenband für Leibbinden und Hosen aus weichem, elastischen Stretchmaterial. Der besonders weiche Abschlussband fühlt sich angenehm auf der Haut an und bietet einen modischen Zusatz.

Ausführung Bein

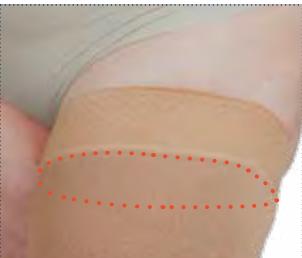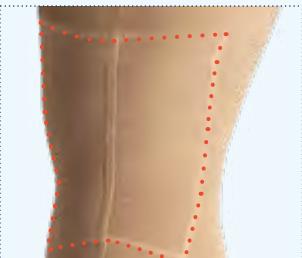Zusätze	Beschreibung
 <p>Slipform / schräger Abschluss</p>	<p>Mit der Slipform wird der Strumpf außen höher gestrickt, um sich der anatomischen Form anzupassen. Standardmäßig beträgt sie 10% vom Oberschenkelumfang (cG-Maß) bei einem Oberschenkelstrumpf (AG) bzw. 4 cm bei einem Wadenstrumpf (AD). Bei Bedarf kann im Kommentarfeld die Höhe geändert werden.</p> <p>Empfohlen für alle Patient*innen mit Lymph- und/oder Lipödem.</p> <p>Hinweis: Die BUFA empfiehlt zur Vermeidung zirkulären Einschürens die Verwendung von schrägen Abschlüssen (Slipform). Diese verhindern ein Abschnüren der Lymphabflussgefäße im Knie- und Leistenbereich.</p>
 <p>Gerader Abschluss</p>	<p>Ein gerader Abschluss kann eine Option für Patient*innen sein, bei denen der Schritt nicht höher liegt als die Gesäßfalte (kein Unterschied zwischen IG und IK), bei denen eine höhere Festigkeit bei cG benötigt wird und deren anatomische Ausprägung eine Slipform nicht zulassen.</p> <p>Hinweis: BUFA empfiehlt zur Vermeidung zirkulären Einschürens die Verwendung von schrägen Abschlüssen (Slipform).</p>
 <p>Funktionszone Oberbein & Slipform</p>	<p>Die Funktionszone Oberbein dient zur proximalen Fixierung und empfiehlt sich für Patient*innen mit voluminiösen, ödembetonten Oberschenkeln und/oder weichem Gewebe. Sie passt sich an den anatomischen Verlauf der Leisten und Gesäßfalten an und verhindert Einschnürungen am Oberschenkel. Des Weiteren dient sie dem Ausgleich eines deutlichen Längenunterschieds zwischen den Messpunkten G und K.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2027 17.99.99.2026</p>
 <p>Futterstoff Kniekehle</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, den Kniebereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern. Empfohlen für Patient*innen, deren Kniekehle besonders empfindlich ist und die nicht mit Funktionszone Knie versorgt werden können.</p> <p>Hinweis: Die Funktionszone Knie und der Futterstoff Kniekehle sind nicht miteinander kombinierbar.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2031</p>

Befestigung Bein

Zusätze	Beschreibung
 <p>Noppenhaftband / Haftband oben</p>	<p>Das starke Haftband, entwickelt für weiches Bindegewebe, verringert dank der Silikon-Noppen-Struktur mögliches Rutschen. Das Haftband ist in der Strumpflänge inkludiert und in den Breiten 5 cm und in 2,5 cm (bei AD) erhältlich.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 <p>Noppenhaftband Zusätzliches Haftband innen</p>	<p>Es können zusätzliche Haftbänder bzw. Haftbandstücke innen für mehr Halt eingenäht werden. Empfohlen für Patient*innen mit einer ausgeprägten konischen Beinform, voluminösen, ödem-betonnten Oberschenkeln und/oder weichem Gewebe.</p> <p>Zusätzliche Haftbänder können innen (lateral auf Gestrickinnenseite) eingenäht werden:</p> <p>Länge Haftband in Slipform innen (5 cm Breite): 5 cm, 10 cm, 12 cm, 15, cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 1/2 Länge innen, 3/4 Länge innen, punktuell innen.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2016</p>
 <p>Micronoppenhaftband / Haftband oben</p>	<p>Das sanfte Haftband, speziell entwickelt für Patient*innen mit empfindlicher Haut. Hilft, die Kompressionsversorgung in Position zu halten. Die Micronoppen-Struktur besteht aus Silikon und wurde für höheren Tragekomfort sowie weniger Druckstellen auf der Haut entwickelt. Das Haftband ist in der Strumpflänge inkludiert und in einer Breite von 5 cm erhältlich.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 <p>Micronoppenhaftband Zusätzliches Haftbandstück innen</p>	<p>Es können zusätzliche Haftbänder bzw. Haftbandstücke innen für mehr Halt eingenäht werden. Empfohlen für Patient*innen mit einer ausgeprägten konischen Beinform, voluminösen, ödem-betonnten Oberschenkeln und/oder weichem Gewebe.</p> <p>Zusätzliche Haftbänder können innen (lateral auf Gestrickinnenseite) eingenäht werden:</p> <p>Länge Haftband in Slipform innen (5 cm Breite): 5 cm, 10 cm, 12 cm, 15, cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 1/2 Länge innen, 3/4 Länge innen, punktuell innen.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2016</p>

3. Medizinische Kompressionsstrümpfe Flachstrick




Befestigung Bein

Zusätze	Beschreibung
 <p>SoftFit (nur AD)</p>	<p>Die feinen Silikonfäden der JOBST SoftFit Technologie werden direkt in den Abschlussbund des Wadenstrumpfes eingestrickt. So bleibt der Strumpf in Position ohne in die Haut einzuschären und der durchgehende Kompressionsdruckverlauf bleibt erhalten. Dies sorgt für einen angenehmen Tragekomfort und sicheren Halt.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 <p>Hüftbefestigung mit Klett</p>	<p>Zur zusätzlichen Befestigung eines Oberschenkellangen Strumpfes (AG) kann eine Hüftbefestigung mit Klettverschluss gewählt werden</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2006</p>

Ausführung Fuß

Zusätze	Beschreibung
 <p>Futterstoff Hallux</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, einen Bereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern. Empfohlen für Lymphödem-Patient*innen mit einer Zehenfehlstellung Hallux Valgus.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>Futterstoff Achillessehne</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, einen Bereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>T-Ferse</p>	<p>Entwickelt, um die Faltenbildung auf dem Spann zu vermindern, wodurch das Risiko von Einschnürung, Hautreizung und -verletzung sowie Druckstellen verringert wird. Unterstützt die Gelenkfunktionalität.</p> <p>Empfohlen für Patient*innen mit Lymph- und/oder Lipödem und prominenten Extensorensehnen, Hautfalten im Y-Maß bzw. ausgeprägten anatomischen Fersen.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2030</p>

Ausführung Fuß

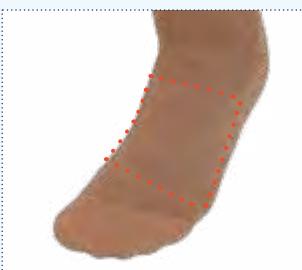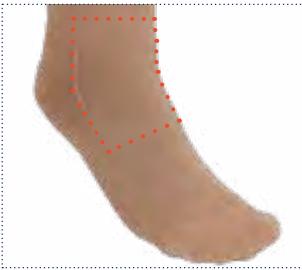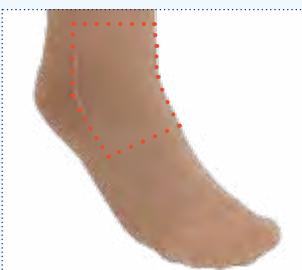
Zusätze	Beschreibung
 <p>Tasche Fußrücken</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an drei Seiten zugenäht ist und das Einlegen von Materialien, wie beispielsweise Pelotten-Material, erlaubt. Die Tasche schützt empfindliche Haut vor Reibung und mechanischer Belastung und verringert Hautirritationen im Einsatzbereich. Empfohlen für Lymphödem-Patient*innen, die zur Ausbildung eines Fensterödems auf dem Fußrücken neigen.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>Futterstoff Fußrücken</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, einen Bereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>Tasche Y-Maß</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an drei Seiten zugenäht ist und das Einlegen von Materialien, wie beispielsweise Pelotten-Material, erlaubt. Die Tasche schützt empfindliche Haut vor Reibung und mechanischer Belastung und verringert Hautirritationen im Einsatzbereich.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>Futterstoff Y-Maß</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, einen Bereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>Futterstoff Ferse</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, einen Bereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2031</p>

3. Medizinische Kompressionsstrümpfe Flachstrick

Ausführung Fuß

Zusätze	Beschreibung
 <p>Schräger Fuß, offene Spitze</p>	<p>Der Abschluss verläuft schräg und gewährleistet so den erforderlichen Druckverlauf entlang der Zehengrundgelenke. Zirkuläre Einschnürung und die Entstehung eines Vorfußödems können vermieden werden.</p> <p>Ein Strumpf ohne Fußspitze bzw. mit offener Spitze kann in Kombination mit einer Zehenkappe getragen werden. Ermöglicht die Verwendung einer einfachen Anziehhilfe.</p> <p>Hinweis: Die BUFA empfiehlt grundsätzlich für alle Lymphödem-Patient*innen die Verwendung von schrägen Fußabschlüssen.</p>
 <p>Schräger Fuß, geschlossene Spitze</p>	<p>Der Abschluss verläuft schräg und gewährleistet so den erforderlichen Druckverlauf entlang der Zehengrundgelenke. Zirkuläre Einschnürung und die Entstehung eines Vorfußödems können vermieden werden.</p> <p>Ein Strumpf mit Fußspitze bzw. mit geschlossener Spitze verringert ein mögliches Rutschen des Strumpfes nach hinten während des Gehens. Die Fußspitze wird aus weichem Material gestrickt und übt keinen Kompressionsdruck auf den Fuß aus.</p>
 <p>Gerader Fuß, offene Spitze</p>	<p>Die Kompression endet in einer geraden Linie, beginnend an der Basis des kleinen Zehs. Mit offener oder geschlossener Fußspitze erhältlich.</p> <p>Ein Strumpf ohne Fußspitze bzw. mit offener Spitze kann in Kombination mit einer Zehenkappe getragen werden. Ermöglicht die Verwendung einer einfachen Anziehhilfe.</p> <p>Hinweis: Die BUFA empfiehlt grundsätzlich für alle Lymphödem-Patient*innen die Verwendung von schrägen Fußabschlüssen.</p>
 <p>Gerader Fuß, geschlossene Spitze</p>	<p>Die Kompression endet in einer geraden Linie, beginnend an der Basis des kleinen Zehs. Ein Strumpf mit Fußspitze bzw. mit geschlossener Spitze verringert ein mögliches Rutschen des Strumpfes nach hinten während des Gehens. Die Fußspitze wird aus weichem Material gestrickt und übt keinen Kompressionsdruck auf den Fuß aus.</p> <p>Ein Strumpf mit Fußspitze bzw. mit geschlossener Spitze verringert ein mögliches Rutschen des Strumpfes nach hinten während des Gehens. Die Fußspitze wird aus weichem Material gestrickt und übt keinen Kompressionsdruck auf den Fuß aus.</p>
	<p>HiMi-Nr. 17.99.99.2025</p>
	<p>HiMi-Nr. 17.99.99.2025</p>

Ausführung Arm

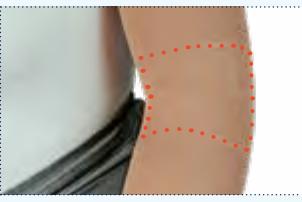Zusätze	Beschreibung
 <p>Tasche Armbeuge</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an drei Seiten zugenäht ist und das Einlegen von Materialen, wie beispielsweise Pelotten-Material, erlaubt. Die Tasche schützt empfindliche Haut vor Reibung und mechanischer Belastung und verringert Hautirritationen im Einsatzbereich.</p>
 <p>Futterstoff Armbeuge</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, einen Bereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern.</p>
	<p>HiMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
	<p>HiMi-Nr. 17.99.99.2031</p>

Befestigung Arm

Zusätze	Beschreibung
 SoftFit	<p>Die feinen Silikonfäden der JOBST SoftFit Technologie werden direkt in den Abschlussbund des Armstrumpfes eingestrickt. So bleibt der Strumpf in Position ohne in die Haut einzuschnüren und der durchgehender Kompressionsdruckverlauf bleibt erhalten. Dies sorgt für angenehmen Tragekomfort und sicherem Halt.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 Noppenhaftband / Haftband oben	<p>Das starke Haftband, entwickelt für weiches Bindegewebe, verringert dank der Silikon-Noppen-Struktur mögliches Rutschen. Das Haftband ist in der Strumpflänge inkludiert und in den Breiten 5 cm und 2,5 cm erhältlich.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 Noppenhaftband Zusätzliches Haftband innen	<p>Es können zusätzliche Haftbänder bzw. Haftbandstücke innen für mehr Halt eingenäht werden. Empfohlen für Patient*innen mit einer ausgeprägten konischen Armform, voluminösen, ödem-betonten Oberarmen und/oder weichem Gewebe sowie Empfindlichkeit im axillären Bereich.</p> <p>Zusätzliche Haftbänder können innen (lateral auf Gestrickinnenseite) eingenäht werden:</p> <p>Länge Haftband in Slipform innen (2,5 cm oder 5 cm Breite): 5 cm, 10 cm, 1/2 Länge innen, 3/4 Länge innen, punktuell innen</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2016</p>
 Micronoppenhaftband / Haftband oben	<p>Das sanfte Haftband, speziell entwickelt für Patient*innen mit empfindlicher Haut. Hilft, die Kompressionsversorgung in Position zu halten. Die Micronoppen-Struktur besteht aus Silikon und wurde für höheren Tragekomfort sowie weniger Druckstellen auf der Haut entwickelt.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 Micronoppenhaftband Zusätzliches Haftbandstück innen	<p>Es können zusätzliche Haftbänder bzw. Haftbandstücke innen für mehr Halt eingenäht werden. Empfohlen für Patient*innen mit einer ausgeprägten konischen Armform, voluminösen, ödem-betonten Oberarmen und/oder weichem Gewebe sowie Empfindlichkeit im axillären Bereich.</p> <p>Zusätzliche Haftbänder können innen (lateral auf Gestrickinnenseite) eingenäht werden:</p> <p>Länge Haftband in Slipform innen (2,5 cm oder 5 cm Breite): 5 cm, 10 cm, 1/2 Länge innen, 3/4 Länge innen, punktuell innen</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>



JOBST ELVAREX SOFT SEAMLESS

Zuverlässige und hautfreundliche Kompression

Die innovativen und flachgestrickten JOBST Elvarex Soft Seamless Kompressionsfußkappen und Kompressionshandschuhe werden für einen hohen Tragekomfort nach Maß gefertigt und ganz ohne Naht hergestellt.



Nahtlos

Aus einem Stück ohne Nähte gefertigt zur optimalen Ödemkontrolle und für ein exzellentes Tragegefühl.



Angenehm weich

Hautschonende Weichheit für optimalen Tragekomfort.



Mikro-Massage

Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikromassage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.



Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftpumpe.

INDIKATION: LYMPHÖDEM

Ohne ausgeprägte Hautfalten und Verformungen

Milde Ausprägung

Moderate Ausprägung

Schwere Ausprägung

Unsere Empfehlung

Mögliche Empfehlung

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

		Maß		
Ausführungen		AC ^I	AE	AA
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●
Informationen		KKL 1: 87 % Polyamid, 13 % Elasthan KKL 2: 90 % Polyamid, 10 % Elasthan		
Wäsche		Die Trocknereignung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.		
Patient*innen entscheiden sich auch für...		<ul style="list-style-type: none"> • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 97 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 93 		

FARBEN




Beige



Macchiato*



Dunkelbraun

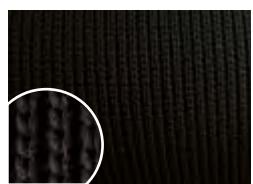


Schwarz



Grau



Dunkelblau

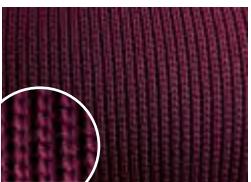

Cranberry



Rubinrot



Pine Green



Sunflower Yellow

* Nur bei Armversorgungen




Optimierte Abschlüsse

Die spezielle Komfortzone im Abschlussbereich ermöglicht ein bequemes Anziehen und Tragen der Versorgung in Verbindung mit Arm- oder Beinkompressionsversorgungen. Finger- und Zehenabschlüsse sind flach verarbeitet, tragen nicht auf und verhindern eine Rollneigung.

Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

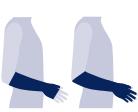Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 Handschuh AC¹ ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2011	17.99.99.2011
	Stück	17.99.99.2012	17.99.99.2012
 Langer Handschuh AE ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.10.09.0008	17.10.09.1008
	Stück	17.10.08.0008	17.10.08.1009
	Zehnkappe AA mit vier Zehen	17.99.99.2004	17.99.99.2004



JOBST ELVAREX

UNTERE EXTREMITÄTEN

Unser Original - starke Kompression für eine feste Unterstützung

Vertraue unserer bewährten Flachstrickqualität - angepasst auf die individuellen Bedürfnisse deiner Kund*innen. Speziell entwickelt für Patient*innen mit ausgeprägten Hautfalten und Verformungen.



Überbrückt Hautfalten

Bietet Stabilität, die hilft, Hautfalten zu überbrücken.



Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.



Hoher Baumwollanteil

Bietet ab KKL 2 einen hohen Baumwollanteil.

INDIKATION: LYMPHÖDEM UND LIPÖDEM

Milde Ausprägung

Moderate Ausprägung

Schwere Ausprägung

Unsere Empfehlung

Mögliche Empfehlung

KUNDENWUNSCH NACH ...

Starkem Halt

Medizinischer Wirksamkeit

Hoher Anpassbarkeit

ZUVERLÄSSIGKEIT:

JOBST Elvarex verliert deutlich weniger Arbeitsdruck (bis zu 6% weniger mmHg) und Ruhedruck (bis zu 24% weniger mmHg) im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten.^{1,2}


INDIVIDUELLE VERSORGUNG:

JOBST Elvarex ist der Experte mit den meisten Zusätzen in unserem Flachstrickportfolio zur individuellen Kundenversorgung.

1: Essity group. Data on file 2025

2: FMR Research: JOBST Lymphology LIVE Segment Portfolio Re-Alignment Qualitative Study. 2023

FARBEN

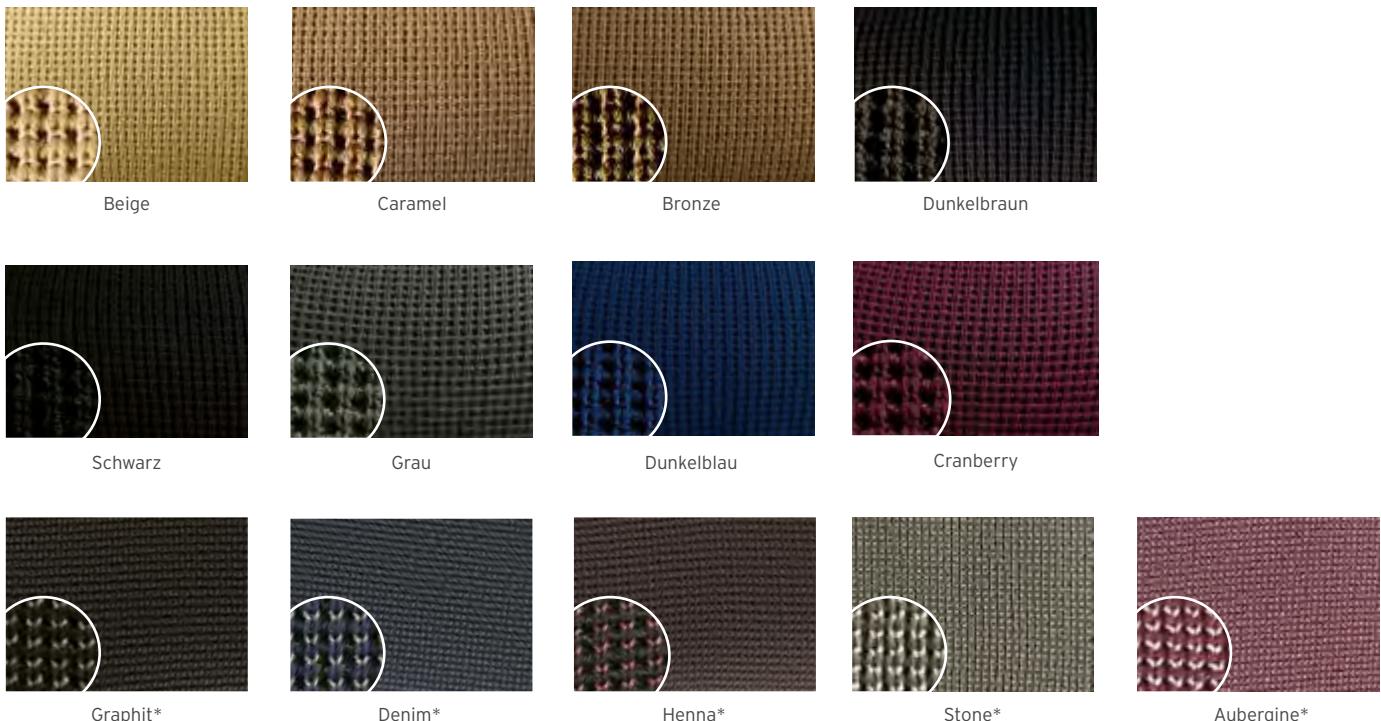

*Die melierten Farben sind nur für Beinversorgungen erhältlich.

HAFTBÄNDER Außen/Innen



Mehr Details,
welches Haftband
die beste Wahl
ist, findest du auf
Seite 19.

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen		Maß								
		AA	AD	AF	AG	AT	BT	CT	ET	FT
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 3: 34 - 42 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 3 forte: 38 - 46 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 4: > 49 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 4 super: > 70 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 70 % Polyamid, 14 % Elasthan, 16 % Elastodien KKL 2: 41% Polyamid, 27% Baumwolle, 22% Elastodien, 10% Elasthan; KKL 3: 40% Baumwolle, 33% Polyamid, 21% Elastodien, 6% Elasthan KKL 3 forte: 39% Baumwolle, 31% Polyamid, 24% Elastodien, 6% Elasthan KKL 4: 38% Baumwolle, 27% Elastodien, 29% Polyamid, 5% Elasthan; KKL 4 super: 39% Baumwolle, 29% Elastodien, 27% Polyamid, 5% Elasthan								
	Wäsche	40°C	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Farbakzente mit der Schließnaht setzen

Deine Kund*innen können den JOBST Elvarex Kompressionsstrumpf mit einer Schließnaht in den Farben Beige, Caramel, Bronze, Dunkelbraun, Schwarz, Grau, Dunkelblau oder Cranberry kombinieren.



JOBST Elvarex Strumpfhose (AT)

JOBST Elvarex Strumpfhosen (AT) setzen sich aus zwei JOBST Elvarex AG-Beinversorgungen und einer JOBST Elvarex Leibbinde zusammen. Bei der Bestellung findest du auf deinen Belegen zusätzlich zur Hilfsmittelnummer die Bestandteile einzeln aufgeführt. Die nachfolgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick:

KKL	Hilfsmittelnr.		Bestandteile & KKL	Hilfsmittelnr.
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 1	17.99.99.2003	+	2 x JOBST Elvarex AG, KKL 1	17.06.17.0008
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 2			2 x JOBST Elvarex AG, KKL 2	17.06.17.1013
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 3			2 x JOBST Elvarex AG, KKL 3	17.06.17.2013
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 3 forte			2 x JOBST Elvarex AG, KKL 3 forte	17.06.17.2012
			2 x JOBST Elvarex AG, KKL 4	17.06.17.2013
			2 x JOBST Elvarex AG, KKL 4 super	17.06.17.2012

Bei JOBST Elvarex Strumpfhosen (AT) können die unterschiedlichen Kompressionsklassen miteinander kombiniert werden. Beispielsweise: 2xAG in der Kompressionsklasse 3 mit einer Leibbinde in der Kompressionsklasse 2.

JOBST Elvarex

Untere Extremitäten (Beinversorgung)

	Maß											
												
Ausführung Leibteil	AA	AB, AB'	AD	AF	AG	AG-T	AT	AG-HT	BT, BT'	CT	ET	FT
Ausführung Leibteil	Slipform / schräger Abschluss					•	•	•	•	•	•	•
	Gerader Abschluss					•	•	•	•	•	•	•
	Hodensack					•	•	•	•	•	•	•
	Reißverschluss					•	•	•	•	•	•	•
	Reißverschluss mit Untertritt					•	•	•	•	•	•	•
	Reißverschluss mit Untertritt-verlängerung und Umschlag					•	•	•	•	•	•	•
	Bellavar-Verstärkung im Leibteil					•	•	•	•	•	•	•
	Schwangerschaftsleibteil					•	•	•	•	•	•	•
	Damenzwickel aus Elvarex Material					•	•	•	•	•	•	•
	Standard-Zwickel					•	•	•	•	•	•	•
Abschluss Leibteil	Zwickel aus Netzmaterial					•	•	•	•	•	•	•
	Strickrand					•	•	•	•	•	•	•
	Durchziehgummi					•	•	•	•	•	•	•
	Taillenband ohne Klett					•	•	•	•	•	•	•
	Taillenband mit Klett					•	•	•	•	•	•	•
	Sensitive Haftband in Taille					•	•	•	•	•	•	•
Abschluss Leibteil	Noppenhaftband in Taille					•	•	•	•	•	•	•

JOBST Elvarex

Untere Extremitäten (Beinversorgung)

		Maß											
		AA	AB, AB'	AD	AF	AG	AG-T	AT	AG-HT	BT, B'T	CT	ET	FT
Ausführung Bein	Slipform / schräger Abschluss			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gerader Abschluss		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Funktionszone Oberbein & Slipform					●	●	●	●	●	●	●	●
	Funktionszone Knie				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Reißverschluss			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Reißverschluss mit Untertritt			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Reißverschluss mit Untertritt-verlängerung und Umschlag			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Futterstoff Achillessehne			●	●	●	●	●	●				
	Futterstoff Kniekehle				●	●	●	●	●	●	●	●	
Befestigung Bein	SoftFit (KKL 1-3)			●									
	Noppenhaftband oben			●	●	●							
	Noppenhaftband innen			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Micronoppenhaftband oben			●		●							
	Micronoppenhaftbandstück innen			(nur wenn auch oben)		(nur wenn auch oben)							

JOBST Elvarex

Untere Extremitäten (Beinversorgung)

	Maß											
	AA	AB, AB ¹	AD	AF	AG	AG-T	AT	AG-HT	BT, B'T	CT	ET	FT
Ausführung Fuß	T-Ferse (KKL 2-3F)			●	●	●	●	●	●			
	Knöchelpelotte			●	●	●	●	●	●			
	Schräger Fuß		●	●	●	●	●	●	●			
	Gerader Fuß		●	●	●	●	●	●	●			
	Offene Spitze			●	●	●	●	●	●			
	Geschlossene Spitze			●	●	●	●	●	●			
	4 Zehen	●										
	5 Zehen	●										
	Zehen zusammenfassen	●										
	Fehlende Zehen	●										
	Futterstoff Ferse			●	●	●	●	●	●			
	Tasche Fußrücken			●	●	●	●	●	●			
	Futterstoff Fußrücken			●	●	●	●	●	●			
	Tasche Y-Maß			●	●	●	●	●	●			
	Futterstoff Y-Maß			●	●	●	●	●	●			
	Futterstoff Hallux			●	●	●	●	●	●			

JOBST Elvarex untere Extremitäten

Maßsortiment AD

Kompressionsklasse 1- 4 super

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
	Wadenstrumpf AD	Stück	17.06.14.0008 KKL 3
			17.06.14.1007 KKL 3 forte
	Wadenstrumpf AD	Stück	17.06.14.2006 KKL 4
			17.06.14.2016 KKL 4 super
	Wadenstrumpf AD	Stück	17.06.14.3012
			17.06.14.3011

Maßsortiment AF, AG und AG-T

Kompressionsklasse 1- 4 super

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
Halbschenkelstrumpf AF	Stück	17.06.15.0008	17.06.15.1007
Oberschenkelstrumpf AG	Stück	17.06.16.0008	17.06.16.1007
Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.16.0008	17.06.16.1007
		17.99.99.2006	17.99.99.2006
		KKL 3	KKL 3 forte
Halbschenkelstrumpf AF	Stück	17.06.15.2006	17.06.15.2014
Oberschenkelstrumpf AG	Stück	17.06.16.2006	17.06.16.2016
Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.16.2006	17.06.16.2016
		17.99.99.2006	17.99.99.2006
		KKL 4	KKL 4 super
Halbschenkelstrumpf AF	Stück	17.06.15.3011	17.06.15.3010
Oberschenkelstrumpf AG	Stück	17.06.16.3012	17.06.16.3011
Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.16.3012 17.99.99.2006	17.06.16.3011 17.99.99.2006

Zusätze	Einheit	Hilfsmittelnummer
Kompressionspelotten inkl. Tasche (exkl. BT, B1T, CT, ET, FT)	Paar	17.99.99.0002
Haftband (exkl. AG-T)	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
Reißverschluss (AD, AF, AG)	Stück	17.99.99.2015
Hodensack	Stück	17.99.99.2017
Eingriff	Stück	17.99.99.2018
Geschlossene Fußspitze	Stück	17.99.99.2025
Schräger Fuß	Stück	kassenspezifische Regelung
T-Ferse (KKL 2-3 forte)	Stück	17.99.99.2030
Slipform	Stück	17.99.99.2026
Funktionszone Knie (KKL 2-4 super)	Stück	17.99.99.2028
Funktionszone Oberbein (AF/AG)	Stück	17.99.99.2027
Futterstoff*/Tasche** Y-Maß, Fußrücken, Kniekehle	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Ferse	Stück	17.99.99.2031
Tasche** Schienbein	Stück	17.99.99.2031

* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

** Tasche: eine Seite offen

JOBST Elvarex untere Extremitäten

Maßsortiment Hosenversorgungen

Kompressionsklasse 1 - 3 forte

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer			
		KKL 1	KKL 2	KKL 3	KKL 3 forte
 Einbeinhose AG-HT	Stück	17.06.16.0008	17.06.16.1007	17.06.16.2006	17.06.16.2016
		17.99.99.2009			
		17.99.99.2003			
 Strumpfhose AT	Stück	17.06.17.0008	17.06.17.1013	17.06.17.2013	17.06.17.2012
		17.99.99.2003			
 Leggins BT, B'T	Stück	17.06.21.0012	17.06.21.1014	17.06.21.2012	17.06.21.2013
		17.99.99.2003			
 Caprihose CT	Stück	17.06.18.0006	17.06.18.1008	17.06.18.2008	17.06.18.2009
		17.99.99.2003			
 Bermuda ET	Stück	17.06.19.0006	17.06.19.1008	17.06.19.2008	17.06.19.2009
		17.99.99.2003			
 Radler FT	Stück	17.06.22.0010	17.06.22.1011	17.06.22.2012	17.06.22.2013
		17.99.99.2003			

i Information zum Maßsortiment AT auch auf Seite 54

Hosenversorgungen bestehen aus einem Leibteil (bis maximal KKL 3 forte) sowie Beinstrümpfen (bis maximal KKL 4 super) - Hilfsmittelnummern für KKL 4 & KKL 4 super entnehmen Sie bitte der Übersicht auf Seite 54.

Maßsortiment - Zehenteil

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
Zehenteil AA (ohne Zehen)	Stück	17.99.99.2004	17.99.99.2004
Zehenteil AA (mit Zehen)	Stück	17.99.99.2004	17.99.99.2004

Maßblatt




Das aktuelle Maßblatt findest du unter
www.jobst.de/fachhandel/downloads
oder bestelle direkt im JOBST eShop
unter eshop.jobst.de

BESCHREIBUNGEN DER ZUSÄTZE

Im Folgenden findest du eine Auswahl an Zusätzen, die wir für die unteren und oberen Extremitäten bei JOBST Elvarex anbieten. Die kurze Beschreibung und Empfehlung helfen dir bei der richtigen Wahl. Bitte beachte, dass dies nur ein Auszug aus unserem Gesamtportfolio ist. Gerne gehen wir auch auf individuelle Sonderwünsche ein, um den spezifischen Anforderungen deiner Kund*innen gerecht zu werden.

 Zur besseren Sichtbarkeit wurden Funktionszonen, Taschen und Futterstoffe grafisch hervorgehoben.

Ausführung Leibteil

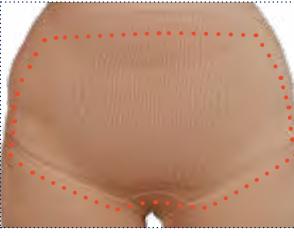Zusätze	Beschreibung
 Slipform / schräger Abschluss	<p>Mit der Slipform wird der Strumpf außen höher gestrickt, um sich der anatomischen Form anzupassen. Standardmäßig beträgt sie 10% vom Oberschenkelumfang (cG-Maß). Bei Bedarf kann im Kommentarfeld die Höhe geändert werden.</p> <p>Empfohlen für alle Patient*innen mit Lymph- und/oder Lipödem.</p> <p>Hinweis: Die Bundesfachschule Orthopädie-Technik (BUFA) empfiehlt zur Vermeidung zirkulären Einschürens die Verwendung von schrägen Abschlüssen (Slipform). Diese verhindern ein Abschnüren der Lymphabflussgefäße im Knie- und Leistenbereich.</p>
 Gerader Abschluss	<p>Ein gerader Abschluss kann eine Option für Patient*innen sein, bei denen der Schritt nicht höher liegt als die Gesäßfalte (kein Unterschied zwischen IG und IK), bei denen eine höhere Festigkeit bei cG benötigt wird und deren anatomische Ausprägung eine Slipform nicht zulassen.</p> <p>Hinweis: BUFA empfiehlt zur Vermeidung zirkulären Einschürens die Verwendung von schrägen Abschlüssen (Slipform).</p>
 Hodensack ohne Eingriff	<p>Option für das Leibteil. Zusätzlich auch mit Eingriff erhältlich.</p> <p>Optional auch erhältlich mit voller Kompression im Genitalbereich - empfohlen für Patienten mit einem Ödem im Genitalbereich.</p>
 Bellavar-Verstärkung im Leibteil	<p>Sorgt für eine Verstärkung im Bauchbereich durch eine zusätzliche Schicht bestehend aus JOBST Bellavar-Material (fester, rundgestrickter Stoff).</p> <p>Empfohlen für Patient*innen, die sich zusätzlichen Unterstützung im Bauchbereich wünschen und/oder bei Bauchüberhängen.</p>

Ausführung Leibteil

Zusätze	Beschreibung
 <p>Reißverschluss</p>	<p>Kann das funktionsgerechte An- und/oder Ablegen bei speziellen anatomischen Voraussetzungen erleichtern. Ermöglicht das Positionieren/Wechseln von Wundauflagen und Inkontinenzversorgungen. Ein Reißverschluss kann den Kompressionsdruckverlauf unterbrechen und verläuft nie über ein Gelenk.</p> <p>Bitte die patientenindividuellen Fähigkeiten (z.B. Kraft & Fingerfertigkeit) vor der Verwendung eines Reißverschlusses berücksichtigen.</p> <p>Mögliche Optionen: Vorne-mittig, rechts oder links in der Naht oder rechts und links in der Naht.</p> <p>Hinweis: Der Reißverschluss im Leibteil ist nur möglich mit den Hosenabschlussvarianten Strickrand, Durchziehgummi & Taillenband mit Klett.</p>
<p>Reißverschluss mit Untertritt oder mit Untertrittverlängerung und Umschlag</p>	<p>HIMi-Nr. 17.99.99.2015</p> <p>Hinweis: Kostenloser Zusatz zum Reißverschluss. Durch den Untertritt liegt der Reißverschluss nicht direkt auf der Haut auf und kann so sicher geschlossen werden. Der Umschlag verhindert den direkten Hautkontakt mit dem oberen Abschluss des Reißverschlusses und der Zipper-Mechanik (siehe S. 65). Unsere Empfehlung ist ein Reißverschluss mit Untertritt und Umschlag.</p>
 <p>Schwangerschaftsleibteil</p>	<p>Ein elastisches, weicheres Material, das verhindert, dass Druck auf dem Bauch entsteht.</p>
 <p>Standard-Zwickel</p>	<p>Standardoption aus dünnerem Material.</p>
 <p>Damenzwickel aus Elvarex Material</p>	<p>Empfohlen bei einem Ödem im Genitalbereich.</p>
 <p>Zwickel aus Netzmaterial</p>	<p>Option für besonders hohe Luftdurchlässigkeit bei starkem Schwitzen.</p>


Befestigung Leibteil

Zusätze	Beschreibung
 <p>Strickrand</p>	Das Gestrick wird mit einer einfachen Naht abgeschlossen. Optional auch mit Reißverschluss erhältlich.
 <p>Durchziehgummi</p>	Das in den Strickrand eingefasste Durchziehgummi lässt sich individuell justieren und gewährleistet dauerhaft den korrekten Sitz der Versorgung. Optional auch mit Reißverschluss erhältlich.
 <p>Taillenband ohne Klett</p>	Taillenband für Leibbinden und Hosen aus weichem, elastischen Stretchmaterial. Der besonders weiche Abschlussband fühlt sich angenehm auf der Haut an und bietet einen modischen Zusatz.
 <p>Taillenband mit Klett</p>	Taillenband für Leibbinden und Hosen aus weichem, elastischen Stretchmaterial, welches mit Klettverschluss zu schließen ist. Optional auch mit Reißverschluss erhältlich. Es hilft, den korrekten Sitz der Kompressionsversorgung zu gewährleisten.


Befestigung Leibteil

Zusätze	Beschreibung
 <p>Sensitives Haftband in Taille</p>	<p>Das weiche Haftband wurde für höheren Tragekomfort entwickelt. Sanftes Silikongarn wird im einzigartigen Fertigungsprozess gleichmäßig in das Textilband eingenäht und gewährleistet so einen sanften Halt auf der Haut. Dank der dezenten Silikonoberfläche ist es atmungsaktiv.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 <p>Noppenhaftband in Taille</p>	<p>Das starke Haftband, entwickelt für weiches Bindegewebe, verringert dank der Silikon-Noppen-Struktur mögliches Rutschen.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>

Ausführung Bein

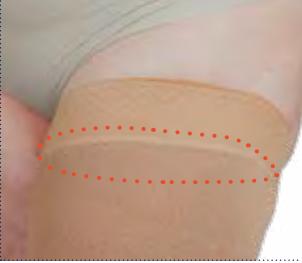
Zusätze	Beschreibung
 <p>Slipform / schräger Abschluss</p>	<p>Mit der Slipform wird der Strumpf außen höher gestrickt, um sich der anatomischen Form anzupassen. Standardmäßig beträgt sie 10% vom Oberschenkelumfang (cG-Maß) bei einem Oberschenkelstrumpf (AG) bzw. 4 cm bei einem Wadenstrumpf (AD). Bei Bedarf kann im Kommentarfeld die Höhe geändert werden.</p> <p>Empfohlen für alle Patient*innen mit Lymph- und/oder Lipödem.</p> <p>Hinweis: Die BUFA empfiehlt zur Vermeidung zirkulären Einschürens die Verwendung von schrägen Abschlüssen (Slipform). Diese verhindern ein Abschnüren der Lymphabflussgefäße im Knie- und Leistenbereich.</p>
 <p>Gerader Abschluss</p>	<p>Ein gerader Abschluss kann eine Option für Patient*innen sein, bei denen der Schritt nicht höher als die Gesäßfalte (kein Unterschied zwischen IG und IK), bei denen eine höhere Festigkeit bei cG benötigt wird und deren anatomische Ausprägung eine Slipform nicht zulassen.</p> <p>Hinweis: BUFA empfiehlt zur Vermeidung zirkulären Einschürens die Verwendung von schrägen Abschlüssen (Slipform).</p>
 <p>Funktionszone Oberbein & Slipform</p>	<p>Die Funktionszone Oberbein dient zur proximalen Fixierung und empfiehlt sich für Patient*innen mit voluminiösen, ödembetonten Oberschenkeln und/oder weichem Gewebe. Sie passt sich an den anatomischen Verlauf der Leisten und Gesäßfalten an und verhindert Einschnürungen am Oberschenkel. Des Weiteren dient sie dem Ausgleich eines deutlichen Längenunterschieds zwischen den Messpunkten G und K.</p>
 <p>Funktionszone Knie</p>	<p>Eine spezielle Strickkonstruktion hilft, Hautirritationen, Hautverletzungen, Einschnürungen und Druckstellen im Kniekehlenbereich vorzubeugen sowie Faltenbildung zu verringern. Dies sorgt insbesondere bei vorwiegend sitzenden Tätigkeiten für einen angenehmeren Tragekomfort und gewährleistet die Gelenkfunktionalität bei Aufrechterhaltung des Kompressionsdrucks.</p>
 <p>Futterstoff Kniekehle</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, den Kniebereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern.</p> <p>Empfohlen für Patient*innen, deren Kniekehle besonders empfindlich ist und die nicht mit Funktionszone Knie versorgt werden können.</p> <p>Hinweis: Die Funktionszone Knie und der Futterstoff Kniekehle sind nicht miteinander kombinierbar.</p>
	<p>HiMi-Nr. 17.99.99.2027 17.99.99.2026</p>
	<p>HiMi-Nr. 17.99.99.2028</p>
	<p>HiMi-Nr. 17.99.99.2031</p>

Ausführung Bein

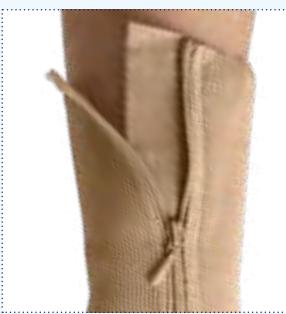Zusätze	Beschreibung
 Reißverschluss	<p>Kann das funktionsgerechte An- und/oder Ablegen bei speziellen anatomischen Voraussetzungen erleichtern. Ermöglicht das Positionieren/Wechseln von Pelotten und Wundauflagen. Ein Reißverschluss kann den Kompressionsdruckverlauf unterbrechen und verläuft nie über ein Gelenk (z.B. Knie).</p> <p>Bitte die patientenindividuellen Fähigkeiten (z.B. Kraft & Fingerfertigkeit) vor der Verwendung eines Reißverschlusses berücksichtigen.</p> <p>Mögliche Optionen: B bis D, E bis G (jeweils innen oder außen)</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2015</p>
 Reißverschluss mit Untertritt	<p>Kostenloser Zusatz zum Reißverschluss. Durch den Untertritt liegt der Reißverschluss nicht direkt auf der Haut auf und kann so sicher geschlossen werden.</p>
 Reißverschluss mit Untertritt-verlängerung und Umschlag	<p>Kostenloser Zusatz zum Reißverschluss. Der Umschlag verhindert den direkten Hautkontakt mit dem oberen Abschluss des Reißverschlusses und der Zipper-Mechanik.</p>

3. Medizinische Kompressionsstrümpfe Flachstrick

Befestigung Bein

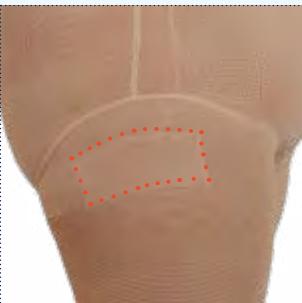Zusätze	Beschreibung
 <p>Noppenhaftband / Haftband oben</p>	<p>Das starke Haftband, entwickelt für weiches Bindegewebe, verringert dank der Silikon-Noppen-Struktur mögliches Rutschen. Das Haftband ist in der Strumpflänge inkludiert und in den Breiten 5 cm sowie auch in 2,5 cm (bei AD) erhältlich.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 <p>Noppenhaftband Zusätzliches Haftband innen</p>	<p>Es können zusätzliche Haftbänder bzw. Haftbandstücke innen für mehr Halt eingenäht werden. Empfohlen für Patient*innen mit einer ausgeprägten konischen Beinform, voluminösen, ödem-betonnten Oberschenkeln und/oder weichem Gewebe.</p> <p>Zusätzliche Haftbänder können innen (lateral auf Gestrickinnenseite) eingenäht werden:</p> <p>Länge Haftband in Slipform innen (5 cm Breite): 5 cm, 10 cm, 12 cm, 15, cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 1/2 Länge innen, 3/4 Länge innen, punktuell innen.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2016</p>
 <p>Micronoppenhaftband / Haftband oben</p>	<p>Das sanfte Haftband, speziell entwickelt für Patient*innen mit empfindlicher Haut. Hilft, die Kompressionsversorgung in Position zu halten. Die Micronoppen-Struktur besteht aus Silikon und wurde für höheren Tragekomfort sowie weniger Druckstellen auf der Haut entwickelt. Das Haftband ist in der Strumpflänge inkludiert und in einer Breite von 5 cm erhältlich.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 <p>Micronoppenhaftband Zusätzliches Haftbandstück innen</p>	<p>Es können zusätzliche Haftbänder bzw. Haftbandstücke innen für mehr Halt eingenäht werden. Empfohlen für Patient*innen mit einer ausgeprägten konischen Beinform, voluminösen, ödem-betonnten Oberschenkeln und/oder weichem Gewebe.</p> <p>Zusätzliche Haftbänder können innen (lateral auf Gestrickinnenseite) eingenäht werden:</p> <p>Länge Haftband in Slipform innen (5 cm Breite): 5 cm, 10 cm, 12 cm, 15, cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 1/2 Länge innen, 3/4 Länge innen, punktuell innen.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2016</p>

Befestigung Bein



Zusätze	Beschreibung
 <p>SoftFit (nur AD)</p>	<p>Die feinen Silikonfäden der JOBST SoftFit Technologie werden direkt in den Abschlussbund des Wadenstrumpfes eingestrickt. So bleibt der Strumpf in Position ohne in die Haut einzuschnüren und der durchgehende Kompressionsdruckverlauf bleibt erhalten. Dies sorgt für angenehmen Tragekomfort und sicheren Halt.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 <p>Hüftbefestigung mit Klett</p>	<p>Zur zusätzlichen Befestigung eines oberschenkellangen Strumpfes (AG) kann eine Hüftbefestigung mit Klettverschluss gewählt werden.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2006</p>

3. Medizinische Kompressionsstrümpfe Flachstrick


Ausführung Fuß

Zusätze	Beschreibung
 <p>Futterstoff Hallux</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, einen Bereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern. Empfohlen für Patient*innen mit einer Zehenfehlstellung Hallux Valgus.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>Futterstoff Achillessehne</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, einen Bereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>T-Ferse</p>	<p>Entwickelt, um die Faltenbildung auf dem Spann zu vermindern, wodurch das Risiko von Einschnürung, Hautreizung und -verletzung sowie Druckstellen verringert wird. Unterstützt die Gelenkfunktionalität.</p> <p>Empfohlen für Patient*innen mit Lymph- und/oder Lipödem und prominenten Extensorensehnen, Hautfalten im Y-Maß bzw. ausgeprägten anatomischen Fersen.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2030</p>
 <p>Knöchelpelotte außen</p>	<p>Pelotten werden für die partielle Druckerhöhung eingesetzt. Die Knöchelpelotten sind so geformt, dass sie die Kompression gleichmäßig um den gesamten Knöchel und nicht nur auf der dünnen Haut über dem Knöchel verteilen. Kann entweder innen und außen oder nur innen oder außen nach Standardmaß angebracht werden.</p> <p>Empfohlen für Lymphödem-Patient*innen, die zur Bildung von Kullissenödemen im Knöchelbereich neigen.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.0002</p>

Ausführung Fuß

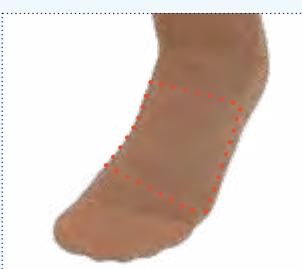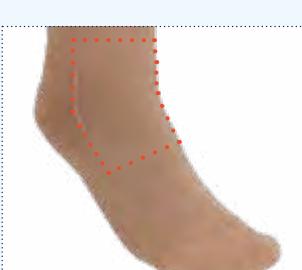Zusätze	Beschreibung
 <p>Tasche Fußrücken</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an drei Seiten zugenäht ist und das Einlegen von Materialien, wie beispielsweise Pelotten-Material, erlaubt. Die Tasche schützt empfindliche Haut vor Reibung und mechanischer Belastung und verringert Hautirritationen im Einsatzbereich.</p> <p>Empfohlen für Lymphödem-Patient*innen, die zur Ausbildung eines Fensterödems auf dem Fußrücken neigen.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>Futterstoff Fußrücken</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, einen Bereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>Tasche Y-Maß</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an drei Seiten zugenäht ist und das Einlegen von Materialien, wie beispielsweise Pelotten-Material, erlaubt. Die Tasche schützt empfindliche Haut vor Reibung und mechanischer Belastung und verringert Hautirritationen im Einsatzbereich.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>Futterstoff Y-Maß</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, einen Bereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>Futterstoff Ferse</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, einen Bereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern.</p> <p>HIMi-Nr. 17.99.99.2031</p>

Ausführung Fuß

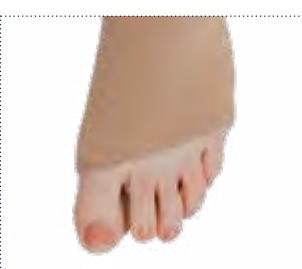Zusätze	Beschreibung
 <p>Schräger Fuß, offene Spitze</p>	<p>Der Abschluss verläuft schräg und gewährleistet so den erforderlichen Druckverlauf entlang der Zehengrundgelenke. Zirkuläre Einschnürung und die Entstehung eines Vorfußödems können vermieden werden.</p> <p>Ein Strumpf ohne Fußspitze bzw. mit offener Spitze kann in Kombination mit einer Zehenkappe getragen werden. Ermöglicht die Verwendung einer einfachen Anziehhilfe.</p> <p>Hinweis: Die BUFA empfiehlt grundsätzlich für alle Lymphödem-Patient*innen die Verwendung von schrägen Fußabschlüssen.</p>
 <p>Schräger Fuß, geschlossene Spitze</p>	<p>Der Abschluss verläuft schräg und gewährleistet so den erforderlichen Druckverlauf entlang der Zehengrundgelenke. Zirkuläre Einschnürung und die Entstehung eines Vorfußödems können vermieden werden.</p> <p>Ein Strumpf mit Fußspitze bzw. mit geschlossener Spitze verringert ein mögliches Rutschen des Strumpfes nach hinten während des Gehens. Die Fußspitze wird aus weichem Material gestrickt und übt keinen Kompressionsdruck auf den Fuß aus.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2025</p>
 <p>Gerader Fuß, offene Spitze</p>	<p>Die Kompression endet in einer geraden Linie, beginnend an der Basis des kleinen Zehs. Mit offener oder geschlossener Fußspitze erhältlich.</p> <p>Ein Strumpf ohne Fußspitze bzw. mit offener Spitze kann in Kombination mit einer Zehenkappe getragen werden. Ermöglicht die Verwendung einer einfachen Anziehhilfe.</p> <p>Hinweis: Die BUFA empfiehlt grundsätzlich für alle Lymphödem-Patient*innen die Verwendung von schrägen Fußabschlüssen.</p>
 <p>Gerader Fuß, geschlossene Spitze</p>	<p>Die Kompression endet in einer geraden Linie, beginnend an der Basis des kleinen Zehs. Ein Strumpf mit Fußspitze bzw. mit geschlossener Spitze verringert ein mögliches Rutschen des Strumpfes nach hinten während des Gehens. Die Fußspitze wird aus weichem Material gestrickt und übt keinen Kompressionsdruck auf den Fuß aus.</p> <p>Ein Strumpf mit Fußspitze bzw. mit geschlossener Spitze verringert ein mögliches Rutschen des Strumpfes nach hinten während des Gehens. Die Fußspitze wird aus weichem Material gestrickt und übt keinen Kompressionsdruck auf den Fuß aus.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2025</p>
 <p>4 Zehen</p>	<p>Bei der Zehenkappe sollte der kleine Zeh ausgespart werden.</p> <p>Hinweis: Bei der Zehenkappe von JOBST Elvarex können Zehen zusammengefasst oder fehlende Zehen berücksichtigt werden. Für JOBST Elvarex und JOBST Elvarex Plus können auch alle 5 Zehen gestrickt werden.</p>



JOBST ELVAREX

OBERE EXTREMITÄTEN

Unser Original - starke Kompression für eine feste Unterstutzung

Vertraue unserer bewahrten Flachstrickqualitat angepasst auf die individuellen Bedrfnisse von Patient*innen.



Uberbrckt Hautfalten

Bietet Stabilitat, die hilft, Hautfalten zu uberbrcken.



Atmungsaktiv

Ermglicht eine hohe Luftdurchlssigkeit.



Strukturierte Oberflache

Die strukturierte Oberflache kann einen Mikromassage-Effekt auf der Haut ausuben, wodurch der Lymphabfluss unterstutzt wird.

INDIKATION: LYMPHDEM UND LIPDEM

Milde Auspragung

Moderate Auspragung

Schwere Auspragung

Unsere Empfehlung

Mgliche Empfehlung

KUNDENWUNSCH NACH ...

Starkem Halt

Medizinischer Wirksamkeit

Hoher Anpassbarkeit

INDIVIDUELLE VERSORGUNG:

JOBST Elvarex ist der Experte mit den meisten Zusatzen in unserem Flachstrickportfolio zur individuellen Kundenversorgung.


EINLEGEFADEN:

JOBST Elvarex besitzt einen Naturkautschuk-Einlegefaden, der doppelt umwunden wird (z. B. mit Polyamid- oder Baumwollfaden). Die geringe Materialermudung von Naturkautschuk ist besonders wichtig fur ein effektives odem-Management. Zudem wird ein starkes und dichtes Gestrick mit hoher Wandstabilitat ermoglicht, das Flexibilitat bietet.

FARBEN



HAFTBÄNDER Außen/Innen

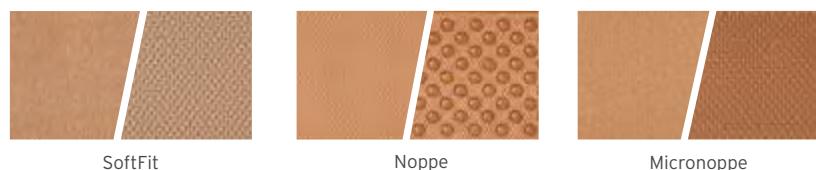

Mehr Details, welches Haftband die beste Wahl ist, findest du auf Seite 19.

Information zur Beratung von Patient*innen

Funktionszonen

Im JOBST Elvarex Sortiment können Funktionszonen für eine verbesserte Passform ausgewählt werden. Funktionszonen verringern Faltenbildungen, schützen besonders sensible Körperstellen und sorgen auf diese Weise für einen verbesserten Tragekomfort und mehr Bewegungsfreiheit.

Für die oberen Extremitäten: Oben schräg & Ellenbogen.



DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼		Maß							
		AC ¹	AE	AG	AG ¹	AH	CG	CG ¹	CH
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
Informationen		Materialzusammensetzung KKL 1: 73 % Polyamid, 15 % Elasthan, 12 % Elastodien KKL 2: 70 % Polyamid, 20 % Elastodien, 10 % Elasthan							
Wäsche		Die Trocknereignung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.							
Patient*innen entscheiden sich auch für...		<ul style="list-style-type: none"> JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 97 JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 93 							

JOBST Elvarex obere Extremitäten

Obere Extremitäten (Armversorgung)

		Maß					
		AC ¹	AE	AG ¹	AH	CG ¹	CH
Ausführung Arm	Schräger Abschluss		●	●	●	●	●
	Funktionszone Ellenbogen			●	●	●	●
	Tasche Armbeuge			●	●	●	●
	Futterstoff Armbeuge			●	●	●	●
	Reißverschluss (inkl. Untertritt)			●	●	●	●
Ausführung Hand	SoftFit (CG ¹)					●	
	Noppenhaftband oben	●	●			●	
	Noppenhaftband innen	●	●	●	●	●	●
	Micronoppenhaftband oben			●	●	●	●
	Micronoppenhaftbandstück innen			(nur wenn auch oben)			
	BH-Befestigung mit Klett				●		●
	Armhalterung				●		●
Ausführung Hand	Tasche Handinnenfläche	●	●	●	●		
	Tasche Handrücken	●	●	●	●		
	Futterstoff Daumennaht	●	●	●	●		
	Reißverschluss mit Untertritt Handrücken	●	●	●	●		
	Haftbandstück	●	●	●	●		
	Handschuh mit Finger mit Daumen	●	●	●	●		
	Fehlende Finger	●	●	●	●		

JOBST Elvarex obere Extremitäten

Maßsortiment - Armstrumpf

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
	Armstrumpf CG	Stück	17.10.04.0017 17.10.04.1018
	Armstrumpf CG¹ inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.04.0017 17.99.99.2026 17.10.04.1018 17.99.99.2026
	Armstrumpf CH mit Kappe und BH-Befestigung* inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.04.0018 17.99.99.2013 17.99.99.2026 17.10.04.1019 17.99.99.2013 17.99.99.2026
	Armstrumpf CH mit Kappe und Halterung inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.04.0018 17.99.99.2013 17.99.99.2026 17.10.04.1019 17.99.99.2013 17.99.99.2026

*mit/ohne Klettverschluss

Zusätze für JOBST Elvarex Armstrumpf-Versorgungen	Einheit	Hilfsmittelnummer
Haftband	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
SoftFit (CG ¹ , CG)	Stück	17.99.99.2008
Reißverschluss	Stück	17.99.99.2014
Funktionszone Ellenbogen (KKL 2)	Stück	17.99.99.2029
Futterstoff* Ellenbogen	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Armbeuge	Stück	17.99.99.2031
Tasche** Armbeuge	Stück	17.99.99.2031

* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

** Tasche: eine Seite offen

Maßsortiment - Handschuh

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 AC ¹	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück	17.99.99.2010 17.99.99.2010
	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2011 17.99.99.2011
	Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2012 17.99.99.2012
 AE	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück	17.10.07.0006 17.10.07.1010
	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.10.09.0006 17.10.09.1006
	Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.10.08.0006 17.10.08.1008

Zusätze für JOBST Elvarex Handschuh-Versorgungen	Einheit	Hilfsmittelnummer
Haftband (AE)	Stück	17.99.99.2008
Tasche** Handrücken	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Handrücken	Stück	17.99.99.2031
Schräger Abschluss (AE)	Stück	17.99.99.2026

JOBST Elvarex obere Extremitäten

Maßsortiment - einteiliger Armstrumpf mit Handschuh

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
Armstrumpf AG	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück 17.10.06.0002 17.99.99.2010	17.10.06.1002 17.99.99.2010
	Ohne Finger, mit Daumen	Stück 17.10.06.0002 17.99.99.2011	17.10.06.1002 17.99.99.2011
	Mit Finger, mit Daumen	Stück 17.10.06.0002 17.99.99.2012	17.10.06.1002 17.99.99.2012
Armstrumpf AG ¹ inkl. schrägem Abschluss	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück 17.10.06.0002 17.99.99.2010 17.99.99.2026	17.10.06.1002 17.99.99.2010 17.99.99.2026
	Ohne Finger, mit Daumen	Stück 17.10.06.0002 17.99.99.2011 17.99.99.2026	17.10.06.1002 17.99.99.2011 17.99.99.2026
	Mit Finger, mit Daumen	Stück 17.10.06.0002 17.99.99.2012 17.99.99.2026	17.10.06.1002 17.99.99.2012 17.99.99.2026
Armstrumpf AH mit Kappe und Halterung inkl. schrägem Abschluss	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück 17.10.04.0018 17.99.99.2010 17.99.99.2013 17.99.99.2026	17.10.04.1019 17.99.99.2010 17.99.99.2013 17.99.99.2026
	Ohne Finger, mit Daumen	Stück 17.10.04.0018 17.99.99.2011 17.99.99.2013 17.99.99.2026	17.10.04.1019 17.99.99.2011 17.99.99.2013 17.99.99.2026
	Mit Finger, mit Daumen	Stück 17.10.04.0018 17.99.99.2012 17.99.99.2013 17.99.99.2026	17.10.04.1019 17.99.99.2012 17.99.99.2013 17.99.99.2026




Zusätze für JOBST Elvarex Armstrumpf- und Handschuh-Versorgungen	Einheit	Hilfsmittelnummer
Haftband	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
BH-Befestigung (mit/ohne Klettverschluss)	Stück	kassenspezifische Regelung
Halterung	Stück	kassenspezifische Regelung
Reißverschluss	Stück	17.99.99.2014
Futterstoff* Handrücken	Stück	17.99.99.2031
Tasche** Handrücken	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Ellenbogen	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Armbeuge	Stück	17.99.99.2031
Tasche** Armbeuge	Stück	17.99.99.2031

* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

** Tasche: eine Seite offen

3. Medizinische Kompressionsstrümpfe Flachstrick

Ausführung Arm

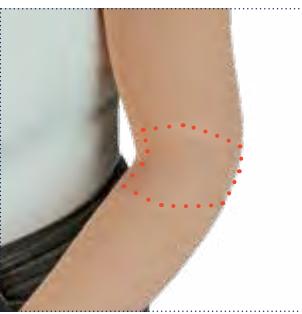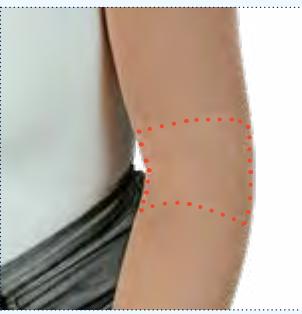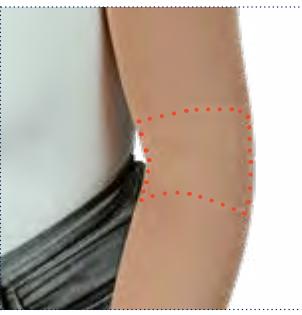
Zusätze	Beschreibung
 <p>Funktionszone Ellenbogen</p>	<p>Eine spezielle Strickkonstruktion hilft, Hautirritationen im Ellenbogengbereich vorzubeugen und Faltenbildung zu verringern. Wurde zur Verbesserung der Mobilität und Gelenkfunktionalität bei Aufrechterhaltung des Kompressionsdrucks entwickelt.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2029</p>
 <p>Tasche Armbeuge</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an drei Seiten zugenäht ist und das Einlegen von Materialen, wie beispielsweise Pelotten-Material, erlaubt. Die Tasche schützt empfindliche Haut vor Reibung und mechanischer Belastung und verringert Hautirritationen im Einsatzbereich.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>Futterstoff Armbeuge</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, einen Bereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>Reißverschluss</p>	<p>Kann das funktionsgerechte An- und/oder Ablegen bei speziellen anatomischen Voraussetzungen erleichtern. Ermöglicht das Positionieren/Wechseln von Pelotten oder Wundaflagen. Ein Reißverschluss kann den Kompressionsdruckverlauf unterbrechen und verläuft nie über ein Gelenk (z.B. Ellenbogen). Bitte die patientenindividuellen Fähigkeiten (z.B. Kraft & Fingerfertigkeit) vor der Verwendung eines Reißverschlusses berücksichtigen.</p> <p>Mögliche Optionen: Außenseite Arm (nur bei AG und AG') C bis E, E bis G; Innenseite Arm (nur bei CG und CG') C bis E, E bis G, A bis E.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
<p>Reißverschluss mit Untertritt oder mit Untertrittverlängerung und Umschlag</p>	<p>Hinweis: Kostenloser Zusatz zum Reißverschluss. Durch den Untertritt liegt der Reißverschluss nicht direkt auf der Haut auf und kann so sicher geschlossen werden. Der Umschlag verhindert den direkten Hautkontakt mit dem oberen Abschluss des Reißverschlusses und der Zipper-Mechanik. Unsere Empfehlung ist ein Reißverschluss mit Untertritt und Umschlag.</p>

Befestigung Arm



Zusätze	Beschreibung
 <p>SoftFit</p>	<p>Die feinen Silikonfäden der JOBST SoftFit Technologie werden direkt in den Abschlussbund des Armstrumpfes eingestrickt. So bleibt der Strumpf in Position ohne in die Haut einzuschnüren und der durchgehender Kompressionsdruckverlauf bleibt erhalten. Dies sorgt für angenehmen Tragekomfort und sicherem Halt.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 <p>Noppenhaftband / Haftband oben</p>	<p>Das starke Haftband, entwickelt für weiches Bindegewebe, verringert dank der Silikon-Noppen-Struktur mögliches Rutschen. Das Haftband ist in der Strumpflänge inkludiert und in den Breiten 5 cm und 2,5 cm erhältlich.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 <p>Noppenhaftband Zusätzliches Haftband innen</p>	<p>Es können zusätzliche Haftbänder bzw. Haftbandstücke innen für mehr Halt eingenäht werden. Empfohlen für Patient*innen mit einer ausgeprägten konischen Armform, voluminösen, ödem-betonnten Oberarmen und/oder weichem Gewebe sowie Empfindlichkeit im axillären Bereich.</p> <p>Zusätzliche Haftbänder können innen (lateral auf Gestrickinnenseite) eingenäht werden:</p> <p>Länge Haftband in Slipform innen (2,5 cm oder 5 cm Breite): 5 cm, 10 cm, 1/2 Länge innen, 3/4 Länge innen, punktuell innen</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2016</p>
 <p>Micronoppenhaftband / Haftband oben</p>	<p>Das sanfte Haftband, speziell entwickelt für Patient*innen mit empfindlicher Haut. Hilft, die Kompressionsversorgung in Position zu halten. Die Micronoppen-Struktur besteht aus Silikon und wurde für höheren Tragekomfort sowie weniger Druckstellen auf der Haut entwickelt.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>
 <p>Micronoppenhaftband Zusätzliches Haftbandstück innen</p>	<p>Es können zusätzliche Haftbänder bzw. Haftbandstücke innen für mehr Halt eingenäht werden. Empfohlen für Patient*innen mit einer ausgeprägten konischen Armform, voluminösen, ödem-betonnten Oberarmen und/oder weichem Gewebe sowie Empfindlichkeit im axillären Bereich.</p> <p>Zusätzliche Haftbänder können innen (lateral auf Gestrickinnenseite) eingenäht werden:</p> <p>Länge Haftband in Slipform innen (2,5 cm oder 5 cm Breite): 5 cm, 10 cm, 1/2 Länge innen, 3/4 Länge innen, punktuell innen</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2008</p>

3. Medizinische Kompressionsstrümpfe Flachstrick



Befestigung Arm

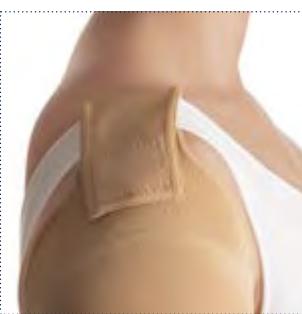Zusätze	Beschreibung
 <p>BH-Befestigung mit Klett</p>	<p>Für zusätzlichen Halt wird der Kompressionsarmstrumpf mit Schulterkappe am BH-Träger befestigt. Bitte die Breite des BH-Trägers bei der Bestellung in cm angeben.</p> <p>Empfohlen für Patientinnen, die sich zusätzlichen Halt wünschen.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2013 (Schulterkappe)</p>
 <p>Armhalterung</p>	<p>Für zusätzlichen Halt kann der Kompressionsarmstrumpf mit Schulterkappe mit einer Armhalterung ausgestattet werden. Die Armhalterung verläuft über den Oberkörper und ist mit einem Klettverschluss versehen. Bitte die gewünschte Gesamtlänge bei der Bestellung angeben.</p> <p>Empfohlen für Patient*innen, die sich zusätzlichen Halt wünschen.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2013 (Schulterkappe)</p>

Ausführung Hand

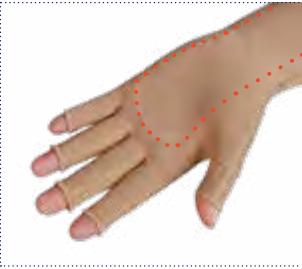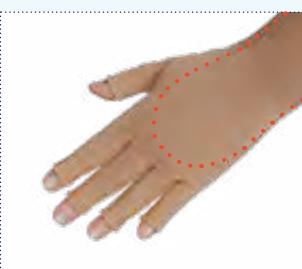Zusätze	Beschreibung
 <p>Tasche Handinnenfläche</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an drei Seiten zugenäht ist und das Einlegen von Materialen, wie beispielsweise Pelotten-Material, erlaubt. Die Tasche schützt empfindliche Haut vor Reibung und mechanischer Belastung und verringert Hautirritationen im Einsatzbereich.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>Tasche Handrücken</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an drei Seiten zugenäht ist und das Einlegen von Materialen, wie beispielsweise Pelotten-Material, erlaubt. Die Tasche schützt empfindliche Haut vor Reibung und mechanischer Belastung und verringert Hautirritationen im Einsatzbereich.</p> <p>Empfohlen für Lymphödem-Patient*innen, die zu einem Handrückenödem neigen.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2031</p>

Ausführung Arm

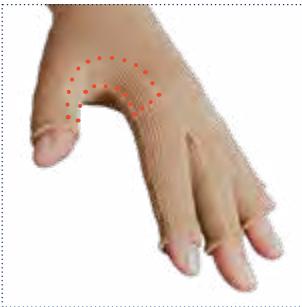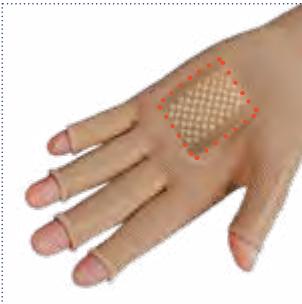Zusätze	Beschreibung
 <p>Futterstoff Daumennaht</p>	<p>Weiches innen eingenähtes Material, das an vier Seiten zugenäht ist und dazu dient, einen Bereich abzudecken, um die Haut vor Reibung zu schützen und Hautirritationen zu verhindern.</p> <p>Empfohlen für Patient*innen mit empfindlicher Daumenschwimmhaut.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2031</p>
 <p>Reißverschluss Handrücken</p>	<p>Kann das funktionsgerechte An- und/oder Ablegen bei speziellen anatomischen und/oder pathologischen Voraussetzungen erleichtern. Ermöglicht das Positionieren/Wechseln von Pelotten und Wundaflagen. Ein Reißverschluss kann den Kompressionsdruckverlauf unterbrechen.</p> <p>Bitte die patientenindividuellen Fähigkeiten (z.B. Kraft & Fingerfertigkeit) der Verwendung eines Reißverschlusses berücksichtigen.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2014</p>
<p>Reißverschluss mit Untertritt oder mit Untertrittverlängerung und Umschlag</p>	<p>Hinweis: Kostenloser Zusatz zum Reißverschluss. Durch den Untertritt liegt der Reißverschluss nicht direkt auf der Haut auf und kann so sicher geschlossen werden. Der Umschlag verhindert den direkten Hautkontakt mit dem oberen Abschluss des Reißverschlusses und der Zipper-Mechanik (siehe S. 34). Unsere Empfehlung ist ein Reißverschluss mit Untertritt und Umschlag.</p>
 <p>Haftbandstück Handfläche innen</p>	<p>Anti-Rutsch-Noppen werden auf der Handinnenfläche nach außen eingenäht. Empfohlen für Patient*innen, die sich besseren Grip mit Handversorgungen wünschen.</p> <p>HiMi-Nr. 17.99.99.2016</p>

Hinweis: Bei den Handversorgungen von JOBST Elvarex können fehlende Finger berücksichtigt werden.



JOBST ELVAREX PLUS

Zuverlässige und nahtlose Kompression

Lasse deine Kund*innen den Tragekomfort von JOBST Elvarex Plus erleben, entwickelt mit der patentierten, nahtlosen 3D-Stricktechnik, für eine bessere Passform und unbeschwertere Momente.



Nahtlos

Reduziert das Risiko von Druckstellen und bietet mehr Bewegungsfreiheit.



Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.



3D-Passform

Innovative 3D-Stricktechnik kann das Gefühl einer zweiten Haut vermitteln.



Ergonomische Anpassung

Angepasst an die individuellen Körperkonturen für eine verbesserte anatomische Passform.

INDIKATION: LYMPHÖDEM

Milde Ausprägung

Moderate Ausprägung

Schwere Ausprägung

Unsere Empfehlung

Mögliche Empfehlung

KUNDENWUNSCH NACH ...

- Hohem Tragekomfort, angepasst an die individuellen Körperperformen
- Keinen Druckstellen zwischen den Fingern
- Mobilität

TRAGEKOMFORT:


80% der Patient*innen bewerteten den Tragekomfort von JOBST Elvarex Plus besser im Vergleich zu ihrer vorherigen Kompressionsversorgung mit Naht.¹

LEBENSQUALITÄT:

Laut Aussage der Patient*innen konnten ihre typischen Lymphödem-Symptome gelindert werden, was nachweislich zu einer verbesserten Lebensqualität führt.¹

¹: Miller A. Impact of seamless compression garments on limb comfort and quality of life. Br J Community Nurs. 2017;22(Sup10):26-37.

FARBEN

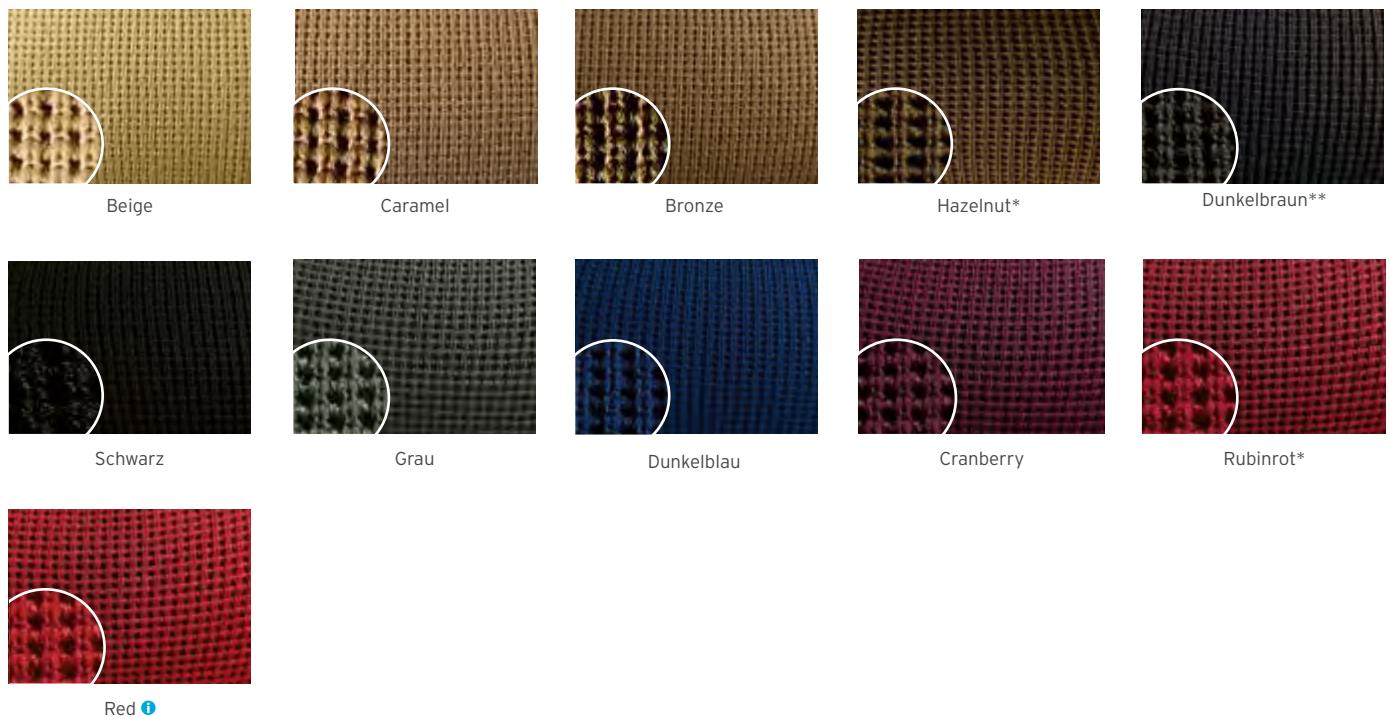

*Nur für Handversorgungen.

**Nur für Zehenversorgungen.

i Die JOBST Elvarex Plus Farbe Red wurde auf die JOBST Confidence Farbe Red Heather abgestimmt.

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

KKL	Ausführungen ▼	Maß			
		AC ¹	AE	AA	
	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	
Informationen	Materialzusammensetzung	Untere Extremitäten KKL 1: 66 % Polyamid, 13 % Elasthan, 21% Elastodien KKL 2: 43 % Polyamid, 21% Baumwolle, 26 % Elastodien, 10 % Elasthan Obere Extremitäten KKL 1: 73 % Polyamid, 15 % Elasthan, 12 % Elastodien KKL 2: 70 % Polyamid, 20 % Elastodien, 10 % Elasthan			
	Wäsche	洗衣机 洗涤剂 烘干机	Die Trocknereignung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.		
	Patient*innen entscheiden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 97 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 93 			

Ergonomische Formgebung

Reduziert die Faltenbildung an der Daumenschwimmhaut für einen ungehinderten Griff.
Anatomisch geformte Ballen sorgen für einen exakten Sitz durch die genaue Anpassung an die individuellen Erhebungen.



Zehenkappe

Stricktechnisch modellierte Zonen in den Zehenzwischenräumen sichern die optimale Formanpassung an sensiblen Stellen. Nahtlos gestrickte Zehenabschlüsse liegen exakt an und sind belastbar.



Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 AC ¹	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2011
	Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2012
 AE	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.10.09.0007
	Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.10.08.0007
 AA	Mit vier Zehen	Stück	17.99.99.2004
 AA	Mit fünf Zehen	Stück	17.99.99.2004
Zusatz		Hilfsmittelnummer	
Schräger Abschluss (AE)		Stück	17.99.99.2026



JOBST RELAX

Kompression für die Ruhe- und Nachtphasen

Maßgefertigte und flachgestrickte Kompressionsstrümpfe für das Lymphödemmanagement in Ruhephasen. JOBST Relax wurde entwickelt, um die Ödemreduktion aufrechtzuerhalten und der Flüssigkeitsansammlung in der Nacht entgegenzuwirken.



Polsterung

Polsterndes Material bietet Komfort.



Mikro-Massage

Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikromassage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.



Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.

INDIKATION: LYMPHÖDEM


Erhaltungsphase

ZEITRAUM: NACHTS


DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Kompression	Ausführungen	Maß			
		AC ¹	CG ¹	AD	AG
	15-20 mmHg	●	●	●	●
	20-30 mmHg			●	●
Informationen		15-20 mmHg: 72 % Polyamid, 11 % Elasthan, 17 % Polyester 20-30 mmHg: 71 % Polyamid, 12 % Elasthan, 17 % Polyester			
Wäsche		Die Trocknereignung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.			
Patient*innen entscheiden sich auch für...		<ul style="list-style-type: none"> • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 97 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 93 			

FARBEN

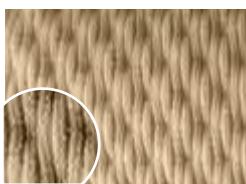

Beige

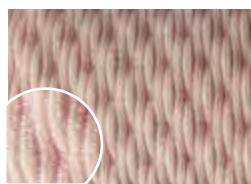

Rose

SCHUTZ UND AUFBEWAHRUNG




JOBST Relax wird in einem Satinbeutel mit Kordelzug zum Schutz und zur Aufbewahrung der Kompressionsversorgung geliefert.



Information zur Beratung von Patient*innen

Monofilament-Zwischenschicht

Eine besondere Eigenschaft, die JOBST Relax von anderen Nachtlösungen unterscheidet, ist die Monofilament-Zwischenschicht. Gemeinsam mit feuchtigkeitsregulierenden Garnen werden Wärme und Schweiß auf diese Weise besonders gut von der Haut abtransportiert. Das anpassungsfähige Material sorgt für Bewegungsfreiheit in der Nacht, die Flachstrickeigenschaften reduzieren die Gefahr der Faltenbildung und Einschnürung.

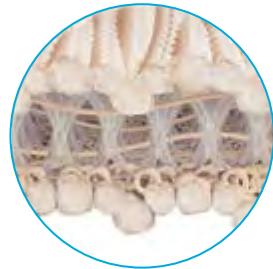

Maßsortiment obere Extremitäten

Ausführung	Einheit	Kompressionsdruck
Armstrumpf AG¹	Stück	15-20 mmHg
Armstrumpf CG¹	Stück	15-20 mmHg

Maßsortiment untere Extremitäten

Ausführung	Einheit	Kompressionsdruck
Wadenstrumpf AD	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg
Wadenstrumpf AD inkl. Reißverschluss	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg
Oberschenkelstrumpf AG	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg
Oberschenkelstrumpf AG inkl. Reißverschluss	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg



JOBST BELLAVAR

Der besonders strapazierfähige Kompressionsstrumpf

JOBST Bellavar eignet sich in seiner robusten Qualität insbesondere zur Behandlung starker Venenerkrankungen, Phleböden und bei fröhlem Lymphödem. Auch besonders zu empfehlen für aktive Patienten.



Haltbarkeit

Die hohe Belastbarkeit des Materials sorgt für einen besonders haltbaren und strapazierfähigen Kompressionsstrumpf.



Einfaches Anziehen

Flexibles, anpassungsfähiges Gewebe für ein leichtes Anziehen.



Atmungsaktiv

Mit dem Microtherm-Effekt sorgt das atmungsaktive Gestrick für einen raschen Feuchtigkeitstransport.

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
		Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV	

INDIKATION: LYMPHÖDEM

Erhaltungsphase

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼		Standard					Maß					
		AD	AF	AG	AG-T	AT	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT
KKL	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 3: 34 - 46 mmHg						●	●	●	●	●	●
Haffband	Noppe		●	●			●	●	●			
	French-Bijou							●	●			
	Volant	●	●	●			●	●	●			
Fußspitze	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●					●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 2: 66 % Polyamid, 34 % Elasthan KKL 3: 66 % Polyamid, 34 % Elasthan										
	Wäsche	40°C	☒	☒	☒	☒	Die Trocknereignung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrümpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.					
	Patient*innen entscheiden sich auch für...	• JOBST Griphandschuhe, Seite 96 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 96			• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 97 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 93							

FARBEN



Sahara



Pearl

FARBEN Maß



Sahara



Pearl



Black

HAFTBÄNDER Außen/Innen




Noppe



French-Bijou

GRÖSSENTABELLE

Messpunkte ▼	Umfangsmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht	
	Größen							
	I	II	III	IV	V	VI		
cG	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64		
cF	39-41	42-44	45-47	48-50	51-53	54-56		
cE	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43	44-46		
cD	26-28	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43		
cC	29-30	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45		
cB ¹	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34		
cY	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38		
cA+cB	18-19	20-21	22-23	24-25	26-27	28-29		
Längenmaße in cm								
AD	Länge	ID	Regular	40-43	Petite	36-39		
AF		IF	58-62					
AG		IG	69-74					
AT / AG-T		IK	Regular	76-80	Petite	70-75		

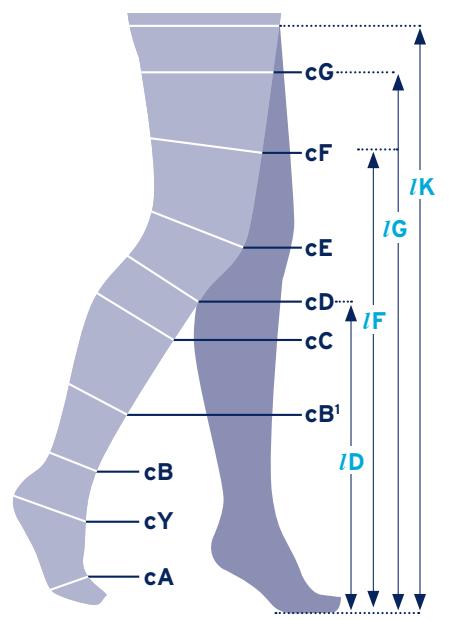

Fußgrößen AD mit geschlossener Fußspitze
lang ab Schuhgröße 40; kurz bis Schuhgröße 39

JOBST Bellavar

Standardsortiment

Kompressionsklasse 2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 2	
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.01.1016
	Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	17.06.02.1025
	Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	17.06.02.1025 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	17.06.03.1024
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.03.1024 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.03.1024 17.99.99.2006
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.1016
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	17.06.04.1016 17.99.99.2018

Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt findest du
unter www.jobst.de/fachhandel/downloads
oder bestelle direkt im JOBST eShop unter
eshop.jobst.de

Maßsortiment

Kompressionsklasse 2 - 3

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 2	KKL 3
 Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.10.1037	17.06.10.2011
	Paar	17.06.10.1037 17.99.99.2008	17.06.10.2011 17.99.99.2008
 Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	17.06.11.1018	17.06.11.2007
	Paar	17.06.11.1018 17.99.99.2008	17.06.11.2007 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	17.06.12.1036	17.06.12.2011
	Paar	17.06.12.1036 17.99.99.2008	17.06.12.2011 17.99.99.2008
 Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2006	17.06.12.2011 17.99.99.2006
 Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009	17.06.12.2011 17.99.99.2009
	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009 17.99.99.2018	17.06.12.2011 17.99.99.2009 17.99.99.2018
 Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring kompr. Leibteil	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009 17.99.99.2003	17.06.12.2011 17.99.99.2009 17.99.99.2003
	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009 17.99.99.2018 17.99.99.2003	17.06.12.2011 17.99.99.2009 17.99.99.2018 17.99.99.2003
 Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.1032	17.06.13.2008
 Strumpfhose AT kompr. Leibteil	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2003	17.06.13.2008 17.99.99.2003
 Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2018	17.06.13.2008 17.99.99.2018
 Strumpfhose AT/Herr Eingriff kompr. Leibteil	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2018 17.99.99.2003	17.06.13.2008 17.99.99.2018 17.99.99.2003
 Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschaftshosenteil	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2019	17.06.13.2008 17.99.99.2019



Anziehhilfen und Pflege

Setze mit JOBST Produkten neue Impulse für das Selbstmanagement deiner Kund*innen.

Ein sorgsamer Umgang mit Kompressionsversorgungen, die richtige Wahl einer Hautpflege, der richtige Einsatz von An- und Ausziehhilfen sowie der Gebrauch von Zubehörprodukten können während der Therapie eine wichtige Rolle spielen.

Aus diesem Grund bieten wir JOBST Qualitätsprodukte an, die deinen Kund*innen das Leben mit Kompression erleichtern.

Hautkleber

JOBST Ultrana HaftFix

FESTER HALT DEN GANZEN TAG



Der Hautkleber wird direkt zwischen Haut und Kompressionsstrumpf aufgetragen und sichert den Halt. JOBST Ultrana HaftFix kommt in einer praktischen Roll-on-Flasche, die das Auftragen an Armen und Beinen auch mit einer Hand einfach macht.

Der Klebestift für Kompressionsstrümpfe enthält ein besonders hautverträgliches Mittel, das mit Wasser einfach abwaschbar ist und keine Flecken hinterlässt. Der Kleber trocknet flexibel und geschmeidig. Dadurch passt er sich den Körperbewegungen an und ist sehr angenehm zu tragen.

- In praktischer Roll-on-Flasche
- Guter Halt den ganzen Tag
- Besonders hautverträglich
- Einfache Anwendung
- Problemlos abwaschbar
- Bleibt flexibel und geschmeidig

Einheit	Hilfsmittelnummer	Bestellnummer	PZN
6 Flaschen a 60ml	17.06.07.0008	7740026	3210956

Pflege

JOBST SkinPro Hautpflege

DIE PFLEGESERIE FÜR EIN GUTES HAUTGEFÜHL

Jede Kompressionstherapie bedeutet eine zusätzliche Herausforderung für die Haut, denn auch wenn unsere atmungsaktiven Qualitäten den Tragekomfort in den letzten Jahren deutlich verbessert haben und zugleich die Hautbelastung verringern, kann eine Kompressionsversorgung das natürliche Gleichgewicht der Haut beeinflussen.

Um den natürlichen Schutzmantel der Haut zu erhalten, empfehlen wir unsere Pflegeserie JOBST Skin-Pro - damit deine Kund*innen je nach Bedarf die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, erfrischen oder intensiv pflegen können:



JOBST SkinPro Body Lotion - mit den glättenden und nährenden Eigenschaften von Olivenöl. Zum Schutz der Haut nach dem Baden oder Duschen.

Weitere Bestandteile sind:

- Panthenol
- Vitamin E
- Sheabutter
- Urea



JOBST SkinPro Body Gel - mit den erfrischenden Eigenschaften von Menthol. Reduziert Spannungsgefühl und Empfindlichkeit der Haut.

Weitere Bestandteile sind:

- Campher
- Eukalyptusöl
- Pfefferminzöl



JOBST SkinPro Foot Cream - mit den pflegenden Eigenschaften von Aloe Vera. Geeignet für beanspruchte Füße und besonders den Fersenbereich - Rosskastanienextrakt steigert das Feuchthaltevermögen der Haut.

Weitere Bestandteile sind:

- Sheabutter
- Avocadoöl
- Urea - Vitamin E
- Vitamin A
- Panthenol

Ausführung	Einheit	Bestellnummer
JOBST® SkinPro Body Lotion	Display mit 6 Tuben à 150 ml	77400-00019-01
JOBST® SkinPro Foot Cream	Display mit 6 Tuben à 100 ml	77400-00020-01
JOBST® SkinPro Body Gel	Display mit 6 Tuben à 100 ml	77400-00021-01
JOBST® SkinPro Body Lotion	50 Doppelsachets à 2 x 7,5 ml	77400-00023-02
JOBST® SkinPro Foot Cream	50 Sachets à 8 ml	77400-00024-02
JOBST® SkinPro Body Gel	50 Sachets à 8 ml	77400-00025-02

Labortests haben bestätigt - die Rezeptur der JOBST SkinPro Pflegeserie ist mit deiner JOBST Kompressionsversorgung kompatibel.

Anziehhilfen

An- und Ausziehhilfen von Arion

Die Qualitätsprodukte von Arion zeichnen sich durch eine einfache und sichere Handhabung aus. Möglich wird dies u. a. durch das gleitfähige Material, das Reibung reduziert und das An- und Ausziehen erleichtert. Ob für Arm- oder Beinversorgungen, Arion-Produkte sind auf die individuellen Bedürfnisse deiner Kund*innen zugeschnitten.

Arion Easy-Slide



Anziehhilfe für Strümpfe mit offener Fußspitze. Besonders für Kniestrümpfe und auch als praktische Anziehhilfe für Pflegekräfte geeignet.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Small / 34-36	79658-00006-00
Medium / 37-38,5	79658-00005-00
Large / 39-41	79659-00003-00
Extra Large / ≥ 42	79660-00002-00
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3005	

Arion Sim-Slide



An- und Ausziehhilfe für Strümpfe mit offener Fußspitze. Basiert auf der Easy-Slide, ermöglicht aber auch das Ausziehen.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Small / ≤ 34-36	70633-00005-00
Medium / 37-38,5	70633-00006-00
Large / 39-41	70633-00007-00
Extra Large / ≥ 42	70633-00008-00
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3022	

Arion Magnide



Anziehhilfe für Strümpfe mit offener und geschlossener Fußspitze. Sanftes, reibungsfreies Design erleichtert die Anwendung bei größeren Beinumfängen oder empfindlicher Haut. Besonders geeignet bei Oberschenkelstrümpfen, da die Anziehhilfe nach oben herausgezogen wird.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Medium / ≤ 38	79571-00019-00
Large / 39-43	79571-00020-00
Extra Large / ≥ 44	79571-00021-00
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3027	

Arion Magnide 2in1



An- und Ausziehhilfe für Strümpfe mit offener und geschlossener Fußspitze. Bietet die selben Vorteile wie Magnide.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Medium / ≤ 38	79571-00024-00
Large / 39-43	79571-00025-00
Extra Large / ≥ 44	79571-00026-00
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3056	

Arion SlideX*



Zusätzliche Anwendungshilfe für Pflegekräfte zum An- und Ausziehen von Strümpfen mit offener und geschlossener Fußspitze. Der Arion SlideX deckt das gesamte Bein ab und ist aus einem weicheren Material gefertigt, wodurch er ideal für empfindliche Haut ist.

Größe/Beinumfang	Bestellnummer
Medium/≤ 40 cm	79571-00022-00
Large/≤ 60 cm	79571-00023-00
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3037	

* Nur zu verwenden in Kombination mit den Produkten:
Easy-Slide, Sim-Slide, Magnide, Magnide 2 in 1



Anziehhilfe für Arm- oder Beinversorgungen von Kindern bis zu 6 Jahren und als Anzieh-Adaptionshilfe für die Eltern oder Erziehungsberechtigten.

Größe/Länge	Bestellnummer
Extra Small/29,5 cm	79571-00008-01
Small/39,5 cm	79571-00009-01
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3048	

Arion Easy-Off



Ausziehhilfe für Strümpfe und Strumpfhosen mit offener und geschlossener Fußspitze. Reibungsarmes Design reduziert die Belastung für Hände, Arme und Beine.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Small/34-37	79570-00000-01
Medium / 38-41	79570-00003-00
Large/42-45	79570-00004-00
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3010	



Anziehhilfe für Armstrümpfe. Reduziert die Reibung und ermöglicht ein einfaches und sanftes Anziehen. Ideal für Personen mit primärem oder sekundärem Arm-Lymphödem oder postoperativen Schwellungen.

Größe/Armlänge/Umfang	Bestellnummer
Medium/ 59-67 cm/ ≤ 45,6 cm	79661-00004-00
Large/ > 67 cm/ ≤ 57,6 cm	75100-00002-00
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3005	

Information zur Beratung von Kund*innen

Deine Arion Produktübersicht

Frage deine JOBST Ansprechpartner*in nach unserer Arion Produktübersicht mit allen wichtigen Informationen zu Pflege, Garantie, Vorteilen und Anwendung. Bestellnummer: 03515272M




Anziehhilfen**JOBST GripHandschuhe****UNTERSTÜTZUNG UND SCHUTZ BEIM ANZIEHEN**

Für das leichte und schonende Anziehen der Kompressionsversorgung.

Größe	Einheit	Bestellnummer
XS	1 Paar	77400-00027-00
S		77400-00028-00
M		77400-00029-00
L		77400-00030-00
XL		77400-00031-00

60% Latex, 40% Nylon

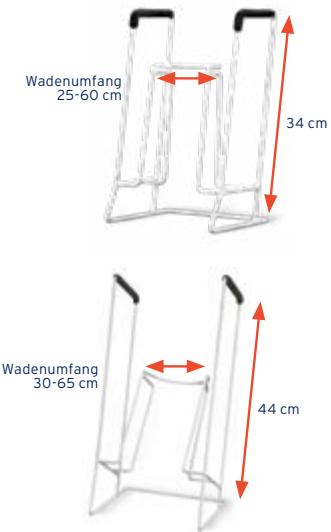JOBST Metallanziehhilfe**ANZIEHHILFE FÜR KOMPRESSIONSSTRÜMPFE**

Für ein schnelles, schmerzfreies und schonendes Anziehen der Kompression. Mit wenig Kraftaufwand Knie- und Oberschenkelstrümpfe anziehen - geeignet für verschiedene Beinformen.



Größe	Einheit	Hilfsmittelnummer	Bestellnummer
Normal	Stück	02.40.01.3063	7966800
Groß			7966804

JOBST Seidenanziehhilfe

- Nur für Kompressionsversorgungen ohne Spitze
- Für ein leichteres und einfacheres über den Fuß ziehen
- Reduziert den Widerstand zwischen der Haut der Patient*in und der Kompression - für spürbar weniger Irritationen



Ausführung	Einheit	Bestellnummer
Einzelverpackung	Stück	78463-00001-01

Kompressionspflege

JOBST WashCARE

ZUR PFLEGE VON KOMPRESSIONSVERSORGUNGEN



JOBST WashCARE ist ein pflegendes Waschmittelkonzentrat, das sich hervorragend für die Reinigung von Kompressionsversorgungen eignet.

- Spezielle waschaktive Substanzen und Pflegestoffe reinigen und schützen die hochwertigen Garne.
- JOBST WashCARE ist hautfreundlich, pH-neutral und verleiht Kompressionsversorgungen einen angenehm frischen Duft.
- Eine Flasche reicht für ca. 125 Handwäschen.

Ausführung	Einheit	Bestellnummer
Thekendisplay	6 Flaschen à 250 ml	77400-00002-02
Sachet	50 Sachets à 15 ml	16923-00020-03

JOBST Wäschennetz

ZUM SCHUTZ VON KOMPRESSIONSVERSORGUNGEN



Das JOBST Wäschennetz bietet Kompressionsversorgungen einen optimalen Pflegeschutz.

- Durch die feinmaschige Netzstruktur wird das hochwertige Kompressionsgestrick beim Waschen vor mechanischen Einflüssen wirksam geschützt.
- Das JOBST Wäschennetz gewährleistet eine besonders schonende und effektive Reinigung, die eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit der Kompressionsversorgung unterstützt.

Ausführung	Einheit	Bestellnummer
Thekendisplay	10 Netze	77400-00005-02



Pflegehinweise



Wir empfehlen, die JOBST Kompressionsstrümpfe täglich oder mindestens jeden zweiten Tag zu waschen. Verwende dazu ein Feinwaschmittel und eine niedrige Schleudergang-Einstellung. Verwende keine Wäschezusätze wie Weichspüler, optische Aufheller oder Fleckenentferner. Spül die Kompressionsstrümpfe gut aus. Wickel die nassen Kompressionsstrümpfe nach dem Waschen in ein Handtuch ein und presse überschüssige Feuchtigkeit aus. Nicht auswringen. Die Kompressionsstrümpfe nicht auf einer Heizung oder in der Sonne trocknen lassen. In warmem Wasser maschinenwaschbar. Nicht bleichen. Liegend oder im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen. Ob dein Kompressionsstrumpf trocknergeeignet ist, entnimmst du bitte dem Produktetikett; das Etikett sollte nicht entfernt werden. Nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln.

Pflege des Silikonbandes: Wasche das Silikonband bei Bedarf von Hand, um überschüssige Cremes, Lotionen, Haare und andere Fremdkörper zu entfernen.



Bild: Lymphödem Vereinigung Schweiz, www.lv-schweiz.ch

Kompressionsbinden



JOBST Kompressionsbinden und Polstermaterialien bieten ein umfassendes Sortiment zur Ödemreduktion und zur individuellen Therapie in jeder Phase der chronisch venösen Insuffizienz.



Entstauung

Ödemreduktion und ggf. Wundmanagement.



Erhaltung

Ödem- und ggf. Wundmanagement.



Prävention

Übergang zur langfristigen Therapie mit Kompressionsstrümpfen.

KURZZUGBINDEN IN DER ENTSTAUUNGSPHASE

Kurzzugbinden*

Comprilan®

Textilelastische, hautfreundliche Kurzzugbinde (100 % Baumwolle)

Für Kompressionsverbände bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen geeignet. Längsdehnung von ca. 90 % möglich. Die Binde ist waschbar bis 60° und bis zu 10x wiederverwendbar.



Compridur®

Dauerelastische, hautfreundliche Ultra-Kurzzugbinde (78 % Baumwolle und 22 % Polyamid)

Längsdehnung von ca. 50% möglich. Die Binde ist waschbar bis 60° und bis zu 10x wiederverwendbar.



JOBST® Comprihaft®

Textilelastische, kohäsive, hautfreundliche Kurzzugbinde (100 % Baumwollgewebe mit selbsthaftender Beschichtung)

Die mikroporöse Beschichtung sorgt für eine Haftung der Bindenlagen aufeinander, nicht aber auf der Haut. Somit wird ein sicherer Sitz ohne Verrutschen auch nach längerer Tragezeit gewährleistet.

Längsdehnung 75%.



*verwendetes Material erhält nach dem Prozess des Standardautoklavierens die therapeutisch relevanten Materialeigenschaften aufrecht.

Kompressionsbinden in der Entstauungsphase

Kurzzugbinden		Abmessung	Bestell-Nr.	PZN*	Inhalt	BE/VE
Comprilan®** Textilelastische Kurzzugbinde	1 Binde in Faltschachtel	5 m x 6 cm	0102600	02059664	5 Stück	1/40
		5 m x 8 cm	0102700	02059670	5 Stück	1/34
		5 m x 10 cm	0102800	02059687	5 Stück	1/28
		5 m x 12 cm	0102900	02059693	5 Stück	1/24
	Einzelbinde lose im Karton	5 m x 6 cm	4538100	04592575	10 Stück	1/8
		5 m x 8 cm	4538200	04592581	10 Stück	1/8
		5 m x 10 cm	4538300	04592598	10 Stück	1/8
		5 m x 12 cm	4538400	04592606	10 Stück	1/8
	2 Binden in Faltschachtel	5 m x 10 cm	0103000	02059701	5 x 2 Binden	1/5
Compridur®** Dauerelastische Kurzzugbinde	Einzelbinde in Faltschachtel	5 m x 6 cm	0105400	02059629	5 Stück	1/44
		5 m x 8 cm	0105500	02059635	5 Stück	1/36
		5 m x 10 cm	0105600	02059641	5 Stück	1/30
		5 m x 12 cm	0105700	02059658	5 Stück	1/26
	Einzelbinde lose im Karton	5 m x 6 cm	4539100	04592612	10 Stück	1/8
		5 m x 8 cm	4539200	04592629	10 Stück	1/8
		5 m x 10 cm	4539300	04592635	10 Stück	1/8
		5 m x 12 cm	4545000	04592641	10 Stück	1/8
Compridur®-Kombi**	Faltschachtel mit 2 Binden	8 cm & 10 cm	0106300	03209456	5 x 2 Binden	1/5
JOBST® Comprihaft®** Kohäsive Kurzzugbinde	Einzelbinde in Faltschachtel	5 m x 6 cm	4595700	11294996	5 Stück	1/16
		5 m x 8 cm	4595800	11295004	5 Stück	1/12
		5 m x 10 cm	4595900	11295010	5 Stück	1/10
		5 m x 12 cm	4596000	11295027	5 Stück	1/9

Unterpolsterung für Kompressionsbinden in der Entstauungsphase

Unterpolsterung		Abmessung	Bestell-Nr.	PZN*	Inhalt	BE/VE
Tricofix®** Elastischer Schlauchverband	E/6: Oberschenkel und kleine Köpfe	20 m x 8 cm	0219700	01868982	1 Stück	1/20
	F/7: Oberschenkel und große Köpfe	20 m x 10 cm	0219800	01868999	1 Stück	1/16
	G/9: starke Oberschenkel und Kinderrümpfe	20 m x 12 cm	0219900	02059606	1 Stück	1/6
Artiflex® Soft** Hochgebauschte Polsterbinde		3 m x 6 cm	7286000	07154427	50 Stück	1/1
		3 m x 8 cm	7286100	00196049	40 Stück	1/1
		3 m x 10 cm	7286200	07154433	30 Stück	1/1
		3 m x 15 cm	7286300	07154456	20 Stück	1/1
		3 m x 20 cm	7286400	07154462	15 Stück	1/1
CompriFoam®** Schaumstoffbinde		10 cm x 2,5 m x 0,3 cm	7529401	00831103	1 Stück	1/24
		10 cm x 2,5 m x 0,4 cm	7529400	00831072	1 Stück	1/24
		12 cm x 2,5 m x 0,4 cm	7529500	00831089	1 Stück	1/16
JOBST® Foam Pad** Schaumgummipolster	1 Binde in Faltschachtel	1 cm x 9 cm	7849610	00775735	1 Stück	1/75
JOBST® Foam Bandage** Schaumgummibinde		10 cm x 1 m	7849701	13570874	1 Stück	1/20

Eine adäquate Unterpolsterung des Kompressionsverbandes gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung, schont druckempfindliche Regionen und vermeidet Einschnürungen unter dem Kompressionsverband. Die Empfehlung, eine Bandagierung mit Unterpolsterung vorzunehmen, wurde in die aktuelle Leitlinie S2k aufgenommen. Publiziert auf www.awmf.org, Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), [...]. AWMF-Registernummer: 037/005

Kompressionssets



JOBST bietet für ein effektives Ödemmanagement bei phlebologischen sowie lymphologischen Indikationen bedarfsgerecht zusammengestellte Kompressions- und Bandagensets.



Entstauung

Ödemreduktion und ggf. Wundmanagement.



Erhaltung

Ödem- und ggf. Wundmanagement.



Prävention

Übergang zur langfristigen Therapie mit Kompressionsstrümpfen.

KOMPRESSIONSSETS IN DER ENTSTAUUNGSPHASE

In der Entstauungsphase können Kurzzugbinden mit einer zusätzlichen Unterpolsterung, 2-Lagen Kompressionssysteme oder Bandagensets eingesetzt werden.

2-Lagen-Kompressionssysteme mit Druckindikator

JOBST® Compri2 | JOBST® Compri2 lite

JOBST Compri2 und JOBST Compri2 lite fördern eine effektive Ödemreduktion und bieten Kompression nach Bedarf. Die Sets bestehen jeweils aus einer Polsterwatte sowie einer kohäsiven Kurzzugbinde samt Druckindikator und bieten je nach Indikation die einfache Lösung zum Erreichen der individuell notwendigen Kompression.

Die zuverlässige Kompression fördert eine effektive Wundheilung und somit den Therapieerfolg.



Kompressionssysteme / Kompressionsset	Abmessung	Bestell-Nr.	PZN*	Inhalt	BE/VE
Comprilan® Plus Komplettsatz zur Mehrfachanwendung für die Kompressionstherapie mit Unterpolsterung		0123301	06834841	1 Set	1/4
JOBST® Compri2** 2-Lagen Kompressionssystem/ Kompressionsgrad 40 mmHg ABPI >= 0,8	18-25 cm	7627100	10541085	1 Set	1/10
	25-32 cm	7627101	10541091	1 Set	1/10
	18-25 cm	7627104	13351528	6 Sets	1/4
	25-32 cm	7627105	13351534	6 Sets	1/4
JOBST® Compri2 lite** 2-Lagen Kompressionssystem/ Kompressionsgrad 20-30 mmHg ABPI 0,5 - 0,8	18-25 cm	7627102	10541116	1 Set	1/10
	25-32 cm	7627103	10541122	1 Set	1/10
	18-25 cm	7627106	13351563	6 Sets	1/4
	25-32 cm	7627107	13351586	6 Sets	1/4

**

Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Anwendung & Eigenschaften des JOBST Compri2



1
Erste Binde:
Polsterwatte auf Polyesterbasis mit Polyurethanschaum beschichtet

- Einfaches Anlegen auch im Fersenbereich aufgrund von 2-dimensionaler Dehnbarkeit.
- Zerreißbar, um bei Bedarf zusätzliche Polsterung anlegen zu können und das Risiko von druckindizierten Hautdefekten zu verringern.
- Aktives Feuchtigkeitsmanagement führt Feuchtigkeit ins Innere des Systems ab und hält die Haut trocken.
- Die Verwendung einer Unterpolsterung entspricht der Empfehlung in der Leitlinie S2k*



2
Zweite Binde:
Kohäsive Kurzzugbinde

- Der Druckindikator visualisiert den korrekten Anlagedruck der Kompressionsbinde.
- Kohäsive Eigenschaften erleichtern die Anlage und ermöglichen eine Korrektur der Wickeltouren.
- Zuverlässiger, rutschsicherer Halt
- Tragedauer bis zu 7 Tagen möglich
- 100 % Baumwolle, luftdurchlässig



Anwendungsvideo

Bandagenset

JOBST® LymphCARE Set

Das JOBST LymphCARE Set enthält alle Materialien, die für das professionelle Bandagieren von Ödemen an Armen und Beinen gemäß den Grundsätzen der komplexen, physikalischen Entstauungstherapie (KPE) erforderlich sind. Wir bieten Ihnen drei verschiedene JOBST LymphCARE Sets an: Für das Bein, den Unterschenkel und den Arm.



Kurzzugbinden/ Kompressionssysteme	Extremität	Inhalt	Bestell-Nr.	PZN*	BE/VE	
JOBST® LymphCARE ** Bandagenset	Arm	1 x Tricofix (D5) 20 x Elastomull (4 cm) 2 x Artiflex (10 cm) 2 x Artiflex (15 cm) 1 x Comprilan (6 cm)	1 x Comprilan (8 cm) 5 x Comprilan (10 cm) 1 x Leukoplast hospital (1,25 cm) 1 x JOBST Foam Pad (Nierenform)	7863900	03378963	1/1
	Bein	1 x Tricofix (F7) 20 x Elastomull (4 cm) 2 x Artiflex (10 cm) 2 x Artiflex (15 cm) 1 x Comprilan (6 cm)	1 x Comprilan (8 cm) 3 x Comprilan (10 cm) 4 x Comprilan (12 cm) 1 x Leukoplast hospital (1,25 cm) 1 x JOBST Foam Pad (Nierenform)	7864100	03378992	1/1
	Unterschenkel	1 x Tricofix (E6) 20 x Elastomull (4 cm) 3 x Artiflex (10 cm) 1 x Comprilan (6 cm)	1 x Comprilan (8 cm) 3 x Comprilan (10 cm) 1 x Leukoplast hospital (1,25 cm) 1 x JOBST Foam Pad (Nierenform)	7864200	03378986	1/1

ÄRZTLICHE VERORDNUNG

Kompressionsversorgungen sollten immer auf einem separaten Rezept verordnet werden. Auf dem entsprechenden Vordruckmuster muss das Feld Nummer 7 (Hilfsmittel) markiert werden. Das Rezept muss darüber hinaus nachfolgende Angaben enthalten.

Rezeptangaben
① Indikation / Diagnose ICD-10 Code
② Hilfsmittelnummer oder Bezeichnung des Hilfsmittels Ggf. Produktnamen & medizinische Begründung
③ Anzahl der Strümpfe / Strumpfhosen 1 Paar oder 1 Stück
④ Erforderlicher Längentyp Beispielsweise: AD Wadenstrumpf, AG Oberschenkelstrumpf, AT Strumpfhose
⑤ Erforderliche Kompressionsklasse KKL 1 bis KKL 4
⑥ Art der Fußspitze offen oder geschlossen
⑦ Ggf. ergänzende Verordnung von Zusätzen Beispielsweise: Haftband, Befestigungen, schräger Fuß, Slipform, Funktionszonen etc.
⑧ Falls erforderlich: „nach Maß (n.M.)“ oder „Maßanfertigung“ UND „Flachstrick“ oder „flachgestrickt“ (in der Lymphtherapie unbedingt erforderlich)

Ärztliche Therapiefreiheit

Ärzt*innen haben im Rahmen der Therapiefreiheit die Möglichkeit eine spezifische Einzelproduktverordnung (namentliche Verordnung) durchzuführen (gemäß Hilfsmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses in der Fassung vom 21. Dezember 2011 / 15. März 2012, zuletzt geändert am 18. März 2021). Für die namentliche Verordnung einer Kompressionsversorgung muss auf dem Rezept die 10-stellige Positionsnummer und der Produktnamen angeben werden. Eine entsprechende medizinische Begründung ist erforderlich. An- und Ausziehhilfen müssen bei Bedarf auf einem zusätzlichen Rezept verordnet werden.

Häufigkeit der Verordnung

Die Haltbarkeit von medizinischen Kompressionsstrümpfen beträgt bei regelmäßiger Nutzung in der Regel 6 Monate. Anschließend gewähren die gesetzlichen Krankenkassen üblicherweise eine neue Versorgung. Bei der Erstversorgung mit medizinischen Kompressionsstrümpfen ist aus hygienischen Gründen eine Doppelversorgung der Patient*innen erforderlich, die sogenannte „Wechselversorgung“. Bei besonderer Beanspruchung oder bei einer Veränderung der Umfangmaße ist eine neue Versorgung bereits vor Ablauf der 6 Monate indiziert.

Empfehlungsgrad von Zusätzen

Aus der S2k-Leitlinie zur medizinischen Kompressionstherapie (*AWMF-Registernummer: 037/005, weitere Informationen www.awmf.org) ergibt sich ein hoher Empfehlungsgrad von Zusätzen für ein besseres Therapieergebnis. Konkret heißt es: „Bei der Verordnung von medizinischen Kompressionsstrümpfen (MKS) soll berücksichtigt werden, dass verschiedene Längen und Spezialteile zur Verfügung stehen. Die Auswahl der Länge und der Zusatzeile richtet sich dabei nach der Diagnose und der Lokalisation der Beschwerden und Veränderungen. Bei flachgestrickten MKS stehen für besondere Problemlokalisationen Zusatzausrüstungen, sowohl im Befestigungsbereich als auch im Strumpfbereich, zur Verfügung (z.B. schräger Abschluss, Einsteketaschen für Polster/ Pelotten, breiter Abschluss).“

VERORDNUNGSBEISPIELE

Krankenkasse bzw. Kostenträger				
Geb.- ter	Geb.- pf.			
noch				
Sorti-				
betrieb				
Name, Vorname des Versicherten JOBST Caroline geb. am Beiersdorfstraße 1 06.11.89				
BG	Hilfsmittel- mittel- mitte	Impf- sof	Spi-St- Befür- Pflicht	Apotheke-Nummer / IK
6	7	8	9	
Zuzahlung	Gesamt-Bruno			
Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.	Faktor	Taxe		
17.06.23.2007 (2)				
1. Verordnung				
2. Verordnung				
3. Verordnung				
Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)				
<p>③1 Stück, ④JOBST FarrowWrap CLASSIC ⑤30-40 mmHg, ⑥Wadenteil (Begründung) ①Diagnose: I83.2 Ulcus cruris venosum, linkes Bein</p>				
Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)				
Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer				

Medizinisch adaptives Kompressionssystem

Krankenkasse bzw. Kostenträger				
Geb.- ter	Geb.- pf.			
noch				
Sorti-				
betrieb				
Name, Vorname des Versicherten JOBST Caroline geb. am Beiersdorfstraße 1 06.11.89				
BG	Hilfsmittel- mittel- mitte	Impf- sof	Spi-St- Befür- Pflicht	Apotheke-Nummer / IK
6	7	8	9	
Zuzahlung	Gesamt-Bruno			
Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.	Faktor	Taxe		
17.10.04.1XXX (2)				
1. Verordnung				
2. Verordnung				
3. Verordnung				
Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)				
<p>③1 Stück ④CG-Armstrumpf ⑤KKL 2, ⑥Haftband, Slipform ⑧Maßfertigung, flachgestrickt ①Diagnose: I97.21 Sekundäres Lymphödem nach Mastektomie, rechts</p>				
Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)				
Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer				

Obere Extremitäten, Maß

Krankenkasse bzw. Kostenträger				
Geb.- ter	Geb.- pf.			
noch				
Sorti-				
betrieb				
Name, Vorname des Versicherten JOBST Caroline geb. am Beiersdorfstraße 1 06.11.89				
BG	Hilfsmittel- mittel- mitte	Impf- sof	Spi-St- Befür- Pflicht	Apotheke-Nummer / IK
6	7	8	9	
Zuzahlung	Gesamt-Bruno			
Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.	Faktor	Taxe		
17.06.16.1XXX (2)				
1. Verordnung				
2. Verordnung				
3. Verordnung				
17.99.99.2008				
17.99.99.2026				
Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)				
<p>③1 Stück ④AG-Oberschenkelstrumpf ⑤KKL2, ⑥Offene Fußspitze, ⑦Haftband, Slipform ⑧Maßfertigung, flachgestrickt ①Diagnose: I82.02 Primäres Lymphödem der unteren Extremitäten, Stadium II, links</p>				
Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)				
Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer				

Untere Extremitäten, Maß

Krankenkasse bzw. Kostenträger				
Geb.- ter	Geb.- pf.			
noch				
Sorti-				
betrieb				
Name, Vorname des Versicherten JOBST Caroline geb. am Beiersdorfstraße 1 06.11.89				
BG	Hilfsmittel- mittel- mitte	Impf- sof	Spi-St- Befür- Pflicht	Apotheke-Nummer / IK
6	7	8	9	
Zuzahlung	Gesamt-Bruno			
Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.	Faktor	Taxe		
17.06.17.1XXX				
1. Verordnung				
2. Verordnung				
3. Verordnung				
17.99.99.2003				
17.99.99.2026				
Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)				
<p>③1 Stück ④AT-Strumpfhose ⑤KKL 2, ⑥Offene Fußspitze, ⑦Slipform, kompr. Leibteil ⑧Maßfertigung, flachgestrickt ①Diagnose: E88.21 Lipödem der unteren Extremitäten</p>				
Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)				
Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer				

Untere Extremitäten, Maß



Beiblatt gemäß Hilfsmittelrichtlinie § 7 Abs. 2 zur ärztlichen Verordnung
Gegebenenfalls sind die notwendigen Angaben der Verordnung gesondert beizufügen - nutzen Sie gerne das JOBST Beiblatt.



eurocom Broschüre „Medizinische Kompressionstherapie richtig verordnen“
Diese Broschüre informiert kompakt und übersichtlich über die wesentlichen Aspekte einer Verordnung von Kompressionsversorgungen. Verfügbar unter:
www.eurocom-info.de/service/publikationen/



Lade das JOBST Beiblatt jederzeit herunter:
www.jobst.de/fachhandel/downloads



ÄRZTLICHE VERORDNUNG BEIM LIPÖDEM

Kompressionsversorgungen für die Behandlung eines Lipödems sollten immer mit Angabe des ICD-10-Codes rezeptiert werden.

E88.2	Lipomatose, andernorts nicht klassifiziert Exkl. Lokalisierte schmerzlose Lipohypertrophie (E65)			
E88.20	Lipödem*	... mit glatter Hautoberfläche, mit gleichmäßig verdickter Subkutis	E88.- Sonstige Stoffwechselstörungen Exkl.: Histozytose X (chronisch) (C96.6)	
E88.21		... mit unebener, wellenartiger Hautoberfläche, mit knotigen Strukturen in verdickter Subkutis		
E88.22		... mit ausgeprägter Umfangsvermehrung und großlappig überhängenden Gewebeanteilen von Haut und Subkutis		
E88.28	Sonstiges oder nicht näher bezeichnetes Lipödem Lokalisierte schmerzhafte symmetrische Lipohypertrophie der Extremitäten mit Ödem, o.n.A.			
E88.29	Sonstige Lipomatose, andernorts nicht klassifiziert Lipomatose o.n.A. Lipomatosis dolorosa [Dercum-Krankheit]			

*Die morphologische Ausprägung ist kein Hinweis auf den Schweregrad, eine Stadieneinteilung entspricht nicht länger dem wissenschaftlichen Stand (S2K-Leitlinie vom 22.01.2024).

VERORDNUNGSBEISPIELE

Krankenkasse bzw. Kostenträger	
Gebührt Geb.- Geb.- noch noch Sond. Sond. Untfall Untfall Krebs- Krebs- auf idem auf idem auf idem auf idem Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag	REZEPTBEISPIEL Name, Vorname des Versicherten JOBST Caroline Beiersdorfstraße 1 46446 Emmerich geb. am 06.11.89 Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum 17.06.16.1XXX 17.99.99.2008 17.99.99.2026 Rp. (Bitte Leerläufe durchstreichen) 1 Paar AG-Oberschenkelstrumpf KKL 2, Offene Fußspitze, Haftband, Slipform Maßfertigung, flachgestrickt Diagnose: E88.21 Lipödem der unteren Extremitäten Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer Vertragsarztstempel Unterschrift des Arztes Muster 16 (7,2008)

Krankenkasse bzw. Kostenträger	
Gebührt Geb.- Geb.- noch noch Sond. Sond. Untfall Untfall Krebs- Krebs- auf idem auf idem auf idem auf idem Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag	REZEPTBEISPIEL Name, Vorname des Versicherten JOBST Caroline Beiersdorfstraße 1 46446 Emmerich geb. am 06.11.89 Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum 17.06.17.1XXX 17.99.99.2026 17.99.99.2003 Rp. (Bitte Leerläufe durchstreichen) 1 Stück AT-Strumpfhose KKL 2, Offene Fußspitze, Slipform, kompr. Leibteil Maßfertigung, flachgestrickt Diagnose: E88.21 Lipödem der unteren Extremitäten Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer Vertragsarztstempel Unterschrift des Arztes Muster 16 (7,2008)

Untere Extremitäten, Maß

Krankenkasse bzw. Kostenträger	
Gebührt Geb.- Geb.- noch noch Sond. Sond. Untfall Untfall Krebs- Krebs- auf idem auf idem auf idem auf idem Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag	REZEPTBEISPIEL Name, Vorname des Versicherten JOBST Caroline Beiersdorfstraße 1 46446 Emmerich geb. am 06.11.89 Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum 17.06.14.1XXX 17.99.99.2008 17.99.99.2030 Rp. (Bitte Leerläufe durchstreichen) 1 Paar AD-Kniestrumpf KKL 2 Offene Fußspitze, Haftband, T-Ferse Maßfertigung, flachgestrickt Diagnose: E88.21 Lipödem der unteren Extremitäten Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer Vertragsarztstempel Unterschrift des Arztes Muster 16 (7,2008)

Krankenkasse bzw. Kostenträger	
Gebührt Geb.- Geb.- noch noch Sond. Sond. Untfall Untfall Krebs- Krebs- auf idem auf idem auf idem auf idem Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag	REZEPTBEISPIEL Name, Vorname des Versicherten JOBST Caroline Beiersdorfstraße 1 46446 Emmerich geb. am 06.11.89 Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum 17.06.21.1XXX 17.99.99.2026 17.99.99.2003 Rp. (Bitte Leerläufe durchstreichen) 1 Stück BT-Leggins KKL 2, Slipform, Maßfertigung, flachgestrickt Diagnose: E88.21 Lipödem der unteren Extremitäten Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer Vertragsarztstempel Unterschrift des Arztes Muster 16 (7,2008)

Untere Extremitäten, Maß

KOMPRESSSKLASSEN, INDIKATIONEN, KONTRAINDIKATIONEN

Kompressionsklasse*		Indikationen**
KKL 1	Bein 18-21 mmHg	Müde, schwere und schmerzende Beine, leichte Varikose ohne Ödem, leichte Schwellneigung der Knöchel, Füße und Beine, beginnende Schwangerschaftsvarikose, kardiales Ödem unter ärztlicher Kontrolle, arthritische Patient*innen, primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien 0-II ohne oder mit minimaler Verformung der Extremitäten (oder Lymphödeme im ISL-Stadium III, wenn eine höhere Kompression nicht toleriert wird)
	Arm 15-21 mmHg	Primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien I-III; Lipödem; Paget-von-Schroetter-Syndrom (Arm- und Schultergürtelvenenthrombose); Klippel-Trenaunay Syndrom; Rheumatoide Arthritis, Hyperthrophe Narben
KKL 2	Bein 23-32 mmHg	Müde, schwere und schmerzende Beine, mäßig bis stark ausgeprägte Varikose mit und ohne Ödem, mäßig bis stark ausgeprägte Schwangerschaftsvarikose mit und ohne Ödem, mäßige Ödemneigung, chronisch venöse Insuffizienz (CVI) C3-C5 nach CEAP: venöse Ödeme, Hautveränderungen und geheiltes Ulcus cruris venosum, hilft Rezidive venöser Ulzera zu verhindern, zur Nachbehandlung von oberflächlicher Thrombophlebitis/SVT, nach venen chirurgischen Eingriffen, Post-Sklerotherapie, posttraumatische und postoperative Ödeme, arthritische Patient*innen mit eingeschränkter Geschicklichkeit, primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien II-III mit Verformung der Extremitäten, Phlebo-Lymphödeme, Lipödeme
	Arm 23-32 mmHg	Primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien I-III; Lipödem; Paget-von-Schroetter-Syndrom (Arm- und Schultergürtelvenenthrombose); Klippel-Trenaunay Syndrom; Rheumatoide Arthritis, Hyperthrophe Narben
KKL 3	Bein 34-46 mmHg	Stark ausgeprägte Varikose mit und ohne Ödem, schwere Ödemneigung, chronisch venöse Insuffizienz (CVI) C3-C6 nach CEAP: venöse Ödeme, Hautveränderungen, geheiltes Ulcus cruris venosum und Ulcus cruris venosum, hilft Rezidive venöser Ulzera zu verhindern, Postthrombotisches Syndrom (PTS), zur Nachbehandlung von oberflächlicher Thrombophlebitis / SVT, nach venen chirurgischen Eingriffen, Post-Sklerotherapie, aktive Patient*innen mit Lymphödemen im ISL-Stadium III, Risiko eines wiederkehrenden Ödems, stark ausgeprägtes Lipödem
KKL 4	Bein > 49 mmHg	Schweres postthrombotisches Syndrom PTS, stark ausgeprägtes Lymphödem in ISL-Stadium III, schwere Ödemneigung nicht arteriellen Ursprungs

*Oberflächendruck am Messpunkt B (Fesselbereich Bein) bzw. Messpunkt C1 (Handgelenk Arm)

**Zuordnung dient lediglich als Empfehlungshilfe. In der Überarbeitung der PG 17 wurde die fixe Zuordnung von Indikationen und Kompressionsklasse aufgehoben.

Kontraindikationen	
	<p>JOBST Kompressionsversorgungen sollten in den folgenden Fällen nicht getragen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortgeschrittene arterielle Insuffizienz einschließlich Ischämie • Dekompensierte Herzinsuffizienz • Unbehandelte septische Phlebitis • Phlegmasia coerulea dolens • Unverträglichkeit des Strumpfmaterials • Offene Wunden, die nicht mit einer angemessenen Wundauflage abgedeckt wurden
	Weitere Warnhinweise können Sie der JOBST Gebrauchsanweisung auf den spezifischen Produktseiten unter www.jobst.de entnehmen.

POSITIONSNUMMERN FLACHSTRICK

HILFSMITTELNUMMERN UNSERER KOMPRESSIÖNSVERSORGUNGEN

Ausführung			JOBST Confidence			JOBST Elvarex			
			KKL 1	KKL 2	KKL 3	KKL 1	KKL 2	KKL 3	KKL 3 forte
Beinversorgung	AA	Maß				17.99.99.2004	17.99.99.2004	17.99.99.2004	
	AD	Serie					17.06.01.1017	17.06.01.2011	
		Maß	17.06.14.0022	17.06.14.1033	17.06.14.2030	17.06.14.0008	17.06.14.1007	17.06.14.2006	17.06.14.2016
	AF	Maß				17.06.15.0008	17.06.15.1007	17.06.15.2006	17.06.15.2014
	AG	Serie					17.06.03.1025	17.06.03.2013	
		Maß	17.06.16.0022	17.06.16.1033	17.06.16.2030	17.06.16.0008	17.06.16.1007	17.06.16.2006	17.06.16.2016
	B'T, BT	Maß	17.06.21.0020	17.06.21.1023	17.06.21.2020	17.06.21.0012	17.06.21.1014	17.06.21.2012	17.06.21.2013
	CT	Maß	17.06.18.0020	17.06.18.1028	17.06.18.2024	17.06.18.0006	17.06.18.1008	17.06.18.2008	17.06.18.2009
	ET	Maß	17.06.19.0020	17.06.19.1029	17.06.19.2025	17.06.19.0006	17.06.19.1008	17.06.19.2008	17.06.19.2009
Armvorsorgung	FT	Maß				17.06.22.0010	17.06.22.1011	17.06.22.2012	17.06.22.2013
	AT	Maß	17.06.17.0023	17.06.17.1032	17.06.17.2027	17.06.17.0008	17.06.17.1013	17.06.17.2013	17.06.17.2012
	AE ohne Finger, ohne Daumen	Maß				17.10.07.0006	17.10.07.1010		
	AE ohne Finger, mit Daumen	Maß				17.10.09.0006	17.10.09.1006		
	AE mit Finger, mit Daumen	Maß				17.10.08.0006	17.10.08.1008		
	AG, AG¹	Maß	17.10.06.0022	17.10.06.1024		17.10.06.0002	17.10.06.1002		
	AH*	Maß				17.10.04.0018	17.10.04.1019		
	CG, CG¹	Maß	17.10.04.0043	17.10.04.1046		17.10.04.0017	17.10.04.1018		
	CH	Maß				17.10.04.0018	17.10.04.1019		

HILFSMITTELNUMMERN DER ZUSÄTZE

Bezeichnung	Himi-Nr.	Bezeichnung	Himi-Nr.
Kompressionspelotten inkl. Tasche	17.99.99.0002	Handteil für Armstrümpfe mit Daumenöffnung	17.99.99.2010
Komprimierendes Leibteil	17.99.99.2003	Handteil für Armstrümpfe mit Daumenansatz	17.99.99.2011
Komprimierendes Zehenteil / Zehenkappe	17.99.99.2004	Handteil für Armstrümpfe mit Daumen & Fingern	17.99.99.2012
Webansatz	17.99.99.2005	Schulterbefestigung / Kappe für Armstrümpfe	17.99.99.2013
Hüftbefestigung für A-F und A-G Strümpfe	17.99.99.2006	Reißverschluss am Armstrumpf	17.99.99.2014
Hüftbefestigung für Stumpfstrümpfe	17.99.99.2007	Reißverschluss am Beinstrumpf	17.99.99.2015
Haftrand	17.99.99.2008	Haftbandstücke	17.99.99.2016
Einbeinhosenteil (Beinring)	17.99.99.2009	Hodensack	17.99.99.2017

		JOBST Elvarex Plus		JOBST Elvarex Soft			JOBST Elvarex Soft Seamless	
KKL 4	KKL 4 super	KKL 1	KKL 2	KKL 1	KKL 2	KKL 3	KKL 1	KKL 2
		17.99.99.2004	17.99.99.2004				17.99.99.2004	17.99.99.2004
17.06.14.3012	17.06.14.3011			17.06.14.0015	17.06.14.1020	17.06.14.2021		
17.06.15.3011	17.06.15.3010							
17.06.16.3012	17.06.16.3011			17.06.16.0015	17.06.16.1020	17.06.16.2021		
17.06.21.3009	17.06.21.3010			17.06.21.0013	17.06.21.1015	17.06.21.2014		
17.06.18.3006	17.06.18.3007			17.06.18.0013	17.06.18.1016	17.06.18.2016		
17.06.19.3006	17.06.19.3007			17.06.19.0013	17.06.19.1016	17.06.19.2016		
17.06.22.3009	17.06.22.3010			17.06.22.0011	17.06.22.1012	17.06.22.2014		
17.06.17.3010	17.06.17.3009			17.06.17.0015	17.06.17.1018	17.06.17.2018		
		17.10.09.0007	17.10.09.1007				17.10.09.0008	17.10.09.1008
		17.10.08.0007	17.10.08.1007				17.10.08.0008	17.10.08.1009
				17.10.04.0028	17.10.04.1029			

Bezeichnung	Himi-Nr.	Bezeichnung	Himi-Nr.
Eingriff	17.99.99.2018	Funktionszone Oberbein, (ventrolaterale Erhöhung)	17.99.99.2027
Schwangerschaftshosenteil	17.99.99.2019	Funktionszone Knie, Ellipse, anatomisch abgewinkeltes Knie	17.99.99.2028
Stomaöffnung	17.99.99.2020	Funktionszone Ellenbogen, vermehrte Einkehr (Arm)	17.99.99.2029
Bolero	17.99.99.2022	T-Ferse, Y-Einkehr, 90° Fuß, anatomisch abgewinkelte Fuß	17.99.99.2030
Komprimierender Fingerling	17.99.99.2023	Futterstoff, inkl. Taschen (z. B. Kniekehle, Ellenbeuge)	17.99.99.2031
Abrechnungsp. für Unterstrümpfe bei Ulcus-cruris-Strümpfen	17.99.99.2024	Schräger Fußabschluss, distaler Fußabschluss, anatomischer Fuß	
Geschlossene Fußspitze	17.99.99.2025	Schräger Abschluss Oberarm	
Schräge Abschlüsse proximal, laterale Erhöhung, Überhöhung, Slipform	17.99.99.2026	Schräger Abschluss Handteil	

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

I. Allgemeines / Geltungsbereich

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen der BSN Jobst GmbH, einem Unternehmen der Essity-Gruppe (nachfolgend: wir/uns) und Kunden, in denen wir als Verkäufer/Lieferant auftreten und unser Vertragspartner als Unternehmer i.S.v. § 14 BGB handelt. Ein Verkauf an Verbraucher gemäß § 13 BGB findet nicht statt.
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird von uns ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

II. Vertragsschluss / Besondere Bestimmungen für das elektronische Bestellportal

1. Unsere Angebote sind freibleibend und ein Zwischenverkauf ist vorbehalten.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von einer Woche nach Zugang anzunehmen oder abzulehnen. Übersteigt die von einem Kunden im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung erteilte Bestellung seine zuvor übliche, durchschnittliche Bestellmenge um mehr als 20%, verlängert sich die Frist, innerhalb der wir die Bestellung annehmen oder ablehnen können, auf zwei Wochen ab Zugang der Bestellung. Im Falle einer Ablehnung der Bestellung wird der Kunde innerhalb dieser Fristen benachrichtigt.
3. Für das elektronische Bestellportal gelten die folgenden besonderen Bestimmungen:
 - (i) Das Sortiment unseres Bestellportals stellt eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, Angebote abzugeben. Durch Anklicken des Buttons „Bestellung abschließen“ gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Etwaige Eingabefehler vor Abgabe einer Bestellung können vor dem Absenden der Bestellung überprüft und mit Hilfe der Löschen- und Änderungsfunktion korrigiert werden. Die Vertrags sprachen sind deutsch und englisch.
 - (ii) Der Kunde erhält im Falle der Abgabe eines verbindlichen Angebots unverzüglich eine Bestätigung des Empfangs seiner Bestellung per E-Mail. Bei dieser Empfangsbestätigung handelt es sich noch nicht um die Annahme oder Ablehnung des Angebots durch uns. Bei einer Bestellung über das Bestellportal beträgt die Annahme- oder Ablehnungsfrist zwei Werkstage (Montag bis Freitag, mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage an unserem Sitz). Im Falle der Ablehnung wird der Kunde innerhalb dieser Frist von uns kontaktiert. Der Status der Bestellung kann später in dem Bestellportal eingesehen werden.

III. Preise und Zahlung

1. Es gelten unsere jeweils aktuellen Preise gemäß gültiger Preisliste bzw. den in dem Bestellportal ausgewiesenen Preisen zuzüglich einer Versandkostenpauschale von derzeit EUR 5,90.
2. Für Verträge mit Kunden mit Sitz in Deutschland: Der Kaufpreis, einschließlich ggf. anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer und Versandkosten, ist bei Rechnungseingang sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig und ist entweder im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens oder per Überweisung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungseingang ohne jeden Abzug an uns zu zahlen, sofern nicht etwas anders vereinbart wurde. Die Erfüllung der Zahlungspflicht tritt am Tag des Geldeingangs auf unserem in der Rechnung angegebenen Konto ein. Die Bezahlung unserer Forderungen in bar ist nicht möglich. Ausgenommen hiervon sind Nachnahmesendungen. Wird der Kunde per Nachnahme beliefert, hat er die Kosten der Nachnahme zu tragen.
3. Für Verträge mit Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands werden die Zahlungs- und Lieferbedingungen individuell verhandelt.
4. Nach Ablauf des in Absatz 2 genannten oder anderweitig vereinbarten Zahlungszeitraums gerät der Kunde ohne Mahnung in Verzug. Wir sind sodann berechtigt, ab dem ersten Tag des Verzugs Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe sowie etwaigen weitergehenden Verzugs schaden geltend zu machen.
5. Wir sind berechtigt, Zahlungen des Kunden zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. In diesem Fall werden wir den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Verzugszinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Verzugszinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
6. Wir sind berechtigt, die Lieferung zu verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrags für uns erkennbar wird, dass unser Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet ist (zum Beispiel bei Verzug des Kunden mit der Zahlung anderer fälliger Rechnungen von uns, Eröffnung Insolvenzverfahren etc.). Das Leistungswiderrufsrecht entfällt, wenn der Kunde den Kaufpreis vorab bezahlt oder eine Sicherheit (zum Beispiel Bankbürgschaft) für die Zahlung des Kaufpreises geleistet hat. Für die Zahlung des Kaufpreises oder die Stellung einer Sicherheit können wir eine angemessene Frist bestimmen. Nach erfolglosem Ablauf der Frist sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

IV. Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher uns aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden zustehenden Forderungen, bleiben alle gelieferten Waren unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Kunden an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungsendbetrag für die von uns gelieferten Waren zuzüglich Umsatzsteuer) auf uns übergeht. Der Kunde verwahrt das (Mit-) Eigentum unentgeltlich für uns. Ware, an der uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
 2. Der Kunde ist, sofern er sich nicht im Zahlungsverzug befindet, zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware oder der aus einer Verarbeitung entstehenden Produkte unter Vereinbarung eines unseren Eigentumsvorbehalt sichernden entsprechenden Eigentumsvorbehalts mit seinem Kunden berechtigt. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Der Kunde tritt bereits jetzt seine Forderungen aus einer etwaigen Weiterveräußerung sowie diejenigen Forderungen des Kunden bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter Handlung und Ansprüche auf Versicherungsleistungen) im Wege der Sicherungsabtretung an uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. Wird die Vorbehaltsware gemeinsam mit anderer Ware von dem Kunden zu einem Gesamtpreis veräußert, bezieht sich die Abtretung nur auf den Teil der Forderung, die dem Kunden aus der Veräußerung der Vorbehaltsware resultiert.
 3. Der Kunde ist zur Einziehung der aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware resultierenden Forderung für uns berechtigt. Diese Befugnis endet, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht wie vereinbart nachkommt. In diesem Fall dürfen wir selbst die abgetretene Forderung einziehen. Der Kunde ist in einem solchen Fall verpflichtet, uns alle für eine Einziehung erforderlichen Unterlagen zu übermitteln.
 4. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherungen unsere offenen Forderungen um mehr als 10%, verpflichten wir uns – auf ausdrückliches Verlangen des Kunden – zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl in Höhe des übersteigenden Betrages.
 5. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden hat insoweit der Kunde zu erstatten, sofern und soweit der Dritte uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage nach § 771 ZPO nicht zu erstatten vermag.
 6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden insbesondere Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche zu verlangen. Die Zurücknahme sowie die Pfändung der Vorbehaltsware durch uns bedeuten keinen Rücktritt vom Vertrag.
 7. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pflichtig zu behandeln. Solange unser Eigentumsrecht besteht, ist die Ware vom Kunden gegen Verlust und Wertminderung, gegen Vandalismus-, Feuer-, Diebstahl- und Transportgefahr sowie Wasserschäden zu versichern.
- ## V. Gefahrübergang / Lieferung / Kein gesetzliches Widerrufsrecht / Höhere Gewalt und Betriebsstörungen
1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den Kunden über mit der Übergabe der Ware, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, d.h. gerät der Kunde in Gläubigerverzug, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. Während des Gläubigerverzugs haben wir nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Die Ware lagert während des Gläubigerverzugs auf Kosten des Kunden, d.h. wir sind berechtigt, vom Kunden eine Entschädigung für die Lagerung und alle etwaigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufbewahrung und Erhaltung zu verlangen.
 2. Der Versand erfolgt nach unserer Wahl ab Lager oder Werk (Ex Works (EXW) gemäß Incoterms 2020). Wir behalten uns die Wahl der Versandart und des Versandweges vor. Teillieferungen, d.h. die Versendung der Ware in mehreren Tranchen sind zulässig, soweit diese für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar sind, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Kunden kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen.
 3. Unbeschadet der in Ziffer VI. und VII. dieser AGB beschriebenen Rechte steht dem Kunden – auch im Falle einer Bestellung in unserem internetbasierten Bestellportal – kein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß §§ 312g Abs. 1, 355 BGB zu. Etwaige Rücksendungen durch den Kunden werden deshalb ohne unser vorheriges Einverständnis und Beachtung von Versandinstruktionen nicht angenommen.
 4. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Epidemien, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen

(z.B. allgemeine Ausgangssperren) oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) bei uns oder unseren Unterlieferanten verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben.

5. Sofern uns solche Ereignisse die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern bzw. verschieben sich die Lieferfristen/-termine um den Zeitraum der Behinderung z.zgl. einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Annahme der Lieferung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten

6. Wenn die Behinderung länger als zwei Monate andauert, ist der Kunde berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer kann hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten.

VI. Prüfung der Ware/Gewährleistung

1. Für die Bestimmung des Vorliegens eines Mangels gelten die gesetzlichen Bestimmungen (insb. § 434 BGB). Von einem Mangel im Sinne dieser Vorschriften ist die bestimmungsgemäße Nutzungsdauer unserer Produkte zu unterscheiden. Diese beträgt bei Kompressionsstrümpfen bei richtiger Handhabung (z.B. bei der Pflege, dem An- und Ausziehen) maximal sechs Monate ab Tragebeginn. Materialverschleiß bzw. Erschlaffung (z.B. Formverlust und dadurch Nachlassen der Kompressionswirkung) nach Ablauf der Nutzungsdauer stellt daher grundsätzlich keinen Sachmangel dar und löst keine Sachmangelgewährleistungsansprüche aus.

2. Der Kunde hat die Ware nach Übergabe unverzüglich auf offensichtliche Mängel (insb. Vollständigkeit, Transportschäden) zu prüfen und entdeckte Mängel unverzüglich schriftlich an uns zu melden; andernfalls ist die Geltendmachung von Mängelansprüchen ausgeschlossen. Offensichtliche Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware auch gegenüber dem Transportunternehmen zu rügen.

3. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nacherfüllung, d.h. entweder Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

4. Schlägt die von uns gewählte Art der Nacherfüllung gemäß § 440 Satz 2 BGB fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder Rückabwicklung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

5. Die Gewährleistungsfrist für Mängel (vgl. oben Absatz 1) beträgt ein Jahr ab Übergabe. Die in Ziffer VII Abs. 5 geregelten Ausnahmen gelten entsprechend.

6. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung in unseren Publikationen und im Bestellportal als vereinbart.

7. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung von uns und/oder dem Hersteller des jeweiligen Produkts stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

VII. Schadensersatzhaftung

1. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend machen kann, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Als wesentliche Vertragspflichten gelten solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung begangen haben, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

2. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit bleibt von den Beschränkungen des Absatz 1 unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und im Falle der Verletzung einer Garantieverpflichtung.

3. Wir haften nicht für Schäden, die durch die Nichteinhaltung der von uns dem Kunden erteilten Instruktionen verursacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass der Kunde Einsatzbedingungen, die eventuell im Zusammenhang mit Produkten in deren Dokumentationen festgelegt sind, nicht einhält. Sofern wir Mängel beheben, für die wir nicht einstandspflichtig sind, ist diese Fehlerbeseitigung angemessen zu vergüten.

4. Im Fall des geplanten Weiterverkaufs unserer Produkte durch den Kunden in Staaten außerhalb der Europäischen Union haften wir nicht für die Zulässigkeit eines solchen Exports, das Vorhandensein etwa erforderlicher staatlicher Genehmigungen für die Aus- und Einfuhr sowie die Einhaltung anwendbarer außenwirtschafts- und (medizin) produktrechtlicher Bestimmungen. Die Beachtung und Einhaltung sämtlicher nationaler und internationaler Bestimmungen unterliegt der alleinigen Prüfung und Verantwortung des Kunden. Der Kunde hat uns von jeglicher Inanspruchnahme durch Dritte (z.B. staatliche Behörden) auf unser erstes - schriftlich zu begründendes Anfordern - freizustellen, die auf der Verletzung derartiger Bestimmungen beruht.

5. Die Verjährungsfrist für alle Haftungsansprüche beträgt ein Jahr. Ansprüche aus Produkthaftung, der Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit, Garantien, Arglist sowie aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit verjähren nach den gesetzlichen Fristen.

VIII. Patientendaten

1. Falls im Rahmen der Bestellung Patientendaten an uns übermittelt werden und verarbeitet werden (für die Produktion, Lieferung und Abrechnung), hat der Kunde eigenverantwortlich sicherzustellen, dass bei der Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung dieser Daten die Vorgaben des Datenschutzrechts eingehalten werden. Insbesondere wird der Kunde die Einwilligung der Patienten in die Erhebung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einholen und angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zur Wahrung der Datensicherheit ergreifen.

2. Der Kunde hat uns und mit uns verbundene Unternehmen von jeglichen Ansprüchen freizustellen und jegliche Schäden zu ersetzen, die aus einem Verstoß des Kunden gegen geltendes Datenschutzrecht folgen.

3. Zur Einholung der Einwilligung der Patienten in die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten stellen wir dem Kunden auf Nachfrage ein Einwilligungsformular zur Verfügung. Patienten sollten das Formular vor der ersten Bestellung und ggf. anschließend mindestens einmal pro Jahr unterzeichnen. Wir haben die relevanten Datenflüsse in dem Formular nach bestem Wissen vollständig und korrekt beschrieben, schließen jedoch jede Haftung für das Formular aus. Der Kunde hat eigenverantwortlich zu prüfen, ob das Formular für seine Zwecke ausreicht und alle datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt. Ist sich der Kunde insoweit nicht sicher, sollte er Rechtsrat einholen.

4. Während des Bearbeitungs- und Herstellungsprozesses eines Maßproduktes können persönliche Daten von Patienten (Name, Geschlecht, Maße) für Mitarbeiter des Kundendienstes und der Produktion sichtbar sein (z.B. auf dem Etikett). Um eine sichere Speicherung der Patientendaten zu gewährleisten, werden diese Daten in Ausnahmesituationen von den Administratoren unserer IT Hosting Partner eingesehen.

IX. Regulatorische Bestimmungen

Der Kunde unterstützt uns spätestens ab dem 26. Mai 2021 bei sämtlichen regulatorischen Verpflichtungen, die uns nach der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte („MDR“) obliegen. Soweit der Kunde selbst auch Händler im Sinne des Art. 14 MDR ist und/oder in Zukunft sein wird, wird auch der Kunde sämtlichen regulatorischen Verpflichtungen gemäß Art. 14 MDR nachkommen. Der Kunde wird insbesondere (i) mit den zuständigen Behörden auf deren Ersuchen bei allen Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren, die mit Produkten verbunden sind, die er auf dem Markt bereitgestellt hat, kooperieren und (ii) uns unverzüglich über alle ihm zugehenden Beschwerden oder Berichte von Angehörigen der Gesundheitsberufe, Patienten oder Anwendern über mutmaßliche Vorkommnisse im Zusammenhang mit einem Produkt, das er bereitgestellt hat, informieren.

X. Schlussbestimmungen

1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag Emmerich, Deutschland. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir haben das Recht, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

3. Im Rahmen der Geschäftsanbahnung oder im Laufe der Geschäftsbeziehung kann eine Identifizierung des Kunden durch uns nach den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GWG) erforderlich sein. Der Kunde hat in diesem Fall eine Mitwirkungspflicht und uns entsprechende Nachweise auf Anfrage zu erbringen. Wir behalten uns für diesen Fall vor, den Vertragsschluss unter der aufschiebenden Bedingung einer ausreichenden Identifizierung und Legitimierung des Kunden nach den Vorgaben des GWG zu schließen.

4. Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch bei einem Verzicht auf das Schriftformerfordernis selbst.

5. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

KOMPRESSIOWNSWISSEN AUF EINEN BLICK

Lymphödem & Lipödem Patientenratgeber



Ulcus cruris Patientenratgeber



Die JOBST Patientenratgeber, Anmessleitlinie und Seminarkalender können Sie über Ihre*n JOBST Ansprechpartner*in oder den JOBST Customer Service bestellen.

Anmessleitlinie Flachstrick



Seminarkalender Termine & Orte





WILLKOMMEN AUF CAMPUS!

Unserem Angebot für hochwertige Fort- und Weiterbildungen rund um die Produktpalette von Essity. Praktische Anwendungstipps & Tutorials, spannende Veranstaltungen, Online- & Präsenz-Schulungen.

Anmeldung auf www.campus.hm.essity.com



Online: Basis-Seminare



Vor Ort: Basis- & Aufbau-Seminare



Vor Ort: Lymphologie Refresher & Anmess-Seminare mit Betroffenen



Vor Ort: Spezial-Seminare für mehr Wissen in einer besonders umfassenden & interessanten Zusammenstellung




Neu: Spezial-Seminar 'Selbstmanagement in der Ödemtherapie'

Die JOBST Sortimentsübersicht wurde mir überreicht von:

JETZT DIGITAL DURCH- STARTEN!

MODERN
SMART &
EFFICIENT

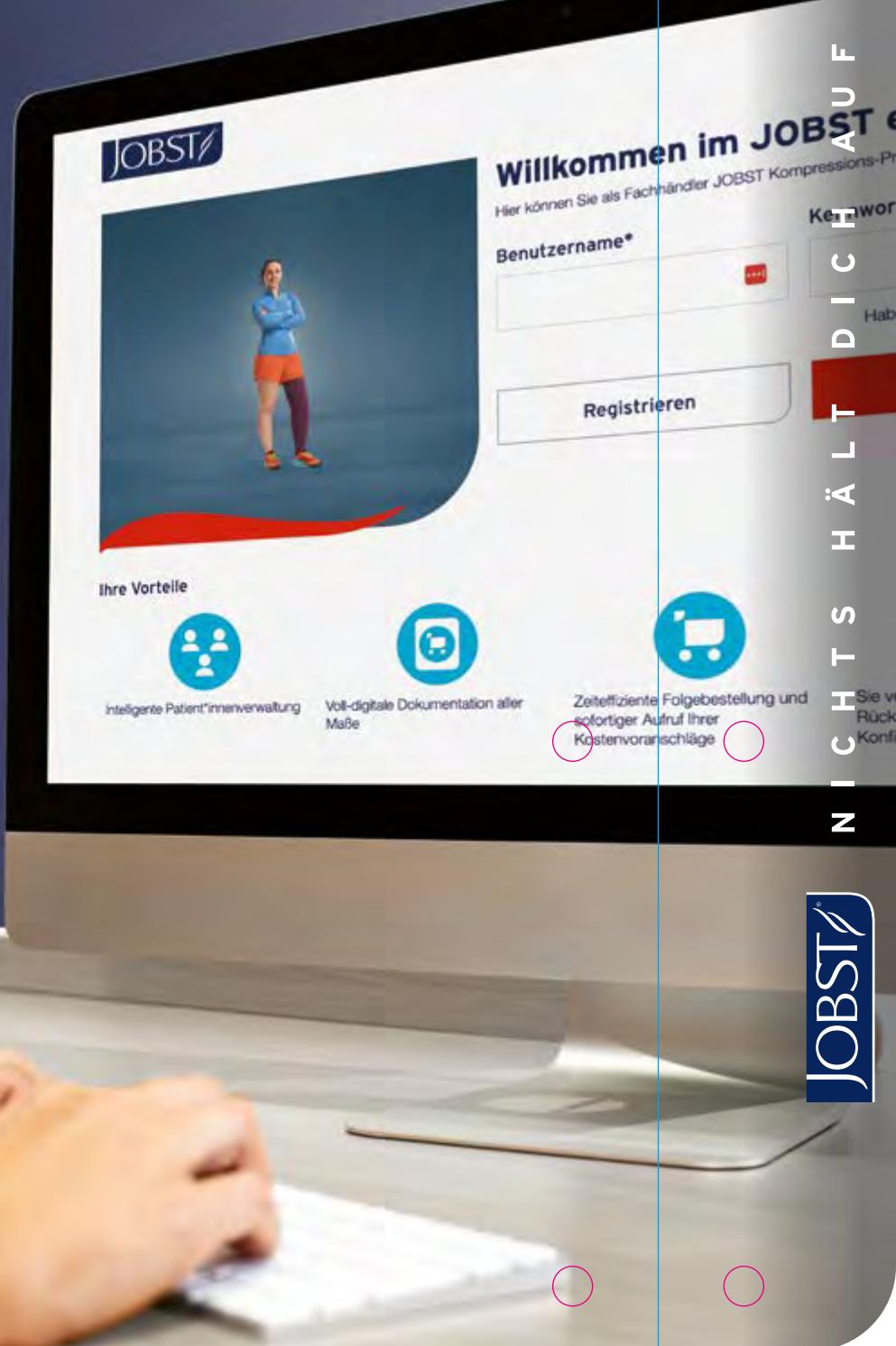

MIT DEM JOBST® ESHOP UND JOBST XPERT VOICE®

Online immer verfügbar unter
www.jobst.de/fachhandel/downloads



Treffen Sie JOBST
auf Facebook & Instagram



JOBST®,
an Essity brand

www.jobst.de

Tel. +49(0)2822 607-100
Fax +49(0)2822 607-199

BSN medical GmbH
Schützenstraße 1-3
22761 Hamburg
Deutschland

Januar 2026

