

Cutimed Science Card

**Cutimed® Siltec®: A nova zona de conforto. Um estudo confirma uma taxa de satisfação do utilizador de 85%.**

Estudo >> Seckam A. 2019.

**Cutimed®**

# Recomendações de **expertos**

A União Mundial das Sociedades de Cicatrização de Feridas (WUWHS) publicou um documento de consenso sobre os princípios do tratamento eficaz de feridas, especificando os seguintes requisitos fundamentais para um curativo:



## Gestão do exsudado

### **Critérios**

Absorção e retenção do excesso de exsudado

### **Benefícios**

- Melhoria da cicatrização de feridas (por exemplo, menos maceração e menor ou nenhuma extensão da ferida)
- Melhoria da qualidade de vida (por exemplo, menor formação de formação de odores)
- Redução da necessidade de cuidados de enfermagem



## Conforto do doente

### **Critérios**

Conforto de utilização e adaptação do penso à região corporal afetada

### **Benefícios**

- Melhoria da qualidade de vida
- Sem deslizamento e mudança de penso precoce



## Facilidade de utilização

### **Critérios**

Fácil aplicação e remoção do penso

### **Benefícios**

- Poupança de tempo durante as mudanças de pensos
- Utilização eficiente dos materiais e maior adesão do pessoal

# O estudo

**Antecedentes:** Estudo de coorte multicêntrico para a avaliação clínica de pensos de espuma.\* Amostra: 129 doentes com feridas diferentes. Produtos utilizados: Cutimed® Siltec®/Siltec® B.

**Método:** Inquérito aos profissionais de saúde presentes; três rondas por paciente (visita de admissão, mudança de penso, avaliação final). Período de tempo: 14 dias.


**Resultados:** Elevada satisfação dos utilizadores. Para além dos resultados apresentados abaixo: melhoria das margens da ferida e redução da sensação de dor.

Satisfação  
global  
85%

## Crítérios de satisfação dos utilizadores

### Propriedades classificadas como “muito boas” ou “boas”

Tamanho da amostra = 146 feridas; sob terapia de compressão: 58 feridas

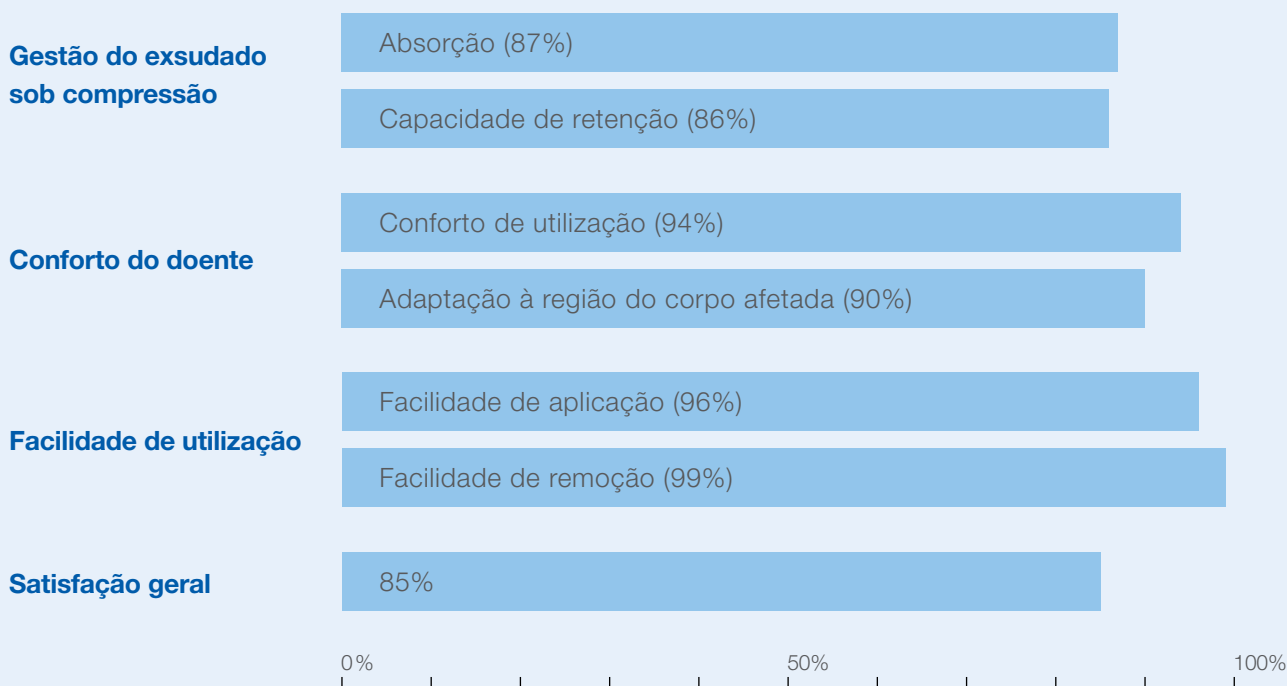

\*Realizado em: Alemanha e Polónia; 2016/2017.

Seckam A. Uma avaliação multicêntrica e observacional das características do produto de dois pensos de espuma absorvente. Br J Nurs. 2019; 28:10-S17.

## Informações complementares

Resumo e ligações para a versão completa do estudo original em Pub.Med.



## Conclusões para a prática clínica:

Os pensos Cutimed® Siltec®/Siltec® B cumprem os critérios especificados no documento de consenso da World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Como resultado, os doentes podem desfrutar de uma melhor qualidade de vida e o pessoal hospitalar é aliviado por pensos fáceis de utilizar e que poupam tempo.



Cutimed® Siltec®



Cutimed® Siltec® B



Cutimed® é uma marca registada da Essity.  
Sorbion® é uma marca registada da Essity.  
Sorbact® é uma marca registada da ABIGO Medical AB.

©MD Informação destinada aos profissionais de saúde. Os produtos mencionados são dispositivos médicos. Aconselhamo-lo a ler as instruções de utilização e a rotulagem antes de os utilizar.