



Istället
för kräm
eller salva



Problem med svamp i hudveck?

För användning till exempel i bukveck, under bröst och i ljumskar

Läs mer på **sorbact.se**



Bruksanvisning

1. Öppna den sterila förpackningen.
2. Klipp till önskad längd.
Applicera i direktkontakt med det infekterade området.
3. Fixera med bh, kalsong, trosa eller hudvänlig häfta på frisk hud.

Byt en gång dagligen. Behandlingstid ca 7– 10 dagar. Fortsätt några dagar efter att symptomen har försvunnit.

Obs!

Kombinera inte Sorbact® med krämer, salvor eller liknande.

Sorbact® Fungi finns på ditt närmaste apotek

Produkt	Storlek	St./frp.
Sorbact® Fungi	10x200 cm	1

Sorbact® Fungi säljs på apotek och är samma produkt som Sorbact® Ribbon inom sjukvården.

