

I stedet
for creme
eller salve



Problemer med svamp i hudfolder?

Effektiv behandling mod svamp i hudfolder

Anvendes i hudfolder f.eks. på maven, under brystet, i lysken og mellem tæer

Med Sorbact® Fungi er det enkelt at behandle svampeinfektion i hudfolder uden brug af cremer og salver. Sorbact®-bandagen binder svampeinfektionen til sig og fjerner den ved bandageskift.

Læs mere på sorbact.dk



Brugsanvisning

1. Åbn den sterile emballage.
2. Klip bandagen til den ønskede længde. Læg den på huden med direkte kontakt til det inficerede område.
3. Fastgør med BH, trusse, underbukser eller hudvenlig tape på rask hud.

Skift bandagen én gang dagligt.
Behandlingstiden er ca. 7–10 dage.
Fortsæt nogle dage efter at symptomerne er væk.

Obs!

Brug ikke salve, creme eller lignende sammen med Sorbact®.

Sorbact® Fungi fås på apoteket

Produkt	Størrelse	Stk./pakke
Sorbact® Fungi	10x200 cm	1

Sorbact® Fungi er det samme produkt som Sorbact® Ribbon Gauze, der anvendes på hospitaler.

