

Bakterier kan inte stå emot Sorbact® – det är en naturlag

Sorbact® är en innovation med dokumenterad effekt vid sår-behandling. Den DACC™-impregnerade ytan på Sorbact® är av speciell karaktär och har hydrofoba egenskaper som förebygger och behandlar infektion utan att frisätta aktiva ämnen till såret. Bakterier förankras och binds irreversibelt till den unika ytan. Sorbact® binder även svamp och endotoxiner som kan försämra sår-läkning. Baserat på en fysisk verkningsmekanism, avlägsnar Sorbact® bakterier, svamp och endotoxiner på ett säkert sätt.



BINDER

- Den DACC-impregnerade ytan på Sorbact® har speciell karaktär och hydrofoba egenskaper
- Bakterier binds naturligt och förankras till den unika Sorbact®-ytan
- Även endotoxiner, som kan försämra sår-läkning, binds*



HÄMMAR

- Bakterierna binds irreversibelt och tillväxt hämmas
- Det har visat sig att endotoxiner inte frisläpps från bakterierna*
- Antimikrobiell resistens förväntas inte



AVLÄGSNAR

- Bundna bakterier, svamp och endotoxiner avlägsnas på ett säkert sätt
- Bakteribelastningen i sår-bädden minskar
- Minskad mikrobiell belastning underlättar den naturliga sår-läkningen

*In vitro-data

Produktsortiment



Sorbact® Compress Kompress

Art. nr.	Storlek	St./frp.	Art. nr.	Storlek	St./frp.
98128	4 x 6 cm	40	98124	10 x 100 cm (roll)	10
98125	7 x 9 cm	40			



Sorbact® Gel Compress Gelkompress

Art. nr.	Storlek	St./frp.	Art. nr.	Storlek	St./frp.
98136	7.5 x 7.5 cm	10	98180	15 x 20 cm	5
98139	3 x 15 cm	10	98181	20 x 25 cm	5
98137	7.5 x 15 cm	10			



Sorbact® Ribbon Tamponad

Art. nr.	Storlek	St./frp.	Art. nr.	Storlek	St./frp.
98115-10	1 x 50 cm	10	98120	5 x 200 cm	10
98116-10	2 x 50 cm	10	98119	10 x 200 cm	10



Sorbact® Surgical Dressing Kirurgiskt förband

Art. nr.	Storlek	St./frp.	Art. nr.	Storlek	St./frp.
98140-50	5 x 7.2 cm	50	98144	10 x 25 cm	20
98141	8 x 10 cm	20	98145	10 x 30 cm	20
98142	8 x 15 cm	20	98146	10 x 35 cm	20
98143	10 x 20 cm	20			



Sorbact® Superabsorbent Superabsorberande förband

Art. nr.	Storlek	St./frp.	Art. nr.	Storlek	St./frp.
98501	10 x 10 cm	10	98503	20 x 20 cm	10
98502	10 x 20 cm	10	98504	20 x 30 cm	10



Sorbact® Absorption Absorberande förband

Art. nr.	Storlek	St./frp.	Art. nr.	Storlek	St./frp.
72165-71	7 x 9 cm	10	72165-70	10 x 20 cm	10
72165-69	10 x 10 cm	10			



Cutimed® Siltec® Sorbact®

Art. nr.	Storlek	St./frp.	Art. nr.	Storlek	St./frp.
72767-40	Ø 4,5 cm (slits)	10	72767-44	10 x 20 cm	10
72767-41	Ø 4,5 cm	10	72767-43	15 x 15 cm	10
72767-39	5 x 6 cm	10	72767-45	20 x 20 cm	5
72767-42	10 x 10 cm	10	72767-47	16 x 24 cm (hål)	5



Cutimed® Siltec® Sorbact® B

Art. nr.	Storlek	St./frp.
73251-76	7.5 x 7.5 cm	10
73251-84	10 x 10 cm	10
73251-78	15 x 15 cm	10
73251-85	7 x 10 cm (oval)	10
73251-77	12.5 x 12.5 cm	10
73251-79	17.5 x 17.5 cm	5
73251-80	22.5 x 22.5 cm	5

Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum

Art. nr.	Storlek	St./frp.
73251-81	17.5 x 17.5 cm	5
73251-82	23 x 23 cm	5

För detaljerad produktinformation, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar läs gällande bruksanvisning (IFU) före användning.

Referenser **1** Mosti G et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. *J Wound Care*. 2015;24(3):121-127. **2**. Kammerlander G et al. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. *Wounds UK*. 2008;4:10-18. **3**. Hampton S. An evaluation of the efficacy of Cutimed Sorbact in different types of non-healing wounds. *Wounds UK*. 2007;3:113-119. **4**. Husmark J et al. Antimicrobial effects of bacterial binding to a dialkylcarbamoyl chloride-coated wound dressing: an in vitro study. *J Wound Care*. 2022;31:560-570.

Cutimed® är ett registrerat varumärke som tillhör BSN medical GmbH.

Läs mer på sorbact.se



Sorbact® är ett registrerat varumärke som ägs av Abigo Medical AB
9024_0625

Abigo Medical AB
– en del av Essity
Besöksadress
Mölnåls Bro 2, Mölnåls, SE

sorbact.se
031-748 49 50
info@sorbact.se



Användarguide

Sorbact® sårförband förebygger och behandlar sårinfektioner



- Minskar den mikrobiella belastningen i sår¹
- Säkert och lätt att använda²
- Bidrar till att minska smärta vid användning¹
- Bidrar till att minska lukt från såret³
- Ingen begränsning i behandlingstid²
- Effektiv mot multiresistenta bakterier⁴



**Cutimed® Siltec®
Sorbact® B**



Användningsområde

För måttligt vätskande sår.
Mjuka självhäftande
silikonkanter.

[illegible]